

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Олимпас Сибирь и К»

А.А. Нехзер
«20» окт 2011 г.



Инструкция по эксплуатации

Маркер хирургический стерильный Spot

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОПИСАНИЕ
3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
4. НАЗНАЧЕНИЕ
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
7. ТРАНСПОРТИРОВКА
8. ХРАНЕНИЕ
9. УТИЛИЗАЦИЯ
10. СРОК ГОДНОСТИ
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по эксплуатации содержит указания по эксплуатации, транспортированию и хранению маркера хирургического стерильного Spot.

2. ОПИСАНИЕ

Маркер хирургический Spot представляет собой стерильное изделие одноразового применения. Каждый маркер стерилизован паром перед упаковкой и отправкой. В каждом маркере содержится 5 см³ стерильной маркировочной жидкости.

Состав маркировочной жидкости:

Вода для инъекции

Глицерол

Полисорбат 80

Бензиловый спирт

Высокоочищенный уголь

Маркер хирургический стерильный Spot соответствует Нормативному документу и признан годным к применению для разметки операционного поля при выполнении различных хирургических вмешательств.

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием маркер хирургический стерильный Spot необходимо потрясти. Перед проведением хирургического разреза с помощью маркера Spot отмечают линию разреза. Маркер хирургический Spot может быть использован для отметки различных дефектов кожных покровов.

4. НАЗНАЧЕНИЕ

Маркер хирургический стерильный Spot предназначен для разметки операционного поля при выполнении пластических и хирургических вмешательств. Используется в пластической, челюстно-лицевой, сосудистой и общей хирургии, косметологии, радиотерапии, УЗИ.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Использование маркера хирургического SPOT противопоказано у пациентов с известной гиперчувствительностью к компонентам изделия.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Образование небольшого осадка угольного пигмента является нормой. Перед использованием маркера, его необходимо встряхнуть. Маркер хирургический SPOT является стерильным одноразовым изделием. Стерильность может быть нарушена в случае повреждения. Протекание изделия может свидетельствовать о его повреждении. В случае повреждения не рекомендуется использовать изделие. Хотя материал не является токсичным, маркер может вызвать загрязнение одежды или пористого материала.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

8.1. Маркер хирургический стерильный Spot транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.2. Условия транспортирования – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69, при температуре от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, относительной влажностью до 65%.

8. ХРАНЕНИЕ

Маркеры хирургические Spot должны храниться на крытых, сухих и темных складах поставщика и потребителя при температуре от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, вдали от нагревательных приборов в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Маркеры должны храниться в контейнере, поставляемом с маркерами. При этом кончики маркеров должны быть направлены вверх. Нельзя хранить маркеры кончиками вниз. Хранение маркеров кончиками вниз может привести к тому, что

часть пигмента осядет в узкой части маркера и помешает повторному перемешиванию пигмента.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Полные или частично использованные упаковки из-под маркеров необходимо утилизировать в соответствии с методами утилизации безопасных биологических отходов.

10. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия составляет два года. Срок годности и номер партии указаны на этикетке маркера.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует качество маркера хирургического стерильного Spot при соблюдении условий использования, транспортирования и хранения, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Пропущено, пропущено и
скреплено печатью 5 листов
Генеральный директор
ООО «Олимпас Спорт и К»
Нехзер А. А.

