


Фотографическое изображение медицинского изделия

Бинт медицинский эластичный

под товарным знаком matorat по ТУ 21.20.24-044-11736425-2017

Общий вид Бинта медицинского эластичного под товарным знаком matorat по ТУ 21.20.24-044-11736425-2017

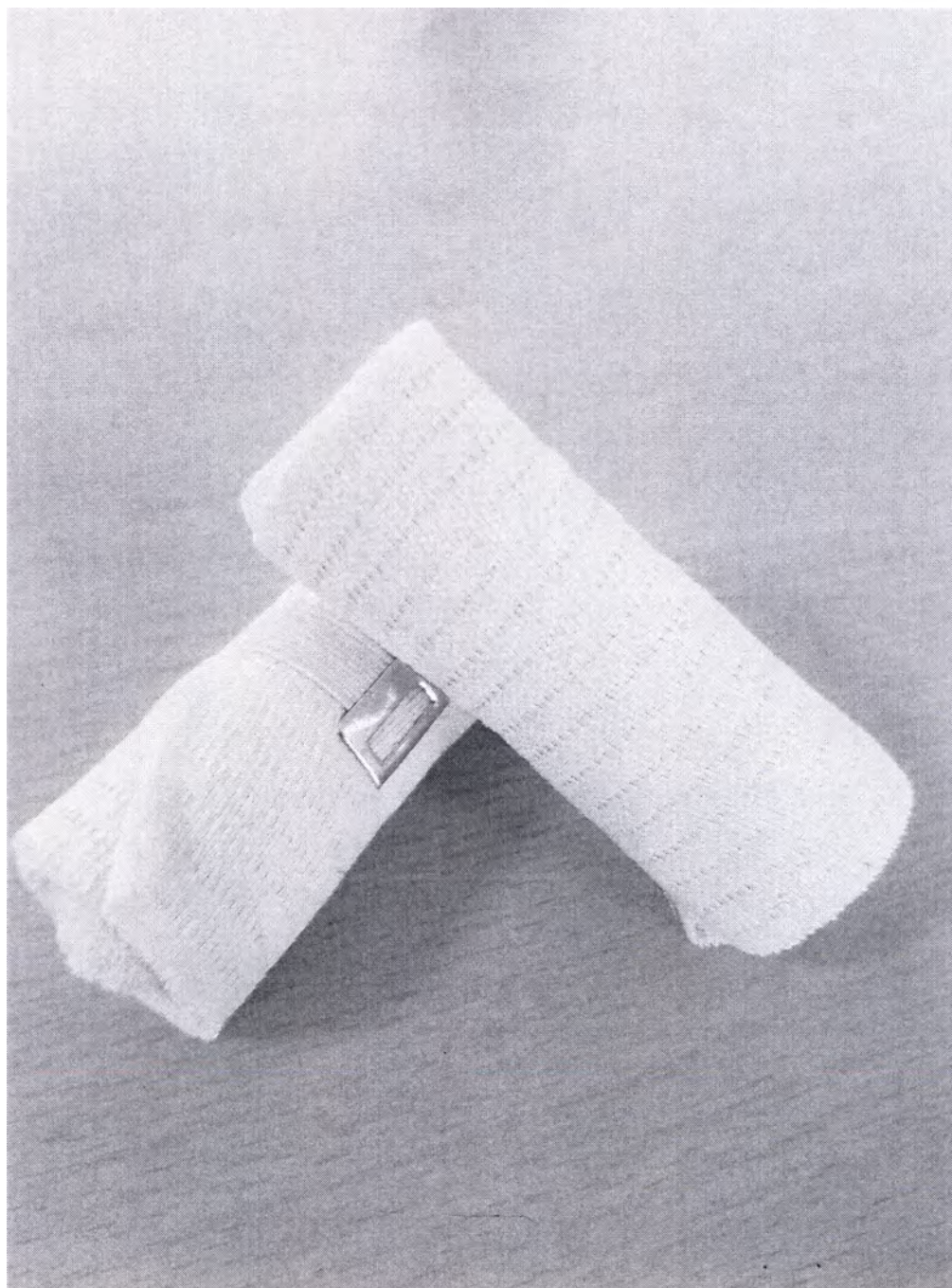



Общий вид Бинта медицинского эластичного под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-044-11736425-2017 в потребительской упаковке с маркировкой




Бинт медицинский эластичный под
товарным знаком **matopat** по
ТУ 21.20.24-044-11736425-2017.
вариант исполнения: универсальный
ленточный **Matopat UNIVERSAL**
с застежкой, размер 10 см x 2 м, 1 шт.
Бинт средней растяжимости.
Предназначен для наклеивания
на участки тела с целью их компрессии
в различных профилактических /
терапевтических целях (поддержание
мягких тканей в покое). Изделие
многоцелевого использования.

Состав: хлопковая пряжа, полиамидный
текстурированный шелк, эластомерная пряжа.
Способ применения: Бинт следует наклеивать
по спирали, начиная от кончиков пальцев по
направлению к телу, растягивая бинт наполовину
его максимальных возможностей. Каждый ход
бинта должен перекрывать предыдущий
наполовину. Внимание: нельзя наклеивать бинт
слишком туго (может привести к нарушениям
кровоснабжения – симптом: посинение кончиков
пальцев). Противопоказания: Индивидуальная
непереносимость материалов, из которых
изготовлено изделие. Возможные побочные
эффекты: аллергическая реакция на
составляющие материалы. Не применять в период
обострения кожных заболеваний, при наличии
заболеваний артерий, открытых ранах; при отеках,
вызванных патологией сердечно-сосудистой
системы. Для лиц, страдающих сахарным
диабетом – только после консультации с врачом.
Не использовать после окончания срока годности.
Не использовать при повреждении упаковки.
Дата изготовления – см. первые 4 цифры в номере
партии (ггмм). Годен до – см. на упаковке (гггг.мм.).
Хранить в сухих помещениях.

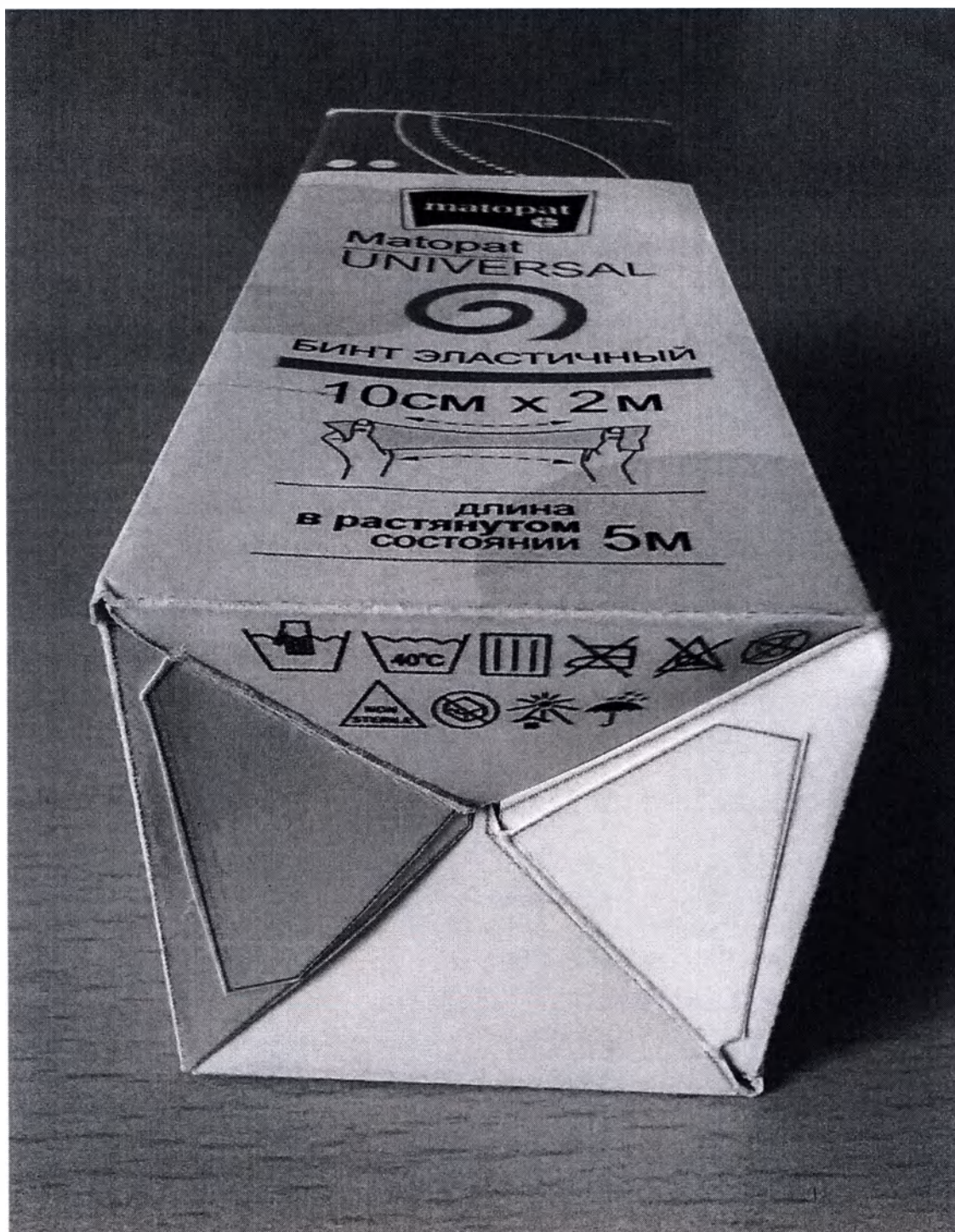

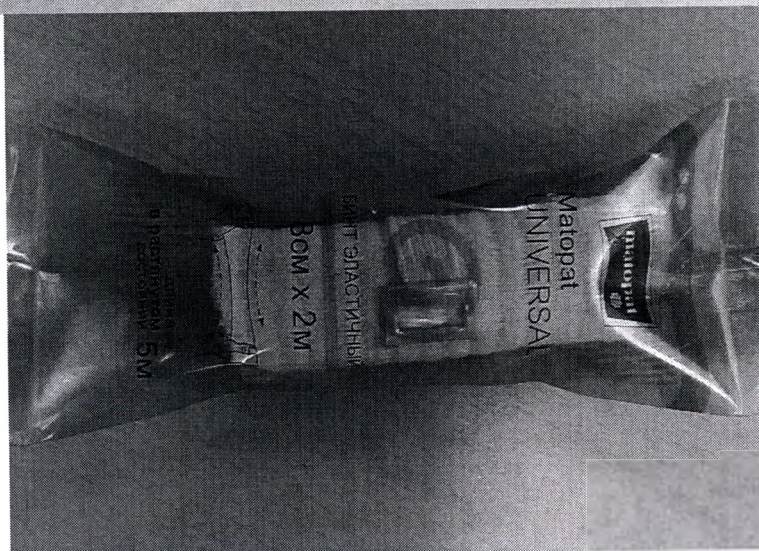

Общий вид Бинта медицинского эластичного под товарным знаком matorpat по ТУ 21.20.24-044-11736425-2017 в транспортной упаковке с маркировкой

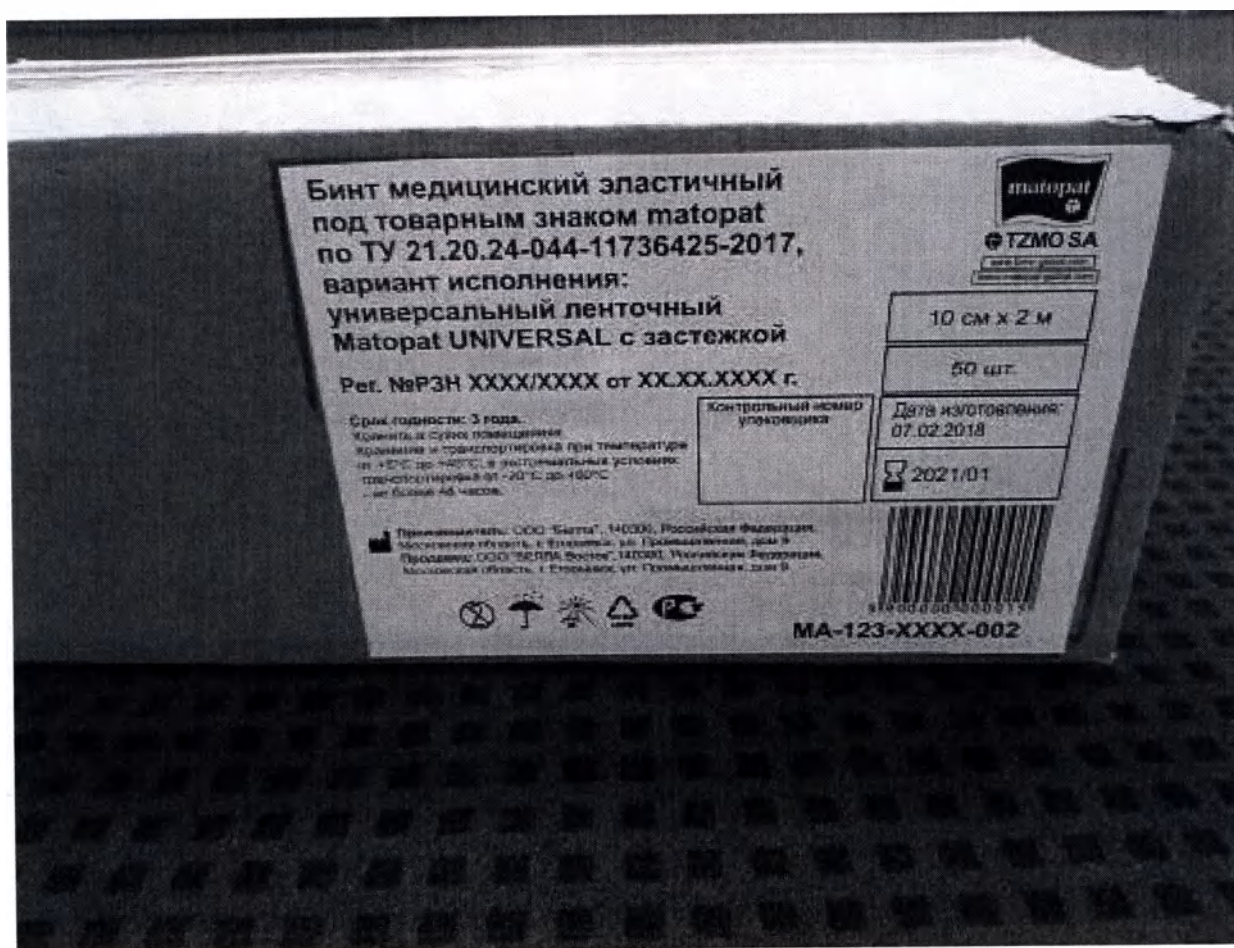

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

(ссыл) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Белла»
Ковальчик М.К.

