

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Сибирский центр инвестиционных технологий»



Келин Л.В.

2013г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению: Бинты медицинские эластичные фиксирующие компрессионные и когезивные по ТУ 8158-001-70530484-2013 в наборах и отдельных упаковках

I. Бинты медицинские эластичные фиксирующие компрессионные в наборе:

Набор медицинских эластичных фиксирующих компрессионных двухслойных бинтов:

- Бинт медицинский эластичный фиксирующий компрессионный двухслойный, размеры 10х600 (см), растяжимость 75%.
- Бинт медицинский эластичный фиксирующий компрессионный двухслойный, размеры 10х750 (см), растяжимость 160%.

II. Бинты медицинские эластичные фиксирующие когезивные в отдельных упаковках:

1. Бинт медицинский эластичный фиксирующий когезивный сетчатый.
2. Бинт медицинский эластичный фиксирующий когезивный.

1. Набор медицинских эластичных фиксирующих компрессионных двухслойных бинтов:

- Бинт медицинский эластичный фиксирующий компрессионный двухслойный, размеры 10х600 (см), растяжимость 75%.
- Бинт медицинский эластичный фиксирующий компрессионный двухслойный, размеры 10х750 (см), растяжимость 160%.


1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- для профилактики и при растяжении мышц, сухожилий и связок.
- для фиксации травмированного места во время функциональной реабилитации.
- для закрепления шин, горячих и холодных компрессов.
- для компрессионного лечения и реабилитации при венозной недостаточности и ее осложнениях, для профилактики тромбозов, после экстирпации подкожных вен и склерозирования вен.

2. СОСТАВ:

1 бинт – вискоза, полиэстер, полиамид, эластан.

2 бинт - акрил, полиамид, эластан, каучуковый клей.

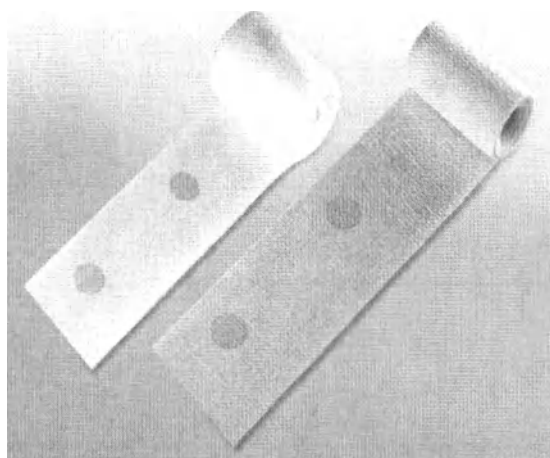

Внешний вид: Набор медицинских эластичных фиксирующих компрессионных двухслойных бинтов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	1 бинт	2 бинт
Размер (см)	10 x 600	10 x 750
Растяжимость (%)	75	160
Предел прочности на разрыв (N/см)	16	
Допуск в длине (+/- см)	10	
Допуск в ширине (+/- см)	0,2	
Средний вес (г)	290 (+/- 10 г)	
Цвет	белый	бежевый
Количество бинтов в одной упаковке (шт.)	2	

3.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: индивидуальная непереносимость


4.ПОДГОВКА К РАБОТЕ: Проверьте целостность упаковки, срок годности.

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ:


Накладывать бинт согласно предложенным схемам, либо по схеме, предложенной врачом.

5.1. Достаньте бинт из упаковки.


5.2. Наложите бинт белого цвета на область головки плюсневой кости, сделайте оборот бинта вокруг, растягивая бинт таким образом, чтобы маркер из эллипса превратился в круг.

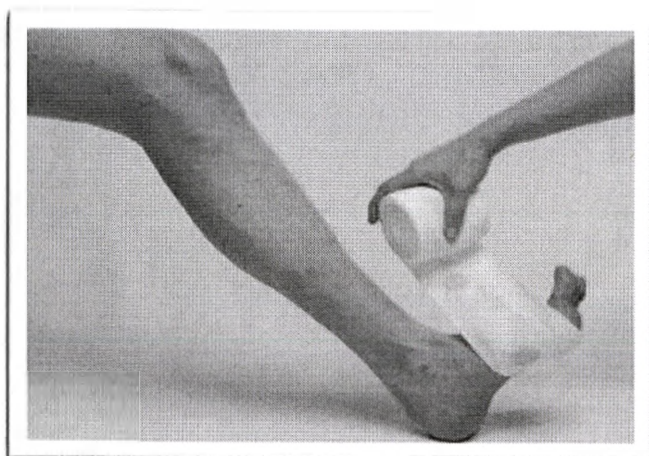

5.3. Закрепите бинт на пятке, обернув его восьмеркой.

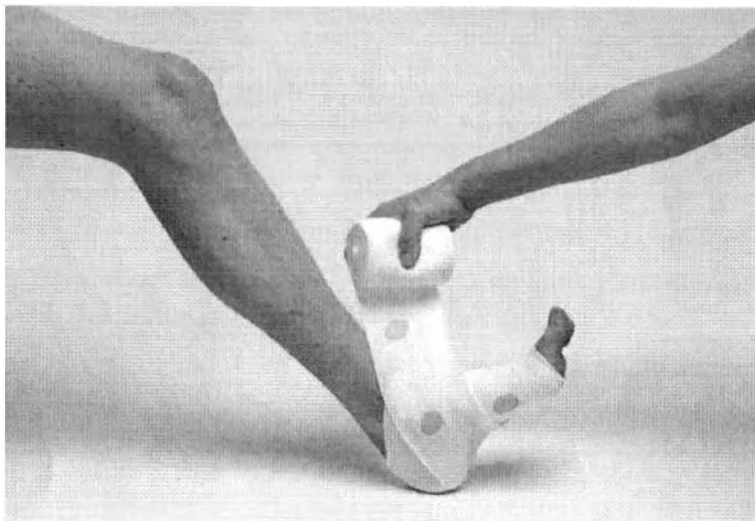


5.4. Накладывайте бинт вверх по голени таким образом, чтобы маркер растянулся из эллипса в круг.

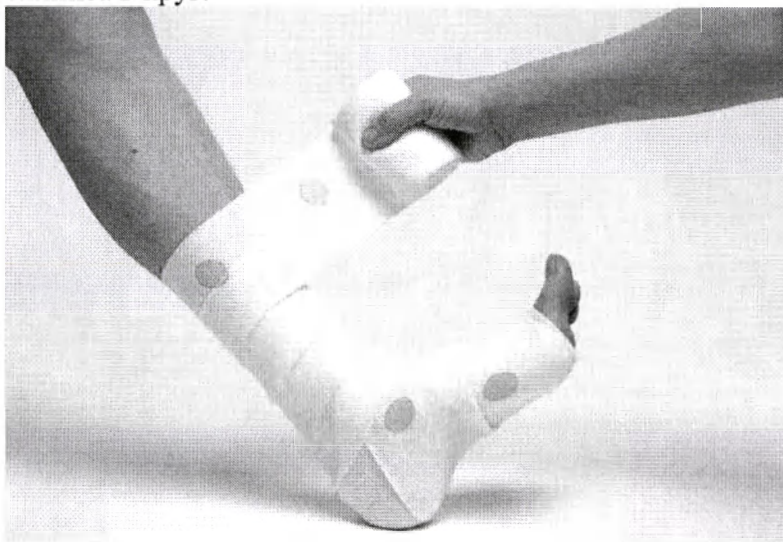

5.5. Завершите наложение бинта в области верхней суставной поверхности большеберцовой кости.




5.6. Наложите бинт телесного цвета поверх белого, начиная с области головки плюсневой кости, сделав оборот бинта вокруг и растягивая бинт таким образом, чтобы маркер из эллипса превратился в круг.

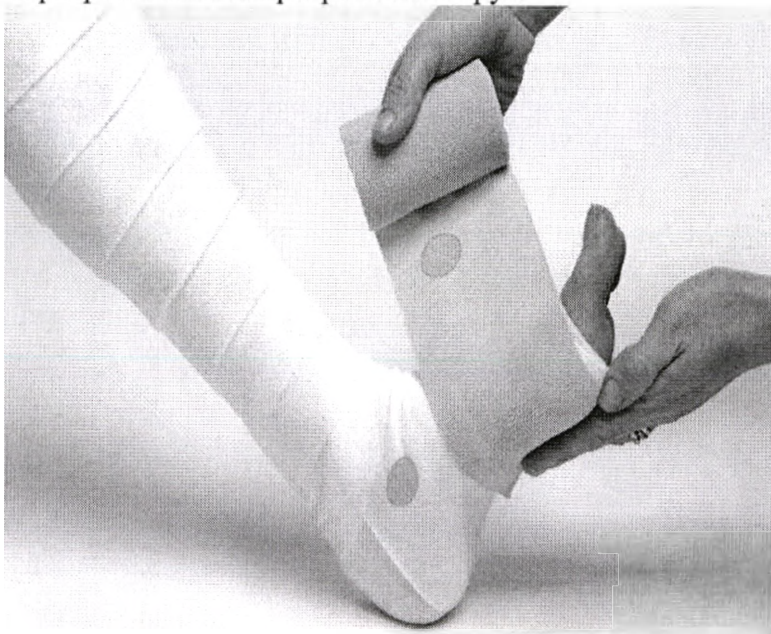

5.7. Закрепите бинт на пятке, обернув его восьмеркой.



5.8. Завершите наложение бинта в области верхней суставной поверхности большеберцовой кости таким образом, чтобы маркер из эллипса превратился в круг.

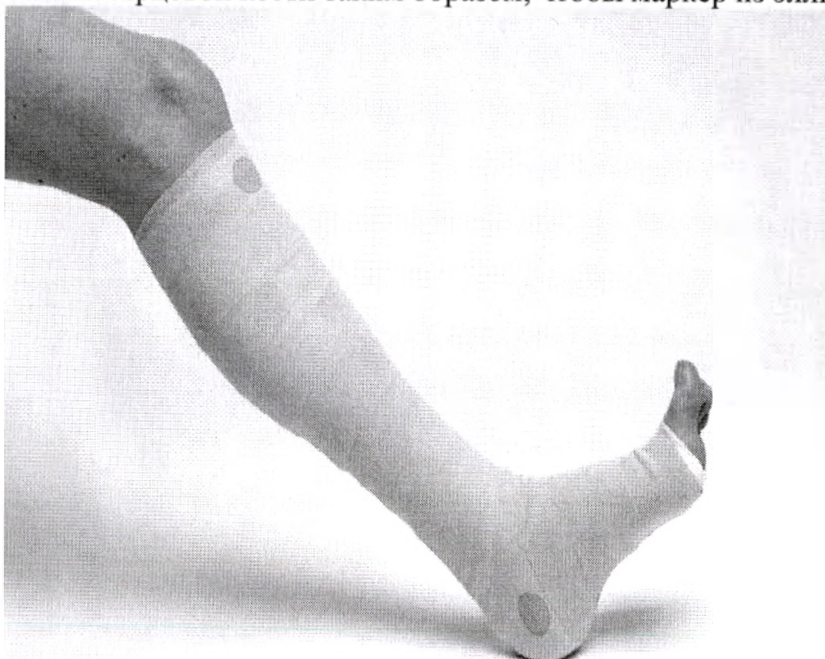

5.9. Остатки бинта отрезать ножницами и убрать в упаковку.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Транспортировать бинты следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70%.

По истечении срока годности товар становится непригодным для использования и подлежит утилизации.

7. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Определенных условий не требуется, бинты могут утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

8. ОЧИСТКА И УХОД:

- Стирать руками при температуре воды не выше 35° С с использованием мягких моющих средств.
- При стирке не тереть и не выкручивать.
- Сушить вдали от источника тепла в расправленном виде.
- Не гладить утюгом.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Срок годности: 5 лет.

2. Бинт медицинский эластичный фиксирующий когезивный сетчатый

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- для закрепления шин.
- в качестве поддерживающего бинта при мышечной боли, для сухожилий и связок,
- для фиксирования повязок, трубок, катетеров, электродов.


2. СОСТАВ

Вискоза, полиамид, каучуковый клей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер (см)	6x400	8x400	10x400	12x400
Растяжимость (%)	55			
Предел прочности на разрыв (N/см)	15			
Допуск в длине (+/- см)	0,5			
Допуск в ширине (+/- см)	0,2			
Средний вес (г)	55 (+/- 10 г)			
Цвет	Белый			
Количество бинтов в одной	1			

упаковке (шт.)	
----------------	--

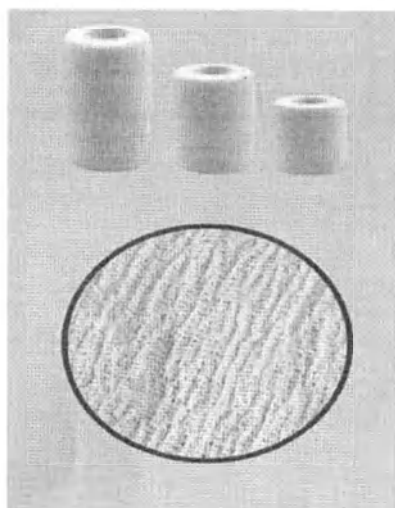

Внешний вид: Бинт медицинский эластичный фиксирующий когезивный сетчатый

3.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: индивидуальная непереносимость

4.ПОДГОВКА К РАБОТЕ: Проверьте целостность упаковки, срок годности.

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Накладывать бинт согласно предложенным схемам, либо по схеме, предложенной врачом.

- 5.1. Достаньте бинт из упаковки.
- 5.2. Разверните 20-30 см бинта, так чтобы покрыть необходимый участок тела и ослабьте растяжение бинта.
- 5.3. Сделайте первый оборот, затем продолжайте накладывать бинт таким образом, чтобы каждый последующий оборот закрывал не менее половины ширины предыдущего слоя бинта.
- 5.4. Для того, чтобы бинт плотно прилегал, последний оборот должен полностью закрывать предыдущий.
- 5.5. По окончании наложения прижмите конец бинта к коже ладонью руки и подержите в течение нескольких секунд или кончик бинта уберите за край последнего оборота бинта.
- 5.6. Остатки бинта отрезать ножницами и убрать в упаковку.

6.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Транспортировать бинты следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70%.

По истечении срока годности товар становится непригодным для использования и подлежит утилизации.

7. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Определенных условий не требуется, бинты могут утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

8. ОЧИСТКА И УХОД:

- Стирать руками при температуре воды не выше 35° С с использованием мягких моющих средств.
- При стирке не тереть и не выкручивать.
- Сушить вдали от источника тепла в расправленном виде.
- Не гладить утюгом.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Срок годности: 5 лет.

3. Бинт медицинский эластичный фиксирующий когезивный

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- для закрепления шин.
- в качестве поддерживающего бинта при мышечной боли, для сухожилий и связок,
- для фиксирования повязок, трубок, катетеров, электродов.

2. СОСТАВ

хлопок, эластан, каучуковый клей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер (см)	4x400	6x400	8x400	10x400	12x400
Растяжимость(%)	55				
Предел прочности на разрыв (N/см)	6				
Допуск в длине (+/- см)	0,5				
Допуск в ширине (+/- см)	0,2				
Средний вес (г)	55 (+/- 10 г)				
Цвет	Белый				
Количество бинтов в одной упаковке (шт.)	1				



когезивный

Внешний вид: Бинт медицинский эластичный фиксирующий

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: индивидуальная непереносимость

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ: Проверьте целостность упаковки, срок годности.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Накладывать бинт согласно предложенным схемам, либо по схеме, предложенной врачом.

5.1. Достаньте бинт из упаковки.

5.2. Разверните 20-30 см бинта, так чтобы покрыть необходимый участок тела и ослабьте растяжение бинта.

5.3. Сделайте первый оборот, затем продолжайте накладывать бинт таким образом, чтобы каждый последующий оборот закрывал не менее половины ширины предыдущего слоя бинта.

5.4. Для того, чтобы бинт плотно прилегал, последний оборот должен полностью закрывать предыдущий.

5.5. По окончании наложения прижмите конец бинта к коже ладонью руки и подержите в течение нескольких секунд или кончик бинта уберите за край последнего оборота бинта.

5.6. Остатки бинта отрезать ножницами и убрать в упаковку.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Транспортировать бинты следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70%.

По истечении срока годности товар становится непригодным для использования и подлежит утилизации.

7. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Определенных условий не требуется, бинты могут утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

8. ОЧИСТКА И УХОД:

— Стирать руками при температуре воды не выше 35° С с использованием мягких моющих средств.

— При стирке не тереть и не выкручивать.

— Сушить вдали от источника тепла в расправленном виде.

— Не гладить утюгом.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Срок годности: 5 лет.



Генеральный директор
ЗАО «Сибирский центр инвестиционных
технологий»

Келин Л.В.

Пронумеровано, прошнуровано

Исстов.
Генеральный директор

