


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ПКФ «РУДАЗ»

Цыбульская С.Ю.
«03» августа 2018



**Фотографические изображения и макет маркировки медицинского изделия:
«Горчичники –пакеты по ТУ 21.20.23–001–34116010–2018 в исполнениях»
производства ООО «ПКФ «РУДАЗ», Россия**

«Горчичники – пакеты по ТУ 21.20.23–001–34116010–2018 в исполнениях»
Исполнение: Горчичник-пакет 20 штук

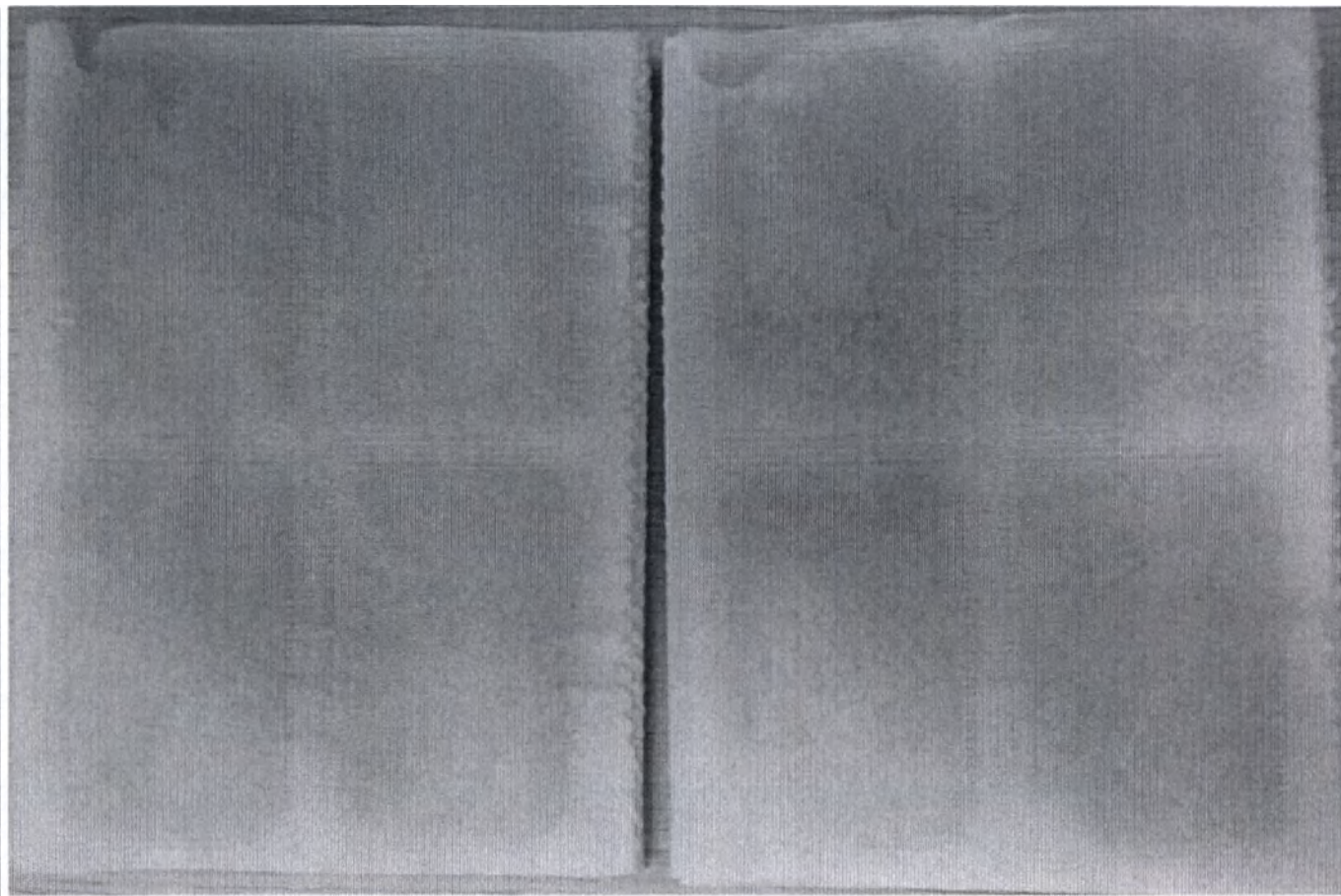



ООО «ПФК «РУДАЗ»

Россия, 346782, г.Азов, ул. Кооперативная, 10

Тел. (863-42) 5-15-98, 5-15-99

e-mail: rudaz17@yandex.ru

ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ 20 ШТУК

ТУ 21.20.23-001-34116010-2018

Применяется для аппликации на кожу человека, как местнораздражающее и согревающее средство при заболеваниях сердечно-сосудистой, бронхо - легочной систем, периферической и центральной нервной систем, заболеваний суставов и позвоночника

Является средством для наружного применения

Состав. Горчичный порошок высшего, первого или второго сорта, жмых горчиный.

Способ применения: Перед применением горчичник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по ячейкам, опускают в воду, нагретую до температуры +37 °С на 15-20 секунд, затем накладывают на кожу пористой стороной. Для усиления эффекта горчичник закрывают полиэтиленовой пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой. Время процедуры – от 5 до 20 минут (до появления стойкой красноты); у детей – 2, 3, 5 или 10 минут, в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения горчичник снимают. По окончании процедуры снять горчичник, насухо вытереть кожу и оставить лежать пациента в тепле не менее 30 минут (лучше процедуру проводить перед сном).

Показания к применению: ринит, фарингит, бронхит, пневмония, головные боли, невралгия, миозит, растяжение связок, радикулит.

Противопоказания: Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, пиодермия, экзема, нейродермит, псориаз, атопический дерматит, гипертермия, туберкулез, онкологические заболевания, дети до 1 года.

Побочные действия: Аллергические реакции, чрезмерно сильное жжение.

Условия хранения: Хранить при температуре воздуха от +4°С до +25°С и относительной влажности до 65% при +25°С. Горчичники должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: без рецепта.

Условия утилизации. Использованные горчичники относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Использованные изделия можно утилизировать с бытовым мусором.

149

Номер партии: 011217

Срок годности: 2 года от даты изготовления


Количество 20 штук.

Размер изделия: (13,2×9,5) см ± 0,5

Регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Штрих-код

«Горчичники – пакеты по ТУ 21.20.23–001–34116010–2018 в исполнениях»
Исполнение: Горчичник-пакет 10 штук

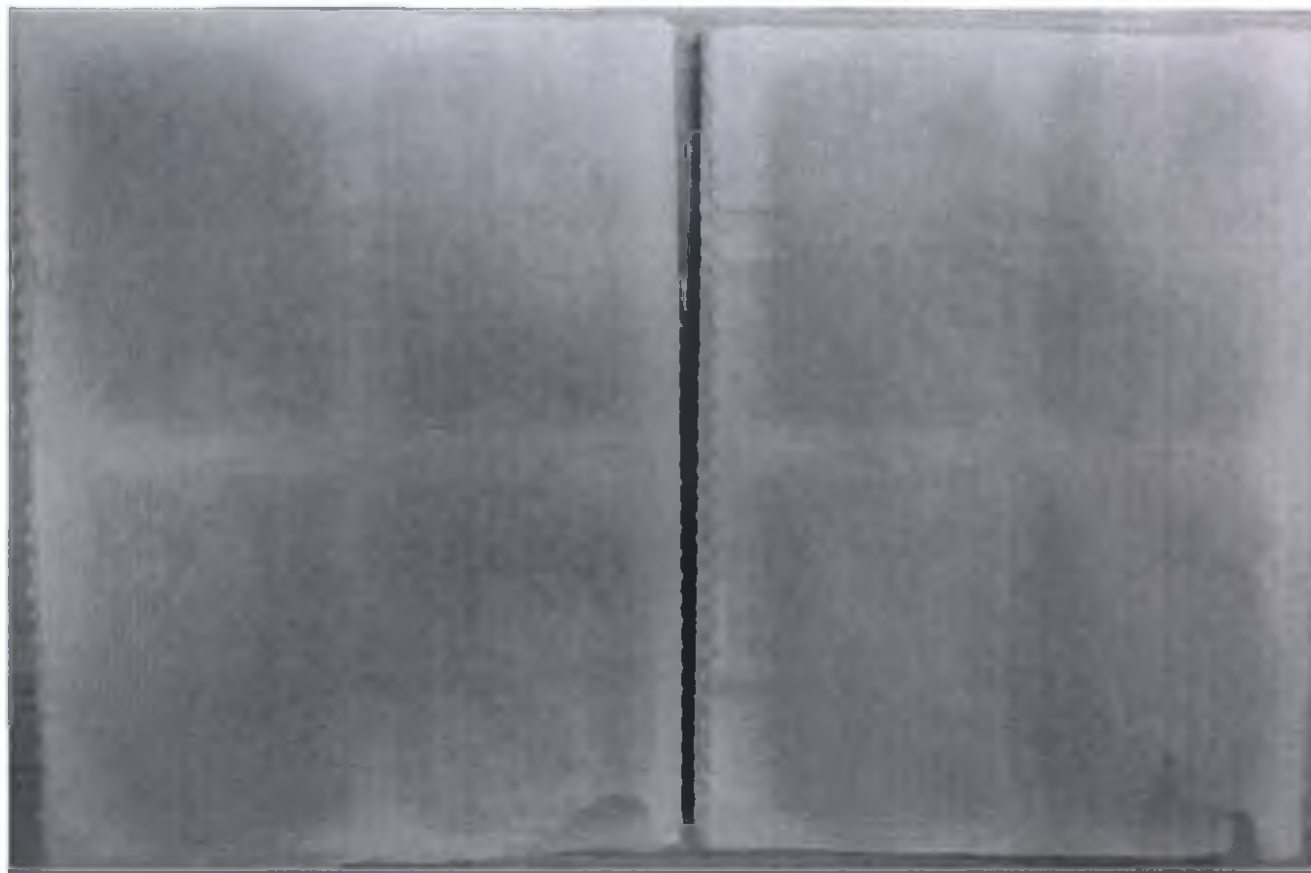

ООО «ПФК «РУДАЗ»
Россия, 346782, г. Азов, ул. Кооперативная, 10
Тел. (863-42) 5-15-98, 5-15-99
e-mail: rudaz17@yandex.ru

ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ 10 ШТУК

ТУ 21.20.23-001-34116010-2018

Применяется для аппликации на кожу человека, как местнораздражающее и согревающее средство при заболеваниях сердечно-сосудистой, бронхо - легочной систем, периферической и центральной нервных систем, заболеваний суставов и позвоночника. Является средством для наружного применения.

Состав: Горчи́чный порошок высшего, первого или второго сорта, жмых горчи́чный.

Способ применения: Перед применением горчи́чник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по ячейкам, опускают в воду, нагретую до температуры +37 °С на 15-20 секунд, затем накладывают на кожу пористой стороной. Для усиления эффекта горчи́чник закрывают полиэтиленовой пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой. Время процедуры – от 5 до 20 минут (до появления стойкой красноты), у детей – 2, 3, 5 или 10 минут, в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения горчи́чник снимают. По окончании процедуры снять горчи́чник, хорошо вытереть кожу и оставить лежать пациента в тепле не менее 30 минут (лучше процедуру проводить перед сном).

Показания к применению: ринит, фарингит, бронхит, пневмония, головные боли, невралгия, миозит, растяжение связок, радикулит.

Противопоказания: Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, пиодермия, экзема, нейродермит, псориаз, атрофический дерматит, гипертермия, туберкулез, онкологические заболевания, дети до 1 года.

Побочные действия: Аллергические реакции, чрезмерно сильное жжение.

Условия хранения: Хранить при температуре воздуха от +4°С до +25°С и относительной влажности до 65% при +25°С. Горчи́чники должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска без рецепта.

Условия утилизации: Использованные горчи́чники относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования и обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Использованные изделия можно утилизировать с бытовым мусором.

Lot

Номер партии: 011217

Срок годности: 2 года от даты изготовления


Количество: 10 штук

Размер изделия: (13,2±0,3) см ± 0,5

А-Регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Штрих-код

Горчичники –пакеты по ТУ 21.20.23–001–34116010–2018 в исполнениях»
Исполнение: Горчичник-пакет 6 штук

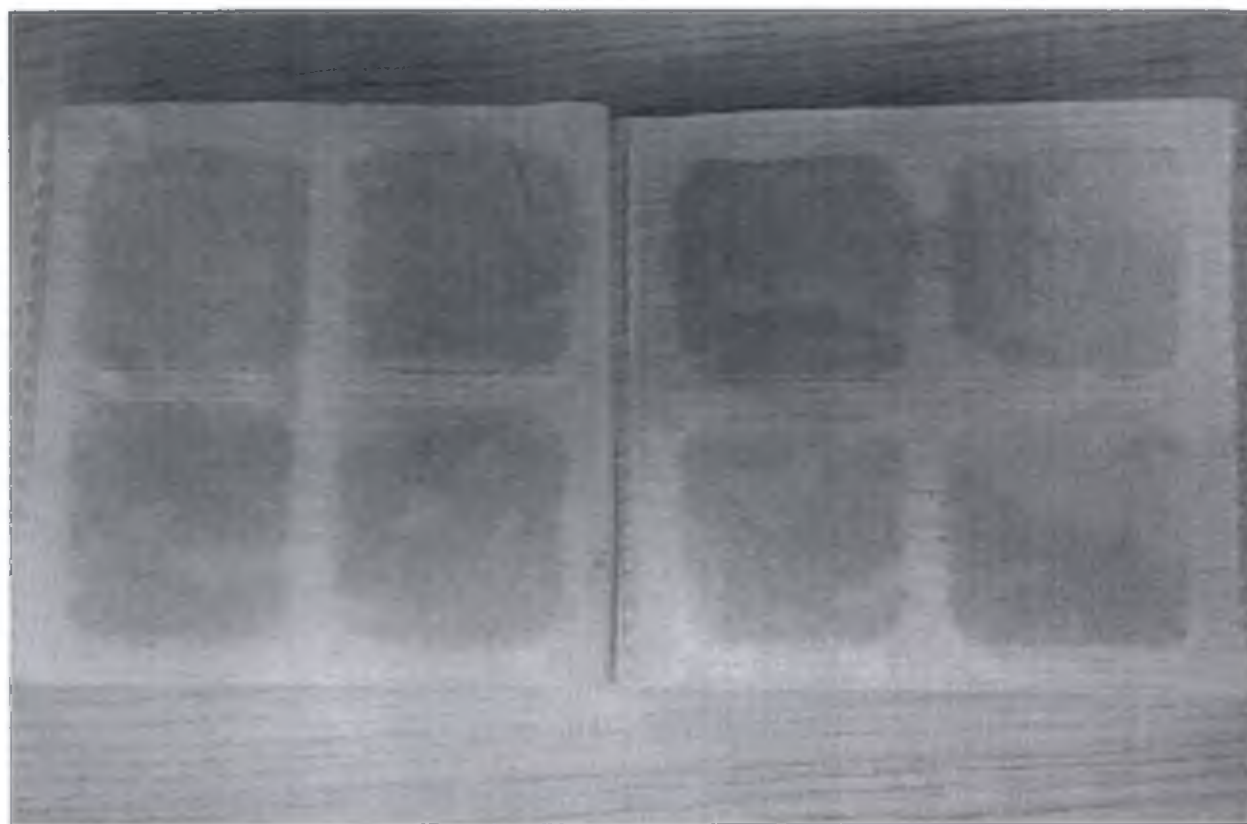

 ООО «ПФК «РУДАЗ»
Россиа, 346782, г. Азов, ул. Кооперативная, 10
Тел (863-42)5-15-98, 5-15-99
e-mail rudaz17@yandex.ru

ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ «ЭКОНОМ» 6 ШТУК

ТУ 21.20.23-001-34116010-2018

Применяется для аппликации на кожу человека, как местнораздражающее и согревающее средство при заболеваниях сердечно-сосудистой, бронхо - легочной систем, периферической и центральной нервной систем, заболеваний суставов и позвоночника. Является средством для наружного применения.

Состав: Горчичный порошок высшего, первого или второго сорта, жмых горчиный.

Способ применения: Перед применением горчичник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по ячейкам, опускают в воду, нагретую до температуры +37 °С на 15-20 секунд, затем накладывают на кожу пористой стороной. Для усиления эффекта горчичник закрывают полиэтиленовой пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой. Время процедуры – от 5 до 20 минут (до появления стойкой красноты), у детей – 2, 3, 5 или 10 минут, в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения горчичник снимают. По окончании процедуры снять горчичник, насухо вытереть кожу и оставить лежать пациента в тепле не менее 30 минут (лучше процедуру проводить перед сном).

Показания к применению: ринит, фарингит, бронхит, пневмония, головные боли, невралгия, миозит, растяжение связок, радикулит.

Противопоказания: Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, пиодермия, экзема, нейродермит, псориаз, атопический дерматит, гипертермия, туберкулез, онкологические заболевания, дети до 1 года.

Побочные действия: Аллергические реакции, чрезмерно сильное жжение.

Условия хранения: Хранить при температуре воздуха от +4°С до +25°С и относительной влажности до 60%, при +25°С. Горчичники должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: без рецепта.

Условия утилизации: Использованные горчичники относятся к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Использованные изделия можно утилизировать с бытовым мусором.

 Номер партии: 011217

Срок годности: 2 года от даты изготовления.


Количество: 6 штук.

Размер изделия: (9,5×9,5) см ± 0,5.

МР Регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Штрих-код

Горчичники –пакеты по ТУ 21.20.23–001–34116010–2018 в исполнениях»
Исполнение: Горчичник-пакет «эконом» 10 штук

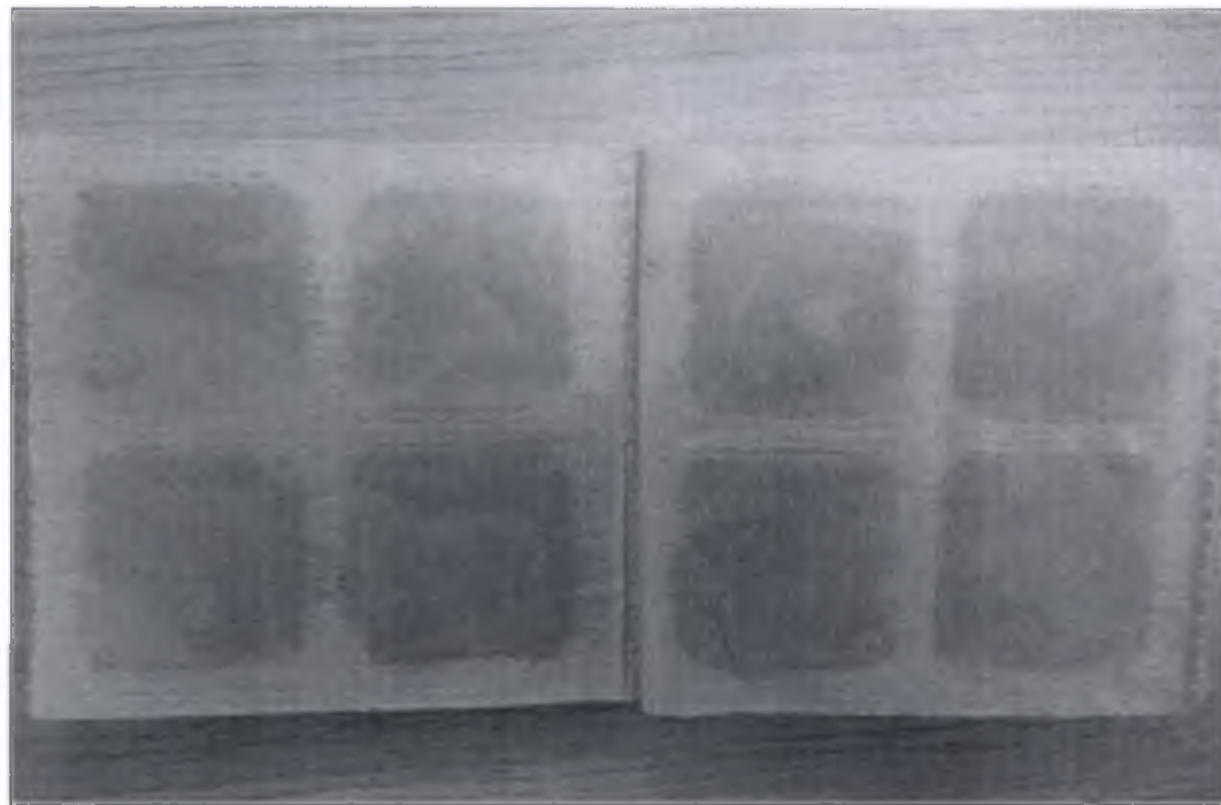

**Горчичники –пакеты по ТУ 21.20.23–001–34116010–2018 в исполнениях»
Исполнение: Горчичник-пакет «эконом» 10 штук (маркировка)**



ООО «ПФК «РУДАЗ»
Россия, 346782, г Азов, ул. Кооперативная, 10
Тел (863-42)5-15-98, 5-15-99

e-mail azov17@yandex.ru

ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ «ЭКОНОМ» 10 ШТУК

ТУ 21.20.23-001-34116010-2018

Применяется для аппликации на кожу человека, как местнораздражающее и согревающее средство при заболеваниях сердечно-сосудистой, бронхо - легочной систем, периферической и центральной нервных систем, заболеваний суставов и позвоночника
Является средством для наружного применения

Состав: Горчичный порошок высшего, первого или второго сорта, жмых горчицы.

Способ применения: Перед применением горчичник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по ячейкам, опускают в воду, нагретую до температуры $+37^{\circ}\text{C}$ на 15-20 секунд, затем накладывают на кожу пористой стороной. Для усиления эффекта горчичник закрывают полиэтиленовой пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой. Время процедуры - от 5 до 20 минут (до появления стойкой красноты), у детей - 2, 3, 5 или 10 минут, в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения горчичник снимают. По окончании процедуры снять горчичник, насухо вытереть кожу и оставить лежать пациента в тепле не менее 30 минут (лучше процедуру проводить перед сном)

Показания к применению: ринит, фарингит, бронхит, пневмония, головные боли, невралгия, миозит, растяжение связок, радикулит.

Противопоказания: Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, пиодермия, экзема, нейродермит, псориаз, атолический дерматит, гипертермия, туберкулез, онкологические заболевания, дети до 1 года.

Побочные действия: Аллергические реакции, чрезмерно сильное жжение

Условия хранения: Хранить при температуре воздуха от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 65% при $+25^{\circ}\text{C}$. Горчичники должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.

Хранить в недоступном для детей месте

Условия отпуска без рецепта

Условия утилизации. Использованные горчичники относятся к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Использованные изделия можно утилизировать с бытовым мусором.



Номер партии 011217

Срок годности: 2 года от даты изготовления


Количество 10 штук

Размер изделия: $(9,5 \times 9,5)$ см $\pm 0,5$

№ Регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Штрих-код

Горчичники –пакеты по ТУ 21.20.23–001–34116010–2018 в исполнениях»
Исполнение: Горчичник-пакет «эконом» 20 штук

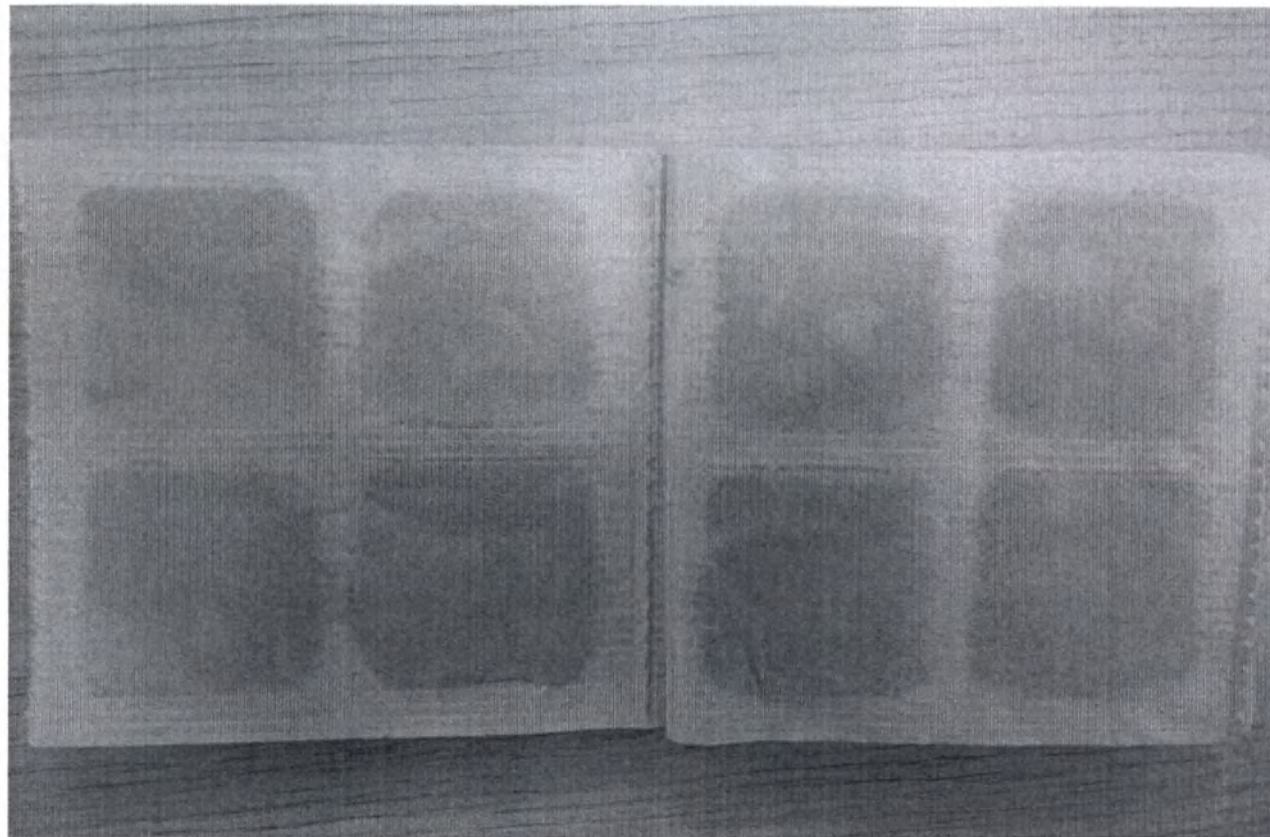



ООО «ПФК «РУДАЗ»
Россия, 346782, г Азов, ул. Кооперативная, 10
Тел (863-42)5-15-98, 5-15-99
e-mail: rudaz17@yandex.ru

ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ «ЭКОНОМ» 20 ШТУК

ТУ 21.20.23-001-34116010-2018

Применяется для аппликации на кожу человека, как местнораздражающее и согревающее средство при заболеваниях сердечно-сосудистой, бронхо - легочной систем, периферической и центральной нервной систем, заболеваний суставов и позвоночника. Является средством для наружного применения.

Состав Горчичный порошок высшего, первого или второго сорта, жмых горчичный.

Способ применения Перед применением горчичник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по ячейкам, опускают в воду, нагретую до температуры +37 °С на 15-20 секунд, затем накладывают на кожу пористой стороной. Для усиления эффекта горчичник закрывают полиэтиленовой пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой. Время процедуры - от 5 до 20 минут (до появления стойкой красноты), у детей - 2, 3, 5 или 10 минут, в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения горчичник снимают. По окончании процедуры снять горчичник, насухо вытереть кожу и оставить лежать пациента в тепле не менее 30 минут (лучше процедуру проводить перед сном).

Показания к применению ринит, фарингит, бронхит, пневмония, головные боли, невралгия, миозит, растяжение связок, радикулит.

Противопоказания: Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, пиодермия, экзема, нейродермит, псориаз, атопический дерматит, гипертермия, туберкулез, онкологические заболевания, дети до 1 года.

Побочные действия Аллергические реакции, чрезмерно сильное жжение.

Условия хранения: Хранить при температуре воздуха от +4°С до +25°С и относительной влажности до 65% при +25°С. Горчичники должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска без рецепта.

Условия утилизации. Использованные горчичники относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Использованные изделия можно утилизировать с бытовым мусором.



Номер партии: 011217

Срок годности 2 года от даты изготовления.

Количество 20 штук.

Размер изделия: (9,5×9,5) см ± 0,5

№ Регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Штрих-код

Горчичники –пакеты по ТУ 21.20.23–001–34116010–2018 в исполнениях»
Исполнение: Горчичник-пакет «ЭЛИТ» 10 штук





ООО «ПФК «РУДАЗ»
Россия, 346782, г. Азов, ул. Кооперативная, 10
Тел. (863-42) 5-15-98, 5-15-99
e-mail: rudaz176@yandex.ru

ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ «ЭЛИТ» 10 ШТУК

ТУ 21.20.23-001-34116010-2018

Применяется для аппликации на кожу человека, как местнораздражающее и согревающее средство при заболеваниях сердечно-сосудистой, бронхо - легочной систем, периферической и центральной нервной систем, заболеваний суставов и позвоночника.

Является средством для наружного применения.

Состав: Горчичный порошок высшего или первого сорта- 50%, жмых льняной- 50 %.

Способ применения: Перед применением горчичник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по ячейкам, опускают в воду, нагретую до температуры +37 °С на 15-20 секунд, затем накладывают на кожу пористой стороной. Для усиления эффекта горчичник закрывают полиэтиленовой пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой. Время процедуры – от 5 до 20 минут (до появления стойкой красноты); у детей – 2, 3, 5 или 10 минут, в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения горчичник снимают. По окончании процедуры снять горчичник, насухо вытереть кожу и оставить лежать пациента в тепле не менее 30 минут (лучше процедуру проводить перед сном).

Показания к применению: ринит, фарингит, бронхит, пневмония, головные боли, невралгия, миозит, растяжение связок, радикулит.

Противопоказания: Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, пиодермия, экзема, нейродермит, псориаз, атолический дерматит, гипертермия, туберкулез, онкологические заболевания, дети до 1 года.

Побочные действия: Аллергические реакции, чрезмерно сильное жжение.

Условия хранения: Хранить при температуре воздуха от +4°С до +25°С и относительной влажности до 65% при +25°С. Горчичники должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: без рецепта.

Условия утилизации: Использованные горчичники относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Использованные изделия можно утилизировать с бытовым мусором.

Lot Номер партии: 011217

Срок годности: 2 года от даты изготовления.


Количество: 10 штук.

Размер изделия: (13,2×9,5) см ± 0,5

№ Регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Штрих-код

Горчичники – пакеты по ТУ 21.20.23–001–34116010–2018 в исполнениях»
Исполнение: Горчичник-пакет детский «ЭЛИТ» 10 штук

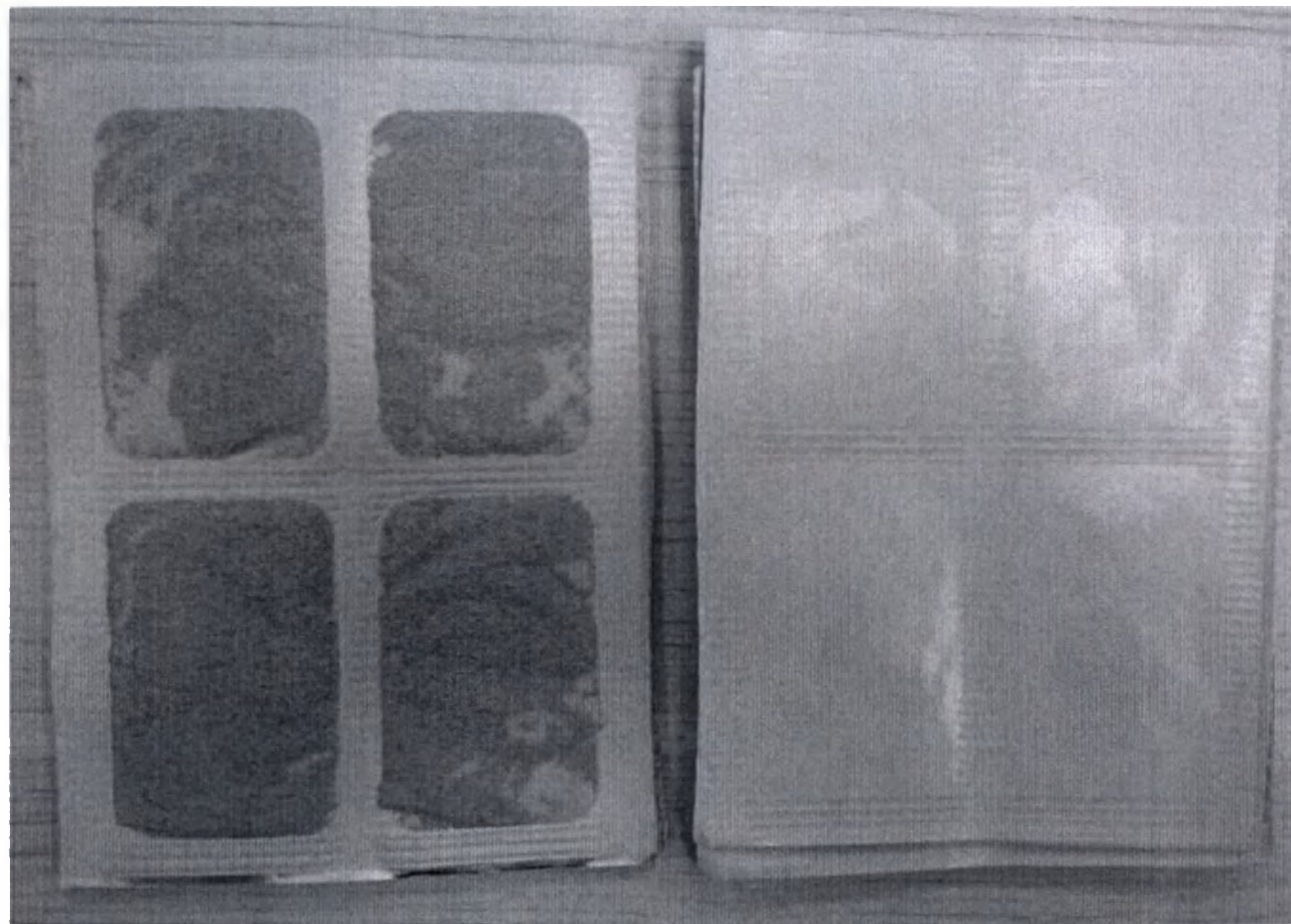



ООО «ПФК «РУДАЗ»
Россия, 346782, г. Азов, ул. Кооперативная, 10
Тел. (863-42) 5-15-98, 5-15-99

e-mail: info@pfk-rudaz.ru

ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ ДЕТСКИЙ «ЭЛИТ» 10 ШТУК

ТУ 21.20.23-001-34116010-2018

Применяется для аппликации на кожу человека, как местнораздражающее и согревающее средство при заболеваниях сердечно-сосудистой, бронхо-легочной систем, периферической и центральной нервной систем, заболеваний суставов и позвоночника.

Является средством для наружного применения.

Состав: Горчичный порошок высшего или первого сорта - 30%, жмых льняной - 70 %.

Способ применения: Перед применением горчичник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по ячейкам, опускают в воду, нагретую до температуры +37 °С на 15-20 секунд, затем накладывают на кожу пористой стороной. Для усиления эффекта горчичник закрывают полиэтиленовой пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой. Время процедуры - от 5 до 20 минут (до появления стойкой красноты); у детей - 2, 3, 5 или 10 минут, в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения горчичник снимают. По окончании процедуры снять горчичник, насухо вытереть кожу и оставить лежать пациента в тепле не менее 30 минут (лучше процедуру проводить перед сном).

Горчичники ставятся не чаще одного раза в сутки.

Малышу от 1 до 3 лет рекомендуется держать горчичник не дольше 2-3 минут.

Детям от 3 и до 6-7 лет можно оставлять горчичник до 3-5 минут.

Детям старше 6-7 лет допускается применение горчичников до 10 мин.

Показания к применению: ринит, фарингит, бронхит, пневмония, головные боли, невралгия, миозит, растяжение связок, радикулит.

Противопоказания: Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, пиодермия, экзема, нейродермит, псориаз, атопический дерматит, гипертермия, туберкулез, онкологические заболевания, дети до 1 года.

Побочные действия: Аллергические реакции, чрезмерно сильное жжение.

Условия хранения: Хранить при температуре воздуха от +4 °С до +25 °С и относительной влажности до 65% при +25 °С. Горчичники должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска: без рецепта.

Условия утилизации: Использованные горчичники относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163). Использованные изделия можно утилизировать с бытовым мусором.

№ Номер партии 011217

Срок годности: 2 года от даты изготовления

Количество: 10 штук.

Размер изделия: (13,2×9,5) см ± 0,5

№ Регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Штрих-код

печатью на 15 листах
Генеральный директор ООО «ПФ «РУДАЗ»
Цыбульская С.Ю. _____

