

Руководство

по эксплуатации линз интраокулярных полимерных заднекамерных с разомкнутыми опорными элементами S-образной формы стерильных ИОЛ-S-«ЧАЛЛЫ»

Показания

Имплантация интраокулярных линз рекомендуется в следующих случаях:

Во время или после экстракции катаракты в пожилом возрасте (особенно в случаях катаракты одного глаза), пациентам, которые могут иметь проблемы с контактными линзами и/или зрение которых плохо адаптируется к очкам с сильными собирающими линзами. (В эту группу могут входить пациенты с профессиональными ограничениями, немолодого возраста, с заболеваниями типа желтых пятен сетчатки – с целью сохранения периферического зрения).

Противопоказания

Ниже перечислены случаи, в которых врач должен убедиться в отсутствии чрезмерного риска для пациента. Хирурги должны рассмотреть все альтернативные методы и остановиться на имплантации хрусталика только в том случае, если эти методы не окажутся достаточно эффективными:

- ◆ врожденные двусторонние катаракты;
- ◆ катаракта глаз с рецидивирующим воспалением переднего или заднего сегмента;
- ◆ хирургические сложности во время экстракции катаракты, которые могут вызвать потенциальные осложнения (потерю стекловидного тела, кровотечение и т.п.);
- ◆ нарушение радужной оболочки, которое может помешать адекватной фиксации хрусталика, например, отсутствие радужки, широкая колобома радужки или ее тяжелая атрофия;
- ◆ некомпенсированная глаукома;
- ◆ микрофтальм;
- ◆ катаракта, наличие которой затрудняет наблюдение, диагностику и лечение заболевания переднего или заднего сегмента.

Предупреждения

Как и любая другая хирургическая операция, имплантация интраокулярной линзы сопряжена с определенным риском.

Ниже следует неполный перечень потенциальных осложнений:

- ◆ дислокация линзы;
- ◆ потеря стекловидного тела;
- ◆ роговичное эндотелиальное повреждение;
- ◆ не пигментные преципитаты;
- ◆ кистозный локулярный отек;
- ◆ выпадение радужной оболочки;
- ◆ грыжа стекловидного тела;
- ◆ патологическая зрачковая мембрана;
- ◆ блокада зрачка;
- ◆ вторичная глаукома;
- ◆ отслойка сетчатки;
- ◆ инфекция.

3. Меры предосторожности

- ◆ Не использовать линзу, если стерильный пакет был открыт или поврежден.
- ◆ Не использовать линзу повторно.
- ◆ Не подвергать линзу повторной стерилизации.
- ◆ Не промывать линзу ни в каком растворе, кроме стерильного сбалансированного солевого раствора или стерильного сбалансированного физиологического раствора.
- ◆ Не хранить линзы под прямыми солнечными лучами или при температуре выше 45°C.
- ◆ Не использовать линзы после истечения срока реализации, указанного на внешней стороне упаковки.
- ◆ Обращаться с линзами осторожно. Грубое обращение может привести к повреждению линзы.

