



Генеральный директор
«Дентекс»

Чернышов А.А.
2011 г.

**Инструкция по применению
изделия медицинского назначения:**

**«Материал стоматологический полировочный (суспензия) Vector Fluid
Polish»**

производства DÜRR DENTAL AG, Bietigheim-Bissingen /Германия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ



VECTOR®Fluid polish

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- * Суспензия предназначена только для использования с аппаратом Dürr Vector®.
- * Суспензия для полировочной обработки зубов, протеза и корней зубов.
- * Минимальноинвазивная, ультразвукодинамическая обработка пародонтальных карманов.
- * Эффективно и щадяще удаляет микробную биопленку, налет, зубной камень, субгингивальные конкременты и эндотоксины.
- * Пригоден для супра- и субгингивального использования.
- * Очистка зубов, протезов-, поверхностей имплантатов, даже в труднодоступных участках, как например костных карманов, фурункул или текстурированная поверхность имплантата.
- * Клинически испытан.

СВОЙСТВА

Vector®Fluid polish является суспензией для щадящей, интенсивной, ультразвукодинамической очистки зубов, протезов и поверхностей корней зубов аппаратом Dürr Vector. Благодаря этой методики - Dürr Vector в комбинации со специальными инструментами и Vector®Fluid polish - дает возможность направленного на причину, минимальноинвазивного лечения пародонтита. Пародонтальные карманы и находящиеся в них налет тщательно и эффективно вымываются. Биопленка и субгингивальные конкременты щадяще удаляются. Бактерии и эндотоксины - также из зон краевых поверхностей - эффективно снижаются. Дальнейшей областью применения является очистка зубов в результате удаления налета и зубного камня с поверхностей зубов-, протеза и имплантата как и щадящая полировка зубов и поверхности корней.

СОСТАВ ПРОДУКЦИИ

Vector®Fluid polish содержит частицы гидроксиапатита, диспергатор, РНВ-эфир (парабены) и вспомогательные вещества в водном растворе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Vector®Fluid polish это концентрат, который автоматически разбавляется при работе с Dürr Vector® в нужной концентрации водой.

ТОКСИКОЛОГИЯ

По параметрам острой оральной токсичности (LD₅₀) составляет на крысах > 5 мл/кг веса тела. Этим самым Vector®Fluid polish классифицируется как "не токсичный". Vector®Fluid polish не имеет как сенсibilизирующие так и раздражающие глаза свойства.

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Находящиеся в Vector®Fluid polish органические вещества биологически разлагаемы. Упаковка состоит из Polyethylenterephthalat/Polyethylen, которую можно использовать как сырьё и топливо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	белая вязкая жидкость
Плотность:	D = 1,10 ± 0,05 гр/см³ (20 °C)
pH:	6,7 ± 0,5
Средняя величина зерна (гидроксиапатита):	≤ 10 µm

СРОК ГОДНОСТИ	1 год, с момента использования 4 недели - хранить при температуре не ниже 5 °C
УПАКОВКА	200 мл.-пакет в картонной коробке 5 x 200 мл. в картонной упаковке
ХРАНЕНИЕ	Хранить препарат в прохладном месте, но при температуре не ниже 5 °C .

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Vector®Fluid polish обладает полировочно-абразивными свойствами. Колпачек пакета не удалять.

Перед перерывом между приемом превышающий 24 часа (например выходные дни, отпуск) необходимо Dürer Vector® промыть и дезинфицировать согласно инструкции специальным препаратом Vector® Desinfektion.

При известной непереносимости пациента к РНВ-эфирам (парбены) нельзя использовать Vector®Fluid polish. В данном случае рекомендуется проводить лечение только с водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промыть их проточной водой. Не проглатывать.

ВЕКТОР®-КОМПОНЕНТЫ

Vector® состоит из базового аппарата, наконечника, педали, подставки наконечника • наборов инструментов из металла, углеродистого волокна и пластмассы для первичной и поддерживающей терапии • Vector®Fluid polish • Vector®Fluid abrasive • Vector® Desinfektion

CE

Рекомендации для наших препаратов основаны на результатах внутренних и внешних научных исследований. Ответственность оценивается согласно нашим "Общим условиям по реализации и поставке", которые можно запросить в любое время.

Данные на 04/05