



Директор  
ООО «Мастер Стар»  
/ Котова Н.А. /

«07» декабря 2018 г.

## **Инструкция по применению**

# **КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ТУ 14.12.30–003–94305616–2018**

производства ООО «Мастер Стар»

2018 г.

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Одежда медицинская многоразового использования предназначена для повседневного использования персоналом медицинских учреждений во время амбулаторного приёма пациентов и проведения лечебных процедур (далее по тексту – одежда, изделия).

## **2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Одежда медицинская многоразового использования применяется в медицинских учреждениях, стационарах, поликлинических отделениях, лабораториях, медицинских транспортных средствах, передвижных пунктах оказания первой помощи.

## **3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Одежда показана для повседневного использования персоналом медицинских учреждений с целью защиты от прямого контакта с болезнетворными организмами.

## **4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Индивидуальная непереносимость или аллергические реакции на материалы, из которых изготовлена одежда.

## **5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ**

Не использовать после истечения срока годности. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

## **6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Отсутствуют.

## **7. НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 1) - Халат Лазурь;
- Халат женский;
- Халат Снежность;
- Халат Илона;
- Халат Снежность С.

Халаты предназначены для защиты от загрязнений.

Халат полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы; с накладными карманами; с хлястиком. Полочка и спинка с рельефными швами от плечевого шва. Рукав втачной одношовный длинный. Воротник английский (Халат Лазурь, Халат Снежность, Халат Илона) или отложной (Халат женский, Халат Снежность С).

Основные измерения готового женского халата

в сантиметрах

| Основные измерения готового женского халата |                                                                                |                              |                                      |       |         |         |         |         |         |                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| Номер измерения                             | Наименование измерения                                                         | Рост типовой фигуры человека | Обхват груди типовой фигуры человека |       |         |         |         |         |         | Допускаемое отклонение |
|                                             |                                                                                |                              | 80-84                                | 88-92 | 96-100  | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |                        |
|                                             |                                                                                |                              | Обхват бедер типовой фигуры человека |       |         |         |         |         |         |                        |
|                                             |                                                                                |                              | 86-90                                | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 | 134-138 |                        |
| 1                                           | Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа                    | 146-152                      | 100,0                                | 100,0 | 100,0   | 100,0   | -       | -       | -       | ±1,0                   |
|                                             |                                                                                | 158-164                      | 106,0                                | 106,0 | 106,0   | 106,0   | 106,0   | 106,0   | 106,0   |                        |
|                                             |                                                                                | 170-176                      | 112,0                                | 112,0 | 112,0   | 112,0   | 112,0   | 112,0   | 112,0   |                        |
|                                             |                                                                                | 182-188                      | -                                    | 118,0 | 118,0   | 118,0   | -       | -       | -       |                        |
| 2                                           | Ширина спинки в самом узком месте                                              | 146-188                      | 38,5                                 | 40,5  | 42,5    | 44,5    | 46,5    | 48,5    | 50,5    | ±0,5                   |
| 3                                           | Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта | 146-152                      | 104,0                                | 104,0 | 104,0   | 104,0   | -       | -       | -       | ±1,0                   |
|                                             |                                                                                | 158-164                      | 110,0                                | 110,0 | 110,0   | 110,0   | 110,0   | 110,0   | 110,0   |                        |
|                                             |                                                                                | 170-176                      | 116,0                                | 116,0 | 116,0   | 116,0   | 116,0   | 116,0   | 116,0   |                        |
|                                             |                                                                                | 182-188                      | -                                    | 122,0 | 122,0   | 122,0   | -       | -       | -       |                        |
| 4                                           | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте      | 146-188                      | 20,2                                 | 21,0  | 21,8    | 22,6    | 23,4    | 24,2    | 25,0    | ±0,5                   |
| 5                                           | Ширина халата на уровне глубины проймы                                         | 146-188                      | 51,0                                 | 55,0  | 59,0    | 63,0    | 67,0    | 71,0    | 74,0    | ±1,0                   |
| 6                                           | Ширина халата внизу                                                            | 146-188                      | 61,0                                 | 65,0  | 69,0    | 73,0    | 77,0    | 81,0    | 84,0    | ±1,0                   |
| 7                                           | Длина рукава                                                                   | 146-152                      | 54,8                                 | 55,0  | 55,2    | 55,4    | -       | -       | -       | ±1,0                   |
|                                             |                                                                                | 158-164                      | 58,8                                 | 59,0  | 59,2    | 59,4    | 59,6    | 59,8    | 60,0    |                        |
|                                             |                                                                                | 170-176                      | 62,8                                 | 63,0  | 63,2    | 63,4    | 63,6    | 63,8    | 64,0    |                        |
|                                             |                                                                                | 182-188                      | -                                    | 67,0  | 67,2    | 67,4    | -       | -       | -       |                        |
| 8                                           | Ширина рукава на уровне глубины проймы                                         | 146-188                      | 18,1                                 | 19,5  | 20,9    | 22,3    | 23,7    | 25,1    | 26,7    | ±0,5                   |
| 9                                           | Количество карманов                                                            | 146-188                      | 3 шт                                 | 3 шт  | 3 шт    | 3 шт    | 3 шт    | 3 шт    | 3 шт    | -                      |

|    |                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 10 | Ширина нагрудного кармана                                           | 146-188 | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | ±0,5  |
| 11 | Длина нагрудного кармана                                            | 146-188 | 13,5 | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | ±0,5  |
| 12 | Длина бокового кармана по длинной стороне                           | 146-188 | 22   | 22,5 | 23   | 23   | 23   | 23,5 | 24,5 | ±0,5  |
| 13 | Ширина бокового кармана вверх на уровне нижнего угла входа в карман | 146-188 | 14   | 15   | 16   | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | ±0,5  |
| 14 | Ширина бокового кармана внизу                                       | 146-188 | 15,5 | 16   | 17,5 | 19   | 20,5 | 21   | 21,5 | ±0,5  |
| 15 | Количество пуговиц                                                  | 146-188 | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | -     |
| 16 | Диаметр пуговиц                                                     | 146-188 | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | ±0,05 |
| 17 | Длина английского воротника                                         | 146-188 | 55   | 57   | 59   | 61   | 65   | 68   | 70   | ±0,5  |
| 18 | Ширина английского воротника                                        | 146-188 | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | ±0,3  |
| 19 | Длина отложного воротника                                           | 146-188 | 40   | 41   | 43   | 46   | 49   | 53   | 54   | ±0,5  |
| 20 | Ширина отложного воротника                                          | 146-188 | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | ±0,3  |

- 2) - Халат Практик;  
 - Халат Гиппократ мужской;  
 - Халат мужской 1;  
 - Халат мужской 2;

Халаты предназначены для защиты от загрязнений.

Халат прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы; с накладными карманами. Полочка с кокеткой. Спинка с кокеткой. Рукав втачной одношовный. Воротник английский (Халат Практик, Халат мужской 2) или отложной (Халат мужской 1), или воротник-стойка (Халат Гиппократ мужской).

Основные измерения готового мужского халата

в сантиметрах

| Номер измерения | Наименование измерения                                                         | Рост типовой фигуры человека             | Обхват груди типовой фигуры человека |                                  |                                  |                                  |                          |                          | Допускаемое отклонение |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 |                                                                                |                                          | 88-92                                | 96-100                           | 104-108                          | 112-116                          | 120-124                  | 128-132                  |                        |
|                 |                                                                                |                                          | Обхват бедер типовой фигуры человека |                                  |                                  |                                  |                          |                          |                        |
|                 |                                                                                |                                          | 72-76                                | 80-84                            | 88-92                            | 96-100                           | 104-108                  | 112-118                  |                        |
| 1               | Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа                    | 158-164<br>170-176<br>182-188<br>194-200 | 104,0<br>110,0<br>116,0<br>-         | 104,0<br>110,0<br>116,0<br>122,0 | 104,0<br>110,0<br>116,0<br>122,0 | 104,0<br>110,0<br>116,0<br>122,0 | -<br>110,0<br>116,0<br>- | -<br>110,0<br>116,0<br>- | ±1,0                   |
| 2               | Ширина спинки в самом узком месте                                              | 158-200                                  | 45,5                                 | 47,5                             | 49,5                             | 51,5                             | 53,5                     | 55,5                     | ±0,5                   |
| 3               | Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта | 158-164<br>170-176<br>182-188<br>194-200 | 105,0<br>111,0<br>117,0<br>-         | 106,0<br>112,0<br>118,0<br>124,0 | 107,0<br>113,0<br>119,0<br>125,0 | 108,0<br>114,0<br>120,0<br>126,0 | -<br>115,0<br>121,0<br>- | -<br>116,0<br>122,0<br>- | ±1,0                   |
| 4               | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте      | 158-200                                  | 24,2                                 | 25,4                             | 26,6                             | 27,8                             | 29,0                     | 30,2                     | ±0,5                   |
| 5               | Ширина халата на уровне глубины проймы                                         | 158-200                                  | 60,0                                 | 64,0                             | 68,0                             | 72,0                             | 76,0                     | 80,0                     | ±1,0                   |
| 6               | Ширина халата внизу                                                            | 158-200                                  | 62,0                                 | 66,0                             | 70,0                             | 74,0                             | 78,0                     | 82,0                     | ±1,0                   |
| 7               | Длина рукава                                                                   | 158-164<br>170-176<br>182-188<br>194-200 | 62,0<br>65,0<br>68,0<br>-            | 62,0<br>65,0<br>68,0<br>71,0     | 62,0<br>65,0<br>68,0<br>71,0     | 62,0<br>65,0<br>68,0<br>71,0     | -<br>65,0<br>68,0<br>-   | -<br>65,0<br>68,0<br>-   | ±1,0                   |
| 8               | Ширина рукава на уровне глубины проймы                                         | 158-200                                  | 22,0                                 | 23,5                             | 25,0                             | 26,5                             | 28,0                     | 29,5                     | ±0,5                   |
| 9               | Количество карманов                                                            | 158-200                                  | 3 шт                                 | 3 шт                             | 3 шт                             | 3 шт                             | 3 шт                     | 3 шт                     | -                      |
| 10              | Ширина бокового кармана                                                        | 158-200                                  | 19                                   | 19                               | 19                               | 19                               | 19                       | 19                       | ±0,5                   |
| 11              | Длина бокового кармана                                                         | 158-200                                  | 20                                   | 20                               | 20                               | 20                               | 20                       | 20                       | ±0,5                   |
| 12              | Ширина нагрудного кармана                                                      | 158-200                                  | 13                                   | 13                               | 13                               | 13                               | 13                       | 13                       | ±0,5                   |

|    |                                               |         |      |      |      |      |      |      |       |
|----|-----------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 13 | Длина нагрудного кармана                      | 158-200 | 13,5 | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | ±0,5  |
| 14 | Количество пуговиц                            | 158-200 |      |      |      |      |      |      | -     |
|    | Халат Практик                                 |         | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт |       |
|    | Халат Гиппократ мужской                       |         | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |       |
|    | Халат мужской 1                               |         | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт |       |
|    | Халат мужской 2                               |         | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |       |
| 15 | Диаметр пуговиц                               | 158-200 | 1,9  | 1,9  | 1,9  | 1,9  | 1,9  | 1,9  | ±0,05 |
| 16 | Длина английского воротника                   | 158-200 | 59   | 61   | 63   | 67   | 70   | 72   | ±0,5  |
| 17 | Ширина английского воротника                  | 158-200 | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | ±0,3  |
| 18 | Длина отложного воротника и воротника-стойки  | 158-200 | 44   | 44   | 44   | 44   | 45   | 45   | ±0,5  |
| 19 | Ширина отложного воротника и воротника-стойки | 158-200 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | ±0,3  |

3) - Халат Диана 1;

- Халат Диана 2;

- Халат Леда;

Халаты предназначены для защиты от загрязнений.

Халат полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы; с накладными карманами; с хлястиком.

Полочка и спинка с рельефными швами от плечевого шва. Рукав втачной одношовный короткий. Воротник-стойка (Халат Диана 1, Халат Диана 2) или без воротника с треугольным вырезом горловины (Халат Леда).

Основные измерения готового женского халата

в сантиметрах

| Номер измерения | Наименование измерения                                            | Рост<br>типовой<br>фигуры<br>человека | Обхват груди типовой фигуры человека |       |         |         |         |         |         | Допускаемое<br>отклонение |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
|                 |                                                                   |                                       | 80-84                                | 88-92 | 96-100  | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |                           |
|                 |                                                                   |                                       | Обхват бедер типовой фигуры человека |       |         |         |         |         |         |                           |
|                 |                                                                   |                                       | 86-90                                | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 | 134-138 |                           |
| 1               | Длина спинки посередине<br>от шва втачивания<br>воротника до низа | 146-152                               | 100,0                                | 100,0 | 100,0   | 100,0   | -       | -       | -       | ±1,0                      |
|                 |                                                                   | 158-164                               | 106,0                                | 106,0 | 106,0   | 106,0   | 106,0   | 106,0   | 106,0   |                           |
|                 |                                                                   | 170-176                               | 112,0                                | 112,0 | 112,0   | 112,0   | 112,0   | 112,0   | 112,0   |                           |
|                 |                                                                   | 182-188                               | -                                    | 118,0 | 118,0   | 118,0   | -       | -       | -       |                           |
| 2               | Ширина спинки в самом<br>узком месте                              | 146-188                               | 38,5                                 | 40,5  | 42,5    | 44,5    | 46,5    | 48,5    | 50,5    | ±0,5                      |

|   |                                                                                         |         |       |       |       |       |       |       |       |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3 | Длина полочки от угла<br>плечевого шва и горловины<br>до низа параллельно краю<br>борта | 146-152 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | -     | -     | -     | ±1,0 |
|   |                                                                                         | 158-164 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |      |
|   |                                                                                         | 170-176 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |      |
|   |                                                                                         | 182-188 | -     | 122,0 | 122,0 | 122,0 | -     | -     | -     |      |
| 4 | Ширина полочки от шва<br>втачивания рукава до края<br>борта в самом узком месте         | 146-188 | 20,2  | 21,0  | 21,8  | 22,6  | 23,4  | 24,2  | 25,0  | ±0,5 |
| 5 | Ширина халата на уровне<br>глубины проймы                                               | 146-188 | 51,0  | 55,0  | 59,0  | 63,0  | 67,0  | 71,0  | 74,0  | ±1,0 |
| 6 | Ширина халата внизу                                                                     | 146-188 | 61,0  | 65,0  | 69,0  | 73,0  | 77,0  | 81,0  | 84,0  | ±1,0 |
| 7 | Длина рукава                                                                            | 146-152 | 22,0  | 22,0  | 22,0  | 22,0  | -     | -     | -     | ±0,5 |
|   |                                                                                         | 158-164 | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  |      |
|   |                                                                                         | 170-176 | 26,0  | 26,0  | 26,0  | 26,0  | 26,0  | 26,0  | 26,0  |      |
|   |                                                                                         | 182-188 | -     | 28,0  | 28,0  | 28,0  | -     | -     | -     |      |

|    |                                                                      |         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |       |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 8  | Ширина рукава на уровне глубины проймы                               | 146-188 | 18,1                 | 19,5                 | 20,9                 | 22,3                 | 23,7                 | 25,1                 | 26,7                 | ±0,5  |
| 9  | Количество карманов                                                  | 146-188 | 2 шт                 | 2 шт                 | 2 шт                 | 2 шт                 | 2 шт                 | 2 шт                 | 2 шт                 | -     |
| 10 | Длина кармана по длинной стороне                                     | 146-188 | 22                   | 22,5                 | 23                   | 23                   | 23                   | 23,5                 | 24,5                 | ±0,5  |
| 11 | Ширина кармана сверху на уровне нижнего угла входа в карман          | 146-188 | 14                   | 15                   | 16                   | 18                   | 18,5                 | 19                   | 19,5                 | ±0,5  |
| 12 | Ширина кармана внизу                                                 | 146-188 | 15,5                 | 16                   | 17,5                 | 19                   | 20,5                 | 21                   | 21,5                 | ±0,5  |
| 13 | Количество пуговиц<br>Халат Диана 1;<br>Халат Диана 2;<br>Халат Леда | 146-188 | 6 шт<br>6 шт<br>5 шт | 6 шт<br>6 шт<br>5 шт | 6 шт<br>6 шт<br>5 шт | 6 шт<br>6 шт<br>5 шт | 6 шт<br>6 шт<br>5 шт | 6 шт<br>6 шт<br>5 шт | 6 шт<br>6 шт<br>5 шт | -     |
| 14 | Диаметр пуговиц<br>Халат Диана 1;<br>Халат Диана 2;<br>Халат Леда    | 146-188 | 2,2<br>1,7<br>2,2    | 2,2<br>1,7<br>2,2    | 2,2<br>1,7<br>2,2    | 2,2<br>1,7<br>2,2    | 2,2<br>1,7<br>2,2    | 2,2<br>1,7<br>2,2    | 2,2<br>1,7<br>2,2    | ±0,05 |
| 15 | Длина воротника                                                      | 146-188 | 40                   | 41                   | 43                   | 46                   | 49                   | 53                   | 54                   | ±0,5  |
| 16 | Ширина воротника                                                     | 146-188 | 7                    | 7                    | 7                    | 7                    | 7                    | 7                    | 7                    | ±0,3  |

- 4) - Халат Лолита;
- Халат Алиса 1;
- Халат Алиса 2;
- Халат Белый Ангел;
- Халат Грация;

Халаты предназначены для защиты от загрязнений.

**Халат полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы (Халат Алиса 1, Халат Алиса 2, Халат Лолита) или кнопки (Халат Белый Ангел, Халат Грация); с накладными карманами; с хлястиком (Халат Лолита, Халат Алиса 1, Халат Алиса 2, Халат Грация) или с поясом (Халат Белый Ангел). Полочка и спинка с рельефными швами от плечевого шва. Рукав втачной одношовный длиной  $\frac{3}{4}$ . Воротник английский (Халат Алиса 1, Халат Алиса 2) или отложной (Халат Белый Ангел, Халат Лолита) или воротник-стойка (Халат Грация).**

Основные **измерения** готового женского халата

в сантиметрах

| Основные измерения готового женского халата |                                                                                         |                                          |                                      |                                  |                                  |                                  |                          |                          |                          |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Номер измерения                             | Наименование измерения                                                                  | Рост<br>типовой<br>фигуры<br>человека    | Обхват груди типовой фигуры человека |                                  |                                  |                                  |                          |                          |                          | Допускаемое<br>отклонение |
|                                             |                                                                                         |                                          | 80-84                                | 88-92                            | 96-100                           | 104-108                          | 112-116                  | 120-124                  | 128-132                  |                           |
|                                             |                                                                                         |                                          | Обхват бедер типовой фигуры человека |                                  |                                  |                                  |                          |                          |                          |                           |
|                                             |                                                                                         |                                          | 86-90                                | 94-98                            | 102-106                          | 110-114                          | 118-122                  | 126-130                  | 134-138                  |                           |
| 1                                           | Длина спинки посередине<br>от шва втачивания<br>воротника до низа                       | 146-152<br>158-164<br>170-176<br>182-188 | 100,0<br>106,0<br>112,0<br>-         | 100,0<br>106,0<br>112,0<br>118,0 | 100,0<br>106,0<br>112,0<br>118,0 | 100,0<br>106,0<br>112,0<br>118,0 | -<br>106,0<br>112,0<br>- | -<br>106,0<br>112,0<br>- | -<br>106,0<br>112,0<br>- | ±1,0                      |
| 2                                           | Ширина спинки в самом<br>узком месте                                                    | 146-188                                  | 38,5                                 | 40,5                             | 42,5                             | 44,5                             | 46,5                     | 48,5                     | 50,5                     | ±0,5                      |
| 3                                           | Длина полочки от угла<br>плечевого шва и горловины<br>до низа параллельно краю<br>борта | 146-152<br>158-164<br>170-176<br>182-188 | 104,0<br>110,0<br>116,0<br>-         | 104,0<br>110,0<br>116,0<br>122,0 | 104,0<br>110,0<br>116,0<br>122,0 | 104,0<br>110,0<br>116,0<br>122,0 | -<br>110,0<br>116,0<br>- | -<br>110,0<br>116,0<br>- | -<br>110,0<br>116,0<br>- | ±1,0                      |

|    |                                                                           |                                          |                            |                              |                              |                              |                            |                            |                            |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| 4  | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте | 146-188                                  | 20,2                       | 21,0                         | 21,8                         | 22,6                         | 23,4                       | 24,2                       | 25,0                       | ±0,5 |
| 5  | Ширина халата на уровне глубины проймы                                    | 146-188                                  | 51,0                       | 55,0                         | 59,0                         | 63,0                         | 67,0                       | 71,0                       | 74,0                       | ±1,0 |
| 6  | Ширина халата внизу                                                       | 146-188                                  | 61,0                       | 65,0                         | 69,0                         | 73,0                         | 77,0                       | 81,0                       | 84,0                       | ±1,0 |
| 7  | Длина рукава                                                              | 146-152<br>158-164<br>170-176<br>182-188 | 35,5<br>37,5<br>39,5<br>-  | 35,5<br>37,5<br>39,5<br>41,5 | 35,5<br>37,5<br>39,5<br>41,5 | 35,5<br>37,5<br>39,5<br>41,5 | -<br>37,5<br>39,5<br>-     | -<br>37,5<br>39,5<br>-     | -<br>37,5<br>39,5<br>-     | ±0,5 |
| 8  | Ширина рукава на уровне глубины проймы                                    | 146-188                                  | 18,1                       | 19,5                         | 20,9                         | 22,3                         | 23,7                       | 25,1                       | 26,7                       | ±0,5 |
| 9  | Количество карманов                                                       | 146-188                                  | 2 шт, 3 шт у халата Грация | 2 шт, 3 шт у халата Грация   | 2 шт, 3 шт у халата Грация   | 2 шт, 3 шт у халата Грация   | 2 шт, 3 шт у халата Грация | 2 шт, 3 шт у халата Грация | 2 шт, 3 шт у халата Грация | -    |
| 10 | Длина кармана по длинной стороне                                          | 146-188                                  | 22                         | 22,5                         | 23                           | 23                           | 23                         | 23,5                       | 24,5                       | ±0,5 |
| 11 | Ширина кармана вверху на уровне нижнего угла входа в карман               | 146-188                                  | 14                         | 15                           | 16                           | 18                           | 18,5                       | 19                         | 19,5                       | ±0,5 |
| 12 | Ширина кармана внизу                                                      | 146-188                                  | 15,5                       | 16                           | 17,5                         | 19                           | 20,5                       | 21                         | 21,5                       | ±0,5 |
| 13 | Ширина нагрудного кармана для халата Грация                               | 146-188                                  | 13                         | 13                           | 13                           | 13                           | 13                         | 13                         | 13                         | ±0,5 |
| 14 | Длина нагрудного кармана для халата Грация                                | 146-188                                  | 13,5                       | 14                           | 14                           | 14                           | 14                         | 14                         | 14                         | ±0,5 |
| 15 | Количество кнопок<br>Халат Белый Ангел;<br>Халат Грация                   | 146-188                                  | 6 шт<br>5 шт               | 6 шт<br>5 шт                 | 6 шт<br>5 шт                 | 6 шт<br>5 шт                 | 6 шт<br>5 шт               | 6 шт<br>5 шт               | 6 шт<br>5 шт               | -    |

|    |                                               |         |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----|-----------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 16 | Диаметр кнопок                                | 146-188 | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | ±0,01 |
| 17 | Количество пуговиц                            | 146-188 | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | -     |
| 18 | Диаметр пуговиц                               | 146-188 | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | ±0,05 |
| 19 | Длина английского воротника                   | 146-188 | 55   | 57   | 59   | 61   | 65   | 68   | 70   | ±0,5  |
| 20 | Ширина английского воротника                  | 146-188 | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | ±0,3  |
| 21 | Длина отложного воротника и воротника-стойки  | 146-188 | 40   | 41   | 43   | 46   | 49   | 53   | 54   | ±0,5  |
| 22 | Ширина отложного воротника и воротника-стойки | 146-188 | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | ±0,3  |

5) - Шапочка медицинская;

Колпак универсальный мужской и женский медицинский и хирургический предназначен для защиты волос от загрязнений и защиты окружающей среды от волос и мелких частиц с головы. Колпак состоит из бортика, донышка. Колпак может быть с завязками, регулирующими обхват, или без них, с отворотом или без него.

| Измерение обхвата головы типовой фигуры | Интервал обхвата головы человека | Размер |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 52 53,0-54,0                            | от 52,5 до 54,5 включительно     | 54     |
| 54 55,0-56,0                            | свыше 54,5 до 56,5 включительно  | 56     |
| 56 57,0-58,0                            | свыше 56,5 до 58,5 включительно  | 58     |
| 58 59,0-60,0                            | свыше 58,5 до 60,5 включительно  | 60     |
| 60 61,0-62,0                            | свыше 60,5 до 62,5 включительно  | 62     |

Основные измерения готовой шапочки

в сантиметрах

| Номер<br>измерения | Наименование измерения      | Размер             |      |      |      |      | Допускаемое<br>отклонение |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                    |                             | 54                 | 56   | 58   | 60   | 62   |                           |
|                    |                             | Значение измерения |      |      |      |      |                           |
| 1                  | Длина внутренней окружности | 56,0               | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | ±0,5                      |
| 2                  | Высота стенки колпака       | 16,2               | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | ±0,3                      |
| 3                  | Диаметр доньшка             | 17,5               | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | ±0,2                      |

Раскрой деталей – по ГОСТ 21219

Классификация стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении изделий, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.

Изделия не должны иметь не обрезанных ниток, не обработанных швов и краев изделия, посторонних включений на поверхности изделия.

В изделиях обработка полочек, бортов, воротников, низа рукавов, шлиц, поясов, краев карманов и застежек, петель и отделочных деталей должна обеспечивать сохранение их формы, предусмотренной образцом-эталонном.

Изделия должны быть устойчивы к мокрым обработкам и выдерживать не менее 20 циклов: стирка нейтральными растворами моющих средств по ГОСТ 25644 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546 при температуре, не превышающей 40 °С (для изделий из цветных тканей) или 85 °С (для изделий из тканей белого цвета), полоскание, обезвоживание (отжим) и высушивание до эксплуатационного состояния в естественных условиях.

Изменение размеров (усадка) изделий после мокрых обработок не должно превышать 5 %.

Поверхностная плотность одежды должна быть, не менее: ткань смесовая – 150 г/м<sup>2</sup>.

Разрывная нагрузка одежды в сухом состоянии должна быть, не менее 2400 Н, а во влажном состоянии, не менее 2800 Н.

**Разрывная нагрузка швов одежды должна быть, не менее 200 Н в сухом состоянии и 560 Н во влажном состоянии.**

Воздухопроницаемость материалов одежды должна быть, не менее 60 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>×с. Гигроскопичность одежды должна быть, не менее 2%.

Удельное электрическое сопротивление одежды должно быть, не более 10<sup>14</sup> Ом. Стойкость к истиранию одежды должно быть, не менее 50000 циклов.

## 8. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Проверьте качество упаковки, а также отсутствие механических и иных повреждений. Вскройте упаковку.
2. Достаньте изделие из упаковки. Убедитесь визуальным осмотром в отсутствии дефектов, влияющих на пригодность изделия к применению.
3. Одевайте изделия своего размера.

## 9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Одежда, поставляемая потребителю, не токсична, не содержит веществ, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья человека.

Одежда не оказывает сенсibilизирующего или раздражающего действия.

В состав одежды не входят компоненты и вещества, требующие при производстве особо строгого соблюдения требований производственной и пожарной безопасности.

При изготовлении одежды должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

Производственные помещения должны быть оборудованы всеми необходимыми средствами пожаротушения.

Требования к охране окружающей среды

Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почвы и воды в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

Отходы производства должны подвергаться утилизации.

Допускается утилизацию отходов материалов и химикатов в процессе производства производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

## 10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект медицинской одежды многоразового использования по ТУ 32.50.50-003-94305616-2017, варианты исполнения:

- 1) Комплект 1 в составе:
  - Халат Белый Ангел – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 2) Комплект 2 в составе:
  - Халат Грация – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3) Комплект 3 в составе:
  - Халат Лазурь – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 4) Комплект 4 в составе:
  - Халат Практик – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 5) Комплект 5 в составе:
  - Халат Гиппократ мужской – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 6) Комплект 6 в составе:
  - Халат женский – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;

- Инструкция по применению – 1 шт.
- 7) Комплект 7 в составе:
  - Халат Диана 1 – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 8) Комплект 8 в составе:
  - Халат Диана 2 – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 9) Комплект 9 в составе:
  - Халат Лолита – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 10) Комплект 10 в составе:
  - Халат Снежность – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 11) Комплект 11 в составе:
  - Халат мужской 1 – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 12) Комплект 12 в составе:
  - Халат мужской 2 – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 13) Комплект 13 в составе:
  - Халат Илона – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 14) Комплект 14 в составе:
  - Халат Леда – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 15) Комплект 15 в составе:
  - Халат Алиса 1 – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 16) Комплект 16 в составе:
  - Халат Алиса 2 – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.
- 17) Комплект 17 в составе:
  - Халат Снежность С – 1 шт.;
  - Шапочка медицинская – 1 шт.;
  - Инструкция по применению – 1 шт.

## 11. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Эксплуатация одежды должна осуществляться в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции по применению.

Одежда является изделием для многоразового использования.

## 12. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одежда при эксплуатации должна быть устойчива к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 15150 для исполнения УХЛ категории 4.2.

Номинальное значение температуры окружающей среды: от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность при температуре 25 °С – до 75%.

Не допускается контакт одежды с открытым пламенем и нагревательными приборами.

## 13. МАРКИРОВКА

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и настоящих технических условий. На этикетках могут быть использованы необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Общие требования к маркировке изделий, способу и месту ее нанесения по ГОСТ 10581. Маркировка должна быть выполнена на ярлыках (этикетках). Ярлыки (этикетки) должны быть пришиты, навешены или прикреплены к одежде другим способом, обеспечивающим сохранность.

Маркировка должна содержать следующие необходимые сведения:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и/или его товарный знак;
- наименование и обозначение одежды по настоящим техническим условиям;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер партии (серии);
- дату изготовления (месяц, год);
- информацию о сроке годности;
- гарантии изготовителя;
- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;
- правила утилизации;
- сведения о сертификации (декларировании), знак по ГОСТ Р 50460 и единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза.

Допускается нанесение других сведений, в том числе рекламного характера.

«Символы по уходу» должны проставляться в соответствии с ГОСТ 16958. Мягкая лента с нанесенными символами по уходу за изделием вшивается в боковой шов или средний шов изделия.

Маркировка индивидуальной упаковки должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и/или его товарный знак;
- наименование и обозначение одежды по настоящим техническим условиям;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименование изделия и обозначение модели (модель);
- размер изделия;
- цвет;

- номер партии (серии);
- дата изготовления (месяц, год);
- информацию о сроке годности;
- условия хранения.

Маркировка групповой упаковки должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и/или его товарный знак;
- наименование и обозначение одежды по настоящим техническим условиям;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименование изделия и обозначение модели (модель);
- размер изделия;
- цвет;
- номер партии (серии);
- дата изготовления (месяц, год);
- информацию о сроке годности;
- информация о сертификации
- символы по уходу

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192, с нанесенным манипуляционным знаком и «Беречь от влаги».

## 14. УПАКОВКА

Упаковка обеспечивает сохранность одежды от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В качестве транспортной тары применяются ящики деревянные по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

По требованию заказчика может использоваться другая упаковочная тара, в том числе производимая на предприятии-изготовителе одежды.

Для защиты одежды от механических повреждений в местах соприкосновения друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами применяются вспомогательные упаковочные средства такие как индивидуальная и/или групповая упаковки, изготовленные из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 и пакет должен быть заварен термическим способом.

Масса любого места (ящика) брутто должна быть не более 20 кг.

## 15. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование одежды осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

- температура – от –50 до +50°C;
- влажность: до 100%

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий осуществляется в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

## **16. ХРАНЕНИЕ**

Одежду хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от 10 до 40 °С, относ. влаж. до 95%. Условия хранения исключают воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

## **17. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие одежды требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок годности с момента изготовления – 3 года.

Гарантийный срок службы со дня продажи при условии проведения не более трех циклов санитарно-гигиенической обработки – 1 год.

## **18. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Одежда утилизируется в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.7.2790-10 (по классу отходов А)

По вопросам утилизации обращаться: ООО «Мастер Стар», юр.адрес: 420029, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт д.7, пом.48, тел.: (843)236-02-92, e-mail: 420073420073@mail.ru

## **19. РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

1) Риск: Загрязнения одежды

Метод устранения: При загрязнении одежды необходимо её постирать.

Примечание: При отсутствии видимых загрязнений, одежду необходимо стирать не реже одного раза в 2 дня. Не смешивайте цветную и белую одежду.

Важные рекомендации: При отсутствии пятен и сильных загрязнений одежду рекомендуется стирать в теплой (до 30 градусов) воде. Стирать цветную одежду необходимо при температуре 30-50 градусов, чтобы избежать потери яркости цвета. Белую одежду допустимо стирать при температуре до 80 градусов.

2) По окончании срока годности, одежду необходимо утилизировать.

Примечание: Перед утилизацией одежду необходимо постирать.

3) Риск: разрыв ткани одежды

Примечание: Неправильная эксплуатация и уход за одеждой могут оказать влияние на прочность материала.

Метод устранения: Одежда должна быть утилизирована.

## **20. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И СЫРЬЮ**

20.1 Все применяемые при изготовлении одежды материалы одежды должны соответствовать установленным в рабочих чертежах.

Используемые материалы: Смесовая ткань "Карелия 2" (хлопок 80%/ПЭ 20%).

Пуговицы изготавливаются из аминопласта марки КФА2.

Кнопки изготавливаются из стали марки 08X18H10.

Для окрашивания одежды используются следующие красители:

- Халат Белый Ангел: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета, анилиновые красители марки LUCAR красного цвета;
- Халат Грация: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета, анилиновые красители марки LUCAR зеленого цвета;
- Халат Лазурь: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета, анилиновые красители марки LUCAR синего цвета;
- Халат Практик: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета;
- Халат Гиппократ мужской: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета;
- Халат женский: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета;
- Халат Диана 1: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета, анилиновые красители марки LUCAR василькового цвета;
- Халат Диана 2: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета, анилиновые красители марки LUCAR зеленого цвета;
- Халат Лолита: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета;
- Халат Снежность: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета;
- Халат мужской 1: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета;
- Халат мужской 2: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета;
- Халат Илона: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета, анилиновые красители марки LUCAR красного цвета;
- Халат Леда: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета, анилиновые красители марки LUCAR синего цвета;
- Халат Алиса 1: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета, анилиновые красители марки LUCAR синего цвета;
- Халат Алиса 2: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета, анилиновые красители марки LUCAR зеленого цвета;
- Халат Снежность С: анилиновые красители марки LUCAR синего цвета;
- Шапочка медицинская: анилиновые красители марки LUCAR белого цвета

20.2 Качество и пригодность материалов должны быть подтверждены соответствующими документами о качестве (паспортами, сертификатами соответствия, декларациями).

При отсутствии документов о качестве все необходимые испытания, включая требования по безопасности, должны быть проведены при изготовлении одежды.

20.3 Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов должны находиться в пределах допустимых норм, установленных «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 2010 года № 299 (глава II, разделы 5, 6 и 18) и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012.

20.4 Перед применением все материалы должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе, исходя из указаний ГОСТ 24297.

20.5 Стерилизация одежды не предусмотрена. Одежда применяется в нестерильном виде.

## 21 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническому обслуживанию и ремонту одежда не подлежит. Одежда должна быть утилизирована при сильных загрязнениях и повреждениях ткани и фурнитуры. (См. п. 9 настоящих технических условий)

## 22 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Наименование документа, на который дана ссылка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 31508-2012                               | Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Приказ Минздрава России № 4н                  | Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ Р 15150-69                               | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды                                                                                                                                                                          |
| ГОСТ 12807-2003                               | Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ГОСТ 21219-88                                 | Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ГОСТ Р 50444-92                               | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ОСТ 17-835-80                                 | Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ГОСТ 24760-81                                 | Халаты медицинские женские. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ 25194-82                                 | Халаты медицинские мужские. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ 23134-78                                 | Уборы головные медицинские. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ГОСТ 25644-96                                 | Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ГОСТ 28546-2002                               | Мыло туалетное твердое. Общие технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ГОСТ ISO 10993 (серия)                        | Серия «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», части: часть 1. Оценка и исследования; часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации; часть 11. Исследования общетоксического действия; часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы; часть 18. Исследование химических свойств материалов |
| ГОСТ 24297-2013                               | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014                       | Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования                                                                                                                                                                                                                                 |
| ГОСТ 10581-91                                 | Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ГОСТ 16958-71                                 | Изделия текстильные. Символы по уходу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ГОСТ 14192-96                                 | Маркировка грузов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12301-2006      | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия                                                                                  |
| ГОСТ 9142-90         | Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия                                                                                                          |
| ГОСТ 18251-87        | Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия                                                                                                               |
| ГОСТ 20477-86        | Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия                                                                                                            |
| ГОСТ 50729-95        | Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида                                                                                   |
| ГОСТ 12.4.021-75     | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования                                                                                     |
| ГОСТ 12.1.005-88     | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны                                                              |
| ГН 2.2.5.1313-03     | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны                                                                                      |
| ГН 2.2.5.1314-03     | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны                                                                         |
| ГОСТ 12.1.016-79     | Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ                                           |
| ГОСТ 12.4.280-2014   | Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования |
| ГОСТ 12.1.004-91     | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования                                                                                      |
| ГОСТ 12.4.009-83     | Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание                                               |
| ГОСТ 12.3.002-2014   | Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.                                                                    |
| ГОСТ 12.0.004-91     | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.                                                                                     |
| ГОСТ 12.1.019-2009   | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты стандартов безопасности.                                   |
| ГОСТ 12.1.018-93     | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования                                                        |
| ГОСТ 12.2.032-78     | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования                                                     |
| ГОСТ 12.2.033-78     | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования                                                     |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления                                                                           |
| ГОСТ 17.1.1.01-77    | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.                                                                             |
| ГОСТ 17.1.3.13-86    | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения                                                                              |
| ГОСТ 17.2.3.02-2014  | Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями                                              |
| ГОСТ 17.2.1.04-77    | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические                                                                                                            |

|                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <b>факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения</b>                                                                                                          |
| <b>ГОСТ 30157.0-95</b>    | <b>Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения</b>                                                  |
| <b>ГОСТ ISO 3759-2013</b> | <b>Материалы текстильные. Подготовка, маркировка и измерение образцов текстильных материалов и одежды при испытаниях для определения изменения размеров</b>                      |
| <b>ГОСТ 31214-2003</b>    | <b>Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность.</b> |

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 2010 года № 299

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 №32)

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 16 августа 2011 г. №769).

## 21. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Отметка о продаже

Категория изделия \_\_\_\_\_

Производитель \_\_\_\_\_

Штамп  
продавца

Дата продажи \_\_\_\_\_

Организация продавец \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Изделие проверено, повреждений не имеет. Стерильно.

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

По вопросам гарантии обращаться: ООО «Мастер Стар», юр.адрес: 420029, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт д.7, пом.48, тел.: (843)236-02-92, e-mail: 420073420073@mail.ru

**ВНИМАНИЕ!** Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Все графы талона (за исключением графы для производителя/поставщика) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.



Прошито и пронумеровано  
22 (листов)