

Инструкция по применению

Бюстгальтер-топ универсальный послеродовый для кормления

Размер	Обхват под грудью, см	Обхват по высшей точке груди, см			
		B	C	D	E
70(1)	67-70	82-83	85-86	88-89	91-92
75(2)	70-75	85-88	88-91	91-94	94-97
80(3)	75-80	90-93	93-96	96-99	99-102
85(4)	80-85	95-98	98-101	101-104	104-107
90(5)	85-90	100-103	103-106	106-109	109-112
95(6)	90-95	105-108	108-111	111-114	114-117



Состав полотна: 95% хлопка, 5% эластан

Показания к применению

- предназначен для использования в период грудного вскармливания
- предотвращение деформации груди
- профилактика кожи от чрезмерных растяжений

Противопоказания к применению

- противопоказания не выявлены

Дополнительная информация

- особенно рекомендуются впервые месяцы после родов, когда идет установление лактации и грудь значительно варьирует в размерах
- отстегивающаяся верхняя часть чашечки позволяет кормить ребенка, не снимая бюстгальтера
- комфортный днем и ночью
- широкая мягкая резинка под грудью и «спортивная» спинка обеспечивают максимальную поддержку
- отсутствие косточек избавляет грудь от давления и раздражения
- не утрачивает своих функциональных свойств после стирки



Рекомендации по уходу

- рекомендуется ручная стирка при температуре не выше +40°C, стирку осуществлять только с застегнутыми застежками «Квик-клип», сушить в расправленном виде, не использовать хлорсодержащие, отбеливающие средства и химическую чистку

Рекомендации по транспортированию

- транспортируются всеми крытыми видами транспорта (обеспечивающие защиту от влаги, пыли, прямых солнечных лучей)

Рекомендации по хранению

- в помещениях с температурой от 10° до 25°C и относительной влажностью не более 75%, вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей.

Срок годности: не менее 5 лет (при соблюдении рекомендаций по хранению)

Гарантийный срок: 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

Срок службы: не менее 1 года, с начала эксплуатации

Рекомендации по утилизации

- Изделия, которые в процессе носки потеряли свой товарный вид и характеристики, являются не пригодными для применения по прямому назначению – требует утилизации.

Изделие утилизируется:

- сдают на предприятия по переработки, где их принимают согласно ГОСТ 4643-75;

- непосредственно выбрасывается в урну.



Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Наша мама»

141540, Московская область, Солнечногорский р-н,
С.п. Пешковское, пос. Жуково, мкр. Березки, стр. 05-Д
тел. 8(495) 775-10-45; 8(495) 994-26-64

Генеральный директор ООО «Наша мама»



Григорьев В.Н.

