

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОТТО БОКК - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»
(ЗАО «ОТТО БОКК -ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»)



УТВЕРЖДАЮ


Исполнительный директор
ЗАО «ОТТО БОКК – Ортопедическая техника»



А.А.Костин

28 » *сентября* *2005* года

**ПРОТЕЗ НА КУЛЬТУ ПОСЛЕ ВЫЧЛЕНЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ В
ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПН8-ОБ**
Памятка по пользованию

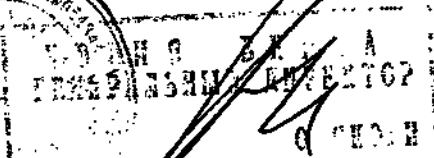

Протез на культю после вычленения конечности в тазобедренном суставе ПН8-ОБ предназначен для протезирования пациентов всех половозрастных групп после односторонней ампутации на уровне тазобедренного сустава, а так же гемипельвектомии.

1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1.1 Протез имеет модульную конструкцию, содержащую приемную гильзу в виде корсета (корзины), коленный и тазобедренные модули, искусственную стопу, регулировочно-соединительные узлы (адаптеры), косметическую облицовку и дополнительные функциональные модули. Широкий выбор комплектующих производства фирмы «ОТТО БОКК» позволяет изготавливать протез с учетом индивидуальных особенностей пациента в соответствии с медицинским назначением, учитывающим клинические, антропометрические, масс-инерционные и другие характеристики инвалида, а также легко корректировать параметры сборки протезов при примерке и в процессе ходьбы.

2 НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕЗОМ

2.1 На протез надеть чулок или носок, затем обувь.

2.2 Протез одевается непосредственно на нижнее бельё.

2.3 Вставить культю в приёмную гильзу протеза. Не давая нагрузки удобно разместить объём таза в корсете и затянуть ремни.

При правильно надетом протезе, приемная гильза не должна оказывать болевого воздействия на мягкие ткани культи. В противном случае, отрегулировать натяжение крепёжных ремней.

Примечание: противопоказано покрывать культю кремами на жирной основе, возможно применение кремов на силиконовой основе. Рекомендовано применение средств по уходу за культёй серии «DERMA».



2.4 В положении «стоя» необходимо осуществить несколько небольших по амплитуде сгибательных и разгибательных движений в коленном шарнире. Проверить удобство размещения культи в приемной полости гильзы и надежность крепления протеза.

3 УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ И ЧЕХЛОМ

3.1 Протез необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.

3.2 Внутреннюю полость приемной гильзы не менее одного раза в неделю рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих средств, с последующей просушкой.

3.3 После использования в дождливую погоду в случае, если стопа, обувь и косметическая облицовка протеза промокли, необходимо снять обувь, а протез протереть и высушить.

3.4 Не следует хранить протез вблизи источника тепла, сушить на солнце.

4 УХОД ЗА КУЛЬТЕЙ

4.1 Ежедневно, после ходьбы на протезе, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов культи, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж культи, обработка кожи культи защитными питательными кремами и лосьонами.

5 РЕМОНТ ПРОТЕЗА

5.1 Самостоятельная разборка и ремонт протеза запрещены.

5.2 При возникновении неполадок и протезе (появлении люфтов, поломка стопы, повреждение силиконового чехла, облицовки протеза и др.) необходимо **обратиться на протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее протез.**



Сброшюровано
и пронумеровано
листов 3 подпись



Сброшюровано и
пронумеровано 3 листов

(трч)

Генеральный директор
Чермянин В.Н.

