



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Закрытое Акционерное Общество
Специализированное
протезно-ортопедическое предприятие
«ПРОТЭК-ЦЕНТР»

140415, г. Коломна,
Московская обл.,
ул. Комсомольская, 13

тел.: +7(496) 614-84-75,
+7(495) 765-92-61;
факс: +7(496) 614-27-99.

22.08.2011 № 128

На № _____ от _____

**Памятка
по пользованию
Протез молочной железы на основе силиконового геля**

Протез грудной (молочной) железы ПГЖ (далее-протез), является не только косметическим средством, помогающим женщинам, перенесших мастэктомию, скрыть (восполнить) послеоперационный дефицит тканей, но и лечебно-профилактическим, который способствует быстрой адаптации травмированных тканей и их заживлению.

Он позволяет женщине компенсировать весовой дисбаланс, что предупреждает развитие искривления позвоночника, сохраняет симметрию тела и правильную осанку.

1. Описание протеза

Протез представляет собой вулканизированную окрашенную в телесный цвет гелеобразную массу, заключенную в оболочку из полиуретановой пленки.

2. Применение протеза

Форма (тип) протеза должна максимально компенсировать постмастэктомический дефицит ткани.

Протез со съемным чехлом вставляется в бюстгальтер со специальным клапаном.

Протез должен полностью заполнить чашечку бюстгальтера, при этом чашечка не должна быть тесной для протеза, что может привести к деформации ПГЖ или наоборот больших размеров, чем протез, что в свою очередь ведет к недостаточности фиксации протеза.

3. Уход за протезом

Правильный уход сохранит качество, обеспечит чувство комфорта и удовлетворения при эксплуатации.

Следует соблюдать следующие правила:

- для обработки и дезинфекции используется теплый (40%) мыльный раствор;
- всегда обращаться с протезом аккуратно;
- содержать его в чистоте, ежедневно промывать в теплой воде с мылом, осторожно просушивать полотенцем;
- не прокалывать, не надрезать, не снимать с протеза пленку;
- использовать с осторожностью при наличии длинных ногтей или острых предметов (кольца, булавки, ножницы);
- после плавания в соленой или хлорированной воде незамедлительно промыть протез в чистой теплой воде с мылом;
- хранить протез в упаковке изготовителя, что позволит сохранить неизменной его форму и качество.

Генеральный директор
ЗАО «Протэкс-Центр»



Чермянин В.Н.

PROTEX CENTRE COMPANY LTD

TEL +7(496) 614-84-75; +7(495) 765-92-61; TEL/FAX +7(496) 614-27-99;

SIP Call: 4140414@sipnet.ru; 4142414@sipnet.ru; 4144414@sipnet.ru;

Komsomolskaya St., 13, Moscow region, Kolomna, 140415, Russia

Web: <http://protex-centr.ru>

E-mail: info@protex-centr.ru



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Закрытое Акционерное Общество
Специализированное
протезно-ортопедическое предприятие
«ПРОТЭК-ЦЕНТР»

140415, г. Коломна,
Московская обл.,
ул. Комсомольская, 13

тел.: +7(496) 614-84-75,
+7(495) 765-92-61;
факс: +7(496) 614-27-99.

№ _____

На № _____

от _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

Закрытое акционерное общество «Специализированное протезно-ортопедическое предприятие «Протэкс-Центр», 140415 Московская область, г.Коломна, ул.Комсомольская, д.13, в лице Генерального директора Чермянина Владимира Николаевича (паспорт серия 4605 №565340 выдан Коломенским УВД Московской области 09.10.2003 г.), проживающего по адресу: Московская область г.Коломна ул.Пионерская д.25 кв.65, действующего на основании Устава,

Настоящим доверяет :

*Вострыцовой Елене Владимировне / паспорт серии 4605 №565340
выдан 09.10.2003 г. в г. Коломна*

Представлять Закрытое акционерное общество «Специализированное протезно-ортопедическое предприятие «Протэкс-Центр», в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития при подаче всех справок и документов, необходимых для регистрации продукции: **Протез молочной железы на основе силиконового геля ТУ 9396-001-31878854-2011**, получение регистрационного удостоверения, с этой целью предъявлять и получать все необходимые документы, заключать и подписывать соглашения для проведения консультационных и экспертных работ, связанных с регистрацией, производить оплату этих работ, заверять своей подписью копии документов, подписывать и выполнять все другие действия, связанные с настоящей доверенностью.

Доверенность действительна до 31.12.2011 г.

Подпись *Вострыцовой Е.В.* _____ удостоверяю.

Генеральный директор
ЗАО «Протэкс-Центр»

Чермянин В.Н.

PROTEX CENTRE COMPANY LTD

TEL +7(496) 614-84-75; +7(495) 765-92-61; TEL/FAX +7(496) 614-27-99;
SIP Call: 4140414@sipnet.ru; 4142414@sipnet.ru; 4144414@sipnet.ru;
Komsomolskaya St., 13, Moscow region, Kolomna, 140415, Russia

Web: <http://protex-centr.ru>

E-mail: info@protex-centr.ru