



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Закрытое Акционерное Общество
Специализированное
протезно-ортопедическое предприятие
«ПРОТЭК-ЦЕНТР»

140415, г. Коломна,
Московская обл.,
ул. Комсомольская, 13

тел.: +7(496)614-84-75,
+7(495) 765-92-61;
факс: +7(496) 614-27-99.

№ _____

На № _____ от _____

Памятка
по использованию Корсета ортопедического на поясничный отдел
позвоночника КРО-207

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!

Данное изделие предназначено для средней степени фиксации поясничного отдела позвоночника (от 1-го поясничного позвонка до крестца). Фиксирует двигательные сегменты позвоночника в правильном физиологическом положении, обеспечивая стабильность при движении и рефлекторные маятниковые движения при статической нагрузке. Согревает и массирует мышцы спины. Уменьшает боли в пояснице.

Показания:

- остеохондроз поясничного отдела позвоночника у лиц с повышенной массой тела
- остеохондроз с корешковым синдромом (радикулит, ишиас, иррадиация болей в ногу)
- грыжа межпозвонковых дисков в поясничном отделе позвоночника
- нестабильность в поясничном отделе позвоночника
- реабилитация после операций на поясничном отделе позвоночника

Применение:

При обострении болей корсет носят постоянно во время бодрствования (при отдыхе лежа – снимают). При отсутствии болей корсет применяют при физической работе.

Инструкция по надеванию:

Корсет надевают лежа на нижнее белье, сделав предварительно выдох. Верх-низ изделия определяется по фирменной бирке расположенной в верхней части корсета.

Оберните корсет вокруг талии (ребра жесткости, расположенные сзади должны симметрично проходить вдоль линии позвоночного столба). При этом корсет должен полностью закрывать крестцовую ямку, а нижний его край слегка прикрывать ягодицы.

Закрепите пояс спереди застежкой «Контакт»

С помощью поясов подхватов отрегулируйте силу фиксации корсета, закрепив их на передне - боковой части изделия застежками «Контакт».

PROTEX CENTRE COMPANY LTD

TEL +7(496) 614-84-75; +7(495) 765-92-61; TEL/FAX +7(496) 614-27-99;

SIP Call: 4140414@sipnet.ru; 4142414@sipnet.ru; 4144414@sipnet.ru;

Komsomolskaya St., 13, Moscow region, Kolomna, 140415, Russia

Web: <http://protex-centr.ru>

E-mail: info@protex-centr.ru

Правила ухода за изделием:

-Ортопедическое изделие изготовлено из материалов, которые теряют свои свойства при воздействии на них высоких температур, поэтому стирать их следует в воде, температура которой не превышает 35 - 45°C.


-По возможности, стирайте корсет вручную или в стиральной машине в деликатном режиме.

-Не пользуйтесь моющими средствами содержащими отбеливатели и кондиционеры, придающими мягкость белью. Детское мыло или шампунь лучше всего подходят для стирки ортопедического изделия.

-После стирки следует тщательно и многократно прополоскать изделие, аккуратно выжать, завернув в сухое полотенце, и повесить сушиться в сухом проветриваемом месте. Не оставляйте влажный корсет лежать на полотенце или под прямыми солнечными лучами. Не сушите корсет на отопительной батарее, не подвергайте химической чистке.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Защищать от жары и влаги.

**Генеральный директор
ЗАО СПОП «Протэкс-Центр»**

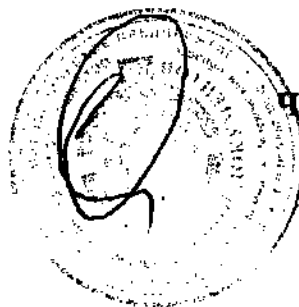

Чермянин В.Н.