

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОТЭКС-ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Протэкс-центр»



В.Н. Чермянин
2011 г.

БАШМАЧОК ВКЛАДНОЙ УСОВЕРШЕНСВОВАННЫЙ
ПРИ КОРОТКОЙ КУЛЬТЕ СТОПЫ 02-K27
ТУ 9397-031-53279025-2002

Памятка по пользованию

1

Башмачок вкладной предназначен для пациентов, имеющих врожденные или ампутационные дефекты стоп, и служат для компенсации опорно-двигательных функций и социальной реабилитации пациентов в повседневном быту, на работе и отдыхе.

Описание изделия

Башмачок состоит из искусственного носка с клиновидной вставкой, межстелечного слоя, жесткого язычка, металлической пластины и заготовки.

Надевание изделия

Башмачок вкладной одевается на ногу. На башмачок одевается обычная или ортопедическая обувь.

Уход за изделием и ремонт

При эксплуатации башмачка следует соблюдать следующие условия:

- нельзя сушить башмачок на нагревательных поверхностях;
- допускается чистить башмачок при необходимости с применением влажной мягкой ткани.

По поводу ремонта обращаться в протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее изделие.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 9397-031-53279025-2002 при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 50 дней с момента получения.

В течении указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездное изготовление нового изделия, взамен преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.

Сброшюровано и
пронумеровано 2/61 ли

Генеральный дирек
Чермянин

