

УТВЕРЖДАЮ

Специалист по
сертификации/ регистрации
отдела Здравоохранение
ЗАО «ЗМ-Россия»
Солодова М.А.



2011 г.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Паста стоматологическая абразивная для чистки зубов Clinpro Prophy Paste

2011 г.

1. Введение

Данное руководство имеет целью дать рекомендации относительно применения пасты стоматологической абразивной для чистки зубов Clinpro Prophy Paste.

2. Описание изделия

2.1 Описание изделие

Паста Clinpro Prophy Paste содержит уникальную смесь полировальных и очистительных агентов, разработанных для использования стоматологическими профессионалами в ходе стандартных, гигиенических, зубных процедур. Паста содержит фторид натрия в концентрации 1,23 %.

Изделие готово в следующей комплектации:

1. Набор абразивной пасты мелкозернистой со вкусом вишни:
 - 1.1 капсулы с пастой (200 шт.)
 - 1.2 держатель для капсулы
2. Набор абразивной пасты среднезернистой со вкусом ментола:
 - 2.1 капсулы с пастой (200 шт.)
 - 2.2 держатель для капсулы
3. Набор абразивной пасты крупнозернистой со вкусом ментола:
 - 3.1 капсулы с пастой (200 шт.)
 - 3.2 держатель для капсулы

2.2 Назначение

Паста предназначена для использования при полировании, в качестве профилактических, профессионально выполняемых процедур.

Меры предосторожности:

- Паста Clinpro Prophy Paste должна использоваться только профессионально обученным стоматологической профилактике персоналом.
- Чрезмерное внутреннее употребление фтора может вызвать тошноту. Паста Clinpro Prophy Paste должна откашливаться. Не глотать.

3. Использование по назначению

- Вставьте единичную дозу колпачка в предоставляемое профилактическое кольцо.
- Одна единичная доза колпачка содержит достаточно профилактической пасты для одной процедуры профилактики.
- Ниже определены цвета и использование зернистого колпачка.

Золотой: Мелкая зернистость - Нежная полировка и чистка

Синий: Средняя зернистость - Обычная полировка и чистка

Красный: Крупная зернистость - Удаление средних и глубоких пятен и налётов



На рисунке представлены образцы пасты в капсуле и держатель для капсулы.

4. Техническое обслуживание и ремонт.

Изделия не предусматривают технического обслуживания и ремонта. Не используются повторно.

5. Хранение и применение

Храните при нормальной комнатной температуре.

6. Срок годности

Срок годности при хранении в комнатной температуре - 24 месяца.

7. Транспортирование

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта, упакованные изделия помещаются в транспортную тару – картонные коробки. На транспортной таре должен быть нанесен логотип 3М и название продукта.

8. Утилизация

Соблюдайте местные правила утилизации отходов.

9. Гарантийные обязательства производителя


Компания 3М гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

(Солодова ел. Д.)

14 ноября 2011

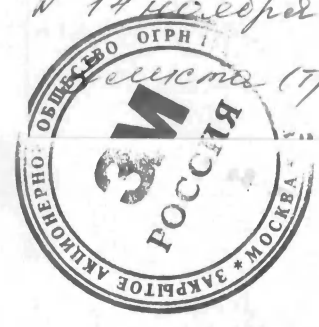

лист (три листа)