



COVIDIEN

Дата начала эксплуатации: \_\_\_\_\_


### Краткая инструкция по эксплуатации тимпанического термометра Genius II™



**1.** Проверьте состояние слухового прохода. Убедитесь, что серные пробки не мешают измерению



**2.** Достаньте термометр из базы

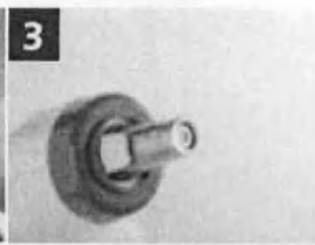


**3.** Проверьте чистоту линзы




**4.** Наденьте колпачок



**5.** Колпачок должен зафиксироваться до щелчка

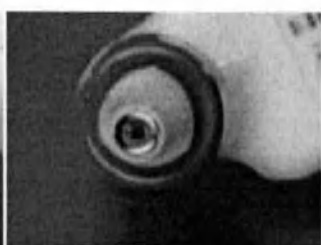

**6.** Установите зонд в слуховой проход герметично. Зонд должен быть направлен вдоль слухового прохода

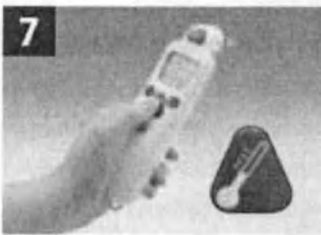


**7.** Нажмите на кнопку измерения




**8.** Выньте термометр после трех гудков



**9.** На экране будет показана температура

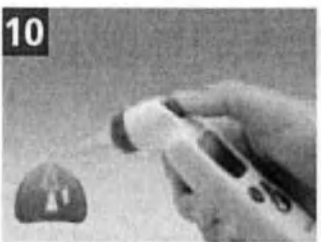

**10.** Нажмите кнопку удаления колпачка

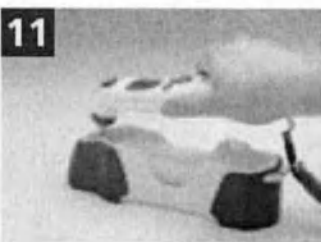

**11.** Установите термометр в подставку



Для повторного вывода измеренной температуры нажмите кнопку измерения

Термометр должен проходить ежегодную проверку точности измерений

Тел. тех поддержки  
Covidien (495)933-64-69