

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО Пауль Хартманн

Калабин Ю.В.
2012 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перчатки медицинские диагностические
Пеха-софт нитрил белые / Peha-soft nitrile white
нестерильные, размеры XS; S; M; L; XL; XXL

2012г.

1. Перчатки медицинские диагностические

Назначение:

Защита рук медицинского персонала во время проведения диагностических процедур

1. Технические характеристики

Материал Перчатки диагностические: Peha-soft nitrile white	нитрил с внутренним полимерным покрытием, текстурированные. Цвет – белый.
Технические характеристики: <i>толщина:</i> ладонь пальцы	 0,07мм 0,09мм
Размеры Peha-soft nitrile white	XS; S; M; L; XL; XXL

2. Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

3. Подготовка к работе:

Обработать руки надлежащим образом, аккуратно вскрыть упаковку перчаток, надеть на руку. Перчатки необходимо правильно подбирать согласно размерному ряду и маркировке на упаковке. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

4. Правила хранения и использования:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте, при температуре от 0°C до +25°C

5. Срок годности:

Срок хранения Peha-soft nitrile white	 3 года от даты производства
---	-------------------------------------

Руководство по эксплуатации

Медицинские перчатки диагностические:

Peha-soft nitrile white нестерильные, размеры XS; S; M; L; XL; XXL

Использование:

Обработать руки надлежащим образом, аккуратно вскрыть упаковку перчаток, надеть на руку. Перчатки необходимо правильно подбирать согласно размерному ряду и маркировке на упаковке. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте, при температуре от 0°C до +25°C.

Транспортировка:

Особый способ транспортировки не предусмотрен.

Утилизация:

Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.



Горазднее ажно
и скреплено
печатью
Зд.

**Перчатки медицинские диагностические Пеха-софт нитрил
белые / Peha-soft nitrile white нестерильные, размеры XS; S; M;
L; XL; XXL.**

**Производства “ Paul Hartmann AG “ Германия,
(Пауль Хартманн АГ), Paul-Hartmann-Str.12 89522
Heidenheim, Germany, тел. 07321360 факс. 07321363636.**





Трансформация
и расширение
мира
20.