

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Ковидиен-Евразия»

М.Л. Бокова

2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Шприцы медицинские Monoject, Magellan с принадлежностями


Перед использованием внимательно прочтите инструкцию. Соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности

1 мл Безопасный инсулиновый шприц с иглой

- Цветовая кодировка не соответствует требованиям ISO 6009.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не использовать, если индивидуальная упаковка вскрыта или повреждена.

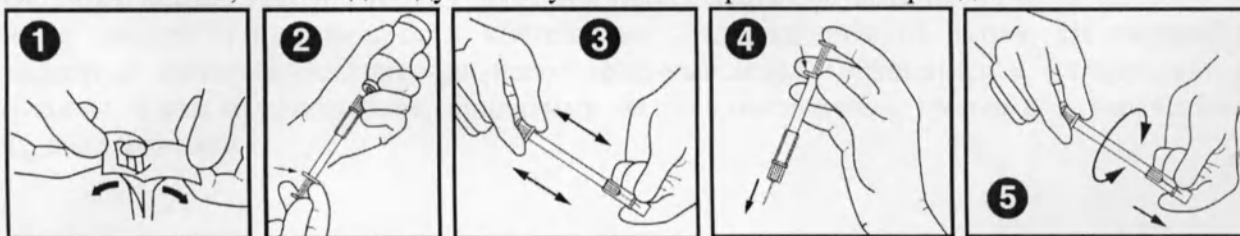

1. Чтобы вскрыть упаковку, отделите бумажную подложку от пластика, взявшись за «крылышки» и потянув их в разные стороны.
2. Наполните шприц лекарственным препаратом, прижимая указательный палец к упору для пальца.
3. Потяните защитный колпачок вперед, пока не почувствуете, что вы довели его до упора, и не услышите отчетливый щелчок. Это зафиксирует защитный колпачок для безопасной транспортировки шприца к месту нахождения пациента. Не вращайте ни защитный колпачок, ни шприц. Если защитный колпачок защелкнется после вращения, выбросьте шприц.
4. Чтобы сделать укол, потяните защитный колпачок назад, пока он не защелкнется в своей первоначальной позиции. Чтобы избежать неожиданного сдвига защитного колпачка, всегда придерживайте одним пальцем упор для пальца во время обращения со шприцем.
5. Сразу же после окончания инъекции потяните защитный колпачок вперед, пока не услышите отчетливый щелчок. Затем зафиксируйте защитный колпачок в этом положении, повернув его в любом направлении, пока не почувствуете, что он повернут до упора, и не услышите отчетливый щелчок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если защитный колпачок правильно зафиксирован, его нельзя вернуть в прежнее положение. Никогда не беритесь пальцами за открытый конец защитного колпачка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для пациентов, которым необходимо смешивать два типа инсулина, не меняйте:

1. Порядок смешивания, предписанный врачом, или
2. Модель или марку шприца или иглы, предварительно не проконсультировавшись с врачом и/или фармацевтом. Несоблюдение этого правила может привести к ошибке в дозировке.

ЭТО ВАЖНО: Прочитайте предупреждения на днище коробки.

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Хранить в сухом месте

Беречь от света

ОСТОРОЖНО: РИСК УКОЛА ИГЛОЙ. Использованные иглы могут быть загрязнены, и их следует утилизировать в контейнерах, защищающих от укола. Не надевайте защитные колпачки повторно на использованные иглы. Обращаться в соответствии с руководствами и политиками, принятыми на государственном уровне и в учреждении здравоохранения.



Искренне
и с любовью
З. Мена