

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи

Приказом Росздравнадзора

от _____ 20 ____ г. № _____

РАМН (Филиал «Медгамал»

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН)



А.Л. Гинцбург

12

2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Бульона Сабуро, питательного бульона

для культивирования грибов, готового к применению.

Бульон Сабуро, питательный бульон для культивирования грибов, готовый к применению (далее Бульон Сабуро) представляет собой прозрачную жидкость от желтого до светло-коричневого цвета, стерильный.

Состав:

Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей	10,0 г
Глюкоза	40,0 г
Диализат хлебопекарных дрожжей	0,1 л
Вода дистиллированная	до 1 л
pH от 5,4 до 5,8	

Назначение. Бульон Сабуро предназначен для культивирования дрожжевых и плесневых грибов.

Способ применения. Перед использованием с бутылки с Бульоном Сабуро снимают алюминиевый колпачок, соблюдая правила асептики, заменяют резиновую пробку стерильной ватно-марлевой и разливают в стерильные пробирки. В таком виде бульон можно использовать в течение 10 суток при условии хранения при температуре от 2 до 8 °C.

Бульон Сабуро обеспечивает через 72 ч инкубации при температуре от 20 до 25°C визуально обнаруживаемый рост дрожжеподобных и плесневых грибов в виде придонного осадка и незначительного помутнения среды.



Для контроля стерильности отбор проб, посев и интерпретацию результатов проводят в соответствии с ГФ XII.

Форма выпуска. По 100, 200, 300, 400 мл в стеклянные бутылках.

Транспортирование. При температуре от 2 до 25 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03.

Хранение. В защищённом от света месте при температуре от 2 до 8 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248-03.

Срок годности 1 год. Бульон Сабуро с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Рекламации на качество в течение срока годности следует направлять в ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора по адресу: 119002, г. Москва, Сивцев-Вражек, д.41, тел. 8-(499)-241-39-22 и в адрес предприятия изготовителя: НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН (Филиал «Медгамал» НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН); 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.18; тел. 8-(499)-193-30-50, 8-(499)-190-44-59; факс 8-(499)-190-66-71.

Заместитель директора Филиала «Медгамал»

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН



Филиппова Н.Е.

20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

Г.Е. Онищенко

« 18 » 2012 г.

№ 01-11/12-12

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бульона Сабуро, питательного бульона

для культивирования грибов, готового к применению.

Бульон Сабуро, питательный бульон для культивирования грибов, готовый к применению (далее Бульон Сабуро) представляет собой прозрачную жидкость от желтого до светло-коричневого цвета, стерильный.

Состав:

Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей	10,0 г
Глюкоза	40,0 г
Диализат хлебопекарных дрожжей	0,1 л
Вода дистиллированная	до 1 л
pH от 5,4 до 5,8	

Назначение. Бульон Сабуро предназначен для культивирования дрожжевых и плесневых грибов.

Способ применения. Перед использованием с бутылки с Бульоном Сабуро снимают алюминиевый колпачок, соблюдая правила асептики, заменяют резиновую пробку стерильной ватно-марлевой и разливают в стерильные пробирки. В таком виде бульон можно использовать в течение 10 суток при условии хранения при температуре от 2 до 8 °C .

Бульон Сабуро обеспечивает через 72 ч инкубации при температуре от 20 до 25°C визуально обнаруживаемый рост дрожжеподобных и плесневых грибов в виде придонного осадка и незначительного помутнения среды.



СОГЛАСОВАНО

И.о. директора ФГУН ГИСК

им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора


/А.А. Мовсисянц/

« 18 » 12 2009 г.

Для контроля стерильности отбор проб, посев и интерпретацию результатов проводят в соответствии с ГФ XII.

Форма выпуска. По 100, 200, 300, 400 мл в стеклянные бутылках.

Транспортирование. При температуре от 2 до 25 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03.

Хранение. В защищённом от света месте при температуре от 2 до 8 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248-03.

Срок годности 1 год. Бульон Сабуро с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Рекламации на качество в течение срока годности следует направлять в ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора по адресу: 119002, г. Москва, Сивцев-Вражек, д.41, тел. 8-(499)-241-39-22 и в адрес предприятия изготовителя: НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН (Филиал «Медгамал» НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН); 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.18; тел. 8-(499)-193-30-50, 8-(499)-190-44-59; факс 8-(499)-190-66-71.

Директор НИИЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН
(Филиал «Медгамал» НИИЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН)



А.Л. Гинцбург
12 2009 г.

