

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МИ

«Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов по ТУ 17.12.14-004-22261422-2017»

Варианты исполнения:

1. В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона с фотометрической меткой.
2. В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона без фотометрической метки.
3. В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона с фотометрической меткой.
4. В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона без фотометрической метки.
5. В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона с фотометрической меткой.
6. В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона без фотометрической метки.
7. В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона с фотометрической меткой.
8. В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона без фотометрической метки.
9. Складывающаяся с нанесением диаграммной сетки.
10. Складывающаяся с нанесением диаграммной сетки с фотометрической меткой.
11. Складывающаяся без диаграммной сетки.
12. Складывающаяся без диаграммной сетки с фотометрической меткой.
13. Складывающаяся с диаграммной сеткой с фотометрической меткой на стороне бумаги без термослоя.
14. Складывающаяся с диаграммной сеткой с двумя фотометрическими метками на сетке.
15. Складывающаяся с диаграммной сеткой с перфорацией с двух сторон.
16. Складывающаяся без диаграммной сетки с перфорацией с двух сторон.



Генеральный директор
ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг»

Ковальчук Л.И.

	Инструкция по применению	Дата пересмотра
	Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов	16.04.2018

ТУ 17.12.14-004-22261422-2017

РУ № ФСР 2009/06045 от «___» _____ 20__ г.

Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов предназначены для записей показаний всех видов медицинских регистрирующих приборов.

Ленты выпускаются различных вариантов исполнения и типоразмеров.

Вариант исполнения и типоразмер ленты указаны на этикетке.

Плотность лент от 48 до 90 г/м². Белизна бумаги-основы: от 81 до 98%.

Применяемая бумага-основа: бумага-основа АО «ГОЗНАК» (Россия), термобумага-основа «ЖТК» (Финляндия), полипропиленовая термопленка-основа «ЖТК» (Финляндия), «International Imaging Materials» Inc.(США), термобумаги-основы «HANSOL PAPER CO. LTD» (Южная Корея).

Выбор необходимого варианта исполнения ленты зависит от характеристик прибора, с которым планируется использовать бумагу.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Извлечь ленту нужного варианта исполнения и размера из упаковки;
2. Установить ленту в протяжное устройство прибора согласно эксплуатационной документации прибора.
3. Согласно эксплуатационной документации прибора провести снятие показаний.
4. После остановки диагностического прибора произвести отрыв ленты с нанесёнными на неё показаниями.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Для предотвращения снижения качества термопечати на лентах при хранении необходимо следовать нижеуказанным мерам:

- Температура воздуха не должна превышать 25° С;
- Относительная влажность воздуха не выше 40-60 %;
- Не допускать прямого попадания солнечного (ультрафиолетового) света;
- Избегать хранения ленты со следующими материалами: бумагой, содержащей органические растворители, включая (но, не ограничиваясь) трибутилфосфат, и / или дибутилфталат; углеродсодержащими формами; материалами содержащими ПВХ такие как (но, не ограничиваясь) файл-папки, конверты, разделители; чистящими жидкостями и растворителями, такими как спирты, кетоны, эфиры и т.д.; материалами, содержащими адгезивные вещества; архивными накопителями, изготовленными с применением водосодержащих материалов.

При утилизации используются обычные методы утилизации бумаги;

Степень воспламеняемости лент аналогична бумаге без покрытия;

Использование, хранение и утилизация лент не вызывает экологического загрязнения.

Транспортирование и хранение лент по ГОСТ 20259 и ГОСТ 12997.

Ленты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ГАРАНТИИ

Производитель гарантирует соответствие лент требованиям ТУ 17.12.14-004-22261422-2017 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Срок сохранности отпечатанных данных:

срок сохранности изображения на лентах при хранении согласно вышеуказанным требованиям 7(семь) лет (для более длительного срока хранения рекомендуется создавать ксерокопию).

Производитель: Закрытое акционерное общество «Фабрика диаграммных бумаг»,
308017, г.Белгород, ул. Константина Заслонова, 161-Г

Претензии и рекламации направлять: Закрытое акционерное общество «Фабрика диаграммных бумаг»,
308017, г.Белгород, ул. Константина Заслонова, 161-Г. Телефон: +7 4722 21-49-94, 21-49-95.
e-mail: import@bfdb.ru.

Пронумеровано и прошито
Два листа (ов)
Генеральный директор
ЗАО «Фабрика диванных бумаж»
Ковальчук Л.И.

