


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ФОРМАН Продактс»

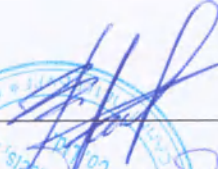

В.В. Новиков


2018 г.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ «ФОРМАН» (FOREMAN)

по ТУ 32.50.50-004-79722512-2018

Инструкция по применению

ФРМН.942819.004 ИП

г. Санкт-Петербург

2018

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение и условия применения	4
1.2 Показания	4
1.3 Противопоказания	4
1.4 Побочные эффекты	4
1.5 Меры предосторожности	4
1.6 Общий вид шкафа	5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	30
2.1 Основные параметры и характеристики	30
2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям	33
2.3 Требования к надежности	40
2.4 Комплектность	40
2.5 Маркировка	41
2.6 Упаковка	41
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	42
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	42
4.1 Эксплуатационные ограничения	42
4.2 Подготовка к эксплуатации	42
5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ И РЕМОНТ	43
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	45
7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	45
8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	46
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	47
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	48
11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	49
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	50

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 3 из 51

Настоящая инструкция распространяется на Шкаф медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) (в дальнейшем – шкаф) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках шкафа, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения шкафа отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования шкафа, необходимо обращаться к изготовителю:

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАН Продактс»
 Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12
 Тел: +7 (812) 332-58-43
 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 4 из 51

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Шкаф медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) (далее – шкаф) предназначен для оснащения кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений широкого профиля, с целью создания для пользователей места для хранения: инструментов, материалов, документов и т.п.

Условия применения – лечебно-профилактические учреждения.

В зависимости от потенциального риска применения шкаф относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид шкафа в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 156900 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям шкаф относится к виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации шкаф относится к группе 1 по ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации шкаф относится к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.

1.2 Показания

- организация хранения материалов, инструментов, медицинских изделий, документов и других предметов медицинского работника/пациента.

1.3 Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала.

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний и противопоказаний.

1.5 Меры предосторожности



Внимание!

- Используйте шкаф только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за шкафом осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за шкафом.
- Не следует ставить на поверхность шкафа горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 5 из 51

1.6 Общий вид шкафа

Шкаф представляет собой предмет мебели в виде большого вертикально стоящего ящика с дверцами и секциями/полками и/или вешалками/крючками, который используется для хранения принадлежностей медицинского персонала или пациента, для хранения инструментов, перевязочных материалов, документов и т.п.

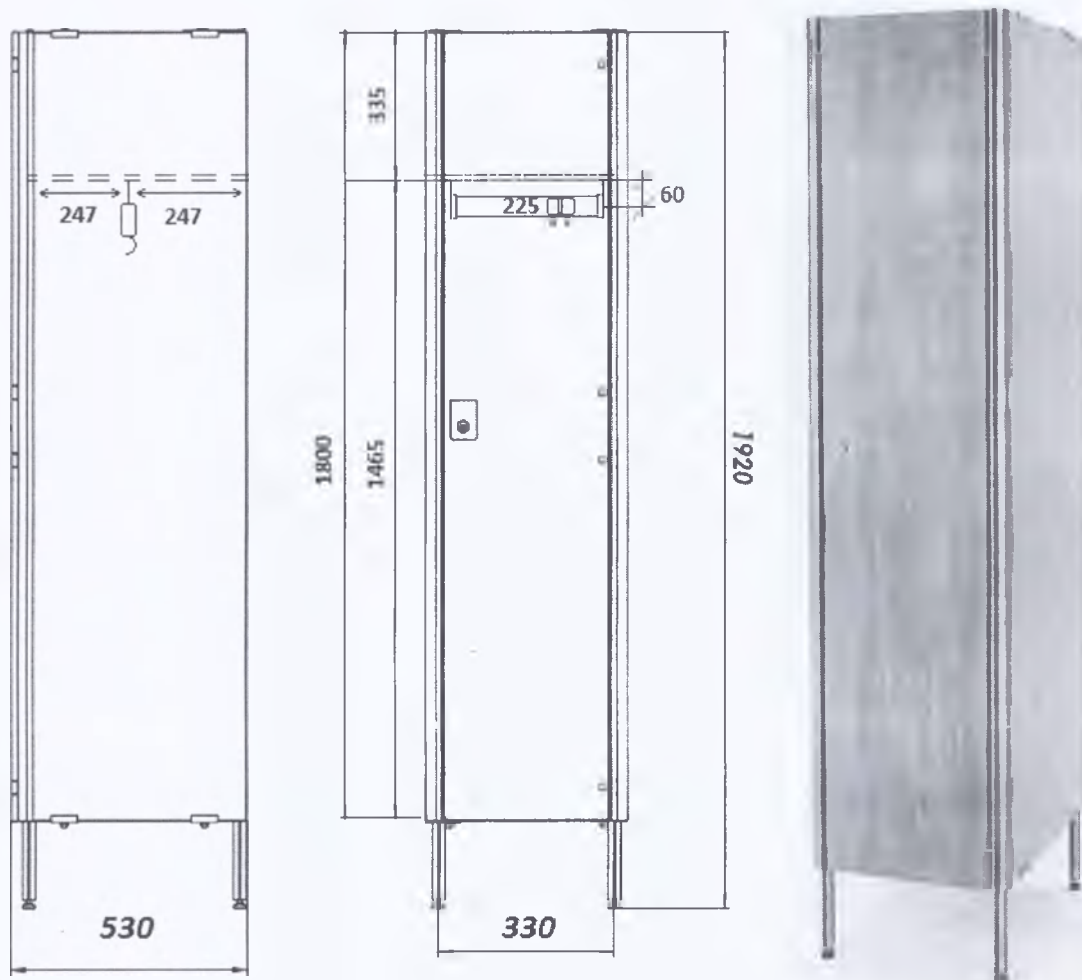


Рисунок 1 - Артикул FP-1-04-01. Шкаф 1-но секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 1 - Размеры шкафа 1-но секционного «ФОРМАН» (FOREMAN) «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	1910	530	300	492

Количество крючков на штанге: 2 шт.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 6 из 51

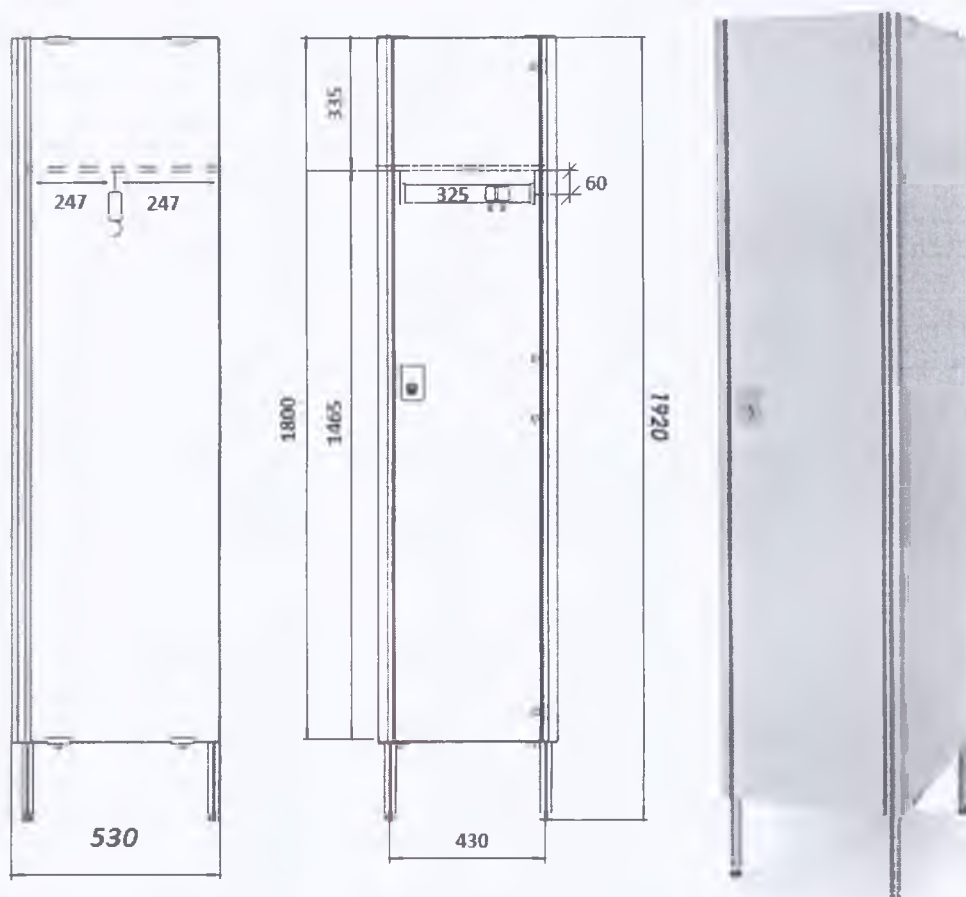


Рисунок 2 - Артикул FP-1-04-02. Шкаф 1-но секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 2 - Размеры шкафа 1-но секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	1910	530	400	492

Количество крючков на штанге: 2 шт.

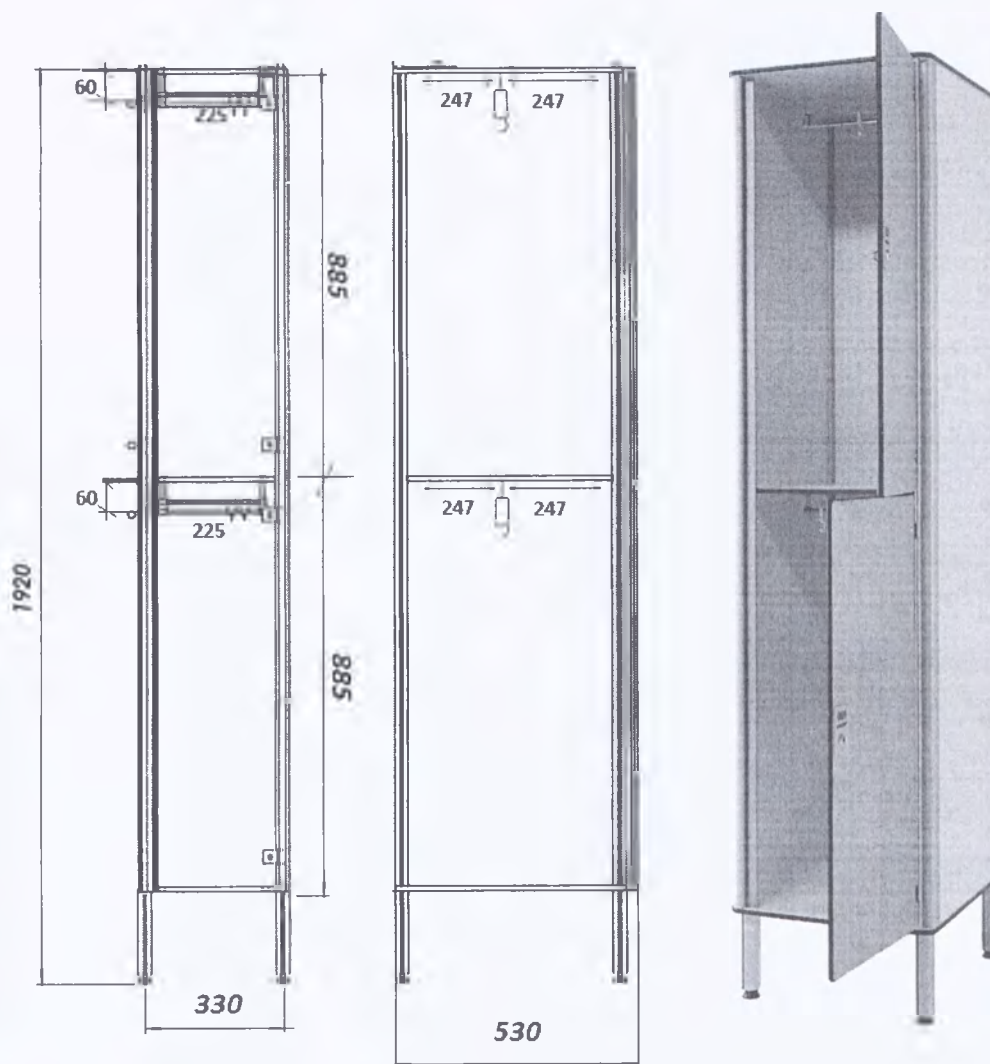


Рисунок 3 - Артикул FP-1-04-03. Шкаф 2-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 3 - Размеры шкафа 2-х секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	1910	530	300	492

Количество крючков на верхней штанге: 2 шт.

Количество крючков на нижней штанге: 2 шт.

Общее количество крючков: 4 шт.

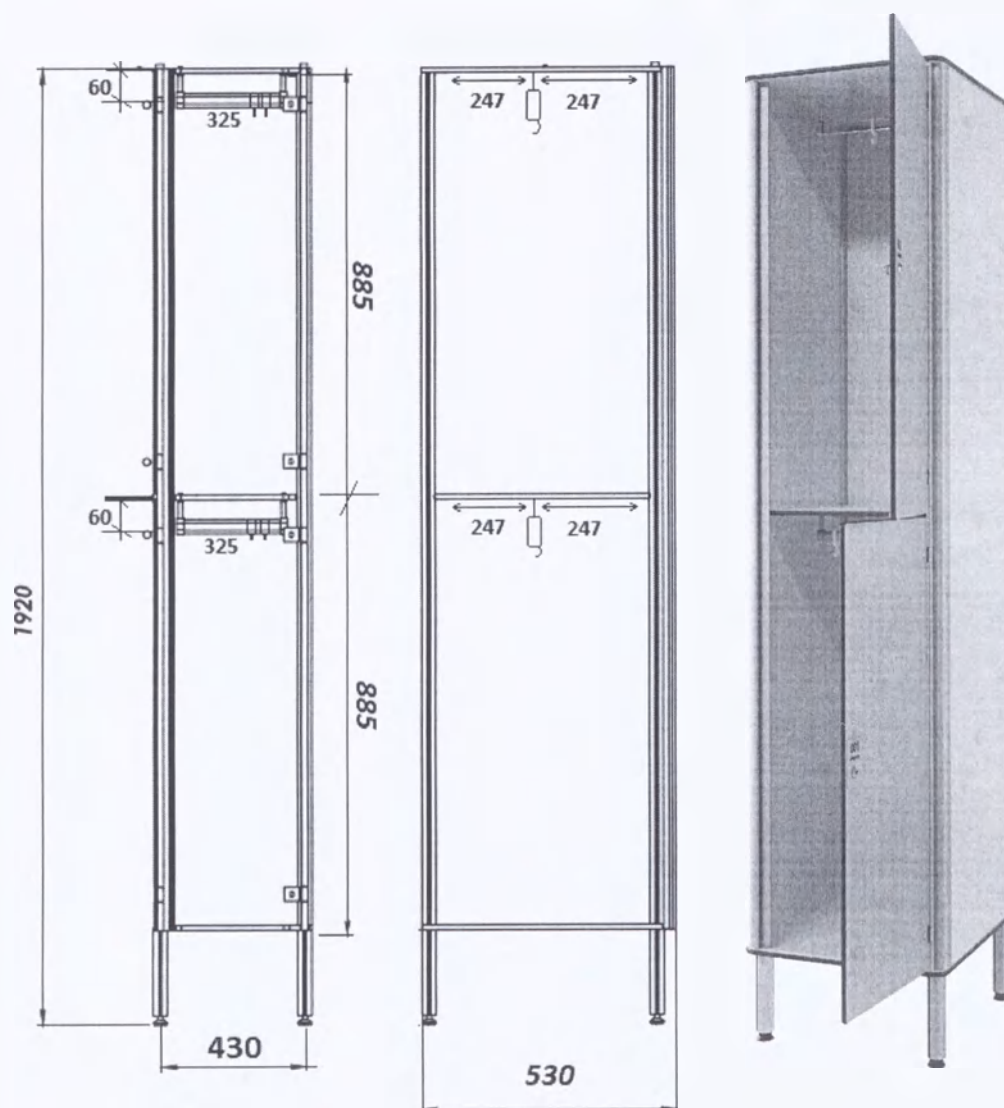


Рисунок 4 - Артикул FP-1-04-04. Шкаф 2-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 4 - Размеры шкафа 2-х секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	1910	530	400	492

Количество крючков на верхней штанге: 2 шт.

Количество крючков на нижней штанге: 2 шт.

Общее количество крючков: 4 шт.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 9 из 51

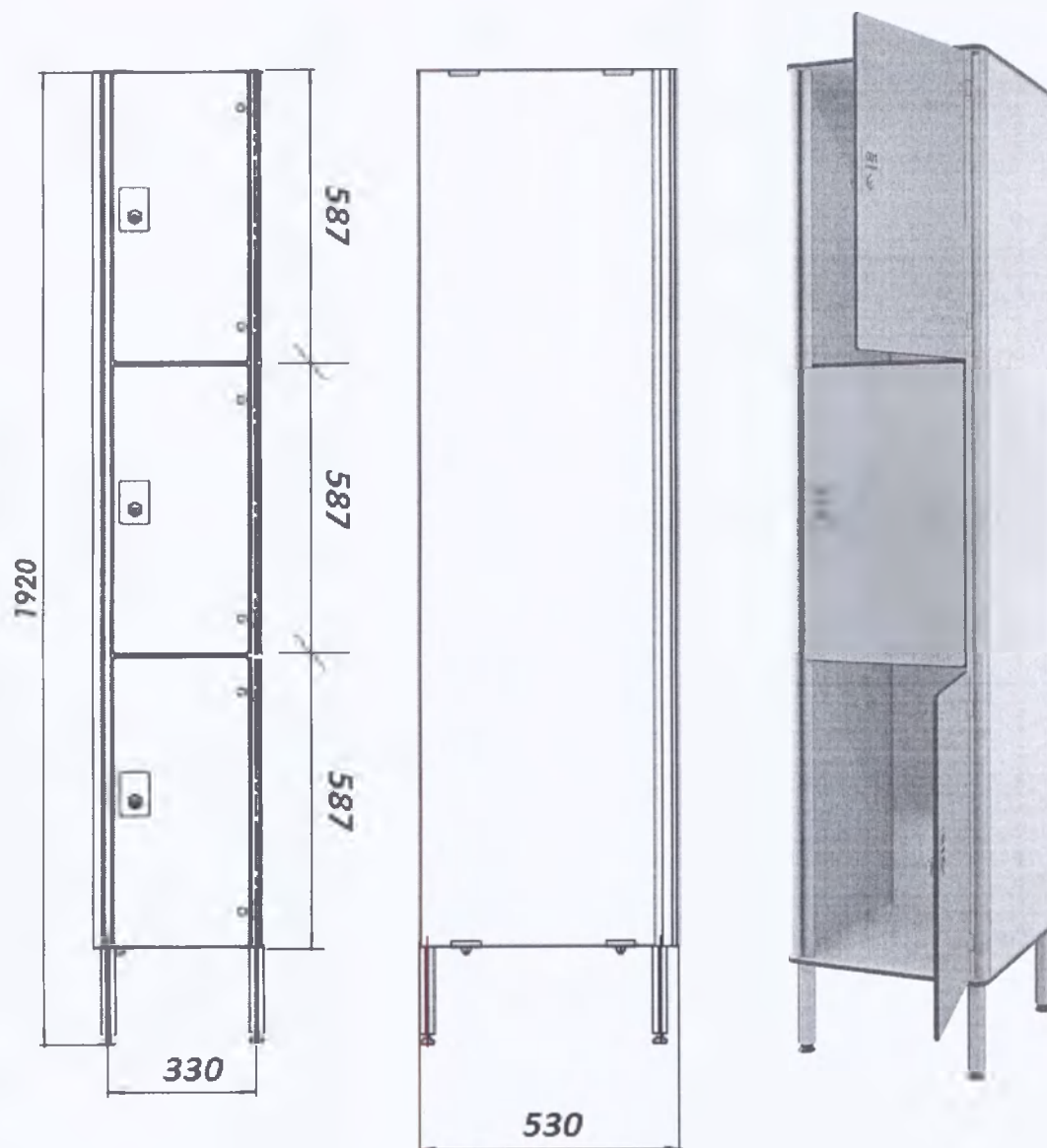


Рисунок 5 - Артикул FP-1-04-05. Шкаф 3-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 5 - Размеры шкафа 3-х секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 2 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	1910	530	300	492

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 10 из 51

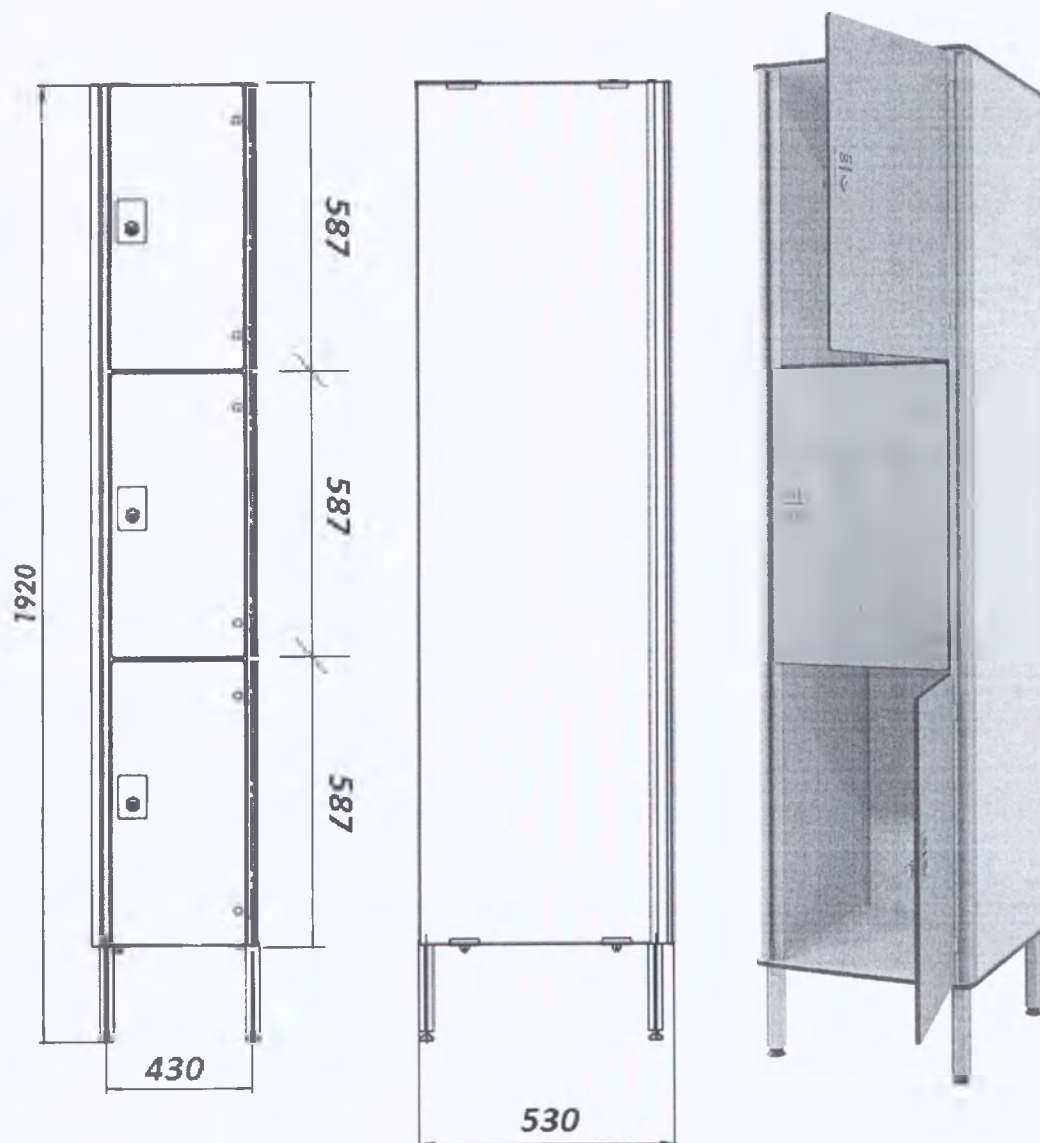


Рисунок 6 - Артикул FP-1-04-06. Шкаф 3-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 6 - Размеры шкафа 3-х секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 2 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	1910	530	400	492

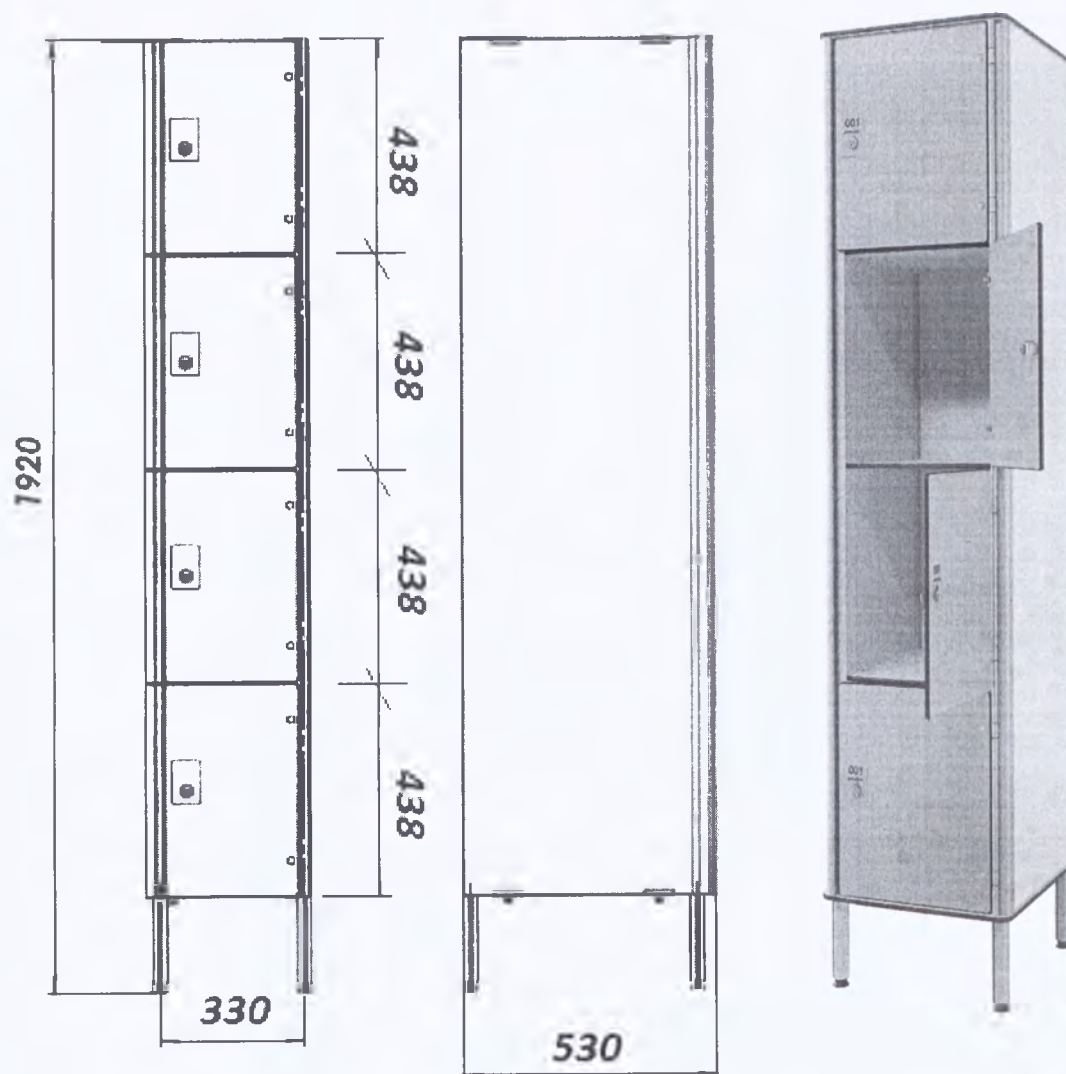


Рисунок 7 - Артикул FR-1-04-07. Шкаф 4-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 7 - Размеры шкафа 4-х секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 3 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	1910	530	300	492

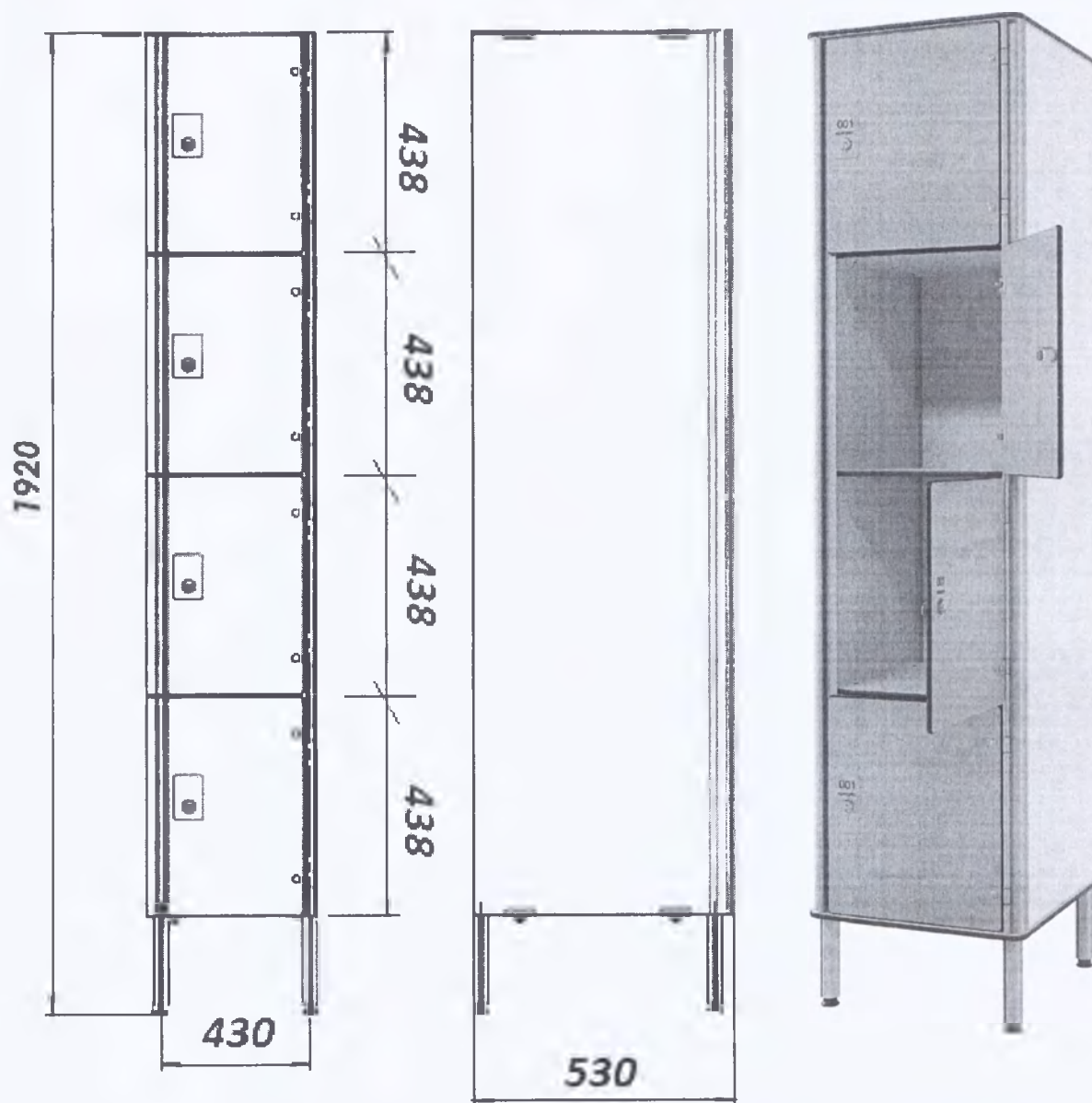


Рисунок 8 - Артикул FP-1-04-08. Шкаф 4-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 8 - Размеры шкафа 4-х секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 3 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	1910	530	400	492

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 13 из 51

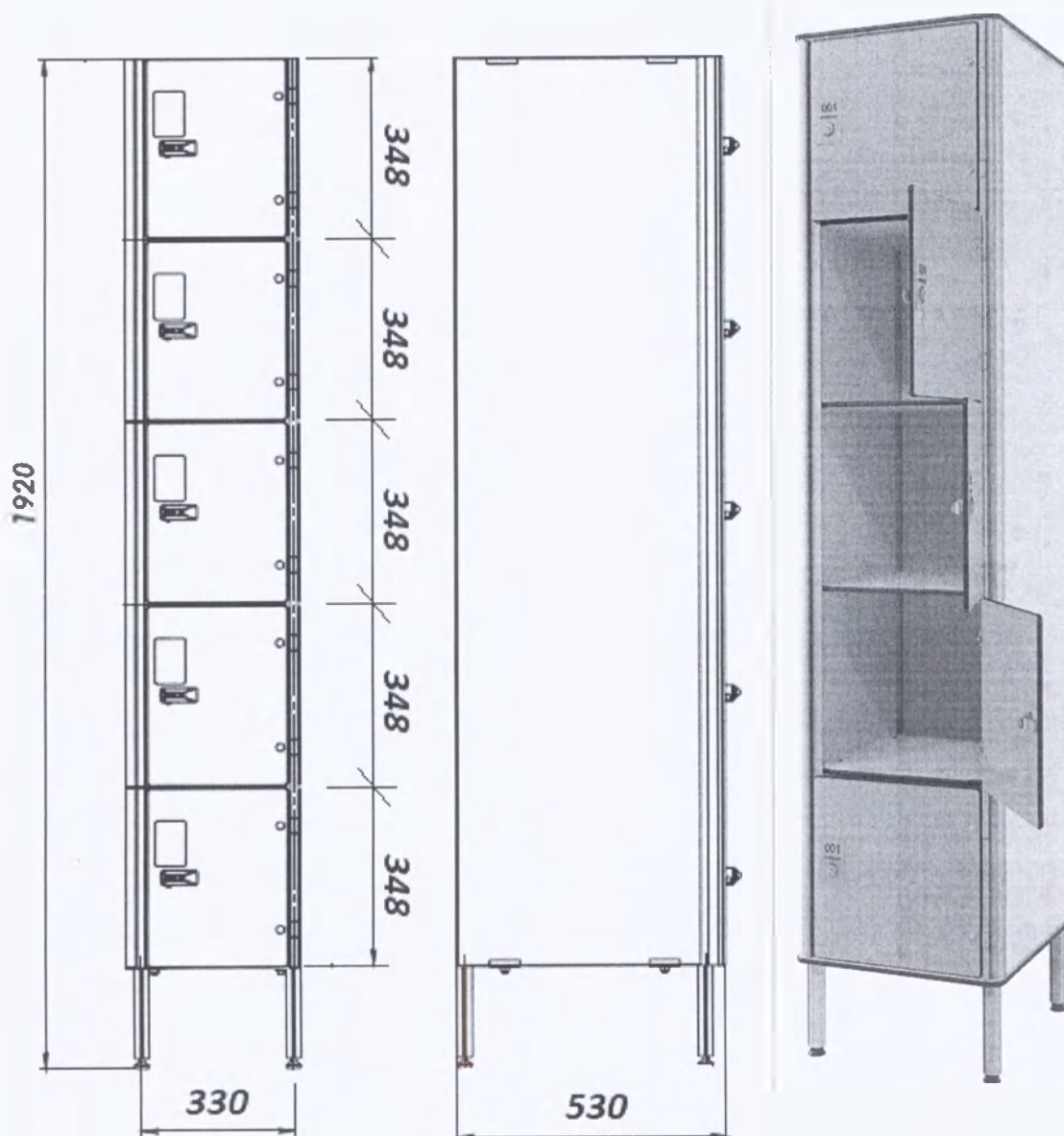


Рисунок 9 - Артикул FR-1-04-09. Шкаф 5-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 9 - Размеры шкафа 5-ти секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	1910	530	300	492

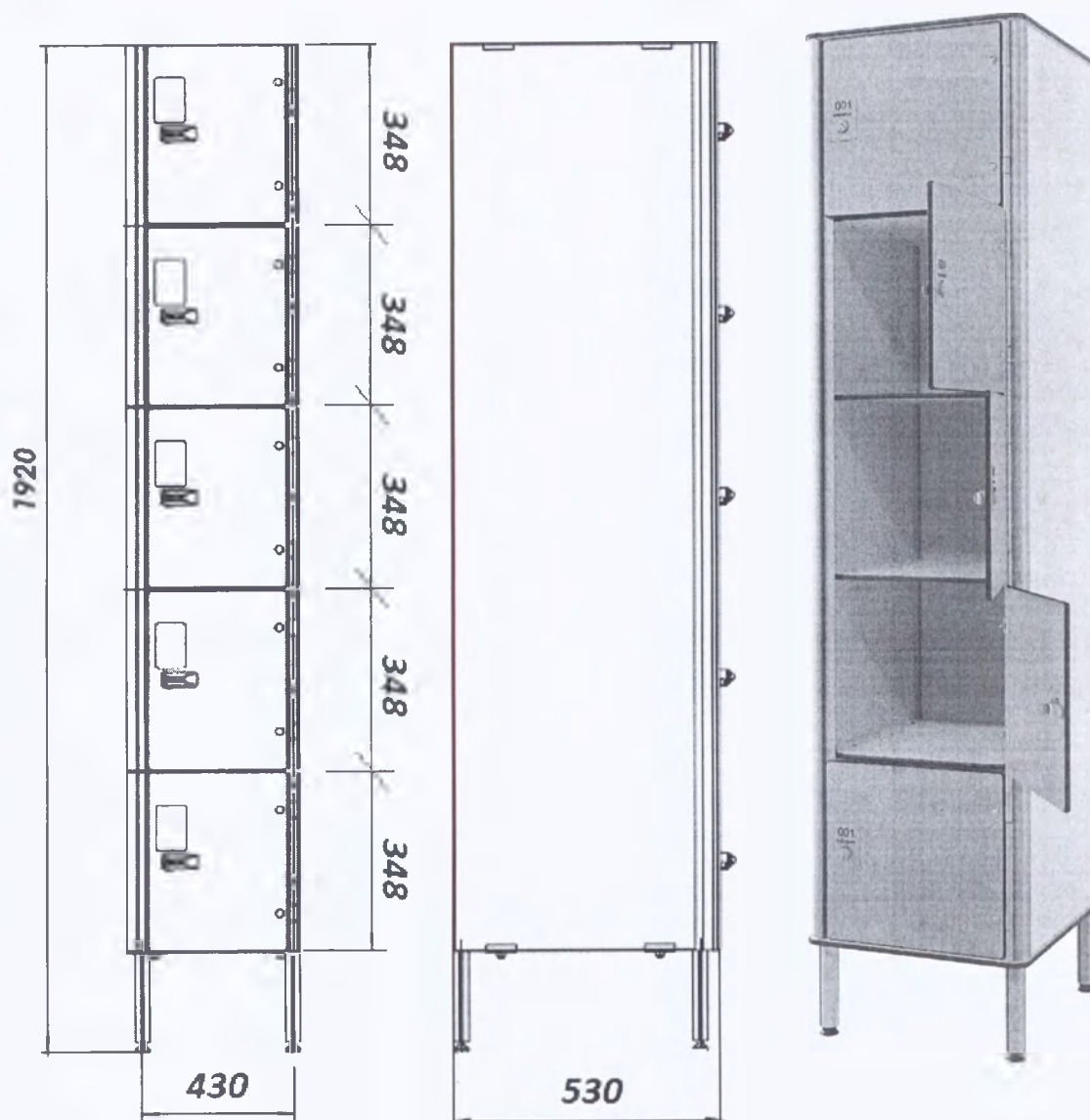


Рисунок 10 - Артикул FP-1-04-10. Шкаф 5-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 10 - Размеры шкафа 5-ти секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	1910	530	400	492

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 15 из 51

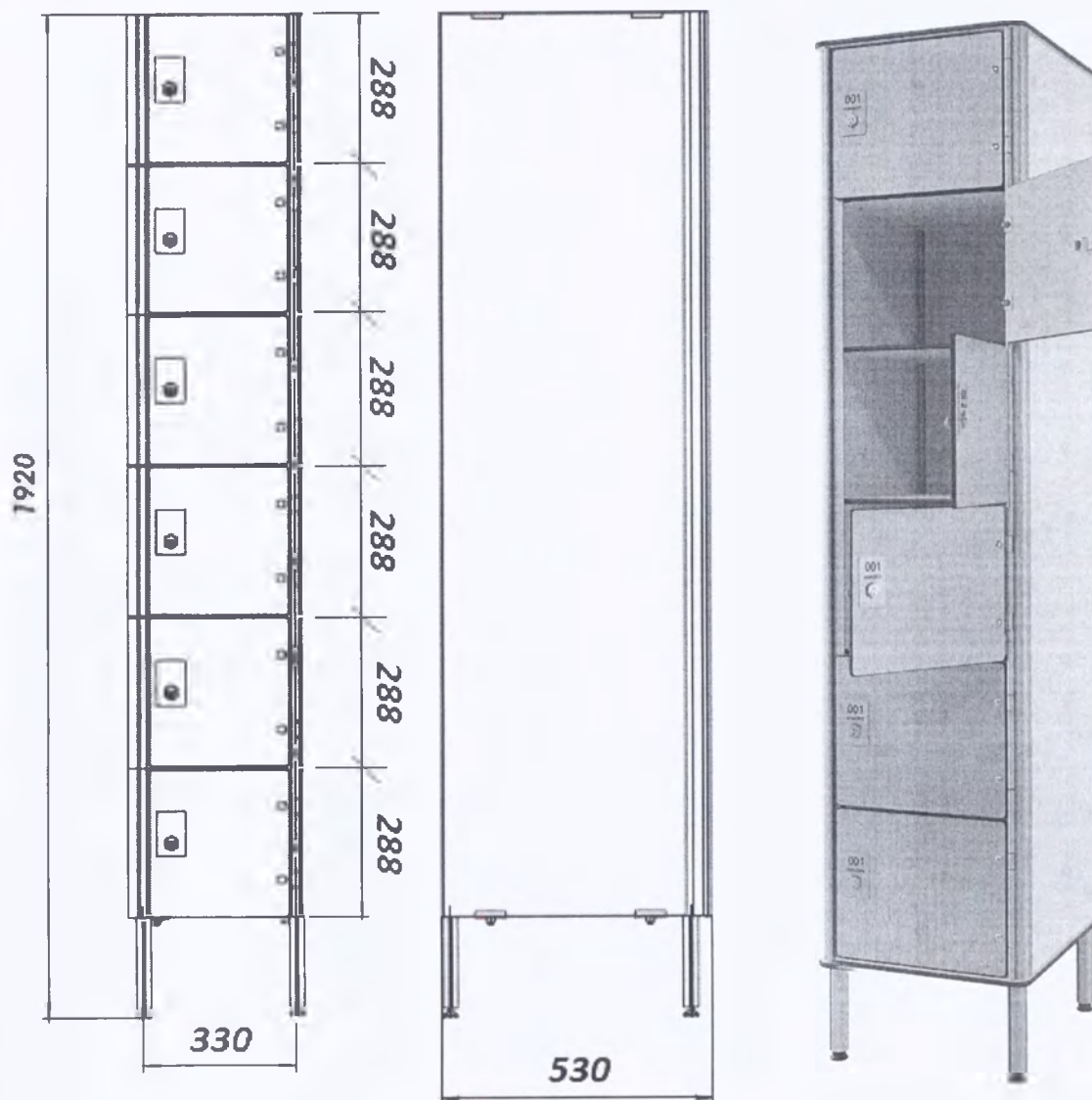


Рисунок 11 - Артикул FP-1-04-11. Шкаф 6-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 11 - Размеры шкафа 6-ти секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 5 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1920	1910	530	300	492

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 16 из 51

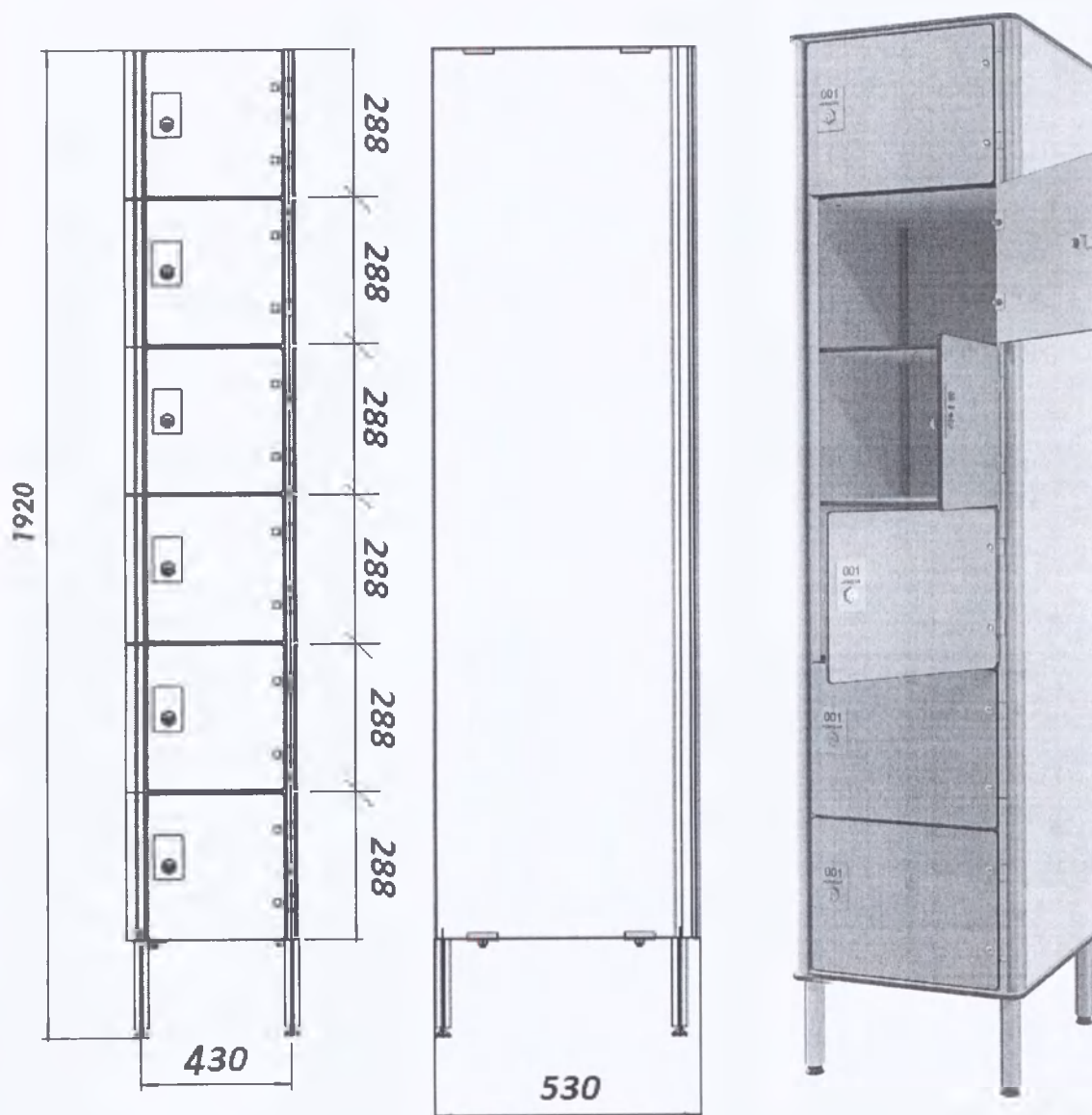


Рисунок 12 - Артикул FP-1-04-12. Шкаф 6-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 12 - Размеры шкафа 6-ти секционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 5 шт.	
					Ширина	Глубина
	430	1920	1910	530	400	492

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 17 из 51

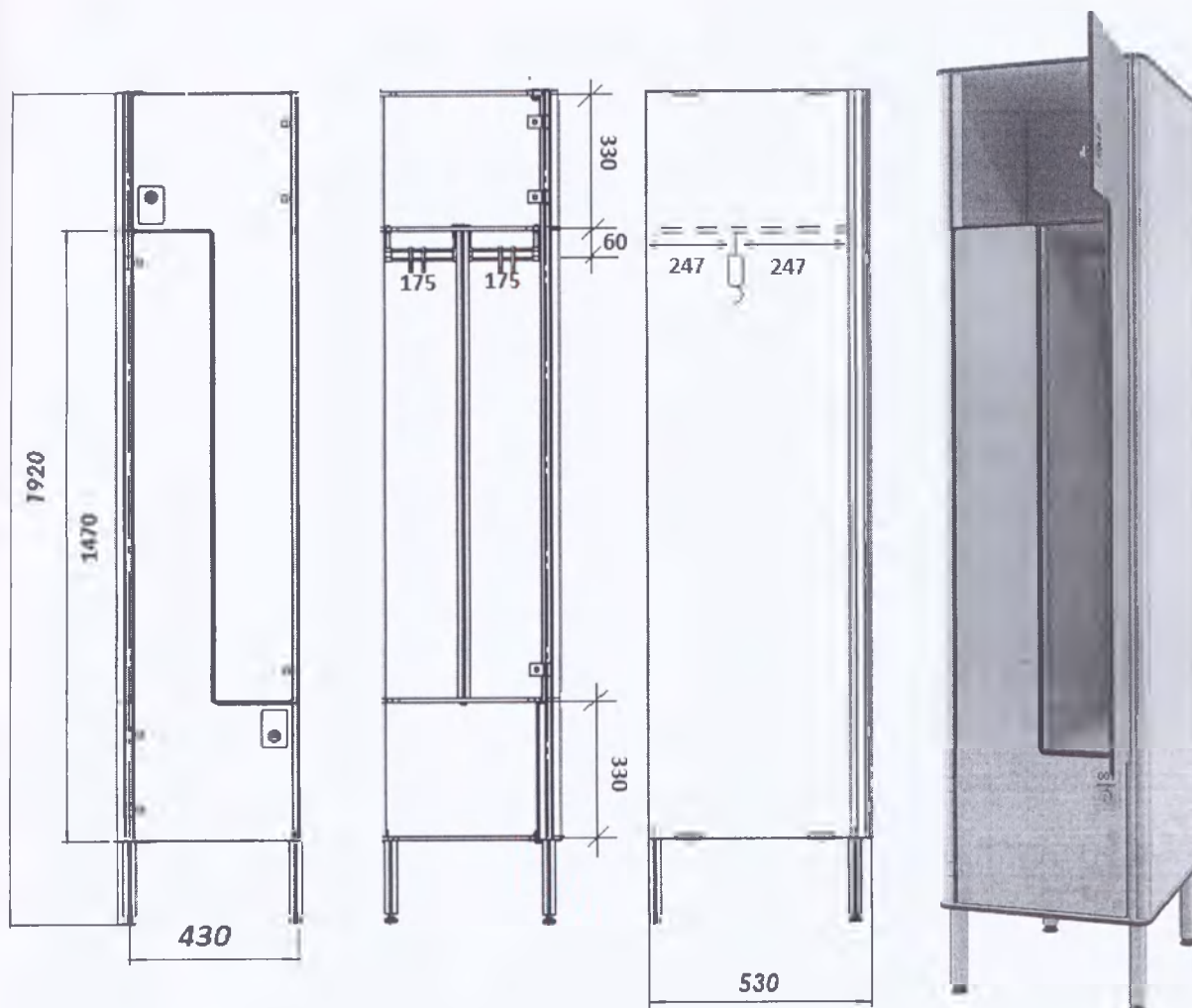


Рисунок 13 - Артикул FP-1-04-13. Шкаф Z образный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 13 - Размеры шкафа Z образного «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 2 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	1910	530	400	492

Количество крючков на левой штанге: 2 шт.

Количество крючков на правой штанге: 2 шт.

Общее количество крючков: 4 шт.

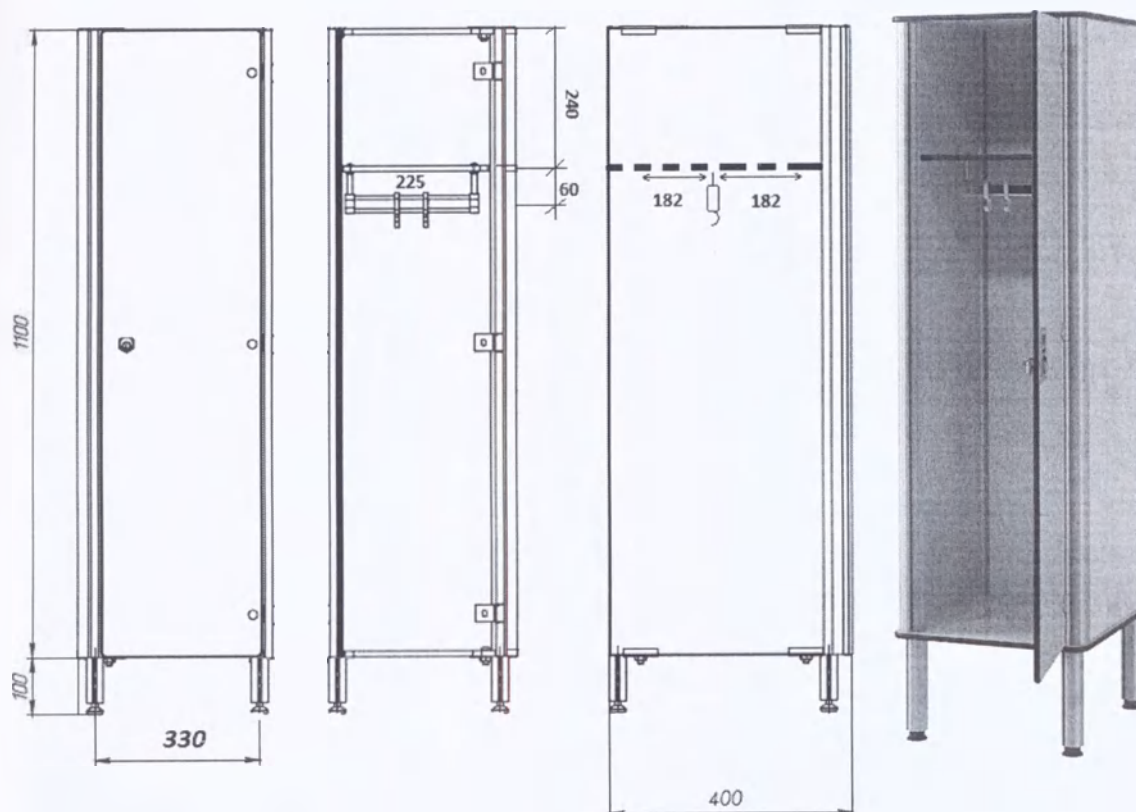


Рисунок 14 - Артикул FR-1-04-14. Шкаф детский «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 14 - Размеры шкафа детского «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	330	1200	1190	400	300	362

Количество крючков на штанге: 2 шт.

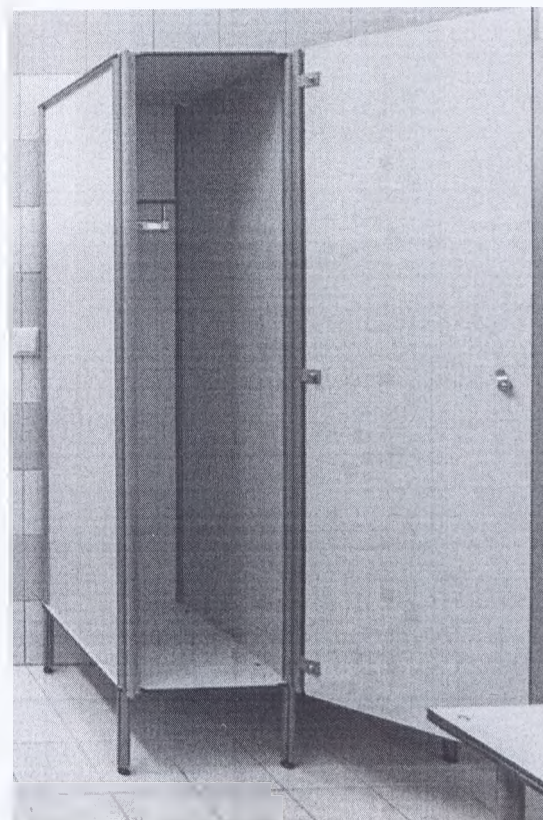
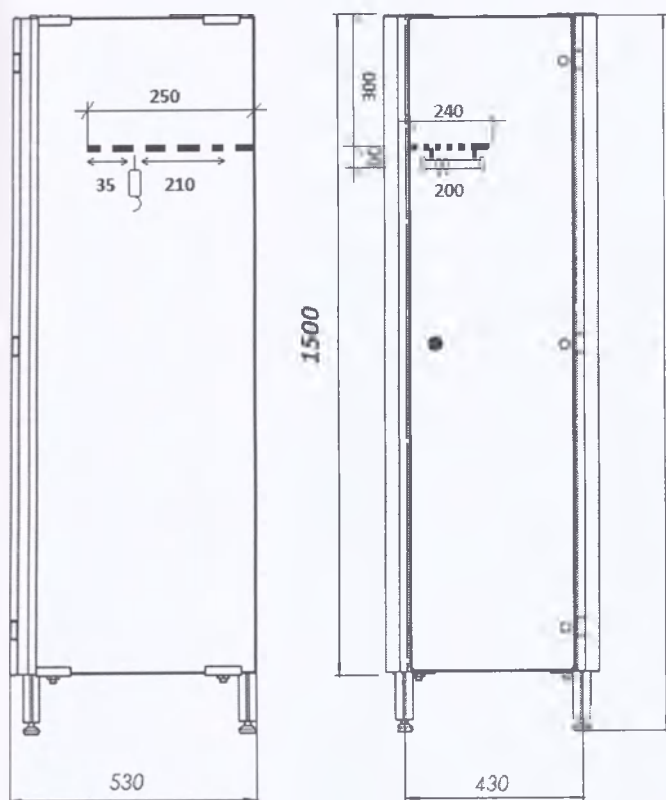


Рисунок 15 - Артикул FR-1-04-15. Шкаф для людей с ограниченными возможностями «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 15 - Размеры шкафа для людей с ограниченными возможностями «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1620	1610	530	240	250

Количество крючков на штанге: 2 шт.

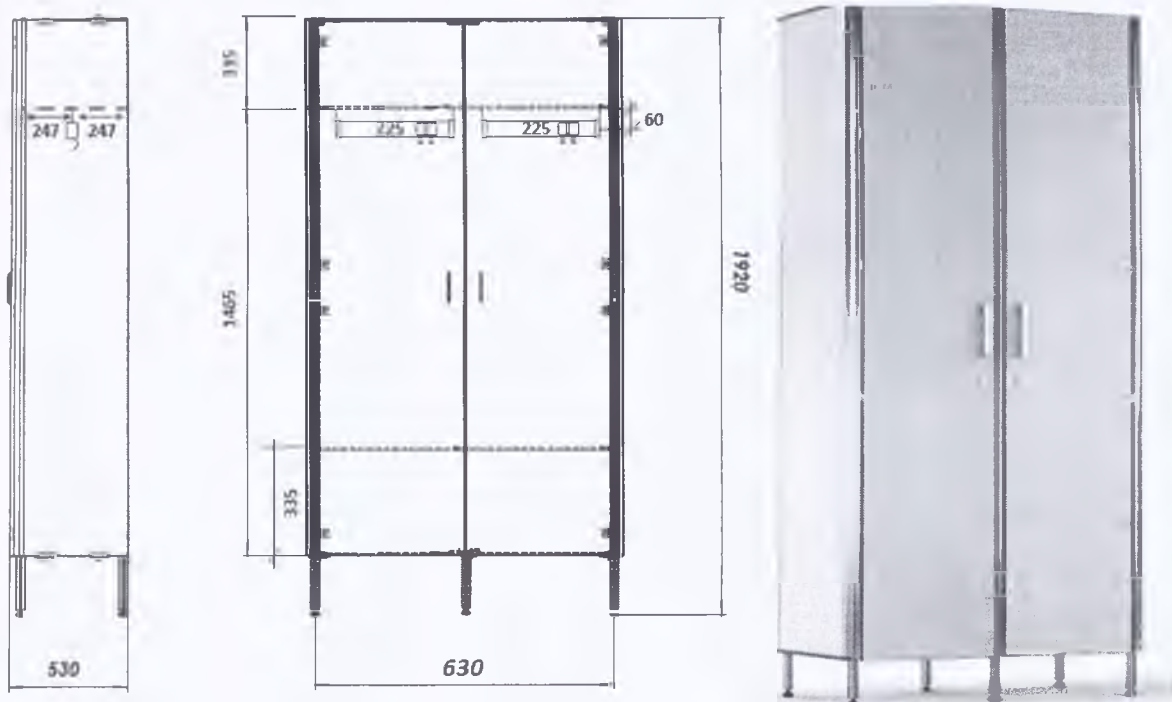


Рисунок 16 - Артикул FP-1-04-16. Шкаф двойной 1-но секционный с дополнительной полкой под обувь «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 16 - Размеры шкафа двойного 1-но секционного с дополнительной полкой под обувь «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 4 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	630	1920	1910	530	300	492

Количество крючков на левой штанге: 2 шт.

Количество крючков на правой штанге: 2 шт.

Общее количество крючков: 4 шт.

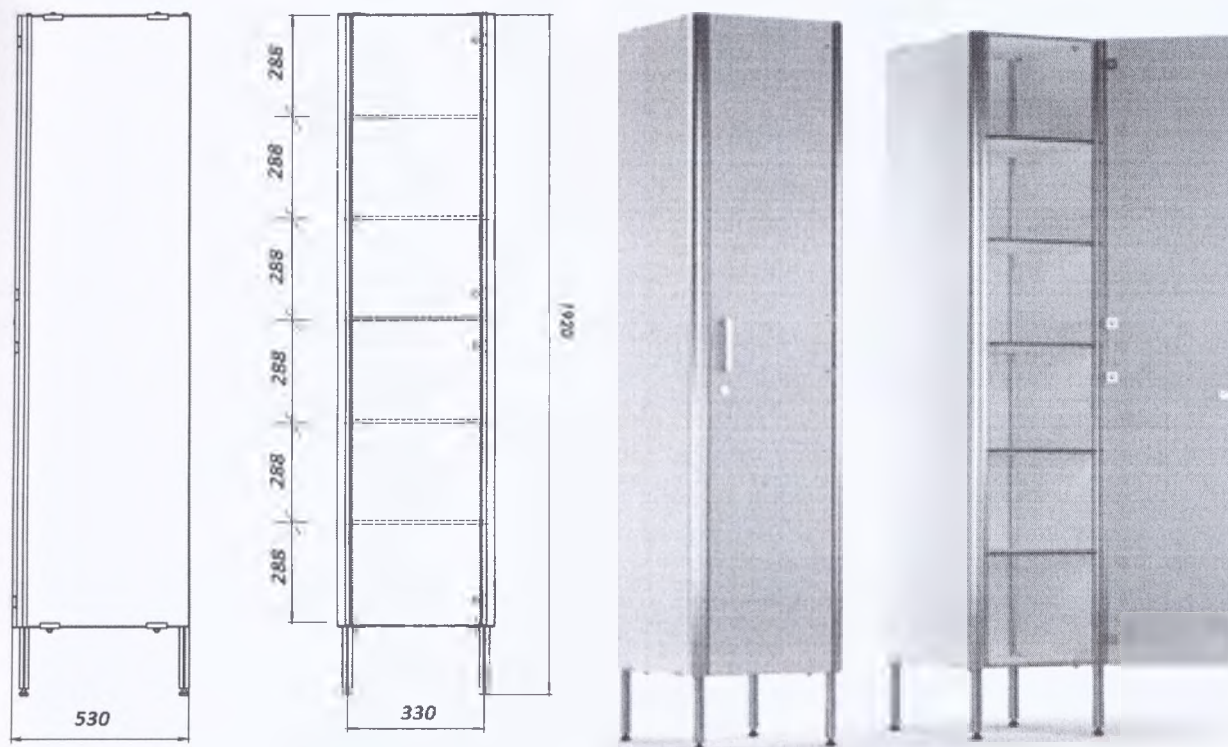


Рисунок 18 - Артикул FP-1-04-18. Шкаф многосекционный с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 18 - Размеры шкафа многосекционного с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 5 шт.	
					Ширина	Глубина
	330	1920	1910	530	300	492

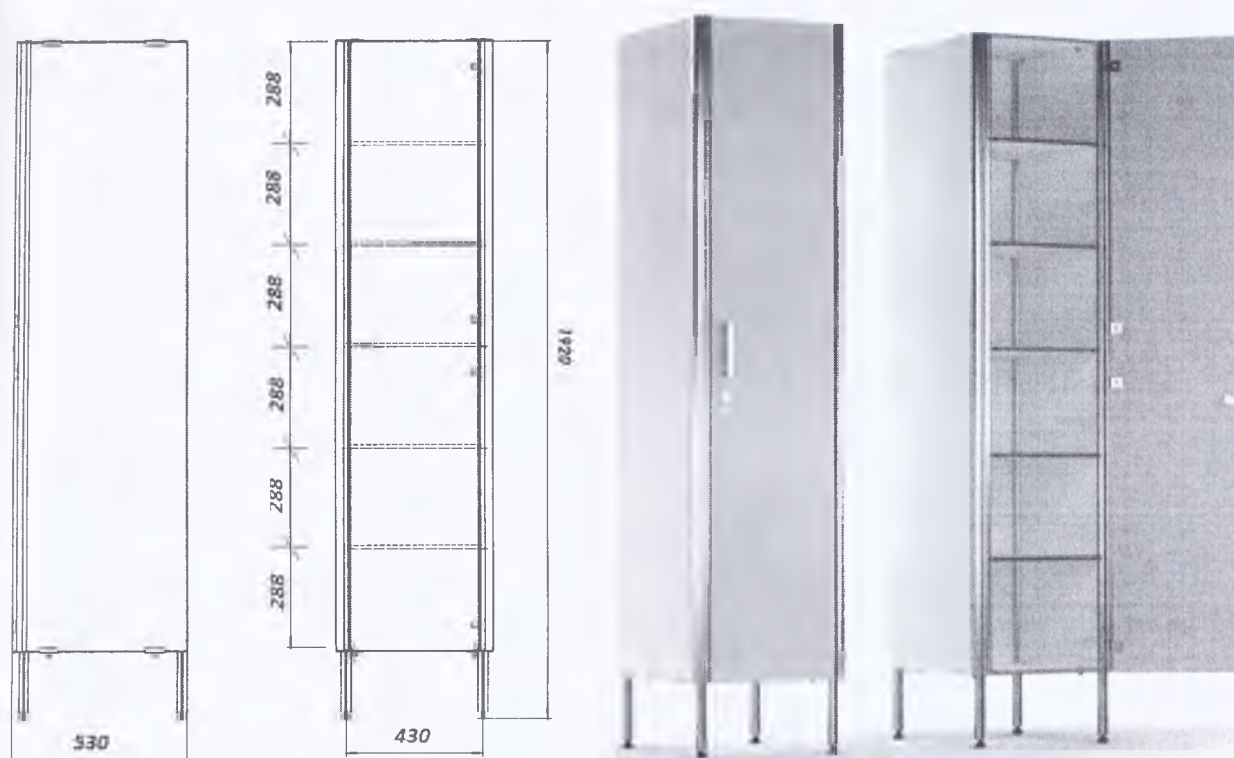


Рисунок 19 - Артикул FR-1-04-19. Шкаф многосекционный с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 19 - Размеры шкафа многосекционного с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 5 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	430	1920	1910	530	400	492

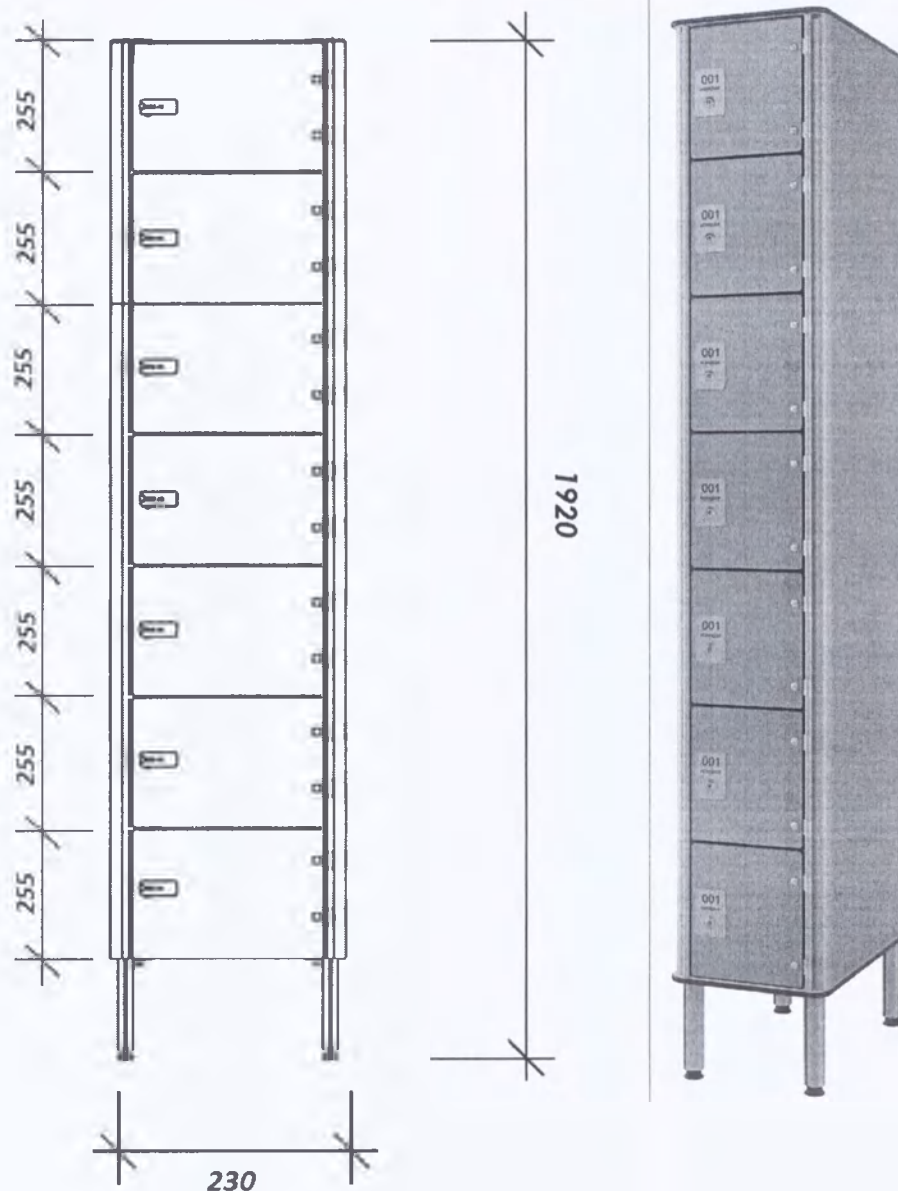


Рисунок 20 - Артикул FP-1-04-20. Шкаф арендный семисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 20 - Размеры шкафа арендного семисекционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 6 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	230	1920	1910	300	200	268

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 25 из 51

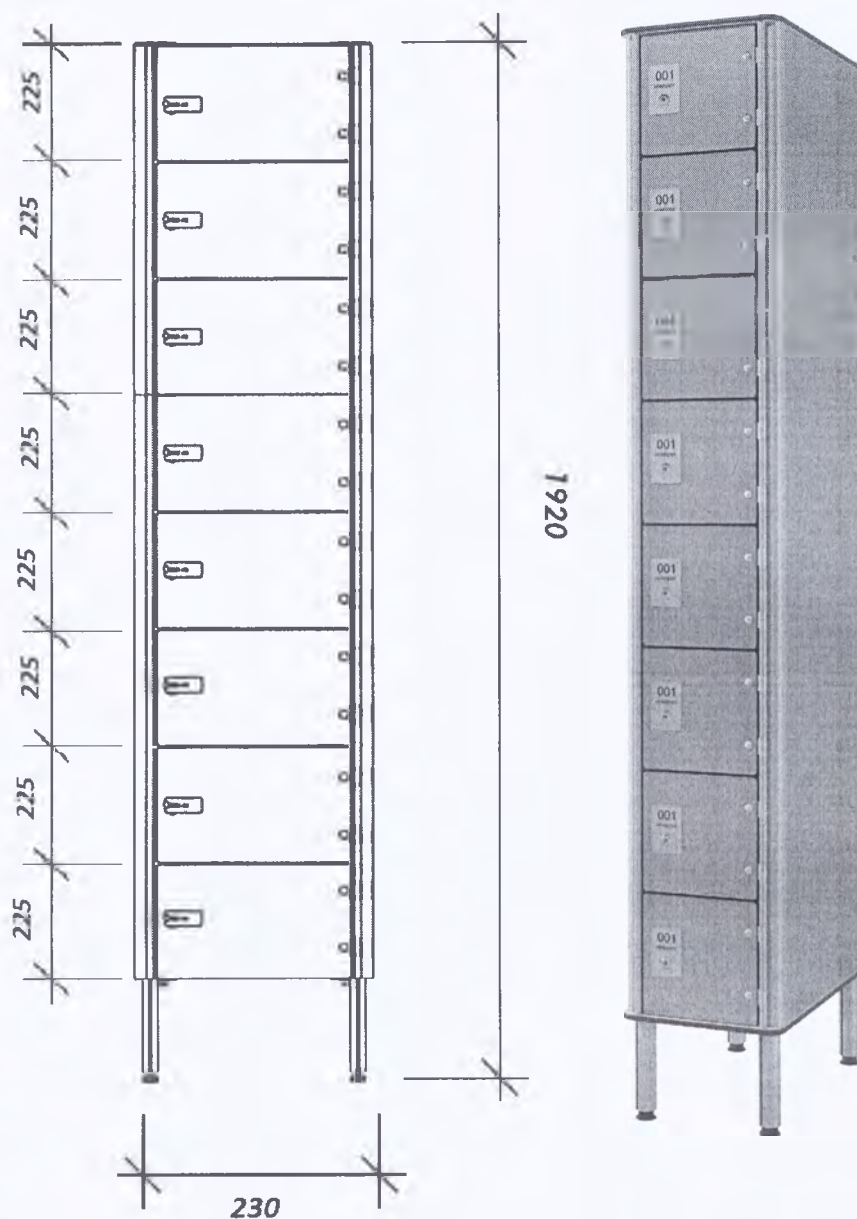


Рисунок 21 - Артикул FP-1-04-21. Шкаф арендный восьмисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 21 - Размеры шкафа арендного восьмисекционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 7 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	230	1920	1910	300	200	268

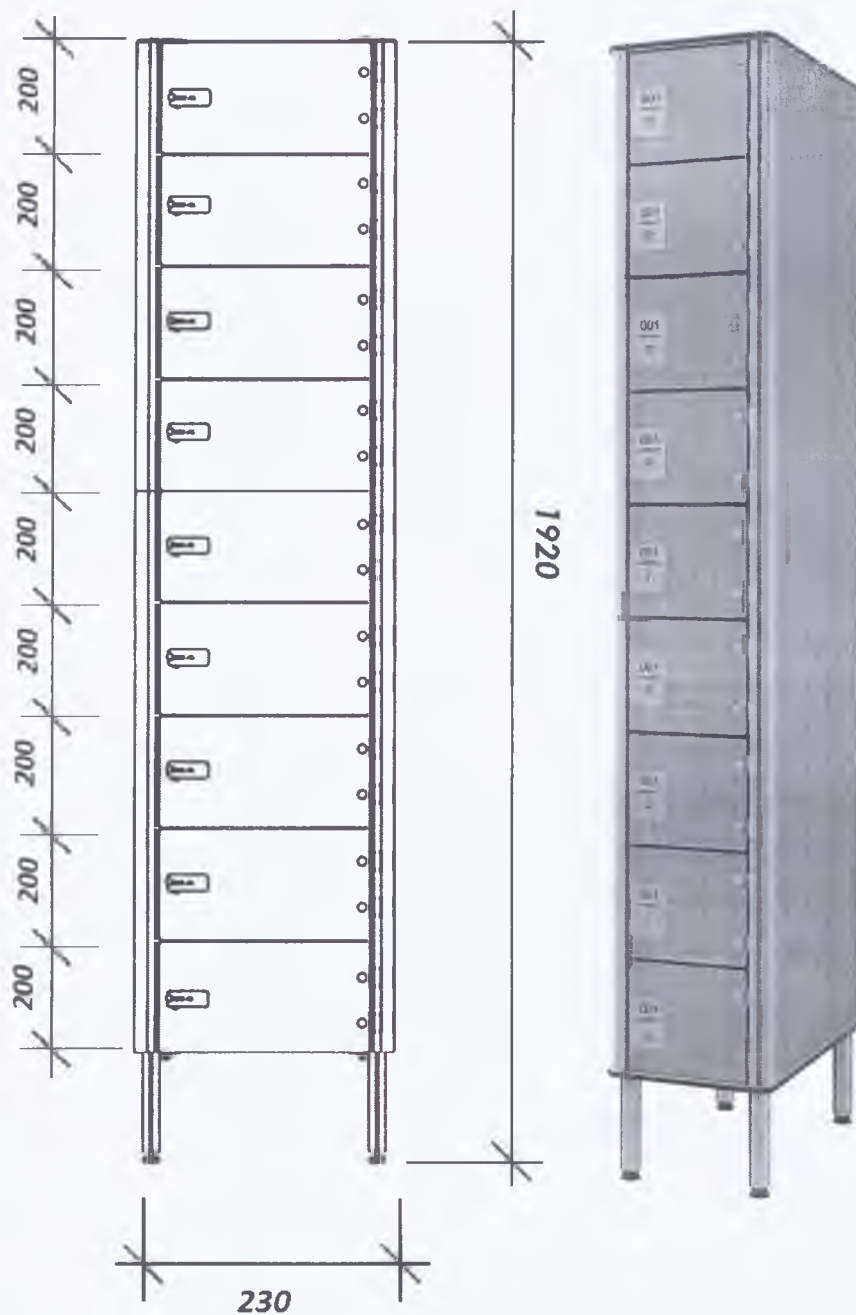


Рисунок 22 - Артикул FP-1-04-22. Шкаф арендный девятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 22 - Размеры шкафа арендного девятисекционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 8 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	230	1920	1910	300	200	268

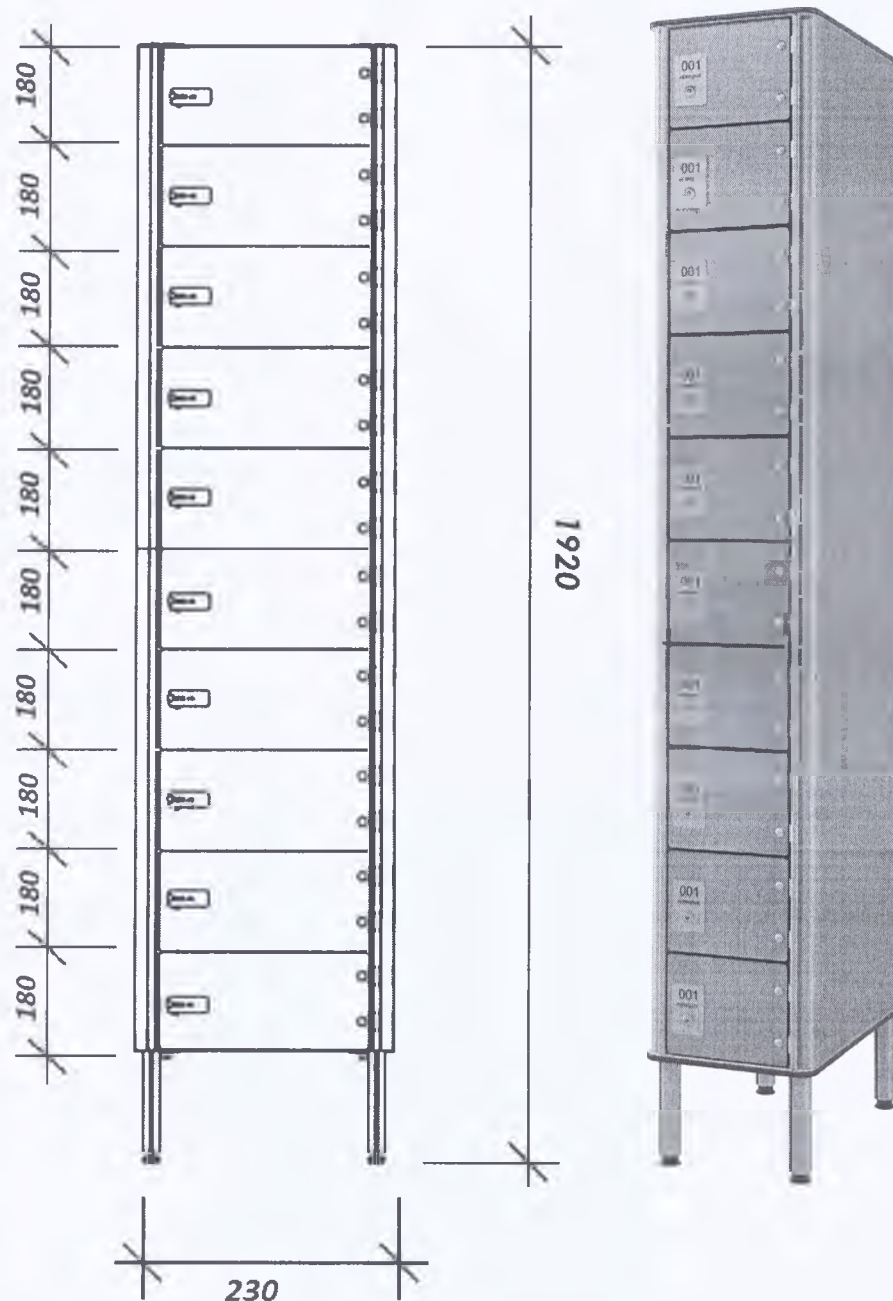


Рисунок 23 - Артикул FR-1-04-23. Шкаф арендный десятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 23 - Размеры шкафа арендного десятисекционного «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Полки 9 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	230	1920	1910	300	200	268

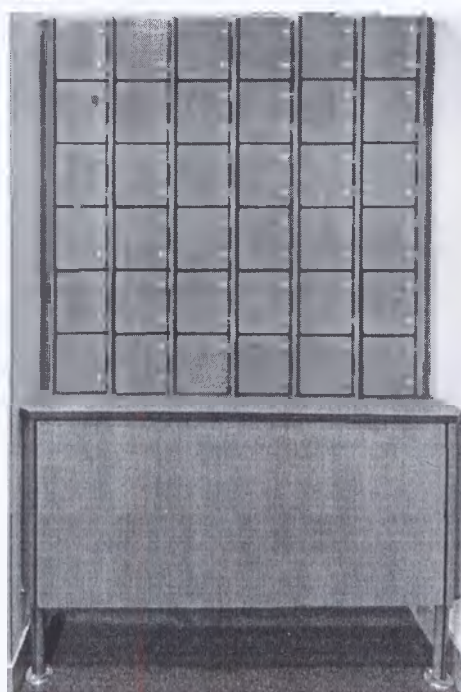
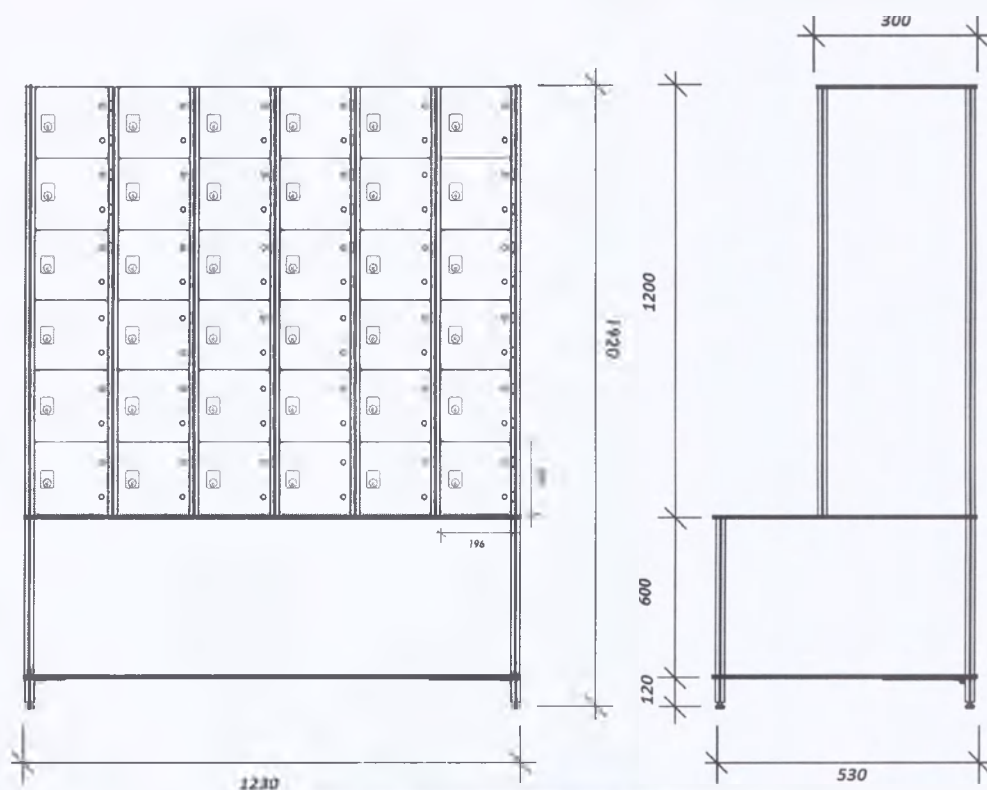


Рисунок 24 - Артикул FP-1-04-24. Шкаф арендный с разноформатными ячейками «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 24 - Размеры шкафа арендного с разноформатными ячейками «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина шкафа	Максимальная высота шкафа	Минимальная высота шкафа	Глубина шкафа	Ячейки 36 шт.		
					Ширина	Высота	Глубина
	1230	1920	1910	530	196	200	268

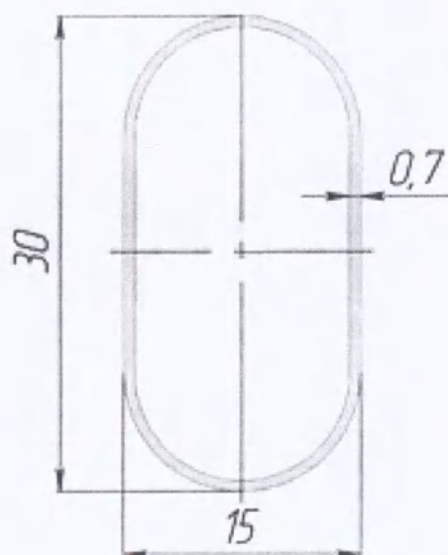


Рисунок 25 – Штанга для вешалок

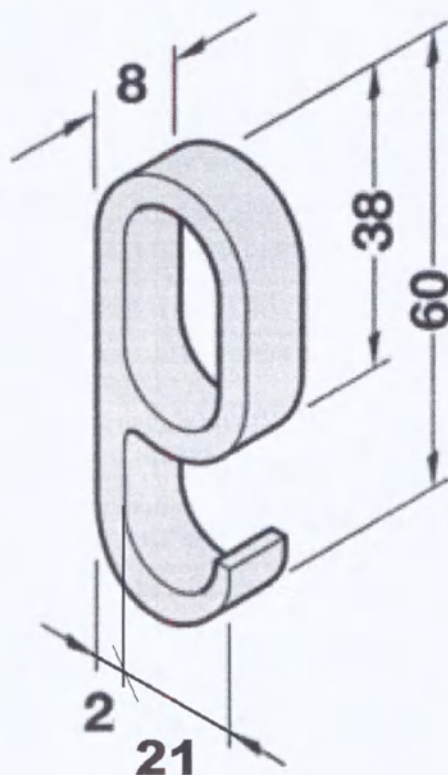


Рисунок 26 – Крючок для одежды навесной однорожковый

ООО «ФОРМАН Продакте» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 30 из 51

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Шкаф соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 16371-2014, настоящих технических условий и комплектов конструкторской документации согласно таблице 25.

Таблица 25 – Полный (номенклатурный) перечень изделий

Артикул	Наименование	Обозначение документа	№ Рисунка
FP-1-04-01	Шкаф 1-но секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-01	Рис. 1
FP-1-04-02	Шкаф 1-но секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-02	Рис. 2
FP-1-04-03	Шкаф 2-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-03	Рис. 3
FP-1-04-04	Шкаф 2-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-04	Рис. 4
FP-1-04-05	Шкаф 3-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-05	Рис. 5
FP-1-04-06	Шкаф 3-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-06	Рис. 6
FP-1-04-07	Шкаф 4-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-07	Рис. 7
FP-1-04-08	Шкаф 4-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-08	Рис. 8
FP-1-04-09	Шкаф 5-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-09	Рис. 9
FP-1-04-10	Шкаф 5-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-10	Рис. 10
FP-1-04-11	Шкаф 6-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-11	Рис. 11
FP-1-04-12	Шкаф 6-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-12	Рис. 12
FP-1-04-13	Шкаф Z образный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-13	Рис. 13
FP-1-04-14	Шкаф детский «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-14	Рис. 14
FP-1-04-15	Шкаф для людей с ограниченными возможностями «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-15	Рис. 15
FP-1-04-16	Шкаф двойной 1-но секционный с дополнительной полкой под обувь «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-16	Рис. 16
FP-1-04-17	Шкаф двойной 1-но секционный с дополнительной полкой под обувь «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-17	Рис. 17
FP-1-04-18	Шкаф многосекционный с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-18	Рис. 18
FP-1-04-19	Шкаф многосекционный с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-19	Рис. 19
FP-1-04-20	Шкаф арендный семисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-20	Рис. 20
FP-1-04-21	Шкаф арендный восьмисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-21	Рис. 21
FP-1-04-22	Шкаф арендный девятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-22	Рис. 22
FP-1-04-23	Шкаф арендный десятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-23	Рис. 23
FP-1-04-24	Шкаф арендный с разноформатными ячейками «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.004-24	Рис. 24

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 31 из 51

2.1.2 Конструкция и внешний вид шкафа соответствуют рисункам 1-24 раздела 1.6.

2.1.3 Габаритные размеры и масса шкафа соответствуют значениям, указанным в таблице 26. Предельные отклонения размеров шкафа не превышают ± 4 мм.

Таблица 26 – Массогабаритные характеристики

Артикул	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Масса, не более, кг
FP-1-04-01	Шкаф 1-но секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	34
FP-1-04-02	Шкаф 1-но секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	38
FP-1-04-03	Шкаф 2-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	34
FP-1-04-04	Шкаф 2-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	38
FP-1-04-05	Шкаф 3-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	36
FP-1-04-06	Шкаф 3-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	40
FP-1-04-07	Шкаф 4-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	38
FP-1-04-08	Шкаф 4-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	42
FP-1-04-09	Шкаф 5-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	40
FP-1-04-10	Шкаф 5-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	44
FP-1-04-11	Шкаф 6-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	42
FP-1-04-12	Шкаф 6-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	46
FP-1-04-13	Шкаф Z образный «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	42
FP-1-04-14	Шкаф детский «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1200x400	30
FP-1-04-15	Шкаф для людей с ограниченными возможностями «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1700x530	38
FP-1-04-16	Шкаф двойной 1-но секционный с дополнительной полкой под обувь «ФОРМАН» (FOREMAN)	630x1920x530	68
FP-1-04-17	Шкаф двойной 1-но секционный с дополнительной полкой под обувь «ФОРМАН» (FOREMAN)	830x1920x530	80
FP-1-04-18	Шкаф многосекционный с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)	330x1920x530	42
FP-1-04-19	Шкаф многосекционный с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)	430x1920x530	46
FP-1-04-20	Шкаф арендный семисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	230x1920x300	42
FP-1-04-21	Шкаф арендный восьмисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	230x1920x300	43
FP-1-04-22	Шкаф арендный девятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	230x1920x300	44
FP-1-04-23	Шкаф арендный десятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	230x1920x300	45
FP-1-04-24	Шкаф арендный с разноформатными ячейками «ФОРМАН» (FOREMAN)	1230x1920x530	250

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 32 из 51

2.1.4 Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не превышают значений по ГОСТ 16371-2014.

2.1.5 Покоробленность щитовых деталей шкафа по ГОСТ 16371-2014.

2.1.6 На видимой поверхности шкафа отсутствуют дефекты по ГОСТ 20400-2013: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

2.1.7 Полки шкафов выдерживают двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

- на полку $30 \pm 0,5$ кг.

2.1.8 Количество и размеры полок, а также их расположение соответствуют рисункам 1-24 раздела 1.2. Предельные отклонения размеров не превышают ± 2 мм.

2.1.8.1 Толщина стенок шкафа: 4 мм. Толщина дверей и полок шкафа: 10 мм. Допускаемое отклонение: $\pm 0,5$ мм.

2.1.9 Штанга для вешалок выдерживает двукратную номинальную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой: 25 ± 1 кг.

2.1.10 Крючки для одежды выдерживают двукратную номинальную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой: 10 ± 1 кг.

2.1.11 Навесные крючки для одежды свободно передвигаются по штанге для вешалок.

2.1.11.1 Внешний вид и размеры штанги для вешалок и крючков для одежды соответствуют рисункам 25, 26 раздела 1.2 соответственно. Допускаемое отклонение от размеров: $\pm 10\%$.

2.1.11.2 Количество и расположение штанг для вешалок и крючков для одежды соответствуют рисункам 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17 раздела 1.2.

2.1.12 Дверцы шкафа открываются и закрываются плавно, без перекосов, с усилием не более 20 Н.

2.1.13 Петли дверей интегрированы в алюминиевый профиль, обеспечивая открывание дверей на 175 ± 2 градусов.

2.1.14 Замки на дверцах неподвижно и прочно закреплены и установлены так, что обеспечено их легкое отпирание и запираение. Замки обеспечивают плотное прилегание дверей к корпусу шкафа.

2.1.15 Шкаф устойчиво стоит на опорах. Зазор между одной из опор и поверхностью пола не превышает 3 мм.

2.1.16 Шкаф устойчив при приложении нагрузки на открытую дверцу 45 Н.

2.1.17 Опоры шкафа имеют регулировку по высоте в пределах 10 мм. Максимальная и минимальная высота шкафа соответствуют таблицам 1-24 раздела 1.6.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 33 из 51

2.1.18 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей фурнитуры и деталей из металла по ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 для изделий группы условий 1.

2.1.19 Наружные поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

2.1.20 Шкаф при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.1.21 Шкаф в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при транспортировании в условиях 5 по ГОСТ 15150-69. Шкаф в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при хранении в условиях 2 по ГОСТ 15150-69.

2.1.22 Шкаф в транспортной упаковке обладает прочностью к механическим воздействиям при транспортировании, соответствующим требованиям ГОСТ Р 50444-92.

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении шкафа, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве шкафа, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.

2.2.3 Для изготовления шкафа используются сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 27.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 34 из 51

Таблица 27 - Сырье, материалы и покупные изделия

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
FP-1-04-01	Шкаф 1-но секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Штанга для вешалок	Сталь 20CrNi3A, HT International Development Co.,Ltd, Китай
		Крючки на штангу	Полиэтилен PE1000, HAFELE, Германия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-02	Шкаф 1-но секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Штанга для вешалок	Сталь 20CrNi3A, HT International Development Co.,Ltd, Китай
		Крючки на штангу	Полиэтилен PE1000, HAFELE, Германия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-03	Шкаф 2-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Штанга для вешалок	Сталь 20CrNi3A, HT International Development Co.,Ltd, Китай
		Крючки на штангу	Полиэтилен PE1000, HAFELE, Германия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-04	Шкаф 2-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 35 из 51

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы
			Наименование, марка, изготовитель
			15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Штанга для вешалок	Сталь 20CrNi3A, HT International Development Co.,Ltd, Китай
		Крючки на штангу	Полиэтилен PE1000, HAFELE, Германия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-05	Шкаф 3-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АДЗ1 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
			Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
		Опоры	Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
			Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-06	Шкаф 3-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АДЗ1 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
			Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
		Опоры	Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
			Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-07	Шкаф 4-х секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АДЗ1 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
			Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
		Опоры	Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
			Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-08	Шкаф 4-х секционный	Каркас	Профиль алюминиевый марки АДЗ1 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 36 из 51

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
	«ФОРМАН» (FOREMAN)		Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-09	Шкаф 5-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-10	Шкаф 5-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-11	Шкаф 6-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-12	Шкаф 6-ти секционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 37 из 51

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-13	Шкаф Z образный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Штанга для вешалок	Сталь 20CrNi3A, HT International Development Co.,Ltd, Китай
		Крючки на штангу	Полиэтилен PE1000, HAFELE, Германия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-14	Шкаф детский «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Штанга для вешалок	Сталь 20CrNi3A, HT International Development Co.,Ltd, Китай
		Крючки на штангу	Полиэтилен PE1000, HAFELE, Германия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-15	Шкаф для людей с ограниченными возможностями «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Штанга для вешалок	Сталь 20CrNi3A, HT International Development Co.,Ltd, Китай
		Крючки на штангу	Полиэтилен PE1000, HAFELE, Германия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 38 из 51

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
FP-1-04-16	Шкаф двойной 1-но секционный с дополнительной полкой под обувь «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	FISHER, Германия
			Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
		Стенки, дверцы, полки	Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
			Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Штанга для вешалок	Сталь 20CrNi3A, HT International Development Co.,Ltd, Китай
		Крючки на штангу	Полиэтилен PE1000, HAFELE, Германия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
FP-1-04-17	Шкаф двойной 1-но секционный с дополнительной полкой под обувь «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
			Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
		Стенки, дверцы, полки	Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
			Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Штанга для вешалок	Сталь 20CrNi3A, HT International Development Co.,Ltd, Китай
		Крючки на штангу	Полиэтилен PE1000, HAFELE, Германия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
FP-1-04-18	Шкаф многосекционный с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
			Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
		Стенки, дверцы, полки	Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Опоры	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
			Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
FP-1-04-19	Шкаф многосекционный с одним фасадом «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
			Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
		Стенки, дверцы, полки	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
		Опоры	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 39 из 51

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы
			Наименование, марка, изготовитель
			металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-20	Шкаф арендный семисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия		
FP-1-04-21	Шкаф арендный восьмисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия		
FP-1-04-22	Шкаф арендный девятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия		
FP-1-04-23	Шкаф арендный десятисекционный «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075. ООО

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 40 из 51

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
			«Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-04-24	Шкаф арендный с разноформатными ячейками «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, дверцы, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средняя наработка на отказ (To) не менее 5000 часов. Критериями отказа является несоответствие требованиям п.п. 2.1.5 - 2.1.12.

2.3.2 Средний срок службы шкафа не менее 4 лет. Критерием предельного состояния шкафа считается невозможность или нецелесообразность его восстановления (или использования).

2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки включает в себя:

- Шкаф одного из исполнений, в сборе
- Эксплуатационная документация:

Инструкция по применению ФРМН.942819.004 ИП

Примечание: количество и исполнение шкафа определяются при заказе по согласованию с заказчиком.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 41 из 51

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка шкафа соответствует ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 50444-92 и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

2.5.2 На каждом изделии этикетка, на которой указано:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак предприятия;
- наименование изделия, его исполнение;
- обозначение изделия (артикул);
- дата изготовления: месяц и год;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- заводской номер;
- обозначение настоящих технических условий, ГОСТ 16371-2014.

2.5.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикреплены к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 50444-92 и конструкторской документации.

2.6.2 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту шкафа от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 42 из 51

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям шкаф соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния изделия, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

Рабочие условия окружающей среды:

Температура от плюс 10 до плюс 35°C.

Относительная влажность воздуха: до 80%.

4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 2.3 настоящей инструкции по применению.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

4.3 Порядок работы с изделием

- Освободите шкаф от упаковки, выбросьте упаковочный материал.

 Все изделия поставляются готовыми к применению, однако рекомендуется перед первым использованием осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями Раздела 5.

- Используйте изделие в соответствии с его функциональным назначением.

Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке (п.п. 2.1.7, 2.1.8).

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 43 из 51

5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ И РЕМОНТ

Необходимо регулярно (не менее одного раза в неделю) контролировать отсутствие механических повреждений.

Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию изделия согласно разделу 5.1 настоящей инструкции.

5.1 Внешние и внутренние доступные поверхности шкафа протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644-96 или иные средства согласно МУ 287-113.

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за шкафом.

 Не следует ставить на поверхность шкафа горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

5.2 Ремонт

Если в процессе подготовки изделия к работе, его эксплуатации или обслуживания выявлены дефекты или неисправности, то необходимо обратиться в ближайший сервисный центр по гарантийному и послегарантийному обслуживанию для проверки, ремонта или замены изделия (его частей).

 Ремонт шкафа может осуществляться только квалифицированным специально обученным персоналом сервисных центров.

Персоналу сервисного центра необходимо заносить в таблицу 28 сведения о проведенном ремонте.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 44 из 51

Таблица 28 – Сведения о проведенном ремонте

№	Дата проведения	Организация, должность, исполнитель	Неисправность, замечания, проведенные работы	Подпись исполнителя

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 45 из 51

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение шкафа должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.

Транспортирование шкафа может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

6.2 Условия транспортирования шкафа должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%).

6.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности до 98%).

7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790-10.

7.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 шкаф относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.

7.3 Перед утилизацией шкаф должен быть подвергнут санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

7.4 Шкаф должен подлежать утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

7.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 46 из 51

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование шкафа должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.2 К эксплуатации шкафа допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие инструкцию по применению.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 47 из 51

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Шкаф медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) производства ООО «ФОРМАН Продактс»

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(Дата)

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 48 из 51

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

упакован на предприятии-изготовителе ООО «ФОРМАН Продактс» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
 (личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 49 из 51

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 50 из 51

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем.

12.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок эксплуатации изделия указан в настоящей инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется бесплатный ремонт или обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

- Несовпадения заводского номера изделия с гарантийным талоном
- Наличия механических повреждений
- Несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.004 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 51 из 51

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____

(подпись, печать)

прошито, пронумеровано, склеено
печатью _____ № _____ (ов)

Генеральный директор
ООО «ФОРМАН ПРОДАКТС»

В.В. Федотов
«____» _____ 2017 г.

