

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Ковидиен Евразия»
М.Л. Бокова



20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению:

Катетеры медицинские урологические с принадлежностями

Производства Covidien Llc , USA; 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA.

Москва 2012

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию. Соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР

Двухходовой катетер Фолея из 100% силикона, импрегнированный серебром.

Катетеры Фолея уретральные предназначены для проведения процедуры катетеризации, используемой для выведения мочи из мочевого пузыря и введения в него различных жидкостей с лечебной и диагностической целью.

ИНСТРУКЦИИ

Баллон: (не заполняйте чрезмерным количеством воды)

- Для наполнения баллона емкостью 5 мл используйте максимум 10 мл стерильной воды.
- Для наполнения баллона емкостью 30 мл используйте максимум 35 мл стерильной воды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПАЦИЕНТАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ АЛЛЕРГИИ НА ЕГО КОМПОНЕНТЫ ИЛИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К НИМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не пережимайте стержень катетера, так как это может привести к повреждению просвета, через который поступает жидкость. Если пережатия избежать нельзя, пережмите стержень около дренажной воронки или около трубки мешка для сбора.
2. Не пользуйтесь смазочными веществами на вазелиновой основе. Они могут повредить катетер.
3. Не используйте изделие, если упаковка вскрыта или повреждена.
4. Только для урологического применения.
5. Не стерилизовать повторно.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Наполняя или опустошая катетер Фолея, плотно вставляйте наконечник шприца в клапан, проталкивая его и одновременно поворачивая.

Извлекайте шприц из клапана, вытягивая и поворачивая его.

В процессе опустошения, если нужно, осторожно выполняйте аспирацию.

Если процесс опустошения затруднен, отсоедините рычаг клапана наполнения. Если затруднения сохраняются, баллон можно опустошить одним или несколькими способами, упоминаемыми в медицинской литературе.

Если произошел разрыв баллона, внимательно проследите за тем, чтобы все фрагменты баллона были удалены из тела пациента.

До катетеризации убедитесь в целостности баллона, наполнив его до рекомендованного уровня.

После катетеризации установите поток мочи и убедитесь в том, что перед наполнением баллона катетер находится в мочевом пузыре.

СОСТАВ: (одноразовый) мешок для сбора мочи емкостью 2000 мл

УКАЗАНИЯ:

1. ПОДВЕШИВАНИЕ МЕШКА – Чтобы повесить мешок на раме кровати, поворачивайте крючок до тех пор, пока он не будет зафиксирован. При использовании нити сделайте следующее: оберните нить вокруг рамы кровати; переведя ось и клин вниз, надежно зафиксируйте их в нижней выемке, а затем, туго натянув нить, оберните ее вокруг верхней выемки.

2. Подсоедините катетер. Прикрепите трубку к подстилке зажимом так, чтобы она спускалась вниз, не образуя петель.

3 ОПОРОЖНЕНИЕ МЕШКА ДЛЯ СБОРА МОЧИ – Откройте дренажный клапан, нажав на его фланцы. Опорожнив мешок, закройте клапан со щелчком.

6. ОТБОР ПРОБ ИЗ СОЕДИНИТЕЛЯ КАТЕТЕРА – Обработайте место для отбора проб дезинфектантом. Сделайте прокол иглой 21 размера или меньшей и извлеките пробу.

7. ОТБОР ПРОБ ИЗ БЮРЕТОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ – Чтобы ОТКРЫТЬ отверстие, поверните носик вниз. Чтобы ЗАКРЫТЬ отверстие, поверните носик вверх.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. В этом изделии содержится натуральный каучуковый латекс, который может вызвать аллергическую реакцию.

Всю прошивку
и саренишко
3 мста

