

Эксплуатационная документация на медицинское изделие

Вкладные ортопедические приспособления по ТУ 9397-030-53279025-2001
(массового изготовления)

Варианты исполнения:

1. ортопедические стельки:

- модель ОС-64, артикулы: 6401-01, 6402-01, 6402-02, 6403-01, 6404-01, 6405-01, 6405-02, 6406-01, 6407-01;
- модель ОС-63, артикулы: 6301-01, 6302-01, 6302-02, 6303-01, 6304-01, 6305-01, 6305-02, 6306-01, 6307-01;

2. ортопедические полустельки:

- модель ОПС-9, артикулы: 9001-01, 9002-01;
- модель ОПС-10, артикулы: 1001-01, 1002-01.

Генеральный директор
ЗАО «ЮЛИАННА»

М.П.

«ЮЛИАННА»



Лунев В.В.



Памятка по пользованию

Версия от
07 августа 2018г.

Вкладные ортопедические приспособления по ТУ 9397-030-53279025-2001 (массового изготовления)

Изделие предназначено для лиц, имеющих деформации и (или) дефекты стоп для эксплуатации в стандартной, профилактической или ортопедической обуви.

Показания к применению:

- различные виды плоскостопия и другие деформации стоп;
- боли различного генеза в стопе, суставах нижних конечностей;
- прочие статические, динамические и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата.

Использование изделий позволяет снизить нагрузку с болевых участков стопы и обеспечивает коррекцию положения стопы.

Противопоказания: индивидуальная аллергическая реакция на материалы стельки, трофические язвы стопы.

Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом. Режим и сроки ношения изделия определяет лечащий врач. Размер изделия подбирается в соответствии с размером стопы пациента.

Порядок пользования изделием:

- вложите изделие в обувь так, чтобы пяточная часть изделия упиралась в задник обуви, а положение вставок совпадало с анатомическими сводами стопы;
- каждый день вынимайте изделие из обуви и сушите его вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей;
- загрязненное изделие с верхним покрытием и межстелечным слоем из вспененных полимерных материалов мойте с применением бытовых моющих средств и сушите без применения нагревательных приборов;
- по мере снашивания изделие необходимо заменить на новое.

Внимание:

- использовать изделие следует только по назначению и в соответствии с размером стопы;
- следует исключить подгибание частей изделия в обуви;
- в первые дни ношения изделия возможны дискомфортные ощущения, связанные с адаптацией. Спустя короткое время дискомфорт исчезнет;
- не подвергайте изделие воздействию растворителей, щелочей, красящих веществ;
- не сушите изделие на нагревательных поверхностях;
- не подвергайте гигиенической обработке изделия, изготовленные с применением натуральной, искусственной и синтетической кож, текстильных материалов, коры пробкового дерева;
- при хранении изделий не допускается прямого попадания на них солнечных лучей, размещение изделий вблизи отопительных и нагревательных приборов (расстояние до них должно быть более 1 метра).
- если Вы почувствовали боль при ношении изделия, обратитесь к лечащему врачу.

Текущему ремонту и техническому обслуживанию изделие не подлежит.

Условия утилизации: с бытовыми отходами.

Комплект поставки:

- изделие – 1 пара;
- упаковка (пакет полиэтиленовый) – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 шт.

Условия хранения: в сухом помещении, не допуская прямого попадания солнечных лучей, вдали от отопительных и нагревательных приборов (расстояние до них должно быть более 1 метра).

Срок службы изделия: не менее 6 месяцев.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 9397-030-53279025-2001 при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок носки изделия – 70 дней, а на мальчиковые, девичьи, детские изделия – 45 дней.

Срок гарантии устанавливается с момента продажи изделия.

Претензии, предложения, отзывы потребителей принимает:

Закрытое акционерное общество «ЮЛИАННА» (ЗАО «ЮЛИАННА»), адрес: 603163, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 10, к. 1, пом. П75А, телефон: (831) 257-

Прошито и скреплено печатью

2 (Два) листа
Ген. директор ЗАО «ЮЛИАННА»
В.В. Лунев

