

УТВЕРЖДЕН
ЯМ4.110.001 РЭ-ЛУ

94 5219

ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ

Руководство по эксплуатации

ЯМ4.110.001 РЭ



Директор. ЯС-09. Мамед 16.04.09

Шиб. не подл.

Штатив медицинский (в дальнейшем по тексту – штатив) предназначен для размещения на нем физрастворов и крови во флаконах и в одноразовых полиэтиленовых упаковках для вливания пациенту.

Штатив применяется для оснащения лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Внешний вид штатива приведен на рисунке 1.

1.2 Габаритные размеры штатива не более 2100 x Ø660 мм.

1.3 Конструкция штатива обеспечивает изменение высоты закрепленных флаконов от 1,2 до 1,9 м.

1.4 Конструкция штатива обеспечивает установку флаконов и их фиксацию.

1.5 Штатив обеспечивает удержание груза массой до 4 кг при всех положениях закрепленного по высоте штыря.


1.6 Масса штатива без флаконов не более 3,5 кг.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки штатива соответствует таблице 1

Таблица 1- Комплект поставки

Наименование	Кол.	Примечание
Стойка	1	в сборе (труба, диск, штырь, гайка стопорная)
Кольцо	1	
Скоба	1	L = 217 мм
Скоба	1	L = 187 мм
Упор	5	
Руководство по эксплуатации	1	

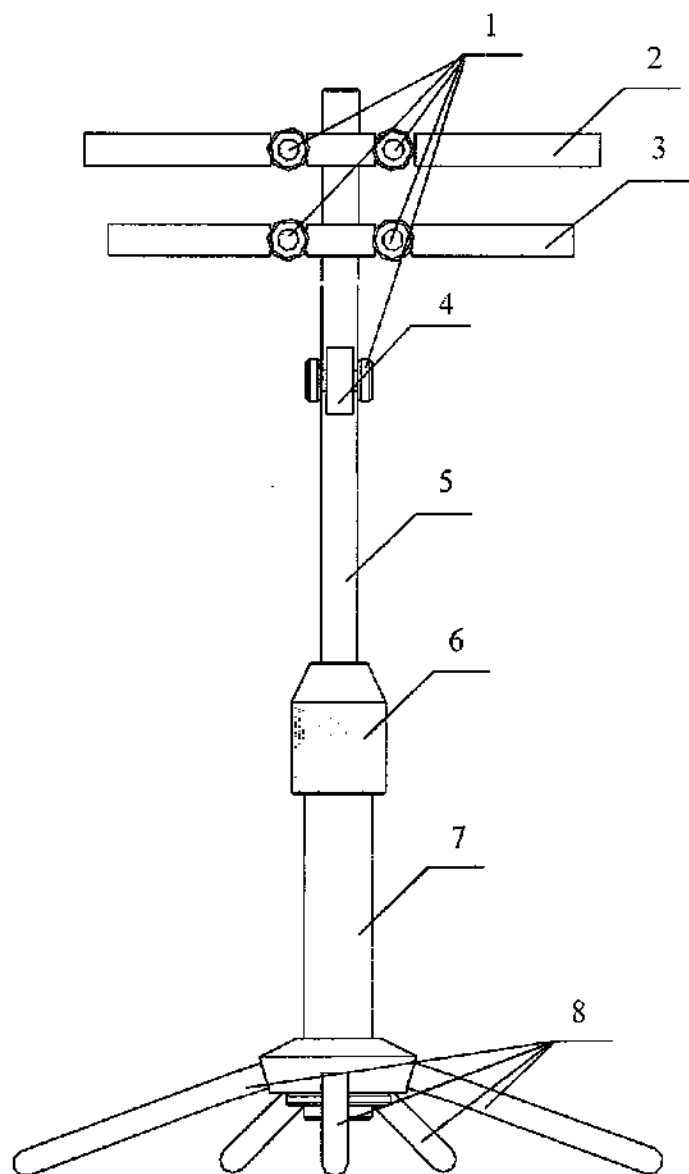

- 1 – Гайки фиксации скоб и кольца
- 2 – Скоба (L = 217 мм)
- 3 – Скоба (L = 187 мм)
- 4 – Кольцо
- 5 – Штырь
- 6 – Гайка стопорная
- 7 – Стойка
- 8 – Упоры

Рисунок 1 - Внешний вид штатива медицинского

3 СБОРКА ШТАТИВА

3.1 Упоры 8 ввернуть в отверстия диска стойки 7. Установить стойку с упорами на пол.

3.2 Ослабить гайку стопорную 6 и выдвинуть из стойки штырь 5 на высоту 50-60 мм. Завернуть гайку стопорную, при этом штырь фиксируется в стойке.

3.3 На штырь 5 надеть кольцо 4 до гайки стопорной и зафиксировать его с помощью гаек фиксации 1, находящихся на этом кольце.

3.4 На штырь 5 надеть последовательно скобу 3 и скобу 2 и зафиксировать их с помощью гаек фиксации 1, находящихся на этих скобах. Расстояние между скобами определяется высотой устанавливаемых флаконов.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Установить необходимую для проведения процедуры высоту установки флаконов выдвижением из стойки штыря 5 со скобами 2, 3 и кольцом 4. Зафиксировать это положение гайкой стопорной 6.

4.2 Установить в скобы 2, 3 флаконы вниз горлом. При необходимости, шланги, отходящие от флаконов, пропустить через кольцо 4.

4.3 После выполнения указанных операций возможно выполнение непосредственно медицинских процедур.

4.4 Санитарную обработку штатива проводить смесью 3 % раствора перекиси водорода с 0,5 % раствором моющего средства при температуре не ниже 18 °С путем двукратного протирания смоченным в растворе тампоном. Тампоны должны быть отжаты. Интервал между протираниями 15 мин.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штатив медицинский № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ9452-002-07504790-2009 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Штатив в заводской упаковке допускается транспортировать любым видом крытого транспортного средства при температуре от минус 50 до 50 °С и относительной влажности 100 % при 25 °С.

6.2 Штатив должен храниться в упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре от минус 50 до 40 °С и относительной влажности 100 % при температуре 25 °С при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие штатива требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода штатива в эксплуатацию.

7.3 Гарантийный срок хранения не более 6-ти месяцев со дня изготовления штатива.

ЯМ4.110.001 РЭ

Маш. 16.04.09

ЛИТН.68.80-09

Инв. № подл.

1148. 180039.

6