


Общество с ограниченной ответственностью
«БИО КОТТОН»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «БИО КОТТОН»

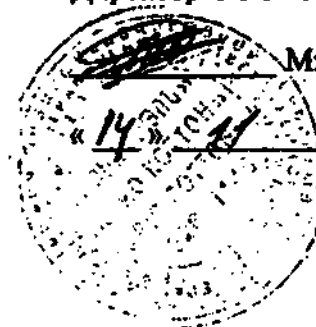

Мхитарян Ш.

2018 г.

Вата медицинская гигроскопическая хлопковая БИО КОТТОН,
нестерильная по ГОСТ 5556-81, в рулоне и зигзагообразной ленте

Инструкция по эксплуатации

2018 г.



Назначение

Вата медицинская гигроскопическая хлопковая БИО КОТТОН, нестерильная по ГОСТ 5556-81, в рулоне и зигзагообразной ленте используется в качестве абсорбента, нестерильной ваты с универсальным применением.

Область применения

Используется в медицинских учреждениях или в быту и доступно в свободной форме (без рецепта). Широко применяется в медицинской практике с другими медицинскими перевязочными средствами. Вата универсального применения, используется в лечебно-профилактических учреждениях, а также в быту, в аптечках первой помощи.

Показания к применению

Неоткрытые раны, порезы, ссадины

Порядок и условия применения

Оторвать необходимое количество ваты и обработать кожу.

Побочное действие


Нет

Противопоказания:

Раздражающее и аллергическое воздействие на кожу пациента отсутствует. Во избежание риска удушья не давать детям играть с ватой нестерильной.

Основные характеристики

Наименование показателя	Хлопковая
1. Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков, %, не более	2,4
2. Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли, %, не более	0,15
3. Засоренность, %, не более	0,30
4. Содержание посторонних примесей: иголок, щепочек и др.	Не допускается
5. Зольность, %, не более	0,30
6. Массовая доля жировых и воскообразных веществ, %, не более	0,35
7. Влажность, %, не более	8,0
8. Поглотительная способность, г, не менее	20
9. Капиллярность, мм, не менее	70
10. Реакция водной вытяжки	Нейтральная
11. Массовая доля хлористых солей, %, не более	0,04
12. Массовая доля сернокислых солей, %, не более	0,02
13. Массовая доля кальциевых солей, %, не более	0,06
14. Содержание восстанавливающих веществ	Следы
15. Степень белизны, %, не менее:	
16. Запах	Не допускается

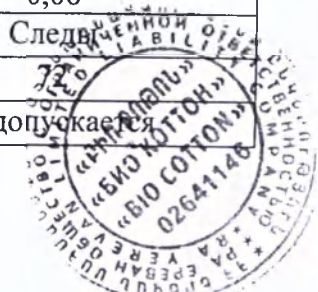

Цвет

Белый

Состав

100% хлопок-волокно 3-го сорта по ГОСТ Р 53244.

Стерильность

Нестерильно.

Описание

Отбеливание ваты производится без применения хлора. Вата состоит из мягких, чистых гидрофильных хлопковых волокон высокого качества. При контакте с кожей и слизистой раздражающего действия не вызывает. Имеет равномерную структуру, без посторонних включений, мягкий гриф. Легко распределяется на параллельные слои. Вата обладает высокой сорбционной способностью, достаточно эффективно впитывает и удерживает раневое отделяемое, хорошо смачивается как раневым экссудатом, так и растворами лекарственных препаратов.

Меры предосторожности

Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению.

Не прошедшая стерилизацию вата может использоваться во всех случаях, когда применение подобного материала не несет риска инфицирования.

Хранение и транспортирование

Вату транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

Вата должна храниться и транспортироваться в недоступном для детей чистом, сухом, темном месте в упаковке производителя при температуре от 2 °С до 25 °С и влажности 50-70%, избегая сдавливания изделий.

Запрещено хранить и транспортировать вату рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами, обладающими сильным запахом (бытовая химия).


Упакованная вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Вата нестерильная должна храниться в индивидуальной упаковке без повреждений.

Допускается хранить вату под навесами с брезентовым укрытием.

Утилизация

Упаковку ваты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» как отходы класса А или вместе с бытовым мусором.

После использования утилизацию ваты осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы), Б (эпидемиологически опасные отходы) или В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы), в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания.

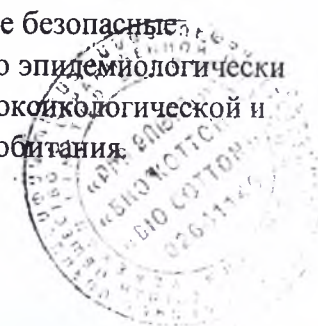

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ваты заявленным свойствам в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования. Гарантийный срок хранения ваты (срок годности) – 5 лет с момента изготовления, указанного на упаковке. Не использовать по истечении гарантийного срока.

Изделие одноразового применения. Не требуется сервисное, техническое обслуживание и ремонт.

Уполномоченный представитель

ООО «РК АГАТ»

ИНН 7811430737, КПП 781101001, ОГРН 1097847055360,

192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, офис 108

Тел.: +7 (812) 633-34-64/633-34-64

E-mail: agat.spb@mail.ru


Производитель

ООО «БИО КОТТОН»

Адрес: Улица Саряна, 40/64 пом., Кентрон 0002 г. Ереван, Армения

Тел.: +37499950096

E-mail: bio.cotton@mail.ru

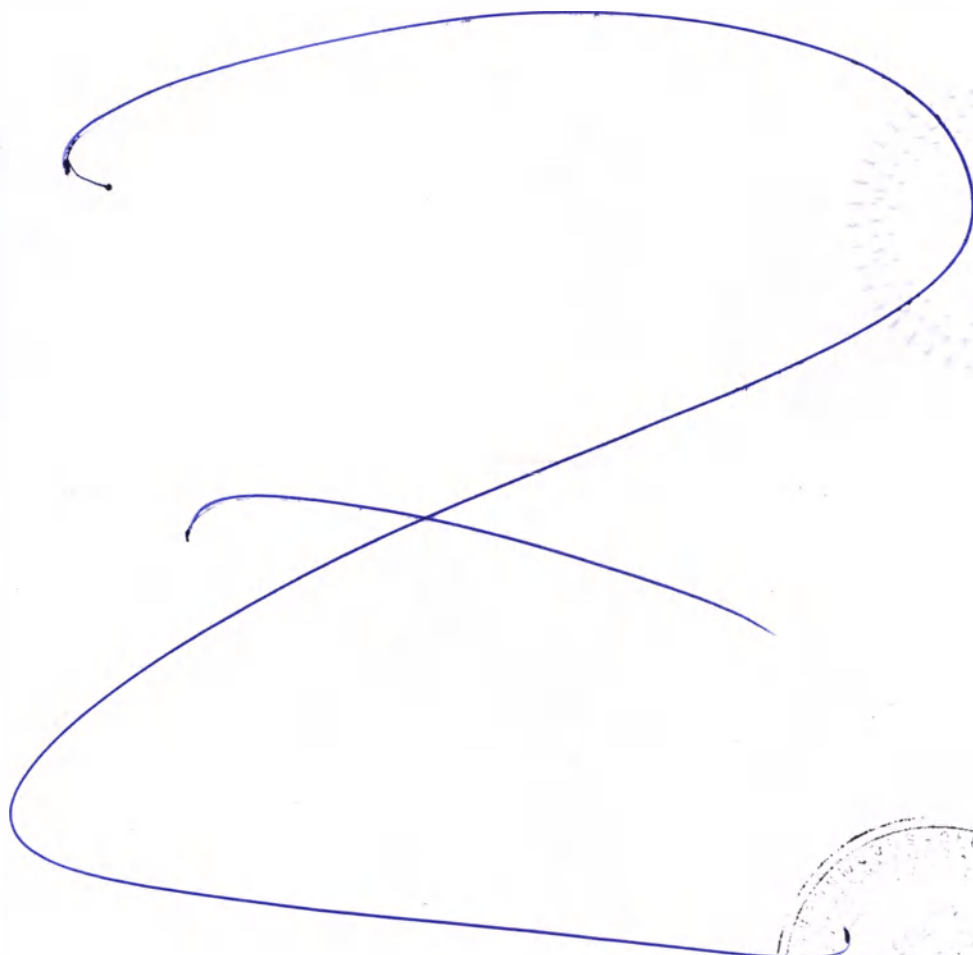

Код нотариального акта: 551-20181115-65-3227613
Пароль нотариального акта: Y9T5VX



Республика Арменияб город Ереван
две тысячи восемнадцатого года пятнадцатое ноября
Я, Саргсян Марине Маратовна, нотариус нотариальной территории „Ереван,, Республики
Армения свидетельствую верность ксерокопии данного документа.
Согласно статье 65 „ Закона о нотариате РА,, удостоверяю соответствие ксерокопии
документа с текстом оригинала, а не изложение в нем факты.
Зарегистрировано в реестре за No 6769

Взыскана государственная пошлина одна тысяча двести РА драм и плата за услугу две тысячи
пятьсот РА драм согласно законам “О государственной пошлине” и “О нотариате” Республики
Армения.



Марине Саргсян

