

2 K/3/12/2



Heinz Schiebler Postfach 2852 - 24918 Flensburg

Heinz Schiebler, Norddeutsche Gummistrumpffabrik GmbH & Co KG
Fachhersteller von med. Kompressionsstrümpfen und Spez. Bandagen
Amtsgericht Flensburg HRA 4698

Maximallee 74 - D-24907 Flensburg
Telefon: 0461/51055 und 54355
Telefax: 0461/54250 und 53018

Homepage: <http://www.schiebler.de>
e-Mail: heinz@schiebler.de
für Bestellungen: bestellung@schiebler.de

Für folgende Gesellschaften:
Schiebler Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Amtsgericht Flensburg HRB 4599
Geschäftsführer: Kay Schiebler
Ust-ID: DE 614067717
Nord Ozean Spedition - Postfach Flensburg
DE 24176 Sande 111 - Tel. 04720/15620 - Fax 04720/15621

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum

ПОДТВЕРЖДАЮ

точность, достоверность

и правильность

Управляющий директор

Heinz Schiebler, Norddeutsche

Gummistrumpffabrik GmbH & Co. KG

Кай Шиблер

HEINZ SCHIEBLER м.п.
Norddeutsche Gummistrumpffabrik
GmbH & Co. KG
Maximallee 74 - Tel. 04 61/5 10 55
24903 Flensburg

Инструкция по применению

Изделия медицинские фиксирующие и компрессионные, антиварикозные Schiebler

2017 г.

Наименование

Изделия медицинские фиксирующие и компрессионные, антиварикозные Schiebler:

1. Компрессионные антиварикозные колготки: Veni CCL 1, Veni Dur CCL 2, Venex micro light CCL 1, Venex Dur micro light CCL 2, Veni Dur Extra CCL 3, Venesso Soft CCL 1, Venesso Soft CCL 2, Doktus CCL 2, Doktus Dur CCL 3, Star Cotton CCL 2, Goldpunkt Karat CCL 2, Goldpunkt normal CCL 3, Goldpunkt Dur CCL 4, Pertex.
2. Компрессионные антиварикозные чулки: Veni CCL 1, Veni Dur CCL 2, Venex micro light CCL 1, Venex Dur micro light CCL 2, Veni Dur Extra CCL 3, Venesso Soft CCL 1, Anti-Embolie, Venesso Soft CCL 2, Pertex, Doktus CCL 2, Doktus Dur CCL 3, Star Cotton CCL 2, Goldpunkt Karat CCL 2, Goldpunkt normal CCL 3, Goldpunkt Dur CCL 4.
3. Компрессионные антиварикозные гольфы: Veni CCL 1, Veni Dur CCL 2, Venex micro light CCL 1, Venex Dur micro light CCL 2, Veni Dur Extra CCL 3, Venesso Soft CCL 1, Venesso Soft CCL 2, Doktus CCL 2, Doktus Dur CCL 3, Star Cotton CCL 2, Business, Holiday, Goldpunkt Karat CCL 2, Goldpunkt CCL 3, Pertex, Goldpunkt normal CCL 3, Goldpunkt Dur CCL 4.
4. Компрессионные носки: Doktus, Goldpunkt Karat CCL 2, Goldpunkt normal CCL 2, Goldpunkt CCL 3, Goldpunkt Dur CCL 4, Pertex, Doktus CCL 2.
5. Компрессионный рукав: Doktus CCL 2, Veni CCL 1, Veni Dur CCL 2, Venex Dur CCL 2, Goldpunkt Karat CCL 2, Doktus Dur CCL 3.
6. Компрессионный антиварикозный чулок на одну ногу: Doktus CCL 2, Doktus Dur CCL 3.

Назначение

Компрессионный трикожаж предназначается для профилактики и лечения заболеваний вен, хронической венозной недостаточности, варикозной болезни, функциональной флебопатии, тромбозе вен, варикотромбофлебите, для компрессионной терапии после флебосклерозирования, посттромбофлебитическом синдроме, лимфовенозной недостаточности, лечение лимфедемы, послеоперационного и посттравматического отека, компрессионной терапии ожогов, послеоперационного лечения келоидных рубцов, лечение слоновости, состояние после мастэктомии, профилактике венозных тромбозов, компрессионном лечении после хирургических вмешательств на нижних конечностях, лечении трофических язв, лечение липедемы, лечении других видов венозных и лимфатических застоев, и реабилитации инвалидов

Основные технические характеристики

Гольфы: Veni CCL 1, Venex micro light CCL 1;
Чулки: Veni CCL 1, Venex micro light CCL 1;
Колготки: Veni CCL 1, Venex micro light CCL 1;
Рукав: Veni CCL 1.
Класс компрессии: I

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	54%
Полиамид (Dederon)	46%

Чулки: Anti-Embolie.
Класс компрессии: I

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	20%
Полиамид (Dederon)	80%

Гольфы: Veni Dur CCL 2; Venex Dur micro light CCL2;
Чулки: Veni Dur CCL 2; Venex Dur micro light CCL2;
Колготки: Veni Dur CCL2; Venex Dur micro light CCL2; Venex Dur CCL2;
Рукав: Veni Dur CCL 2; Venex Dur CCL 2; Goldpunkt Karat CCL 2.
Класс компрессии: II

Колготки: Veni Dur Extra CCL 3;
Чулки: Veni Dur Extra CCL 3;
Гольфы: Veni Dur Extra CCL 3
Класс компрессии: III

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	58%
Полиамид (Dederon)	42%

Гольфы: Doktus CCL 2;
Чулки: Doktus CCL 2;
Колготки: Doktus CCL 2;
Носки: Doktus;
Рукав: Doktus CCL 2;
Чулок на одну ногу: Doktus CCL 2.
Класс компрессии: II

Гольфы: Doktus Dur CCL 3;
Чулки: Doktus Dur CCL 3;
Колготки: Doktus Dur CCL 3;
Рукав: Doktus Dur CCL 3.
Класс компрессии: III

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	46%
Полиамид (Dederon)	54%

Гольфы: Venesso Soft CCL 2;
Чулки: Venesso Soft CCL 2;
Колготки: Venesso Soft CCL 2.
Класс компрессии: II

Гольфы: Venesso Soft CCL 1;
Чулки: Venesso Soft CCL 1;
Колготки: Venesso Soft CCL .
Класс компрессии: I

Чуллок на одну ногу: Doktus Dur CCL 3.
Класс компрессии: III

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	44%
Полиамид (Dederon)	56%

Гольфы: Star Cotton CCL2;
Чулки: Star Cotton CCL2;
Колготки: Star Cotton CCL2.
Класс компрессии: II

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	30%
Полиамид (Dederon)	22%
Хлопок (Supina cotton)	48%

Гольфы: Business; Holiday
Класс компрессии: II

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	32%
Полиамид (Dederon)	45%
Хлопок (Supina cotton)	23%

Гольфы: Business; Holiday
Класс компрессии: I

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	35%
Полиамид (Dederon)	65%

Гольфы: Goldpunkt Karat CCL 2;
Чулки: Goldpunkt Karat CCL 2;
Колготки: Goldpunkt Karat CCL 2;
Носки: Goldpunkt Karat CCL2; Goldpunkt normal CCL 2;
Класс компрессии: II

Гольфы: Goldpunkt normal CCL 3; Goldpunkt CCL 3;
Чулки: Goldpunkt normal CCL 3;
Колготки: Goldpunkt normal CCL 3;
Носки: Goldpunkt CCL 3.
Класс компрессии: III

Гольфы: Goldpunkt Dur CCL 4;
Чулки: Goldpunkt Dur CCL 4;
Колготки: Goldpunkt Dur CCL 4;
Носки: Goldpunkt Dur CCL 4.
Класс компрессии: IV

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	38%
Полиамид (Dederon)	62%

Чулки: Pertex;
Гольфы: Pertex;
Носки: Doktus CCL2; Pertex;
Колготки: Pertex.
Класс компрессии: II

Состав	%
Эластан (Dorlastan)	42%
Полиамид (Dederon)	58%

Во всех чулках используется силиконовыеполоски- полоски расположены с внутренней стороны, вверху чулка, силикон нагревается от тепла тела и прилипает к ноге.
Марка Силикона:Elastosil P 7684/30 A.

Колготки, чулки, чулки на одну ногу, гольфы и носки могут быть окрашены в следующие цвета: черный, белый, жемчуг, бежевый, темно-бежевый, песочный, миндаль, абрикос, кофейный, рыже-коричневый, слюда, угольный, дымчатый, темно-синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый, синий, красный, желтый.

Рукава окрашиваются только в черный, белый, бежевый, темно-бежевый или песочный цвет.

Используемые красители приведены в таблице 1.

Таблица 1

Цвет	Наименование
Черный	Marabu-Fashion Color, черный (073)
Белый	Akmaster Akkat PB/F 1182B TiO2
Жемчуг	Marabu Easy Color, розовый (033)
Телесный (Бежевый), Сахара (Темно-бежевый), Светло-бежевый (Песочный)	Marabu Easy Color, средний коричневый (046)
Миндаль (Миндальный)	Marabu Easy Color, оливковый (265)
Абрикос (Абрикосовый)	Marabu-Fashion Color, абрикос (025)
Мокка (Кофейный)	Marabu-Fashion Color, кофе (244)
Рыже-коричневый	Marabu-Fashion Color, коричневый (045)
Шиферный сланец (Слюда)	Marabu-Fashion Color, серый (078)
Угольный (Антрацит)	Marabu-Fashion Color, антрацит (074)
Дымчатый	Marabu-Fashion Color, серый (078)
Ультрамариновый (Темно-синий)	Marabu Easy Color, Темный ультрамарин (055)
Оранжевый	Marabu Easy Color, Оранжевый (023)
Зеленый	Marabu Easy Color, зеленый майский (064)
Фиолетовый	Marabu Easy Color, фиолетовый (251)
Синий	Marabu Easy Color, лазурный (095)
Красный	Marabu Easy Color, ярко-красный (031)
Желтый	Marabu Easy Color, желтый (020)

Основные параметры компрессионного трикотажа приведены в таблице 2

Таблица 2

Наименование изделия	Растяжимость %	Рабочая растяжимость %	Поведенческая плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка, Н (кгс)	Класс компрессии
Гольфы: Veni CCL 1, Venex micro light CCL 1; Venesso Soft CCL 1, Business; Holiday. Чулки: Veni CCL 1, Venex micro light CCL 1; Anti-Embofic; Venesso Soft CCL 1. Колготки: Veni CCL 1, Venex micro light CCL 1; Venesso Soft CCL 1. Рукав: Veni CCL 1.	не менее 120	-----*	-----*	-----*	I
• по длине					
• по ширине	-----*	не менее 30	не менее 120, но не более 200	не менее 68.6 (7)	

Гольфы: Veni Dur CCL 2; Venex Dur micro light CCL 2; Doktus CCL 2; Venesso Soft CCL 2; Star Cotton CCL 2; Business: Holiday; Goldpunkt Karat CCL 2; Pertex. Чулки: Veni Dur CCL 2; Venex Dur micro light CCL 2; Venesso Soft CCL 2; Star Cotton CCL 2; Goldpunkt Karat CCL 2; Pertex. Колготки: Veni Dur CCL 2; Venex Dur micro light CCL 2; Venex Dur CCL 2; Doktus CCL 2; Venesso Soft CCL 2; Star Cotton CCL 2; Goldpunkt Karat CCL 2; Pertex. Чулок на одну ногу: Doktus CCL 2;	не менее 120	-----•	-----•	-----•	II
- по длине	-----•	не менее 30	не менее 200, но	не менее 88.2	
- по ширине			не более 400	(9)	
Гольфы: Doktus Dur CCL 3; Goldpunkt normal CCL 3; Goldpunkt CCL 3; Veni Dur Extra CCL 3. Чулки: Doktus Dur CCL 3; Goldpunkt normal CCL 3; Veni Dur Extra CCL 3. Колготки: Doktus Dur CCL 3; Goldpunkt normal CCL 3; Veni Dur Extra CCL 3. Рукав: Doktus Dur CCL 3. Носки: Goldpunkt CCL 3. Чулок на одну ногу: Doktus Dur CCL 3. Класс компрессии: III	не менее 120	-----•	-----•	-----•	III
	-----•	не менее 30	не менее 300, но	не менее	
			не более 400	117.6	
Гольфы: Goldpunkt Dur CCL 4; Чулки: Goldpunkt Dur CCL 4; Колготки: Goldpunkt Dur CCL 4; Носки: Goldpunkt Dur CCL 4.	не менее 120	-----•	-----•	-----•	IV
- по длине	не менее 120	-----•	-----•	-----•	
- по ширине	-----•	не менее 30	не более 400	не менее	
				147.6	

*Значение параметра не нормируются, так как изделия высокоэластичные.

I-IV классов компрессии соответствующие стандарту RAL-GZ 387/1

Изменение линейных размеров изделий после первой стирке должны быть не более 20%.

Значение деформации изделий до и после стирки должны быть не более 10%.

Соответствие стандартам:

DIN EN ISO 13485:2012

DIN EN ISO 15223

DIN 58133

RAL-GZ 387/1

Medical Products Directive 93/42 EEC

Область применения

Изделия используются в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях.

Потенциальный потребитель

Показания

Ношение компрессионного трикотажа рекомендовано, если имеется:

- наследственная предрасположенность к заболеваниям вен (варикозная болезнь у близких родственников).
- склонность к избыточной массе тела
- увеличенная нагрузка на нижние конечности в положении стоя
- статическая длительная нагрузка на нижние конечности в положении сидя
- активное занятие спортом, туризмом, путешествиями.
- прием гормональных препаратов (в том числе контрацептивы)
- лимфовенозная недостаточность

По степени компрессии изделия подразделяются на IV класса:

Класс компрессии	наименование
Класс компрессии I	Гольфы: Veni CCL 1, Venex micro light CCL 1, Venesso Soft CCL 1, Business, Holiday. Чулки: Veni CCL 1, Venex micro light CCL 1, Venesso Soft CCL 1, Anti-Embolie. Колготки: Veni CCL 1, Venex micro light CCL 1, Venesso Soft CCL. Рукав: Veni CCL 1.
Класс компрессии II	Гольфы: Veni Dur CCL 2, Venex Dur micro light CCL 2, Doktus CCL 2, Venesso Soft CCL 2, Star Cotton CCL 2, Goldpunkt Karat CCL 2, Business, Holiday, Pertex. Чулки: Veni Dur CCL 2, Venex Dur micro light CCL 2, Doktus CCL 2, Venesso Soft CCL 2, Star Cotton CCL 2, Goldpunkt Karat CCL 2, Pertex. Колготки: Veni Dur CCL 2, Venex Dur micro light CCL 2, Venex Dur CCL 2, Doktus CCL 2, Venesso Soft CCL 2, Goldpunkt Karat CCL 2, Star Cotton CCL 2, Pertex. Рукав: Veni Dur CCL 2, Venex Dur CCL 2, Goldpunkt Karat CCL 2, Doktus CCL 2. Носки: Doktus, Goldpunkt Karat CCL 2, Goldpunkt normal CCL 2, Doktus CCL 2, Pertex. Чуллок на одну ногу: Doktus CCL 2.
Класс компрессии III	Колготки: Veni Dur Extra CCL 3. Чулки: Veni Dur Extra CCL 3, Doktus Dur CCL 3, Goldpunkt normal CCL 3. Гольфы: Veni Dur Extra CCL 3, Doktus Dur CCL 3, Goldpunkt normal CCL 3, Goldpunkt CCL 3. Колготки: Doktus Dur CCL 3, Goldpunkt normal CCL 3. Рукав: Doktus Dur CCL 3. Носки: Goldpunkt CCL 3. Чуллок на одну ногу: Doktus Dur CCL 3. Класс компрессии: III
Класс компрессии IV	Гольфы: Goldpunkt Dur CCL 4. Чулки: Goldpunkt Dur CCL 4. Колготки: Goldpunkt Dur CCL 4. Носки: Goldpunkt Dur CCL 4.

Ношение компрессионного трикотажа I класса компрессии рекомендовано постоянно, если:

- начальные проявления варикозной болезни (расширенные вены длиной до 5 см или выраженные сосудистые звездочки).
- отечность в области стопы или лодыжек к вечеру.
- периодические болевые ощущения в икрах и стопах после статической нагрузки (стоя и сидя).
- значительно усилен подкожный венозный рисунок.
- ощущение дискомфорта в области стоп и лодыжек (распирающие, жжение, зябкость и т.д.).

Ношение компрессионного трикотажа II класса компрессии рекомендовано постоянно, если:

- проявления варикозной болезни (расширенные вены длиной более 5 см, множественные расширенные вены, варикозные узлы).
- постоянная отечность в области стопы или лодыжек (как проявление хронической венозной недостаточности или после травмы).
- болевые ощущения в икрах и стопах после статической нагрузки (в положении стоя или сидя), почные судорожные боли в икроножных мышцах.
- оперативное вмешательство на венах нижних конечностей (в том числе склеротерапевтическое).

Ношение компрессионного трикотажа III класса компрессии рекомендовано постоянно, если:

- выраженная или осложненная хроническая венозная недостаточность.
- трофические изменения на коже (как проявление выраженной формы варикозной болезни).
- лимфовенозная недостаточность (со значительными отеками конечностей)
- при прохождении курса лечения по поводу трофической язвы или тромбоза нижних конечностей.

IV класс компрессии используется крайне редко.

Также компрессионные изделия можно использовать, когда еще нет никаких симптомов, чтобы предотвратить появление варикоза.

- Для снижения болезненных ощущений. (При шаге мышца ноги содрогается, при заболевании вен, и не только, появляются болезненные ощущения).
- Для вывода лишних шлаков, влаги. (При носке белья создается дополнительный приток крови).
- Для снятия симптомов тяжести, усталости. (В компрессионных изделиях есть градуированная компрессия (давление на мягкие ткани)). Происходит давление на мышечно-венозную помпу, сужается просвет сосудов, следовательно, отток крови от ног к сердцу увеличивается в несколько раз.

Противопоказания и возможные побочные эффекты (меры предосторожности):

Противопоказания:

Заболевания артерий (облитерирующий атеросклероз, эндартериит, диабетическая полинейтропатия и ангиопатия);

Сердечно-легочная недостаточность;

Трофические язвы нижних конечностей не венозной этиологии;

Острая инфекция мягких тканей ног. Септический флебит;

Местные кожные заболевания ног;

Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа;

Размеры ноги, не соответствующие приложенной таблице подбора размеров (например, очень тонкие лодыжки).

Возможные побочные эффекты:

Аллергические реакции на компрессионные трикотажные изделия чрезвычайно редки. При возникновении острой боли или раздражения кожи при ношении чулок необходимо немедленно обратиться к врачу.

Меры предосторожности при применении:

До применения компрессионных трикотажных изделий необходимо дождаться полного заживления ран и трофических язв, сопровождающихся обильными выделениями!

Описание и работа

Гольфы – изделия круговой или плоской вязки, соответствующие конфигурации конечности до коленного сустава. Имеют закрытый либо открытый носок. Две длины. Градуированное распределение компрессии в соответствии с классом – максимальная на уровне лодыжек. Имеют трикотажную резинку.

Чулки - изделия круговой вязки или плоской, соответствующие конфигурации конечности до паховой области. Имеют закрытый либо открытый носок. Две длины. Градуированное распределение компрессии в соответствии с классом – максимальная на уровне лодыжек.

Имеют силиконовую резинку, либо застежку на талии, либо трикотажную резинку.

Колготки - изделия круговой вязки или плоской, соответствующие конфигурации конечности, надеваются на талию. Имеют закрытый либо открытый носок. Две длины. Градуированное распределение компрессии в соответствии с классом – максимальная на уровне лодыжек. Регулируемый пояс.

Рукава: изделия круговой вязки или плоской, соответствующие конфигурации конечности до верхней трети плеча или надплечья. Могут быть с перчаткой или без нее.

Градуированное распределение компрессии в соответствии с классом. Имеют трикотажную резинку, либо силиконовую резинку, либо застежку с помощью ремня.

Перечень исполнений (модельный или габаритный ряд).

Компрессионные чулки:

Наименование

-Veni CCL 1	}	бесшовные
-Veni Dur CCL 2		
- Venex micro light CCL 1		
- Venex Dur micro light CCL 2		
- Venesso Soft CCL 2		
- Doktus CCL 2		
- Pertex		
- Doktus Dur CCL 3		
- Star Cotton CCL 2		

- Goldpunkt Karat CCL 2	}	со швом
- Goldpunkt Normal CCL 3		
- Goldpunkt Dur CCL 4		

Таблица 3

Типоразмер бесшовных чулок/ окружность, см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max	g	43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max	f	39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max	e	30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max	d	28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max	c	29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69
	f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
	e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
	d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
	c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48
	b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
	b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	y (= h)	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
	a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

A-D = до колен A-G = полная длина чулка

A-D длина A-G длина

Нормальная: 38-43 см. Нормальная: 68-80 см.

Укороченная: 33-37 см. Укороченная: 57-67 см.

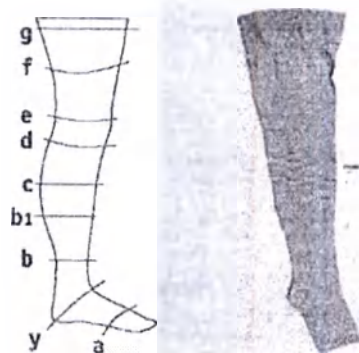


Таблица 4

Типоразмер чулок со швом/ Окружность, см	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
f	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5
e	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5
d	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5
c	30	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5

b1	24	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35
y (= h)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
a + b	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

A-D длина


Нормальная: 39 см.

A-G длина

Нормальная: 72 см.

A-D = до колен

A-G = полная длина чулка

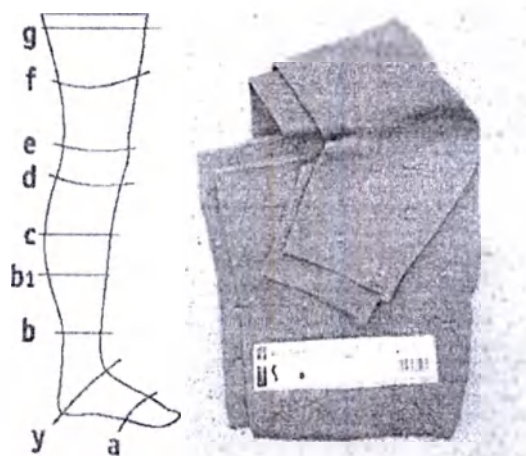

Компрессионные чулки:

Наименование

- Venesso Soft CCL 1

бесшовные

Таблица 5

Типоразмер бесшовных чулок, окружность/ см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max g		43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max f		39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max e		30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max d		28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max c		29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69
	f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
	e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
	d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
	c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48

b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
y (= h)	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

A-D = до колен

A-G = полная длина чулка

A-T = колготки

A-D длина

A-G длина

A-T длина

Нормальная: 38-43 см.


Нормальная: 68-80 см.

Нормальная: 76-88 см.

Укороченная: 33-37 см.

Укороченная: 57-67 см.

Укороченная: 65-75 см.

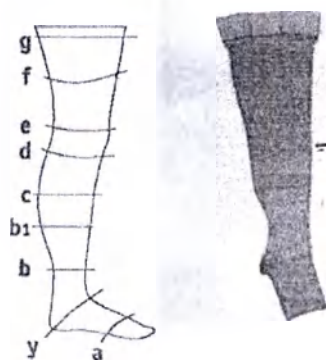

Компрессионные колготки:

Наименование

- Venesso Soft CCL 1

бесшовные

Таблица 6

Типоразмер бесшовных чулок/ окружность, см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max g		43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max f		39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max e		30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max d		28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max c		29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69
	f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
	e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
	d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
	c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48
	b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39

b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
y (= h)	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

A-D = до колен

A-G = полная длина чулка

A-T = колготки

A-D длина

A-G длина

A-T длина

Нормальная: 38-43 см.



Нормальная: 68-80 см.

Нормальная: 76-88 см.

Укороченная: 33-37 см.

Укороченная: 57-67 см.

Укороченная: 65-75 см.

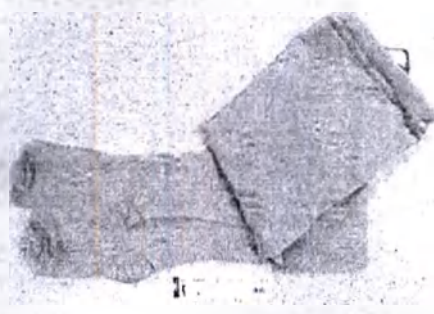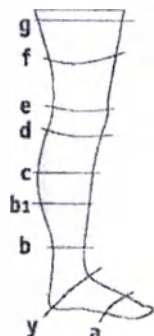

Компрессионные гольфы:

Наименование

- Venesso Soft CCL 1

бесшовные

Таблица 7

Типоразмер бесшовных чулок/ окружность, см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max g		43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max f		39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max c		30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max d		28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max c		29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69
	f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
	e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
	d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
	c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48
	b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
	b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

y (= h)	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

A-D = до колен

A-G = полная длина чулка

A-T = колготки

A-D длина

A-G длина

A-T длина

Нормальная: 38-43 см.



Нормальная: 68-80 см.

Нормальная: 76-88 см.

Укороченная: 33-37 см.

Укороченная: 57-67 см.

Укороченная: 65-75 см.

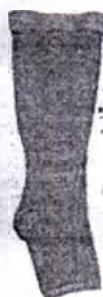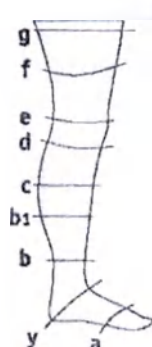

Компрессионные рукава:

Наименование:

- Veni CCL 1
- Doktus CCL 2
- Doktus Dur CCL 3
- Veni Dur CCL 2
- Venex Dur CCL 2


бесшовные


- Goldpunkt Karat CCL 2 } со швом

Таблица 8

Типоразмер окружности рукавов окружность, см	I	II	III	IV
c	17,5	19	21	23
d	24	26	27	29
e	25	27	29	31
f	27	29	31	34
g	32	35	38	41

Длина c-gca. 45 см.

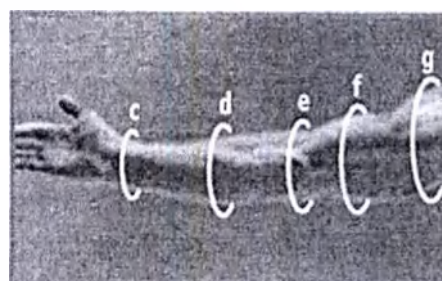

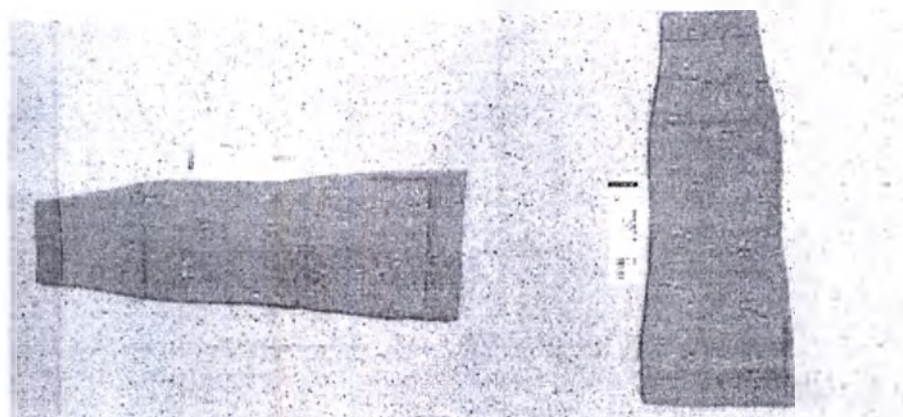

Компрессивные гольфы:

Наименование:

- Veni CCL 1
- Veni Dur CCL 2
- Venex micro light CCL 1
- VenexDur micro light CCL 2
- Venesso Soft CCL 2
- Doktus CCL 2
- Doktus Dur CCL 3
- Star Cotton CCL 2
- Business. Holiday
- Pertex

бесшовные

- Goldpunkt Karat CCL 2
- Goldpunkt CCL 3
- Goldpunkt Dur CCL 4
- Goldpunkt normal CCL 3

со швом

Таблица 9

Типоразмер бесшовных гольф/ окружность, см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max	g	43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max	f	39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max	e	30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max	d	28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max	c	29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69

f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48
b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
y (= h)	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

А-D длина

Нормальная: 38-43 см.

Укороченная: 33-37 см.

А-G длина

Нормальная: 68-80 см.

Укороченная: 57-67 см.

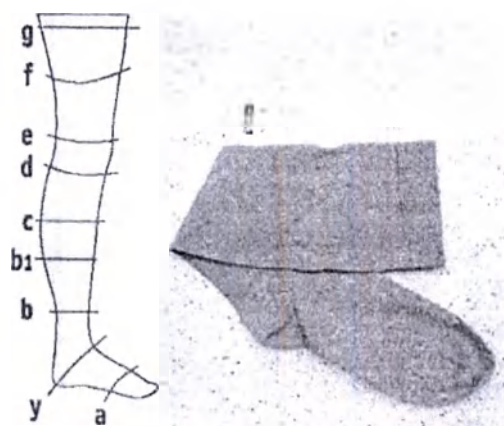


Таблица 10



Типоразмер гольф со швом/ окружность, см	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
f	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5
e	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5
d	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5
c	30	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5
b1	24	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35
y (= h)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
a + b	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

А-D длина

Нормальная: 39 см.

А-G длина

Нормальная: 72 см.

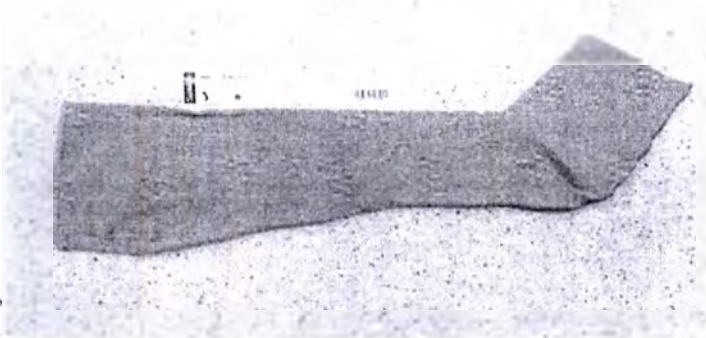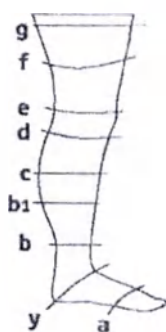

Компрессионные колготки:

Наименование:

-Veni Dur Extra CCL 3

бесшовные

Таблица 11

Типоразмер бесшовных гольф/ окружность, см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max g		43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max f		39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max e		30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max d		28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max c		29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69
	f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
	e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
	d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
	c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48
	b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
	b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	y (= h)	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
	a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

A-D длина



Нормальная: 38-43 см.

Укороченная: 33-37 см.

A-G длина

Нормальная: 68-80 см.

Укороченная: 57-67 см.

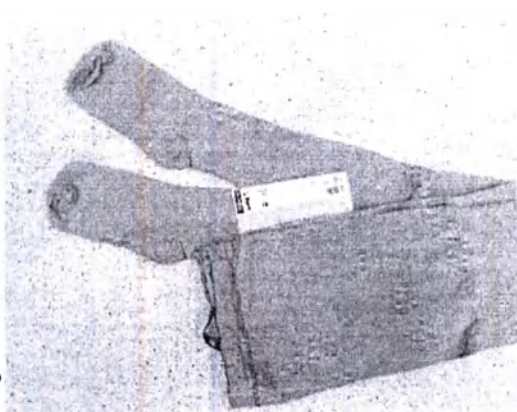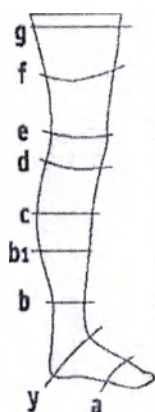

Компрессионные чулки:

Наименование:

-Veni Dur Extra CCL 3

бесшовные

Таблица 12

Типоразмер бесшовных гольф/ окружность, см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max g		43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max f		39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max e		30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max d		28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max c		29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69
	f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
	e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
	d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
	c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48
	b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
	b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	y (= h)	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
	a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

A-D длина


Нормальная: 38-43 см.

Укороченная: 33-37 см.

A-G длина

Нормальная: 68-80 см.

Укороченная: 57-67 см.

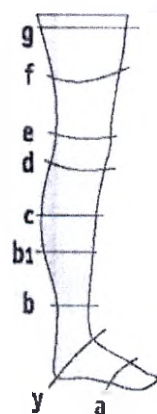

Компрессионные гольфы:

Наименование:

-Veni Dur Extra CCL 3

бесшовные

Таблица 13

Типоразмер бесшовных гольф/ окружность, см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max g		43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max f		39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max e		30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max d		28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max c		29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69
	f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
	e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
	d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
	c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48
	b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
	b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	y (= h)	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
	a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

A-D длина



Нормальная: 38-43 см.

Укороченная: 33-37 см.

A-G длина

Нормальная: 68-80 см.

Укороченная: 57-67 см.

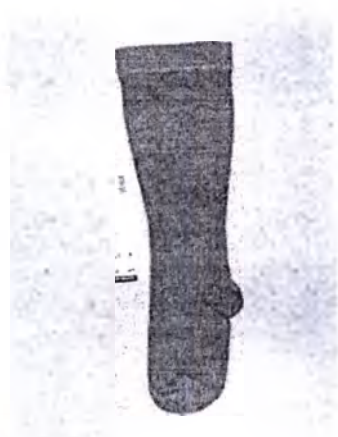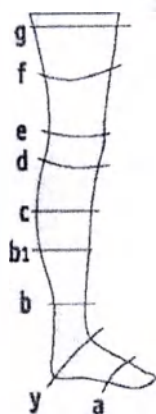

Компрессионные носки:

Наименование:


- Doktus CCL 2 } бесшовные

- Goldpunkt Karat CCL 2
 - Goldpunkt normal CCL 2
 - Goldpunkt CCL 3
 - Goldpunkt Dur CCL 4
 - Pertex
 - Doktus

со швом

Таблица 14

Типоразмер бесшовных носок	I	II	III	IV	V	VI	VII
окружность b - см	17-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
Типоразмер носок со швом	1	2	3	4	5	6	
окружность b - см	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	

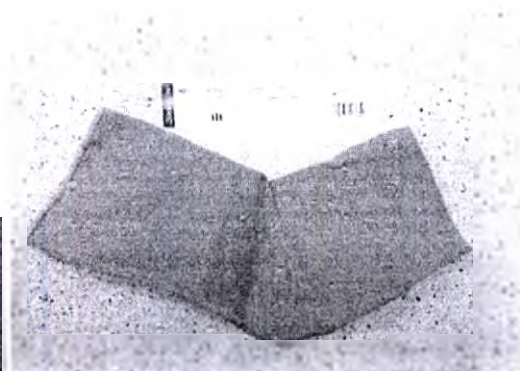

Компрессионные колготки:

Наименование:

- Veni CCL 1
 - Veni Dur CCL 2
 - Venex micro light CCL 1
 - Venex Dur micro light CCL 2
 - Venesso Soft CCL 2
 - Doktus CCL 2
 - Doktus Dur CCL 3
 - Star Cotton CCL 2
 - Pertex
- } бесшовные

- Goldpunkt Karat CCL 2
 - Goldpunkt Dur CCL 4
 - Goldpunkt normal CCL 3
- } со швом

Таблица 15

Типоразмер бесшовных колготок/ окружность, см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max g		43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max f		39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max e		30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max d		28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max c		29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69
	f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
	e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
	d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
	c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48

b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
y (= h)	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

А-В длина

Нормальная: 38-43 см.

Укороченная: 33-37 см.

А-С длина

Нормальная: 68-80 см.

Укороченная: 57-67 см.

Внутренняя длина (колготок)

Нормальная: 76-85 см.

Укороченная: 65-75 см.

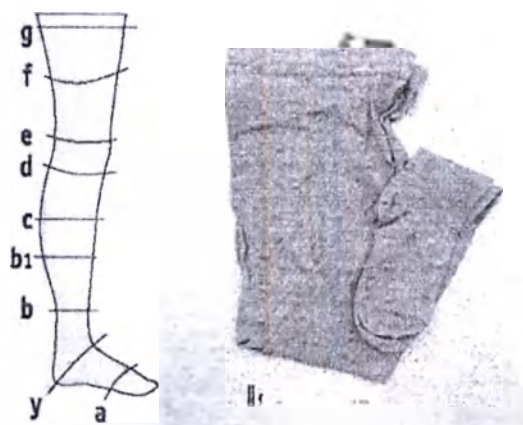


Таблица 16


Типоразмер колготок со швом/ окружность, см	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
f	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5
e	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5
d	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5
c	30	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5
b1	24	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35
y (= h)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
a + b	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

А-В длина

Нормальная: 39 см.

А-С длина

Нормальная: 72 см.

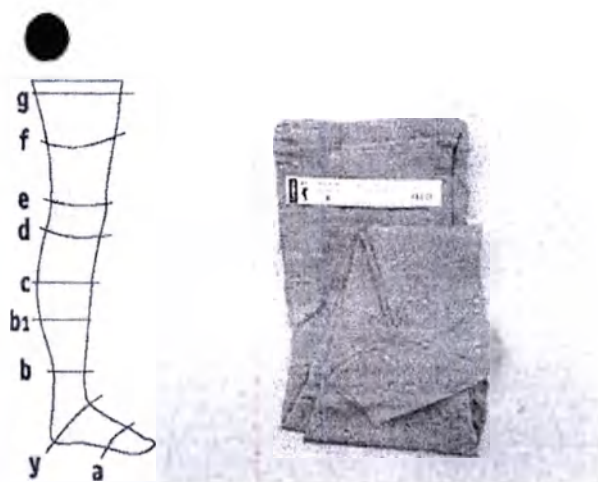

Компрессионные чулки:

Наименование:

- Anti-Embolie

Таблица 17

Типоразмер чулков/ окружность, см	I (orange)	II (green)	III (violet)	IV (black)	V (blue)	VI (red)	VII (yellow)
g	43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
f	39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
e	30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
d	28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
c	29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
y	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

А-С длина

Нормальная: 68-80 см.

Основной цвет изделия - белый с цветными нитями в пяточной части в качестве индикатора размера:

I-(orange/оранжевый)

II-(green/зеленый)


III-(violet/фиолетовый)

IV-(black/черный)

V-(blue/синий)

VI-(red/красный)

VII-(yellow/желтый)

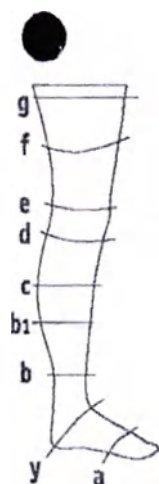

Компрессионный чулок на одну ногу:

Наименование:

- Doktus CCL 2 бесшовный
- Doktus Dur CCL 3

Таблица 18

Типоразмер бесшовных чулок/окружность, см		I	II	III	IV	V	VI	VII
Plus-Max	g	43-55	45-59	49-63	53-66	57-69	61-72	64-75
Plus-Max	f	39-49	41-52	44-55	47-58	50-61	53-64	56-67
Plus-Max	e	30-37	33-39	35-41	38-44	40-46	42-48	44-52
Plus-Max	d	28-34	30-36	32-38	34-41	36-43	38-45	40-49
Plus-Max	c	29-35	31-37	33-39	35-42	37-45	39-47	41-52
	g	43-48	45-51	49-55	53-59	57-63	61-66	64-69
	f	39-43	41-46	44-49	47-52	50-55	53-58	56-61
	e	30-34	33-37	35-39	38-41	40-44	42-46	44-48
	d	28-30	30-34	32-36	34-38	36-41	38-43	40-45
	c	29-33	31-35	33-37	35-39	37-42	39-45	41-48
	b1	24-26	26-28	28-30	30-33	32-35	34-37	36-39
	b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	y	26-31	28-33	29-34	31-36	32-37	34-39	36-41
	a	17-21	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31	29-33

A-D = до колен

A-G = полная длина чулка

A-T = колготки

A-D длина

A-G длина

A-T длина

Нормальная: 38-42 см.


Нормальная: 68-78 см.

Нормальная: 76-88 см.

Укороченная: 33-37 см.

Укороченная: 60-67 см.

Укороченная: 68-75 см.

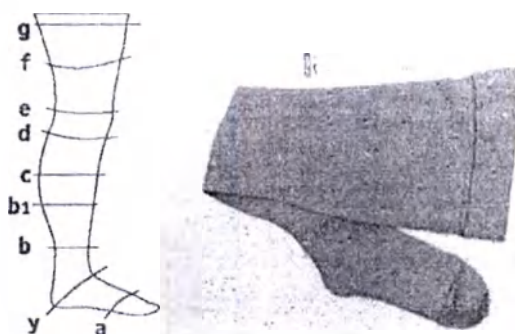

1. Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)

Компрессионные изделия – это медицинские изделия, полезное действие которых состоит в равномерном давлении на поверхность части тела. Это значит, что:

1. Компрессионные изделия достаточно трудно надеть, поскольку они стремятся очень плотно прилегать к поверхности части тела.
2. Их не следует слишком сильно тянуть вверх, поскольку можно разрушить тканевые волокна, и полезный эффект будет потерян.

Во многих аптеках продаются специальные приспособления для надевания изделий из компрессионного трикотажа. Однако на практике они не всегда доступны. Ниже приведены рекомендации по надеванию компрессионных изделий:

Обратите внимание на состояние ногтей на руках и ногах. Предпочтительно, чтобы они были ровно подстрижены и обработаны пилочкой для ногтей. Осмотрите кожу на стопах. При наличии мозолей, натоптышей и шершавых участков, необходимо их сгладить. Такие дефекты могут привести к появлению растяжек и разрывов на изделии. Поэтому чем ровнее и глаже поверхность стопы, тем дольше прослужит изделие.

Необходимо снимать кольца с пальцев – они могут разорвать ткань. Используйте перчатки. Подойдут обычные медицинские, или хозяйственные перчатки – главное, чтобы они надёжно крепились на руке, и не создавали неудобств. По мере приобретения опыта в использовании изделия в перчатках отпадёт необходимость. Но если у вас дорогостоящий маникюр и длинные ногти, то перчатками пользоваться обязательно! Надевать изделия следует сухими, и только на сухую кожу, чтобы минимизировать трение при надевании.

При надевании гольф, чулок или колготок ноги должны быть отдохнувшими. Рекомендуется приподнять их выше средней линии тела, и подержать так 5-10 минут. Это позволит снизить отёчность и уменьшить припухлость вен. Людям, которым рекомендовано непрерывное использование компрессионные изделия, рекомендуется надевать изделие утром, не вставая с постели. Это позволит оптимизировать эффективность гольф. При надевании ноги необходимо расположить горизонтально, или немного приподнять. При этом ноги не следует опускать вниз. Тянуть вверх за края данные изделия не следует. Поэтому их надевают со стопы.

Общепринятый метод надевания компрессионных гольфов, чулок или колготок:

1. Выворачиваем изделие наизнанку до пятки.
2. Вставляем ногу в след, и осторожно разравниваем ткань, чтобы стопа удобно расположилась по всей длине.
3. Затем ладонями слегка натягиваем изделие на ногу, одновременно выворачивая его на правую сторону.
4. Разравниваем компрессионные изделия. Расправляем складочки, если они появились. Необходимо немного тренировки, но со временем вы научитесь делать это быстро и правильно – главное понять принцип. Проявляйте терпение в процессе надевания изделий из

компрессионного трикотажа. Особенно данная рекомендация относится к лицам, использующим изделия второго класса компрессии и выше. Отнеситесь к надеванию гол, как к лёгкой утренней гимнастике.

Важно! Если врач назначил вам гольфы третьего или четвертого класса компрессии, то лучше всё-таки купить в аптеке специальные приспособления для их надевания, поскольку обходиться без них будет крайне затруднительно. Описанный выше метод - классический. Он рекомендован изготовителями компрессионных изделий, и поэтому считается единственно правильным.

Снимать изделия из компрессионного трикотажа необходимо не торопясь и без украшений на руках. Начиная с верхнего края изделия, постепенно стягивая его вниз по направлению к стопе. Затем аккуратно снять пятку и далее все изделие с ноги.



1. Осторожно собрать изделие от верхней части до носка.
2. Правильно зафиксировать на стопе носок и пятку изделия.
3. Осторожно, с небольшим усилием, растянуть изделие от щиколотки до колена.
4. Расправить складки на голени.
5. Распределить изделие по бедру (для чулок и колготок).

Напоминаем, что компрессионные рукава необходимо надевать ДО появления отека, то есть утром, сразу после просыпания:

1. Рукав выворачивают наизнанку до той части, которая надевается на запястье.
2. Вставляют ладонь.
3. Равномерно, не перекручивая, осторожно расправляют изделие по руке, до тех пор, пока на нем не останется ни одной складки.

Техническое обслуживание и текущий ремонт (порядок действий при возникновении неисправностей для изделий медицинской техники)

Изделия предназначены для эксплуатации только одним человеком без передачи другим, ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.

Условия хранения

- температура воздуха от $(0 \text{ до } +35) \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- относительная влажность $(60-95\%) \pm 2\%$
- атмосферное давление $760 \pm 10 \text{ мм рт.ст.}$

Условия применения

- температура воздуха от $(-30 \text{ до } +30) \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность $(20-80) \pm 2 \text{ } \%$;
- атмосферное давление $760 \pm 10 \text{ мм рт.ст.}$

Условия транспортирования

На транспортном ящике с изделиями должны быть нанесены манипуляционный знак, соответствующие значениям: «Беречь от влаги», надписи: «Условия хранения: от $(0 \text{ до } +35) \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$, относительной влажности $(60-95\%) \pm 2\%$ », «Условия транспортировки: от $(-50 \text{ до } +50) \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$, относительной влажности $(20-95\%) \pm 2\%$ ».

- температура воздуха от $(-50 \text{ до } +50) \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- относительная влажность $(20-95\%) \pm 2\%$
- атмосферное давление $760 \pm 10 \text{ мм рт.ст.}$

Упаковка и комплект поставки

Все изделия упаковываются в индивидуальную упаковку – 1 шт./пара изделия упаковывается в картонную коробку с этикеткой или в упаковочный пленочный пакет с этикеткой. Также в комплект входит буклет с руководством пользователя.

Материалы, используемые для упаковки, не оказывают вредных воздействий на содержимое. Материал и оформление упаковки обладают такими свойствами, чтобы:

- обеспечить сохранность изделия при хранении в сухих, чистых условиях с соответствующим проветриванием,
- свести к минимуму опасность загрязнения содержимого в процессе открывания.

Символы на упаковке

Символы	Описание
	Знак соответствия Российским нормам
	Знак соответствия европейским нормам стран-членов ЕС
	Обратитесь к инструкции по применению

Порядок утилизации

Утилизация изделий, производится в соответствии с правилами утилизации бытовых отходов.

Гарантийные обязательства

Сохранение компрессионным изделием медицинских свойств гарантируется при правильном соблюдении инструкции производителя. Гарантия не распространяется на механические повреждения.

Компрессионные чулки, гольфы и колготки, рукава можно стирать так же часто, как и обычные чулочные изделия.

Изделия стираются вручную, либо, при наличии соответствующего значка на стикере, в стиральной машине в режиме «деликатная стирка», при температуре не выше 40°C.

Прополоскав изделие в чистой воде, его отжимают в полотенце, не скручивая!

Сушить изделие предпочтительно в горизонтальном положении подальше от источника тепла.

Естественно, что наличие двух пар компрессионных чулок, гольфов или колготок облегчит надлежащий уход за ними и позволит Вам носить компрессионные изделия без перерыва.

Символы по уходу за изделиями:


Глажка запрещена



Ручная стирка



Отбеливание запрещено

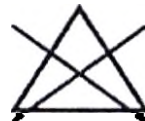

Барабанная сушка запрещена



Сухая чистка запрещена



Срок годности

3 года. Не использовать по окончании срока годности.

Дата пересмотра документации:

Перечень применяемых национальных стандартов

DIN EN ISO 13485:2012

DIN EN ISO 15223

DIN 58133

RAL-GZ 387/1

Medical Products Directive 93/42 EEC

Производитель

Heinz Schiebler, Norddeutsche Gummistrumpf-fabrik GmbH & Co. KG

Marienallee 74, 24937 Flensburg, Germany

Tel.: +49(0)461-51055, Fax: +49(0)461-54050

e-mail: info@schiebler.de, www.schiebler.de

«Хайнц Шиблер, норддойче гуммиструмпффабрик ГмбХ унд Ко. КГ»

Мариеналлее 74, г. Фленсбург, Германия, 24937

Тел.: +49(0)461-51055, Факс: +49(0)461-54050

e-mail: info@schiebler.de, www.schiebler.de

Уполномоченный представитель производителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тривес»

(ООО "Тривес")

Юридический адрес:

191123, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23, литер А, пом.99-Н

Тел: (812) 329-72-97

E-mail: info@trives-spb.ru

Прошито и пронумеровано

10.10.2010 листа(ов)

Управляющий директор

Heinz Schiebler, Norddeutsche
Gummistrumpffabrik GmbH & Co. KG

Heinz Schiebler Кан Шиблер

М.п.

HEINZ SCHIEBLER

Norddeutsche Gummistrumpfabrik

GmbH & Co. KG

Manenallee 74 - 0

24937 Flensburg



Nr. **246** der Urkundenrolle für **2018**
Notar Rolf Meierrieke, Flensburg

Notarielle Beglaubigung

Nach Verneinung der Frage nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG beglaube ich die vorstehende, vor mir am vollzogenen Unterschriften

des Herrn Kay Schiebler, geb. am geboren am 11.03.1952,
geschäftsansässig Marienallee 74, 24937 Flensburg
- persönlich bekannt -.

Die Unterschrift habe ich auf Ersuchen im Hause Marienallee 74 in Flensburg eingeholt.

Ich bescheinige durch Einsicht am 27. Juni 2018 in das beim Amtsgericht Flensburg elektronisch geführte Handelsregister, dass Herr Kay Schiebler als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Firma Schiebler Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (HRB 4893 FL) eingetragen ist.

Weiter bescheinige ich durch Einsicht am 27. Juni 2018 in das beim Amtsgericht Flensburg elektronisch geführte Handelsregister, dass die Schiebler Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafter der Heinz Schiebler, Norddeutsche Gummistrumpfabrik GmbH & Co. KG (HRA 4698 FL) eingetragen ist und diese allein zur Vertretung der Kommanditgesellschaft berechtigt ist.

Flensburg, 27. Juni 2018

, Notar

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5. octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Rolf Heierichs

3. in ~~seiner~~/seiner Eigenschaft als Notar

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des ~~(der)~~ Notars

Bestätigt

5. in Flensburg 6. am 29.06.2018

7. durch den Präsidenten des Landgerichts Flensburg

8. unter Nr. 35912018

9. Siegel/Stempel:

10. Unterschrift:



Christian Blöcker
Christian Blöcker

ШИБЛЕР 1949 -60 лет- 2009

Хайнц Шиблер – а/я 2852 - 24918 Фленсбург

Хайнц Шиблер, норддойче гуммиштрумпффабрик ГмбХ унд Ко. КГ
Профессиональный производитель медицинских компрессионных чулок
и специальных бандажей
участковый суд Фленсбург, торговый реестр HRA 4698

Мариеналлее 74, 24937 - Фленсбург
Телефон: 0461/51055 и 54055
Факс: 0461/54050 и 53018

Интернет: <http://www.schiebler.de>
Электронная почта: heinz@schiebler.de

для оформления заказов: besyellung@schiebler.de

Шиблер Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс мбХ
Участковый суд Фленсбург, торговый реестр
HRB 4893

директор: Кай Шиблер
ИНН: DE814087717
Сберкасса: НОРД-ОСТЗЕЕ:
БИК: 21750000 счет 500024
Почтовый банк Гамбург:
БИК: 20010020 счет 149074

Исх.номер:

Ваше сообщение от:

Вход.номер:

Дата:

Хайнц Шиблер,
норддойче гуммиштрумпффабрик ГмбХ унд Ко. КГ

Печать:
ХАЙНЦ ШИБЛЕР
норддойче гуммиштрумпффабрик ГмбХ унд Ко. КГ
Мариеналлее 74 - Тел.: 04 61/5 10 55
24937 Фленсбург

Хайнц Шиблер,

норддойче гуммиштрумпффабрик ГмбХ унд Ко. КГ

Печать:

ХАЙНЦ ШИБЛЕР

норддойче гуммиштрумпффабрик ГмбХ унд Ко. КГ

Мариеналлее 74 - Тел.: 04 61/5 10 55

24937 Фленсбург

НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

После отрицательного ответа на вопрос о заинтересованности нотариуса в предмете нотариального действия согласно §3 ч.1 п.7 Закона об установлении обязательной формы документации я удостоверяю поставленную в моем присутствии подпись

господина Кая Шиблера, дата рождения: 11.03.1952,
юридический адрес: Мариеналлее 74, 24937 Фленсбург
- личность установлена-

Подпись по предварительному согласованию поставлено в офисе по адресу: Мариеналлее 74, Фленсбург.

После просмотра электронного реестра юридических лиц, который заполняется в районном суде Фленсбург, 27.06.2018 года я удостоверяю, что господин Кай Шиблер является единоличным уполномоченным управляющим директором компании Шиблер бетайлигунгс-унд Фервальтунгсгезельшафт мбХ (зарегистрированного в торговом реестре-HRB 4893 FL).

Также, после просмотра электронного реестра юридических лиц, который заполняется в районном суде Фленсбург, 27.06.2018 года я удостоверяю, что компания Шиблер бетайлигунгс-унд Фервальтунгсгезельшафт мбХ зарегистрирована в качестве лично ответственного компаньона компании Хайнц Шиблер норддойче гуммиштрумпффабрик ГмбХ унд Ко. КГ - (номер в Торговом Реестре HRA 4698 FL), уполномоченного единоличного представительства компании.

Фленсбург, 27.06.2018

Круглая гербовая печать:
Нотариус Рольф Мейеррикс

/ подпись / нотариус

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

Гагская конвенция от 5 октября 1961 г.

1. Страна: Федеральная Республика Германия
Настоящий официальный документ

2. был подписан **г-ном Рольфом Мейерриксом**
3. выступающим в качестве **нотариуса**
4. скреплен
печатью/штампом
нотариуса

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе **Фленсбург** 6. **29.06.2018**
7. **Президентом окружного суда Фленсбурга**
8. номер **359/2018**
9. Печать/штамп: 10. Подпись
Окружной суд / подпись /
Фленсбург Кристиан Блекер

/Гербовая печать/

Окружной суд Фленсбурга 14

Перевод выполнил переводчик Горбаткова Кристина Георгиевна

Российская Федерация.

Город Москва.

Семнадцатого сентября две тысячи восемнадцатого года.

Я, Дзиковская Галина Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Горбатковой Кристины Георгиевны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/165-Н/77-2018-20-1565

Взыскано по тарифу: 100 рублей

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



Г.В. Дзиковская



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 37 лист (-а, -ов)

Нотариус