

Фотографическое изображение медицинского изделия: Материал композитный низкомодульный (для восстановления культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО» с адгезивом двойного отверждения для эмали и дентина



ФлоуКор ДУО

Материал композитный низкомодульный
(для восстановления культи зуба)
двойного отверждения
с адгезивом двойного отверждения для эмали и дентина

Содержимое:

- двухкамерный шприц с универсальной и каталитической пастой по 4 г - 1 шт., цвет
- флакон с адгезивом двойного отверждения для эмали и дентина каталитическая жидкость - 1 шт.,
- флакон с адгезивом двойного отверждения для эмали и дентина основная жидкость - 1 шт.,
- флакон с гелем для обработки зуба - 1 шт.,
- принадлежности

ООО «СТОМАДЕНТ»

Россия, 140070, Московская обл.,
Люберецкий район, п. Томилино,
ул. Гаршина, д.11, этаж 3, офис 301.

Тел./факс: +7(495)514-9346,
Тел.: +7(495)514-9347, +7(495)514-9313,
www.stomadent.ru

РУ № ФСР 2012/13851 от 14.12.2015
ТУ9391-024-40151387-2012

Только для стоматологов




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал композитный низкомодульный
(для восстановления культи зуба)

ФлоуКор ДУО

Материал композитный низкомодульный
(для восстановления культи зуба)
двойного отверждения

КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ В НАБОРЕ - 4

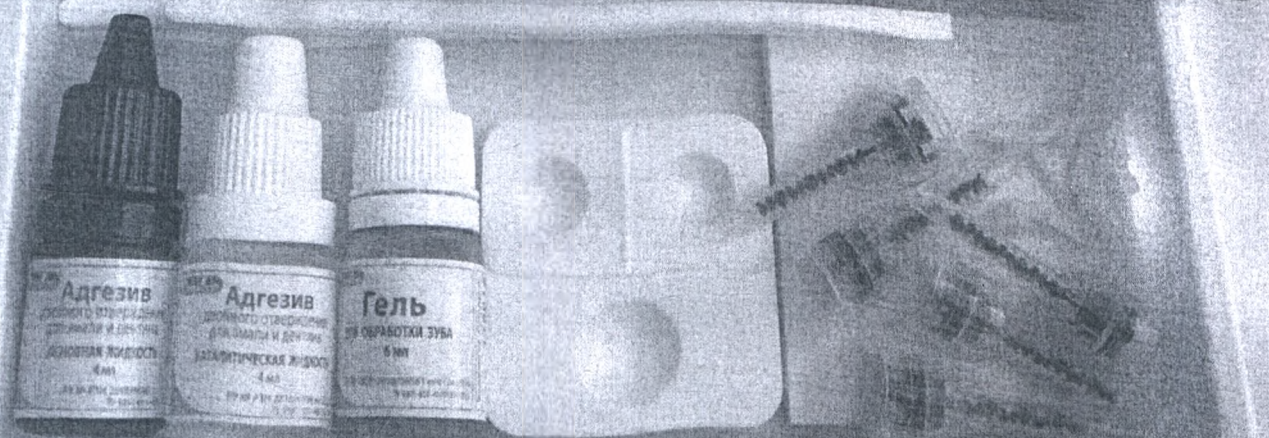

Фотографическое изображение медицинского изделия: Материал композитный низкомодульный (для восстановления культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО» набор



ФлоуКор ДУО

Материал композитный низкомодульный
(для восстановления культи зуба)
двойного отверждения

Набор

Содержимое:

- двухкамерный шприц
с универсальной и каталитической пастой по 4 г - 2 шт.
цвет

- насадки для смешивания (1:1)
- насадки внутриротовые
- шпатель стекловолоконный, комплект
- инструкция по применению

ООО «СТОМАДЕНТ»

Россия, 140070, Московская обл.,
Люберецкий район, п. Томинское,
ул. Гаршина, д.11, этаж 3, офис 301.

ПУ № ФСР 2012/13851 от 14.12.2015

ТУ9391-024-40151387-2012

Только для стоматологии

Тел./факс: +7(495)514-9346,

Тел.: +7(495)514-9347, +7(495)514-9313,

www.stomadent.ru

Содержимое набора: 2 шт. универсальный шприц, 2 шт. насадка для смешивания (1:1), 2 шт. насадка внутриротовая, 1 шт. шпатель стекловолоконный, комплект. Инструкция по применению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал композитный низкомодульный
(для восстановления культи зуба)
двойного отверждения

ФлоуКор ДУО
Материал композитный низкомодульный
(для восстановления культи зуба)
двойного отверждения

ФлоуКор ДУО

Партия: 200816
Годен до: 082020

ООО «СТОМАДЕНТ»
Россия, 140070, Московская обл.,
Люберецкий район, п. Томинское,
ул. Гаршина, д.11, этаж 3, офис 301.

Фотографическое изображение медицинского изделия: Материал композитный низкомодульный (для восстановления культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО» 1 шприц



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал композитный низкомодульный
(для восстановления культи зуба)
двойного отверждения
ФлоуКор ДУО

ТУ 9391-024-40151387-2012

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ФСР 2012/13851 от 14 декабря 2015 г.



ФлоуКор ДУО

Материал композитный низкомодульный
(для восстановления культи зуба)
двойного отверждения

Содержимое:

- двухкамерный шприц
- с универсальной и каталитической пастой по 4 г - 1 шт., цвет
- принадлежности,
- инструкция по применению.

ПУ № ФСР 2012/13851 от 14.12.2015
ТУ 9391-024-40151387-2012

Партия: 200818
Годен до: 082020

Хранить в сухом защищенном
от прямого солнечного света помещении
при темп. $+ (5 \div 12) ^\circ\text{C}$ - 2 года
 $(15 \div 25) ^\circ\text{C}$ - 1 год

ПРОИЗВЕДЕНО:


ООО "СТОМАДЕНТ"
Россия,
140070, Московская область,
п. Томилино, ул. Гаршина, 11.

+7(495)514-346,
+7(495)514-9347,
+7(495)514-9313,
www.stomadent.ru


ФлоуКор ДУО


Материал композитный низкомодульный
(для восстановления культи зуба)
двойного отверждения

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ПАСТА - 4 г

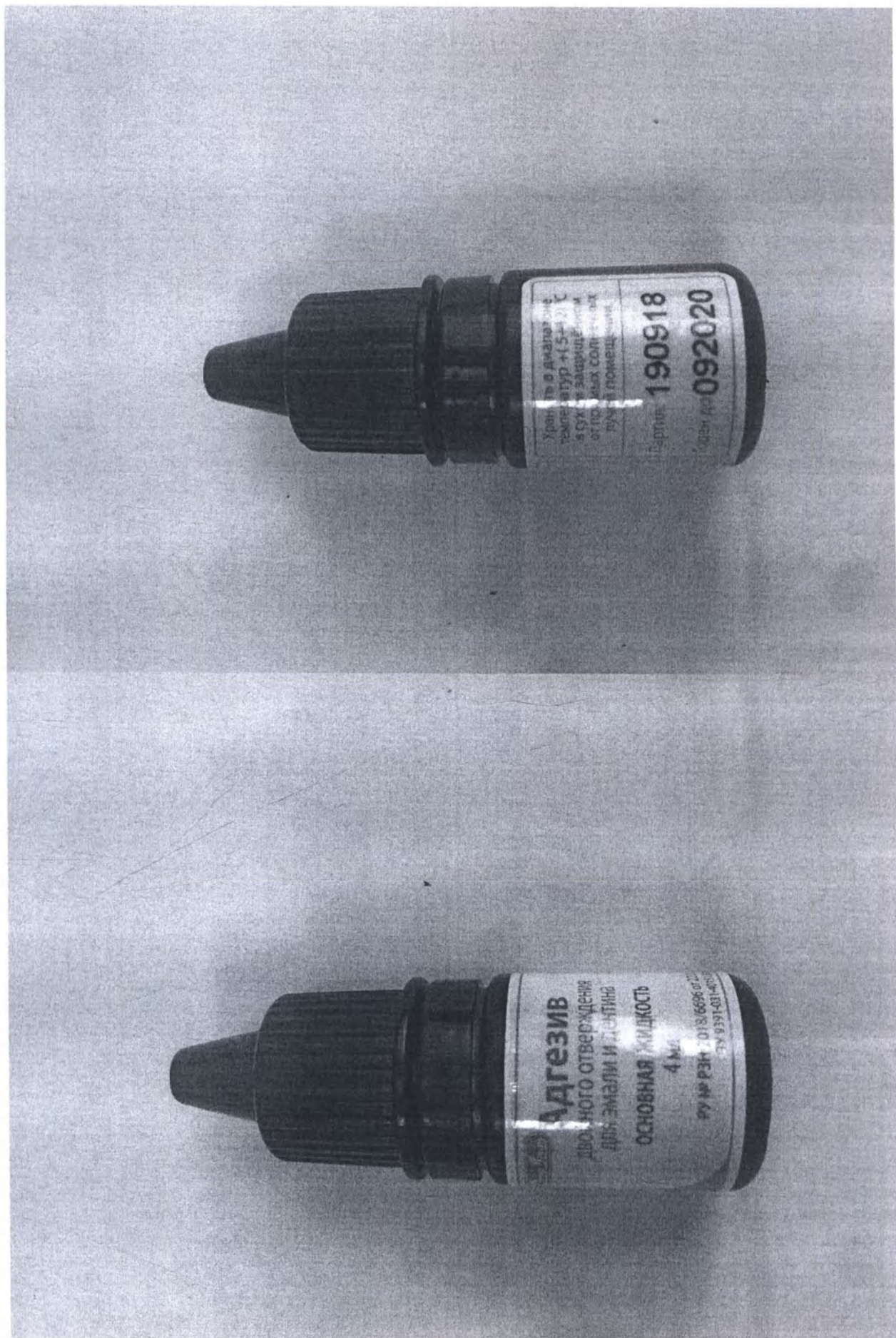


Фотографическое изображение медицинского изделия: Адгезив двойного отверждения для эмали и дентина каталитическая жидкость


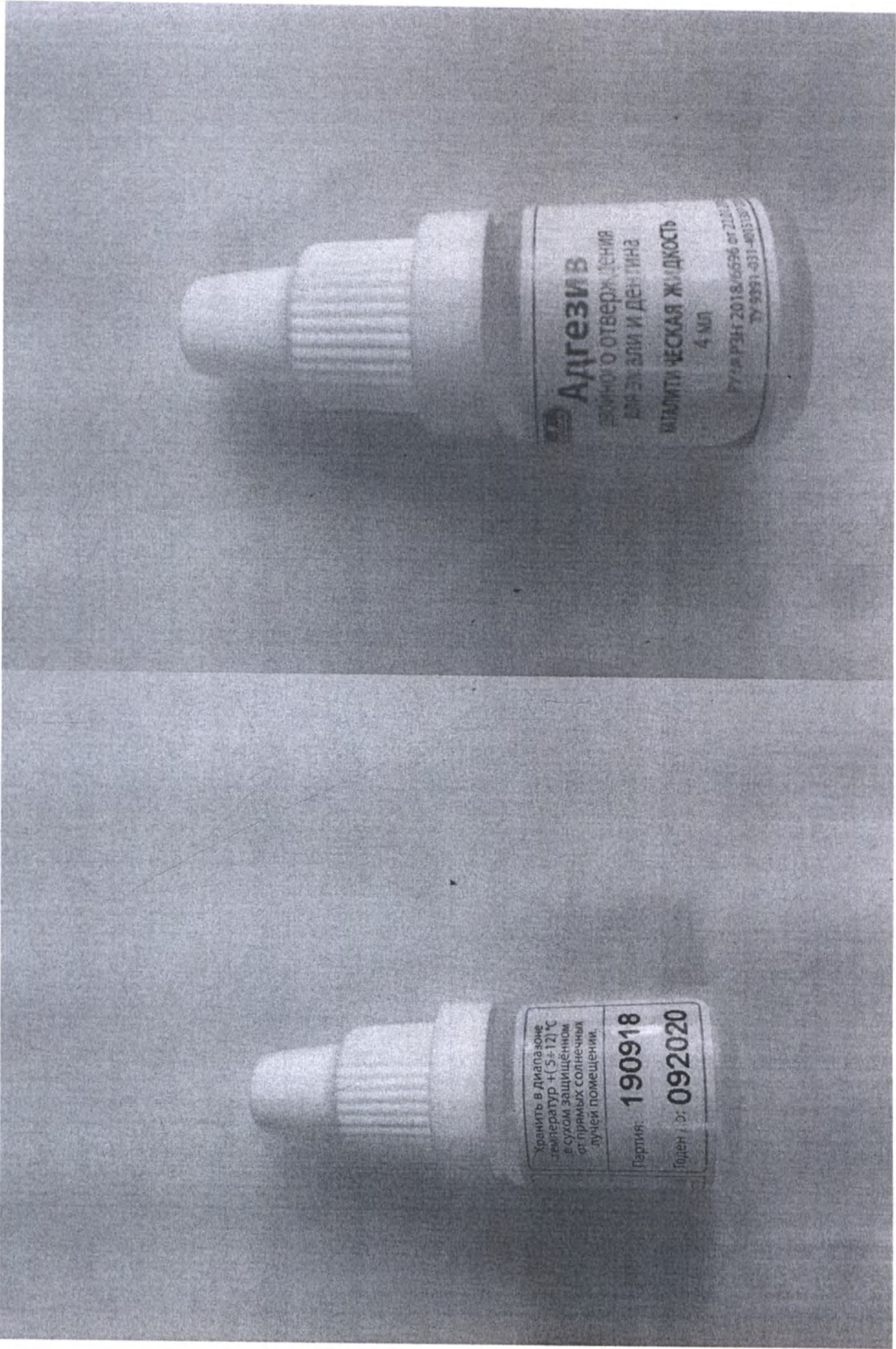


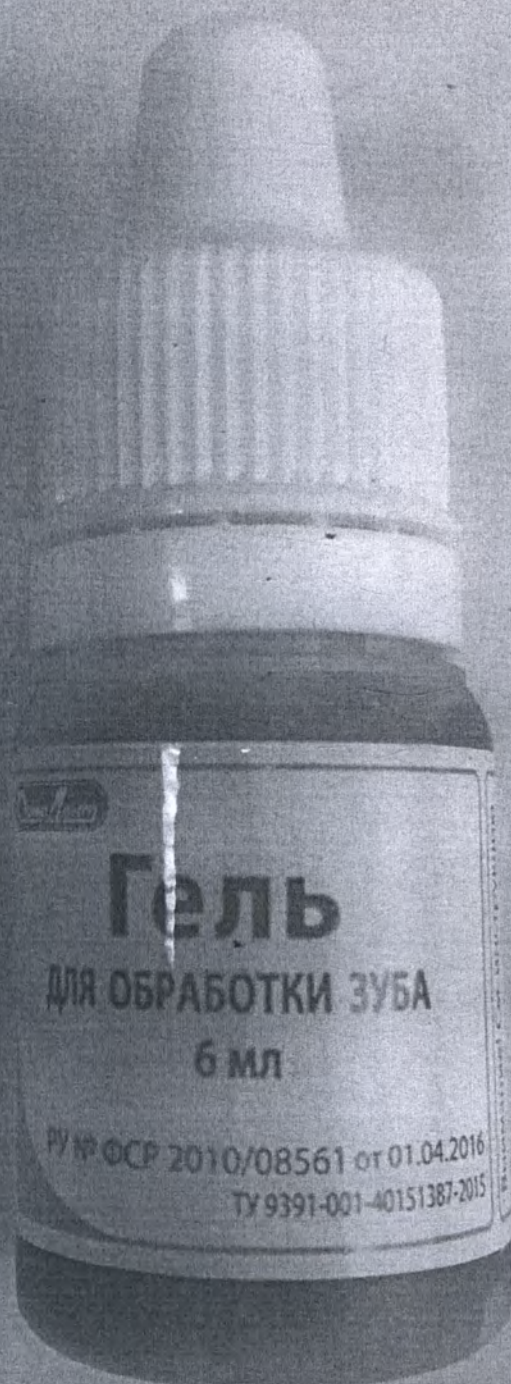


Фотографическое изображение принадлежности «Шпатель для замешивания» к
медицинскому изделию : Материал композитный низкомолекулярный (для восстановления
культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО»

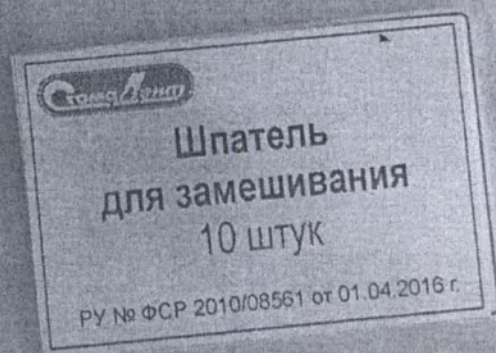

Фотографическое изображение принадлежности «Микроаппликаторы стоматологические»
к медицинскому изделию : Материал композитный низко модульный (для восстановления
культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО»

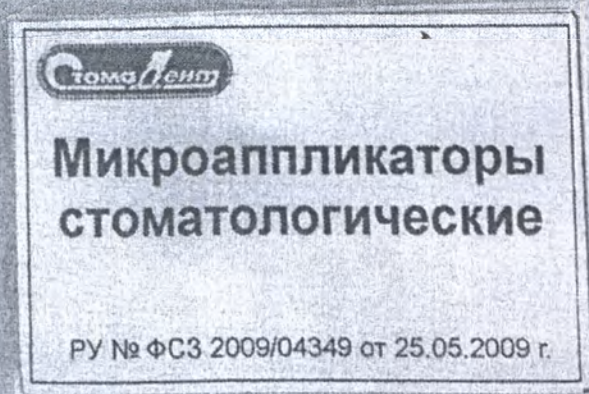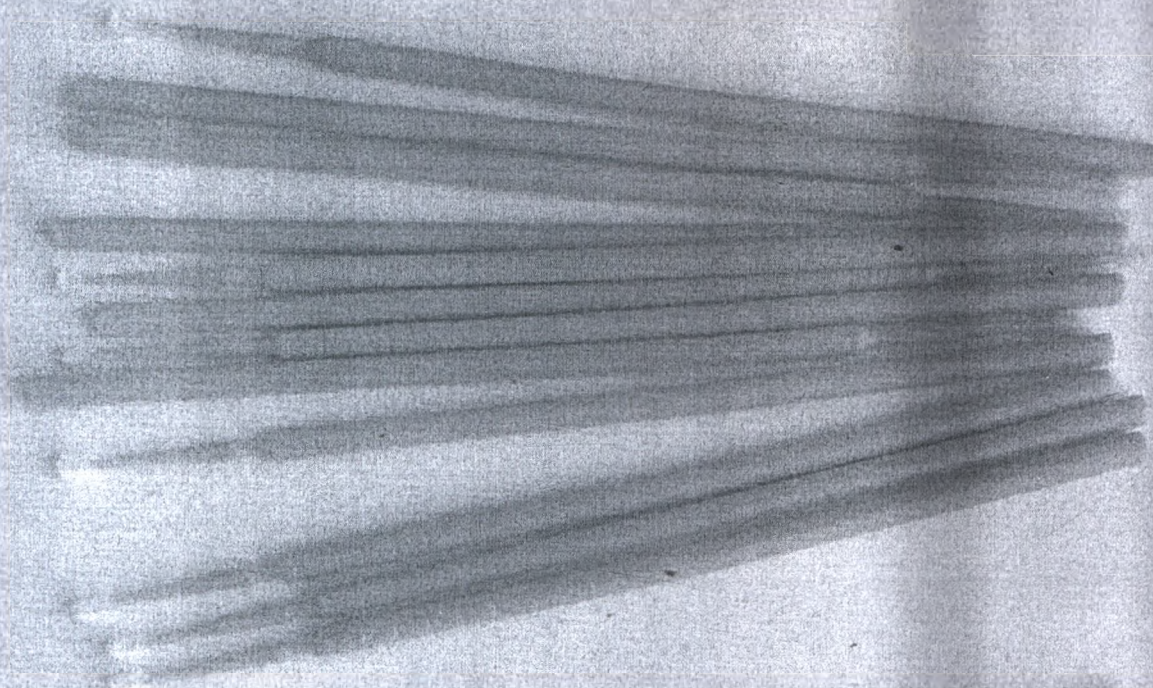

Фотографическое изображение принадлежности «Одноразовые насадки для смешивания» к медицинскому изделию : Материал композитный низко модульный (для восстановления культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО»

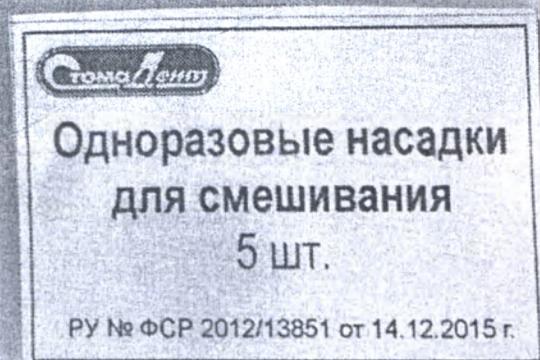



Фотографическое изображение принадлежности «Одноразовые насадки для внесения смешанного материала» к медицинскому изделию : Материал композитный низкомодульный (для восстановления культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО»



**Одноразовые насадки
для внесения
смешанного материала
5 шт.**

РУ № ФСР 2012/13851 от 14.12.2015 г.

Фотографическое изображение принадлежности «Кювета» к медицинскому изделию :
Материал композитный низкомолекулярный (для восстановления культи зуба) двойного
отверждения «ФлоуКор ДУО»

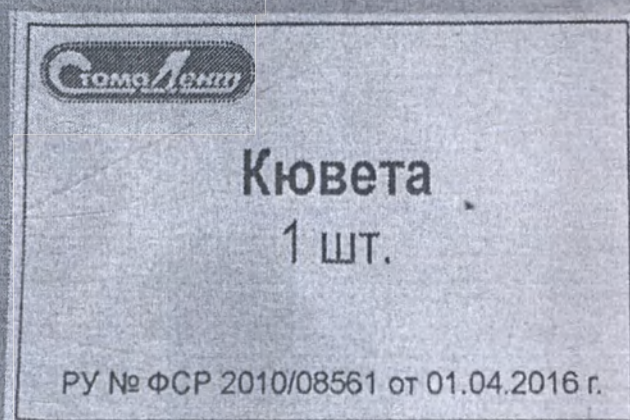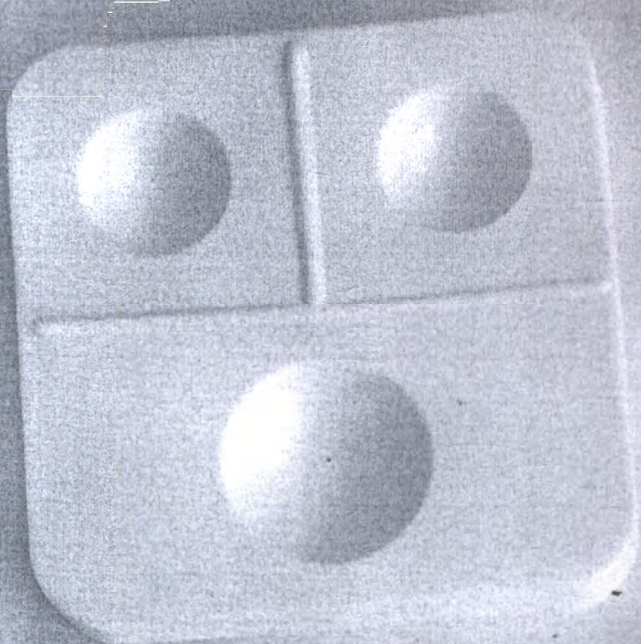

Фотографическое изображение принадлежности «Блокнот для замешивания» к
медицинскому изделию : Материал композитный низкомолекулярный (для восстановления
культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО»



Генеральный директор
ООО «СТОМАДЕНТ»


Ю.В.Кузовков




Фотографическое изображение принадлежности «Одноразовые насадки для смешивания» к медицинскому изделию: Материал композитный низкомолекулярный (для восстановления культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО»




**Одноразовые насадки
для смешивания**
5 шт.

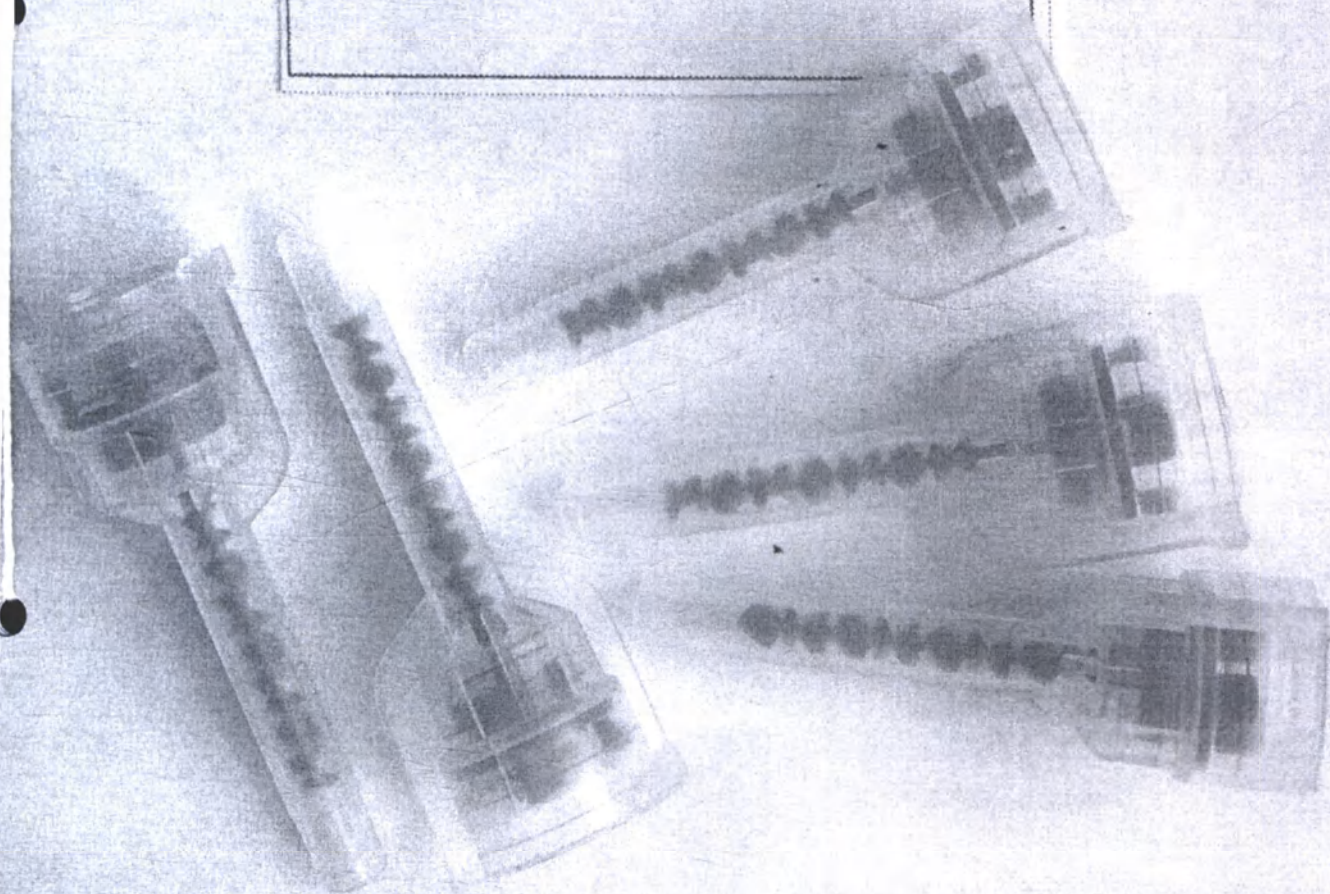

Фотографическое изображение принадлежности «Шпатель для замешивания» к
медицинскому изделию: Материал композитный низкомолекулярный (для восстановления
культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО»

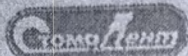

Шпатель
для замешивания
10 штук

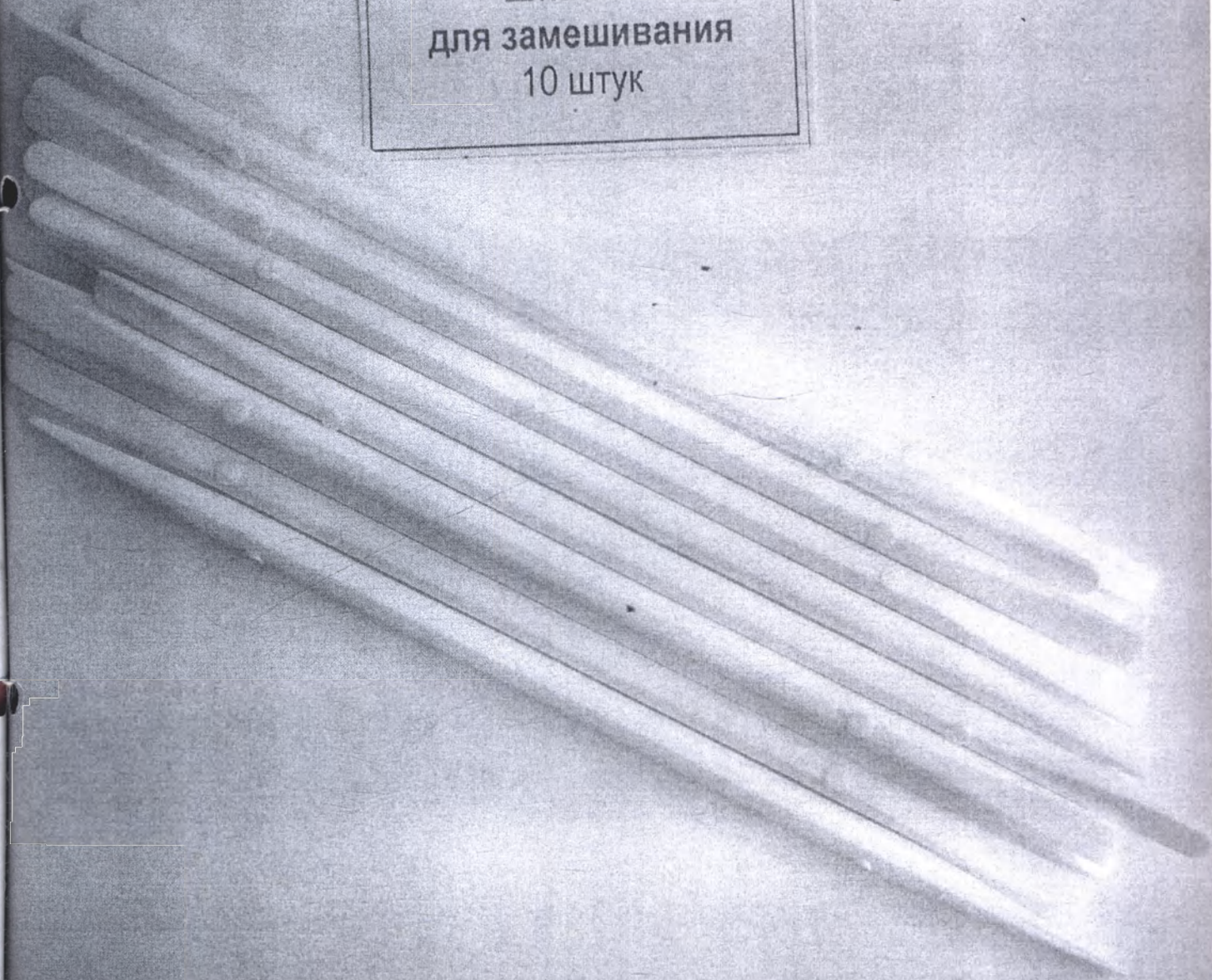

Фотографическое изображение принадлежности «Блокнот для замешивания» к медицинскому изделию: Материал композитный низкомолекулярный (для восстановления культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО»




**Блокнот
для замешивания
1 шт.**


Фотографическое изображение принадлежности «Одноразовые насадки для внесения смешанного материала» к медицинскому изделию: Материал композитный низкомолекулярный (для восстановления культи зуба) двойного отверждения «ФлоуКор ДУО»



**Одноразовые насадки
для внесения
смешанного материала
5 шт.**

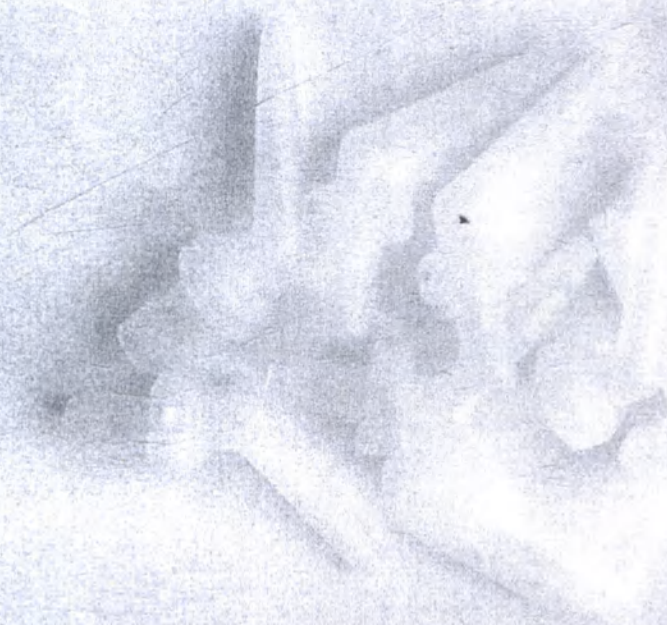


Фотографическое изображение принадлежности «Кювета» к медицинскому изделию:
Материал композитный низкомолекулярный (для восстановления культи зуба) двойного
отверждения «ФлоуКор ДУО»

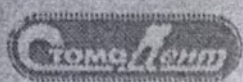

Кювета

1 шт.

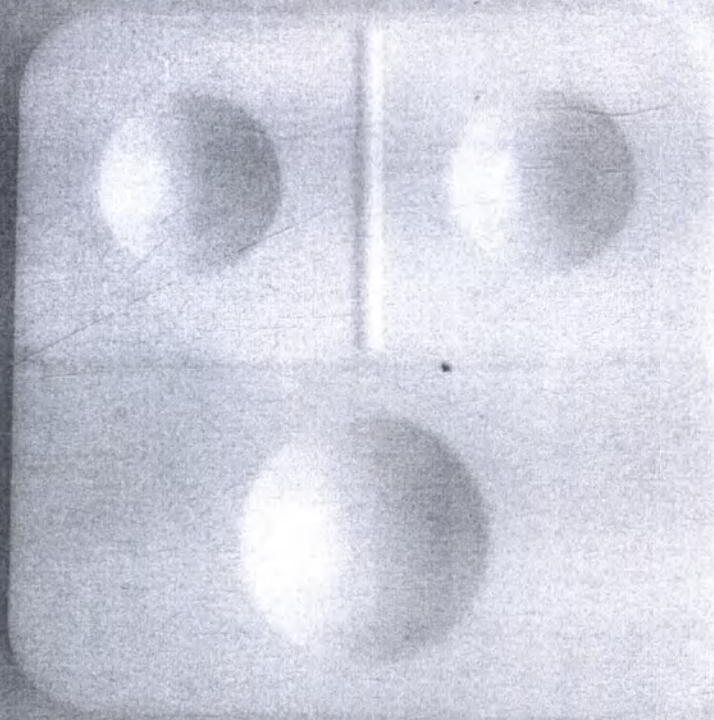

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 5 лист.

Генеральный директор
ООО «СТОМАДЕНТ» Ю.В.Кузовков

