



Общество с ограниченной ответственностью

420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Галеева 12 Тел./факс: (843) 272-10-04  
ИНН 1660033075 КПП 166001001 ОКПО 48675428 ОКОНХ 19320  
Р/счет: 4070281 2190100997 в банке «Татарстан» № 8610 СБ РФ г. Казани БИК 049205603  
К/счет: 30101810600000000603 СОСБ № 6669/0000 СБ РФ г. Казани.

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР  
ШТОПОРОВ Ю.В.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Опора»



## Бандаж на коленный сустав разъемный БН6 – 67 Памятка по пользованию

Бандаж на коленный сустав разъемный БН6 – 67 изготавливается по ТУ 9396-083-55220088-2006 (далее бандаж).

Бандаж предназначен при легкой нестабильности коленного сустава, артрозо – артрите, бурсите, синовите и в реабилитационном периоде после травм и операций коленного сустава.

Благодаря своей разъемной конструкции прост в надевании, что позволяет использовать его при лечении пациентов с широким объемом нижней трети бедра, а также пациентам пожилого возраста.

### КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж изготавливается из ткани «Ортопрен» или башмачной резины с фиксирующими застежками «Контакт» разъемным.

Застежки в бандаже изготовлены из застежки текстильной «Контакт».

### НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНДАЖОМ

Надевается бандаж непосредственно на тело или хлопчатобумажный чулок.

Фиксация бандажа на нижней конечности осуществляется с помощью пристроченных с передней стороны бандажа застежек текстильных «Контакт», а также с помощью ремней из ткани «Ортопрен», башмачной резины, ленты «стропа», оканчивающихся застежкой текстильной «Контакт».

Бандаж должен плотно прилегать к телу, не оказывать болезненного давления, не смещаться вдоль конечности.