

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОПОРА»
(ООО «ОПОРА»)

УТВЕРЖДАЮ



КОРСЕТ ЭЛАСТИЧНЫЙ НА ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ
ПОЗВОНОЧНИКА С РЕКЛИНАТОРОМ
КРО - 81

Памятка по пользованию
КРО – 81.00.00.ПП

Имя № подл	Подп. и дата	Вып. Инв. №	Имя № подл	Подп. и дата

Корсет эластичный на грудопоясничный отдел позвоночника с реклинатором КРО-81 назначается при остеохондрозе, кифозе, кифосколиозе, остеопорозе, начальной форме болезни Шюермана – Мау, нарушении осанки, типичной «круглой» спине при ДЦП.

1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Корсет КРО-81 является изделием как индивидуального, так и массового изготовления.

Размеры изделий индивидуального изготовления должны соответствовать размерным признакам фигуры потребителя, указанным в бланке-заказе.

Изделия массового изготовления должны соответствовать требованиям технических условий и типоразмерам:

Корсет КРО-81 выполнен составным при помощи застежки текстильной «Контакт».

Реклинатор выполнен из пелота снашитыми на него двумя ремнями соединяемых между собой при помощи застежек текстильных «Контакт» или пряжками.

Пелот изготовлен из ленты эластичной с планшетами, расположенными вертикально между основным материалом и планками из ленты отделочной нашитой с наружной стороны пелота.

2. НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ КОРСЕТОМ

2.1. Корсет надевают непосредственно на тело или хлопчатобумажное белье в положении стоя или сидя и тщательно расправляют складки. Осуществляется поддержка, разгрузка и фиксация грудного и пояснично - крестцового отделов позвоночника в физиологически выгодном положении.

2.2. Конструкция корсета должна обеспечивать удобство пользования надевания и снятия.

2.3. Корсет должен плотно прилегать к телу, не оказывая болезненного давления, не смещаться вдоль тела и не ограничивать

КРО – 81.00.00.ПП

					КРО – 81.00.00.ПП			
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	Корсет эластичный на грудопоясничный отдел позвоночника с реклинатором КРО-81	Лит	Лист	Листов
Разраб.		Васильевский И.И.	И.И.	11.06		A	2	4
Пров.		Игорев А.В.	И.В.	11.06				
Н. контр.		БЕТЕВ Б.П.	Б.П.	12.06				
Утв.						ООО «ОПОРА»		

Копировал

Формат

дыхательные движения.

2.4. Носить корсет необходимо в течении всего дня, кроме часов отдыха в постели и процедур гимнастики и массажа.

3. УХОД ЗА КОРСЕТОМ

3.1. При пользовании корсетом следует оберегать его от механических повреждений.

3.2. В случае загрязнения стирать корсет вручную в теплой воде с добавлением нейтральных моющих средств или детского мыла. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла, не гладить.

4. УХОД ЗА ТЕЛОМ

Не реже двух раз в сутки следует проводить гигиеническую обработку кожных покровов тела мыльным раствором.

5. РЕМОНТ КОРСЕТА

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 40 дней со дня выдачи потребителю. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие-изготовитель производит замену изделия бесплатно.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- корсет КРО – 81 – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Подп. и дата	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КРО – 81.00.00.ПІ	3

Лист регистрации изменений

[illegible]

Име. №	Годн. и дата	Взам. иог. №	Име. № дѣлѣ	Годн. и дата

KPO - 81.00.00.ΓΠ