

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Концептгрупп»



Хафизова М.В.
15 ноября 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Презервативов марки LifeStyles

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие используют в качестве противозачаточного, профилактического и предохраняющего от болезней, передаваемых половым путем и нежелательной беременности средства

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Принцип действия

Презерватив следует надевать на половой член перед контактом с телом партнерши, это позволит избежать заражения болезнями, передающимися половым путем и нежелательной беременности.

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВОМ

Открыть упаковку и достать презерватив. Презерватив следует надевать только при достижении эрекции. Расположить свернутый презерватив на головке пениса (свернутой частью наружу). Одной рукой сжать резервуар презерватива, чтобы выпустить воздух, тем самым создать место для спермы. Другой рукой раскатать презерватив по всей длине пениса. После семяизвержения извлечь половой член из влагалища, плотно придерживая презерватив у основания. Завернуть использованный презерватив в салфетку и поместить в емкость для отходов. Не выбрасывать презерватив в унитаз.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит натуральный латекс, способный вызвать аллергическую реакцию. Правильное использование презервативов способствует снижению риска беременности, заражения болезнями, передающимися половым путем,


однако он не обеспечивает 100% защиты. Не использовать смазки и вещества на масляной основе, т.к. они разрушают структуру латекса. Использовать только один раз.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25С вдали от солнечных лучей

Генеральный директор
ООО Концептгрупп
Хафизова М.В.

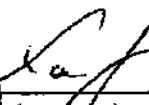


(подпись)

Ф.И.О