

«УТВЕРЖДАЮ»



ИНСТРУКЦИЯ

по применению: Стекла для микроскопических исследований предметные и покровные
производства: Лейка Биосистемс Ричмонд Инк. (Leica Biosystems Richmond Inc.), США.

1. Назначение
2. Основные технические характеристики
3. Противопоказания к применению
4. Подготовка изделия к работе
5. Порядок работы изделия
6. Правила хранения и использования
7. Требования безопасности

1. Назначение

Стекла для микроскопических исследований предметные и покровные производства Лейка Биосистемс Ричмонд Инк. (Leica Biosystems Richmond Inc.), США, предназначены для приготовления и сохранения микроскопического препарата с целью его дальнейшего исследования при помощи микроскопа. Стекла предметные предназначены для микроскопирования микропрепаратов в видимой части спектра микроскопа, стекло покровное предназначено для защиты микропрепаратов от пыли и механических повреждений.

Область применения – клиническая лабораторная диагностика.

2. Основные технические характеристики

Предметные и покровные стекла производства Лейка Биосистемс Ричмонд Инк. (Leica Biosystems Richmond Inc.), США, изготовлены из прозрачного бесцветного боросиликатного стекла, показатель преломления $1,51 \pm 0,01$, поверхность стекла имеет идеально гладкую, ровную поверхность, не содержит пузырей, царапин, инородных вкраплений. Стекла имеют шлифованную кромку, выпускаются с полем для нанесения маркировки и без него. Полностью готовы к использованию. Размер предметного стекла 26x76 мм, толщина 1 мм. Покровные стекла выпускаются в 16 вариантах размеров, толщина 0,13-0,17 мм и 0,16-0,19 мм

3. Противопоказания к применению

Не следует использовать в работе стекла имеющие механические повреждения, а также стекла с истекшим сроком годности.

4. Подготовка изделия к работе

Стекла для микроскопических исследований предметные и покровные производства Лейка Биосистемс Ричмонд Инк. (Leica Biosystems Richmond Inc.), США, полностью готовы к работе и не требуют дополнительной подготовки.

5. Порядок работы изделия

Принцип действия заключается в возможности зафиксировать гистологический препарат между предметным и покровным стеклами для дальнейшего исследования биологического объекта при помощи микроскопа: срез ткани или клеточный мазок наносится на предметное стекло, заливается специальной монтирующей средой и сверху накрывается покровным стеклом. Предметные и покровные стекла производства Лейка Биосистемс Ричмонд Инк. (Leica Biosystems Richmond Inc.), США, предназначены не только для повседневных лабораторных исследований, но и для специальных методик (иммуногистохимические исследования, *in situ* гибридизация, молекулярные методы исследования).

6. Правила хранения и использования

Стекла для микроскопических исследований предметные и покровные хранят при комнатной температуре, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте. Не следует применять изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке.

7. Требования безопасности

При работе следует соблюдать требования ГОСТ Р 529205-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».

Удалять неиспользованные компоненты необходимо в соответствии с требованиями СП 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» и МУ 287-113 по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

8 По вопросам качества продукции обращаться по адресу:

ООО «БиоЛайн», Центральный офис
197101, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36 литера А
Тел. (812) 320-49-49, факс (812) 320-49-42.

ООО «БиоЛайн» филиал в г. Москва
127473, Москва, 1-й Волконский переулок, д.11, стр. 2
Тел. 8-800-555-49-40

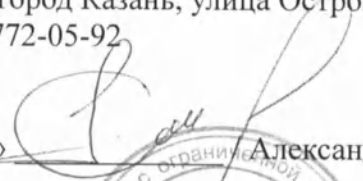
ООО «БиоЛайн» филиал в г. Нижний Новгород
603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 13 В, б/ц "Портал", офис 122
тел./факс: (831) 278-61-47

ООО «БиоЛайн» филиал в г. Новосибирск
630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д. 16, офис 902
Тел. (383) 227-09-63, Тел./факс (383) 212-54-47

ООО «БиоЛайн» филиал в г. Екатеринбург
620014 г. Екатеринбург, Белинского, д.39
Тел. (343) 380-23-48

ООО «БиоЛайн» филиал в г. Ростов-на-Дону:
344018, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Текучева, дом 234, оф. 502
тел.: (863) 268-99-32

ООО «БиоЛайн» филиал в г. Казань:
420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Островского, дом 87, оф. 501
тел.: 8 (843) 570-66-88; 8 (937) 772-05-92

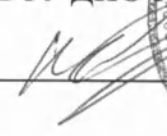
Генеральный директор ООО «БиоЛайн»  Александр Владимирович Семенов/

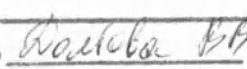
«20» июля 2012 г.

М.П.

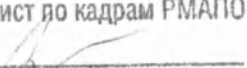
«СОГЛАСОВАНО»

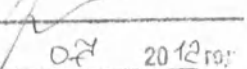
Зав. кафедрой клинической лабораторной
диагностики ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России, д.м.н., профессор

 Долгов В.В.

Подпись 
удостоверяю:

Специалист по кадрам РМАПО

Подпись 

«20»  20 12 г.

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 3 листов

Генеральный директор

ООО «БиоЛайн»

Семенов А.В.

