

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТФК ОРТО»

ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ МАЛОСЛОЖНАЯ

по ТУ 32.50.22-001-15135148-2017

Инструкция по эксплуатации. Редакция 002

1 Назначение

Инструкция по эксплуатации распространяется на обувь ортопедическую по ТУ 32.50.22-001-15135148-2017, предназначенную для взрослых и детей с деформациями и дефектами стоп, имеющих медицинские показания к ее использованию.

2 Показания к применению

Малосложная ортопедическая обувь предназначена должна применяться при следующих заболеваниях и дефектах:

- при продольном плоскостопии;
- распластанности переднего отдела стопы;
- сочетанной форме плоскостопия;
- вальгусной, плосковальгусной стопе;
- варусной, половарусной стопе;
- поллой стопе;
- эквинусной стопе;
- пяточной стопе;
- косолапости;
- отвисающей стопе;
- паралитической стопе;
- диабетической стопе;
- лимфостазе;

3 Противопоказания

Ношение ортопедической обуви не рекомендовано при диагностике:

- некроза костей стопы;
- острых и хронических суставных воспалений;
- незаживающих ран, язв, болезненных рубцов;
- рецидивирующих воспалительных процессов на коже;
- застойных трофических явлений и хронических отеков;
- эндартериита сосудов нижних конечностей, тромбофлебита;
- некоторых индивидуальных особенностей стопы (большая полнота или длина стопы, широкая пучковая часть, увеличенный объем голени).

4 Побочные эффекты

Побочных эффектов не выявлено.

5 Указания по эксплуатации и меры предосторожности

Обувь следует эксплуатировать при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 40 °С и относительной влажности, не превышающей 100% при 25 °С.

При эксплуатации обуви следует соблюдать следующие условия:

- при эксплуатации обуви учитывайте сезонность. Помните, кожаная обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, так как она не является непромокаемой (как, например, резиновая);
- изменение цвета верха обуви при попадании воды не является дефектом;
- при одевании обуви обязательно расшнуровывайте шнурки, застёжки и всегда пользуйтесь рожек для обуви (во избежание заломов задника);
- перед снятием обуви ослабьте шнурки, ремешок или «липучку», а потом снимайте, придерживая рукой. Никогда не снимайте обувь, наступая на задник;
- не перетягивайте шнурки в районе голеностопа во избежание разрыва кожи, декоративной строчки;
- новую обувь из натуральной кожи следует начистить сразу после покупки. Используйте только подходящие и качественные средства для ухода за кожаной обувью. Во избежание изменения цвета обуви будьте внимательны при выборе кремов соответствующих оттенков;
- чистите обувь, по крайней мере, раз в неделю. Для чистки обуви из натуральной кожи используйте обувной крем или восковую эмульсию. Пользуйтесь специальной мягкой щеткой. Крем должен хорошо впитываться;
- грязную обувь сначала нужно очистить специальной щеткой, влажной тряпкой или губкой, не давая грязи впитаться в кожу. Лишь потом можно ухаживать за кожей;
- никогда не сушите мокрую обувь на отопительных приборах или вблизи открытого огня. Кожа после этого становится жесткой, хрупкой и ломкой;
- сушите обувь при комнатной температуре, предварительно вложив внутрь скомканную бумагу. Снимая обувь на ночь, вынимайте супинаторы для просушки. Супинаторы, изготовленные из натуральных материалов (кожа, пробка) мыть нельзя, при загрязнении можно их протереть влажной салфеткой, смоченной в мыльном растворе;
- храните обувь в хорошо проветриваемом или вентилируемом месте;
- не оставляйте на хранение обувь в грязном состоянии, так как это может стать причиной изменения цвета, а также привести к деформации обуви;
- избегайте воздействия на материал верха обуви щелочей, кислот и других активных растворителей;
- не рекомендуется ходить в обуви по гравию, щебню, поверхностям, на которых

имеется техническая соль;

- не допускайте чрезмерных механических нагрузок, ударов, порезов, которые, как правило, приводят к отрыву подошвы, фурнитуры;
- не надевайте обувь на голую ногу, так как это негигиенично и может быть причиной появления мозолей, дефектов кожи и мелких ран;
- следует учитывать, что при повышенной потливости ног или при намокании, обувь может окраситься изнутри;

Не допускайте нахождения обуви рядом с источниками возгорания, например:

- от изделий, предназначенных для курения;
- печей, плит и других кухонных нагревательных приборов;
- зажигательных приборов с открытым пламенем;
- электростатических заряжающих устройств.

6 Состав обуви ортопедической

Наружные детали верха обуви ортопедической изготавливаются из натуральной кожи, для малоответственных деталей отделки могут применяться текстильные материалы.

Внутренние детали верха обуви изготовлены из натуральной подкладочной кожи, либо из шерстяной ткани, либо из натурального меха.

Промежуточные детали верха обуви изготовлены из специальных эластичных или термопластичных материалов.

Внутренние детали низа: основные стельки и простилки изготовлены из стелечного картона и простилочного картона соответственно.

Супинатор – из стали.

Формованная подошва изготовлена из ТЭП, либо полиуретана. Подошва для обуви ортопедической малосложной для больных сахарным диабетом изготовлена из микропористой резины. Рант – из поливинилхлорида. Формованные стельки-супинаторы изготовлены из вспененного полиуретана, дублированного кожаной стелькой. На ходовой поверхности подошвы имеется рисунок.

7 Рекомендации по ношению ортопедической обуви

Особые предупреждения при ношении ортопедической обуви:

В первые дни ношения ортопедической обуви возможны непривычные ощущения. Пусть это вас не тревожит: ваши мышцы и суставы «привыкли» к патологической позиции, и требуется время, чтобы правильная постановка стоп вновь стала нормой жизни. В первые недели ношения ортопедической обуви возможны покраснения в местах давления и небольшие мозоли.

Рекомендуемое время ношения ортопедической обуви:

Первые 3 дня — с 1,5 до 3-х часов в день.

Следующие 7-10 дней — до 5 часов в день.

Привыкание к ортопедической обуви — индивидуально и в среднем составляет от 2-х до 6 недель.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование обуви должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование и хранение по ГОСТ 7296

При иногородних отправлениях, в радиусе более 100 км, транспортирование производят в транспортной таре в контейнерах, без контейнеров и транспортными пакетами по ГОСТ 21929-76.

Транспортирование обуви пакетами должно соответствовать требованиям ГОСТ 21929-76, ГОСТ 24597-81 и ГОСТ 26663-85.

Транспортирование обуви и комплектов кроя в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-79.

Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже +14°C и не выше +25°C и относительной влажности воздуха 50-80%.

Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м.

Расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, расстояние хранящихся изделий от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м. Между стеллажами, штабелями и стенками склада должны быть проходы шириной не менее 0,7 м.

Изделия должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

Складское помещение должно иметь достаточное естественное или искусственное освещение в соответствии с действующими нормами строительного проектирования.

9 Утилизация

Утилизация обуви в быту — совместно с твёрдыми бытовыми отходами.

Утилизация обуви в медицинских учреждениях - как отходы класса А в соответствии с СанПин 2.1.7.2790.

10 Комплектность

В комплект поставки обуви входит:

- обувь (согласно таблице 2) — 1 пара;
- инструкция по эксплуатации — 1 экз.

11 Символы, применяемы на упаковке



- знак обращения на территории Таможенного Союза

12 Производитель

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТФК ОРТО»

Адрес места производства: Россия, 141191, Московская обл., г. Фрязино, ул. Горького, д. 10А, корп. 2.

Номера телефонов: (925) 222-21-14, 8-800-500-03-30 доб. 120.

Электронная почта: tfk-cfo-yrotdel@mail.ru

13 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует качество обуви настоящим техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона:

- на кожаной подошве - 40 дней;
- на кожаной подошве с накладкой - 50 дней;
- на подошве из кожеподобной резины - 60 дней;
- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта - 70 дней;
- на детскую обувь - 45 дней

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству обуви и производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Обувь ортопедическая малосложная по

ТУ 32.50.22-001-15135148-2017

Вид обуви

Артикул

Материал верха

Материал подкладки

Подошва

Номер ИПР/направления/заказа

Дата покупки/выдачи « ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.

С условиями представления гарантии, эксплуатации, ухода и хранения ознакомлен.

ФИО _____

Подпись _____

Ваше здоровье в надежных руках!

Гарантийный талон

Данный талон дает право на бесплатный ремонт обуви на протяжении указанного ниже гарантийного срока.

Изготовитель гарантирует качество обуви при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона:

на кожаной подошве - 40 дней;

на кожаной подошве с накладкой - 50 дней;

на подошве из кожеподобной резины - 60 дней;

на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта - 70 дней;

на детскую обувь - 45 дней

Гарантия на обувь не распространяется в следующих случаях:

- Дефект появился вследствие применения товара с целью, не соответствующей общепринятой сфере применения данного товара.

- Дефект вызван попаданием внутрь изделия или на его поверхность химических реагентов.

- Дефект появился вследствие грубого механического воздействия или ускоренного естественного износа.

- Дефект возник вследствие несчастного случая или форс-мажорных обстоятельств.

- Изменение цвета верха обуви при попадании воды не является дефектом.

- Гарантия не распространяется на набойки, шнурки и прочую фурнитуру.

Данные условия не ущемляют законных прав Потребителя, предоставленных ему действующим законодательством Российской Федерации.

Все замечания, вопросы и предложения по качеству обслуживания Вы можете отправить на электронный адрес tfk-ortozakaz@mail.ru или позвонить по телефону 8-800-500-03-30 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 мск.

14 Технические характеристики

Таблица 1 - Параметры ортопедической обуви, изготавливаемой на подбор, в исходных размерах

Половозрастная группа обуви	Размер обуви	Высота обуви, мм, не менее					Высота задников, мм	
		Сапог	Сапожек	Полусапожек	Ботинок	Полуботинок, туфель, сандалий	Сапожек, полусапожек	Ботинок, полуботинок, туфель, сандалий
Для ясельного возраста	130	-	110	-	80	41	36	28
Малодетская	155	-	126	-	106	45	40	32
Дошкольная	185	-	150	-	118	49	44	36
Для школьников-девочек	225	-	180	145	139	59	50	42
Для школьников-мальчиков	230	-	184	150	114	60	50	42
Девичья	235	-	190	160	143	61	52	44
Мальчиковая	265	-	210	179	124	65	56	48
Женская	240	345	110	180	156	61	44	44
Мужская	270	410	215	180	126	65	48	48

Примечания

1 Высота обуви и задников во всех полнотах не должна меняться. Допускается изменять высоту ботинок по назначению врача.

2 Высоту обуви в готовом виде измеряют от середины верхнего края берцев (голенищ) до грани следа:

- сапог и сапожек - по внешней стороне голенища;
- полусапожек и ботинок - по внутренней стороне голенища или берца;
- полуботинок, сандалет, туфель - по заднему шву.

3 Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть:

- 4 мм - для сапог и сапожек;
- 3 мм - для полусапожек;
- 2 мм - для ботинок;
- 1 мм - для полуботинок и туфель.

4 Разница в высоте задников двух смежных размеров обуви должна быть 2 мм.

5 Высота обуви с межстелечным слоем должна быть увеличена на толщину межстелечного слоя.

Таблица 2 Характеристики и варианты исполнения обуви

Группа обуви		Размер (штихмассовый) размер по ГОСТ 11373)	Исходный размер группы	Полнота
Номер	Наименование			
1	Обувь для старшего ясельного возраста			
	Сандалии 2009 С-КП, 2011 С-КП, 2020 С-КП, 2021 С-КП, 2022 С-КП, 2023 С-КП	105 (17), 110 (18), 115 (19), 120 (19,5), 125 (20), 130 (21), 135 (22), 140 (22,5)	130	2
	Туфли 2006 Т-КП, 2029 Т-КП, 2030 Т-КП	105 (17), 110 (18), 115 (19), 120 (19,5), 125 (20), 130 (21), 135 (22), 140 (22,5)	130	
	Ботинки 2001 Б-КП, 2008 Б-ТМ, 2008 Б-М 2012 Б-ТМ, 2015 Б-М, 2024 Б-ТМ, 2024 Б-М, 2025 Б-ТМ, 2025 Б-М, 2027 Б-М, 2028 Б-ТМ, 2028Б-М	105 (17), 110 (18), 115 (19), 120 (19,5), 125 (20), 130 (21), 135 (22), 140 (22,5)	130	
2	Обувь малолетская			
	Сандалии 2009 С-КП, 2011 С-КП, 2020 С-КП, 2021 С-КП, 2022 С-КП, 2023 С-КП	145 (23), 150 (24), 155 (25), 160 (25,5), 165 (26)	155	3
	Туфли 2006 Т-КП, 2029 Т-КП, 2030 Т-КП	145 (23), 150 (24), 155 (25), 160 (25,5), 165 (26)	155	
	Полуботинки 2003 ПБ-КП, 6001ПБ-КП	145 (23), 150 (24), 155 (25), 160 (25,5), 165 (26)	155	
	Ботинки 2001 Б-КП, 2008 Б-ТМ, 2008 Б-М 2012 Б-ТМ, 2015 Б-М, 2024 Б-ТМ, 2024 Б-М, 2025 Б-ТМ, 2025 Б-М, 2027 Б-М, 2028 Б-ТМ, 2028Б-М	145 (23), 150 (24), 155 (25), 160 (25,5), 165 (26)	155	
3	Обувь дошкольная			
	Сандалии 2009 С-КП, 2011 С-КП, 2020 С-КП, 2021 С-КП, 2022 С-КП, 2023 С-КП	170 (27), 175 (28), 180 (28,5), 185 (29), 190 (30), 195 (31), 200 (31,5)	185	3
	Туфли 2006 Т-КП, 2029 Т-КП, 2030 Т-КП	170 (27), 175 (28), 180 (28,5), 185 (29), 190 (30), 195 (31), 200 (31,5)	185	
	Полуботинки 2003ПБ-КП,6001 ПБ-КП, 6002 ПБ-КП, 6003 ПБ-КП, 6004 ПБ-КП, 6005 ПБ-КП	170 (27), 175 (28), 180 (28,5), 185 (29), 190 (30), 195 (31), 200 (31,5)	185	
	Ботинки 2001 Б-КП, 2008 Б-ТМ, 2008 Б-М 2012 Б-ТМ, 2015 Б-М, 2024 Б-ТМ, 2024 Б-М, 2025 Б-ТМ, 2025 Б-М, 2027 Б-М, 2028 Б-ТМ, 2028Б-М	170 (27), 175 (28), 180 (28,5), 185 (29), 190 (30), 195 (31), 200 (31,5)	185	
4	Обувь для школьников-девочек			
	Сандалии 2009 С-КП, 2011 С-КП, 2020 С-КП, 2021 С-КП, 2022 С-КП, 2023 С-КП	205 (32), 210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37)	225	3
	Туфли 2006 Т-КП, 2029 Т-КП, 2030 Т-КП, 7002 Т-КП, 8009 Т-КП, 8010 Т-КП, 8012 Т-КП	205 (32), 210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37)	225	
	Полуботинки 2003 ПБ-КП, 6001 ПБ-КП, 6002 ПБ-КП, 6003 ПБ-КП, 6004 ПБ-КП, 6005 ПБ-КП, 8013 ПБ-КП	205 (32), 210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37)	225	

Группа обуви		Размер (штихмассовый) размер по ГОСТ 11373)	Исходный размер группы	Полнота
Номер	Наименование			
	Ботинки 2001 Б-КП, 2008 Б-ТМ, 2008 Б-М 2012 Б-ТМ, 2015 Б-М, 2024 Б-ТМ, 2024 Б-М, 2025 Б-ТМ, 2025 Б-М, 2027 Б-М, 2028 Б-ТМ, 2028Б-М	205 (32), 210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37)	225	
5	Обувь девичья			
	Сандалии 2009 С-КП, 2011 С_КП, 2020 С-КП, 2021 С-КП, 2022 С-КП, 2023 С-КП	225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5), 245 (38), 250 (39), 255 (40)	235	3
	Туфли 7002Т-КП, 8009 Т-КП, 8010 Т-КП, 8012 Т-КП	225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5), 245 (38), 250 (39), 255 (40)	235	
	Полуботинки 2003 ПБ-КП, 6001 ПБ-КП, 6002 ПБ-КП, 6003 ПБ-КП, 6004 ПБ-КП, 6005 ПБ-КП, 8001 ПБ-КП, 8013 ПБ-КП, 8014 ПБ-КП, 8016 ПБ-КП, 8022 ПБ-КП	225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5), 245 (38), 250 (39), 255 (40)	235	
	Ботинки 2008 Б-ТМ, 2008 Б-М 2012 Б-ТМ, 2015 Б-М, 2024 Б-ТМ, 2024 Б-М, 2025 Б-ТМ, 2025 Б-М, 2027 Б-М, 2028 Б-ТМ, 2028Б-М, 8004 Б-ТМ, 8004 Б-М, 8005 Б-ТМ, 8005 Б-М, 8006 Б-ТМ, 8006 Б-М, 8008 Б-ТМ, 8008 Б-М, 8017 Б-ТМ, 8017 Б-М, 8022 Б-ТМ, 8025 Б-ТМ, 9005 Б-ТМ, 9005 Б-М	225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5), 245 (38), 250 (39), 255 (40)	235	
6	Обувь для школьников-мальчиков			
	Сандалии 2009 С-КП, 2011 С_КП, 2020 С-КП, 2021 С-КП, 2022 С-КП, 2023 С-КП	205 (32), 210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5)	230	3
	Туфли 2006 Т-КП, 2029 Т-КП, 2030 Т-КП, 7002 Т-КП, 8009 Т-КП	205 (32), 210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5)	230	
	Полуботинки 2003 ПБ-КП, 6001 ПБ-КП, 6002 ПБ-КП, 6003 ПБ-КП, 6004 ПБ-КП, 6005 ПБ-КП, 8001 ПБ-КП, 8013 ПБ-КП	205 (32), 210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5)	230	
	Ботинки 2001 Б-КП, 2008 Б-ТМ, 2008 Б-М 2012 Б-ТМ, 2015 Б-М, 2024 Б-ТМ, 2024 Б-М, 2025 Б-ТМ, 2025 Б-М, 2027 Б-М, 2028 Б-ТМ, 2028Б-М	205 (32), 210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5)	230	
7	Обувь мальчиковая			
	Сандалии 2009 С-КП, 2011 С-КП, 2020 С-КП, 2021 С-КП, 2022 С-КП, 2023 С-КП	245 (38), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265 (41), 270 (42), 275 (43), 280 (43,5)	265	4
	Туфли 7002 Т-КП, 9004 Т-КП, 9015 Т-КП, 9017 Т-КП, 9018 Т-КП, 9020 Т-КП, 9021 Т-КП	245 (38), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265 (41), 270 (42), 275 (43), 280 (43,5)	265	

Группа обуви		Размер (штихмассовый) размер по ГОСТ 11373)	Исходный размер группы	Полнота
Номер	Наименование			
	Полуботинки 2003 ПБ-КП, 6001 ПБ-КП, 6002 ПБ-КП, 6003 ПБ-КП, 6004 ПБ-КП, 6005 ПБ-КП, 8001 ПБ-КП, 8013 ПБ-КП, 8014 ПБ-КП, 8016 ПБ-КП, 9001 ПБ-КП, 9002 ПБ-КП, 9008 ПБ-КП, 9009 ПБ-КП, 9019 ПБ-КП	245 (38), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265 (41), 270 (42), 275 (43), 280 (43,5)	265	
	Ботинки 2024 Б-ТМ, 2024 Б-М, 2025 Б-ТМ, 2025 Б-М, 2027 Б-М, 2028 Б-ТМ, 2028Б-М, 8004 Б-ТМ, 8004 Б-М, 8005 Б-ТМ, 8005 Б-М, 8006 Б-ТМ, 8006 Б-М, 8008 Б-ТМ, 8008 Б-М, 8017 Б-ТМ, 8017 Б-М, 9005 Б-ТМ, 9005 Б-М, 9011 Б-ТМ, 9011 Б-М, 9012 Б-ТМ, 9012 Б-М, 9013 Б-ТМ, 9013 Б-М, 9014 Б-ТМ, 9014 Б-М, 9016 Б-ТМ, 9016 Б-М	245 (38), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265 (41), 270 (42), 275 (43), 280 (43,5)	265	
8	Обувь женская			
	Туфли 2029 Т-КП, 2030 Т-КП, 7002 Т-КП, 8009 Т-КП, 8010 Т-КП, 8012 Т-КП, 9004 Т-КП, 9015 Т-КП	210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5), 245 (38,5), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265(41), 270 (42), 275 (43)	240	6
	Полуботинки 2003 ПБ-КП, 6001 ПБ-КП, 6002 ПБ-КП, 6003 ПБ-КП, 6004 ПБ-КП, 6005 ПБ-КП, 8001 ПБ-КП, 8013 ПБ-КП, 8014 ПБ-КП, 8016 ПБ-КП, 9001 ПБ-КП, 9002 ПБ-КП, 9008 ПБ-КП, 9009 ПБ-КП, 9019 ПБ-КП	210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5), 245 (38,5), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265(41), 270 (42), 275 (43)	240	
	Ботинки 2008 Б-ТМ, 2008 Б-М 2012 Б-ТМ, 2015 Б-М, 2024 Б-ТМ, 2024 Б-М, 2025 Б-ТМ, 2025 Б-М, 2027 Б-М, 2028 Б-ТМ, 2028Б-М, 8004 Б-М, 8005 Б-ТМ, 8005 Б-М, 8006 Б-ТМ, 8006 Б-М, 8008 Б-ТМ, 8008 Б-М, 8017 Б-ТМ, 8017 Б-М, 9005 Б-ТМ, 9005 Б-М, 9011 Б-ТМ, 9011 Б-М, 9012 Б-ТМ, 9012 Б-М, 9013 Б-ТМ, 9013 Б-М, 8025 Б-ТМ	210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5), 245 (38,5), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265(41), 270 (42), 275 (43)	240	
	Полусапоги 8002 ПС-ТМ, 8002 ПС-М, 8021 ПС-ТМ, 8021 ПС-М, 8022 ПС-ТМ, 8023 ПС-ТМ, 8023 ПС-М, 8024 ПС-ТМ, 8024 ПС-М 9005 ПС-ТМ, 9005 ПС-М	210 (33), 215 (34), 220 (34,5), 225 (35), 230 (36), 235 (37), 240 (37,5), 245 (38,5), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265(41), 270 (42), 275 (43)	240	
9	Обувь мужская			

Группа обуви		Размер обуви (штихмассовый) размер по ГОСТ 11373)	Исходный размер группы	Полнота
Номер	Наименование			
	Сандалии 2009 С-КП, 2011 С-КП, 2020 С-КП, 2021 С-КП 2022 С-КП, 2023 С-КП	245 (38), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265 (41), 270 (42), 275 (43), 280 (43,5), 285 (44), 290 (45), 295 (46), 300 (46,5), 305 (47)	270	от 7
	Туфли 7002 Т-КП, 9004 Т-КП, 9015 Т-КП, 9017 Т-КП, 9018 Т-КП, 9020 Т-КП, 9021 Т-КП	245 (38), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265 (41), 270 (42), 275 (43), 280 (43,5), 285 (44), 290 (45), 295 (46), 300 (46,5), 305 (47)	270	
	Полуботинки 2003 ПБ-КП, 6001 ПБ-КП, 6002 ПБ-КП, 6003 ПБ-КП, 6004 ПБ-КП, 6005 ПБ-КП, 8001 ПБ-КП, 8013 ПБ-КП, 8014 ПБ-КП, 8016 ПБ-КП, 9001 ПБ-КП, 9002 ПБ-КП, 9008 ПБ-КП, 9009 ПБ-КП, 9019 ПБ-КП	245 (38), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265 (41), 270 (42), 275 (43), 280 (43,5), 285 (44), 290 (45), 295 (46), 300 (46,5), 305 (47)	270	
	Ботинки 8004 Б-ТМ, 8004 Б-М, 8005 Б-ТМ, 8005 Б-М, 8006 Б-ТМ, 8006 Б-М, 8008 Б-ТМ, 8008 Б-М, 8017 Б-ТМ, 8017 Б-М, 9005 Б-ТМ, 9005 Б-М, 9011 Б-ТМ, 9011 Б-М, 9012 Б-ТМ, 9012 Б-М, 9013 Б-ТМ, 9013 Б-М, 9014 Б-ТМ, 9014 Б-М, 9016 Б-ТМ, 9016 Б-М	245 (38), 250 (39), 255 (40), 260 (40,5), 265 (41), 270 (42), 275 (43), 280 (43,5), 285 (44), 290 (45), 295 (46), 300 (46,5), 305 (47)	270	

Прошито и пронумеровано

11/04/2019 листа(ов)

Генеральный директор

ООО «ТФК ОРТО»

А.А. Джавадян

