

Рекомендации по применению:

Ходунки на колесиках детские складные арт.ХД-2С предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 60 кг и ростом от 100 см до 140 см.

Ходунки состоят (см. рис. 1) из двух «П» образных опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Каждая опора имеет ножки с отверстиями и фиксирующими кнопками (3), позволяющими регулировать высоту ходунков. Передние ножки оснащены колесами (4), задние ножки – резиновыми наконечниками (5) с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг – перестановка – шаг. Причем перестановка производится путем поднятия задних ножек ходунков, и перекатыванием передних ножек на колесиках.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующих кнопок (6). (см. рис. 1)

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (3), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Для складывания ходунков (см. рис. 1) необходимо нажать два кнопочных фиксатора (6) на центральной перекладине (2), затем сложить ходунки.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
высота, мм	635	760
шаг регулировки по высоте		25
ширина		510
нагрузка, кг		60
вес ходунков, кг		2,42

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Производитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 7, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Зарегистрированный товарный знак

АВЕРСУС®



Ходунки на колесиках детские складные арт. ХД-2С

Рег. удостов. Росздравнадзора № ФСР 2009/06107 от 19.11.2009 г.

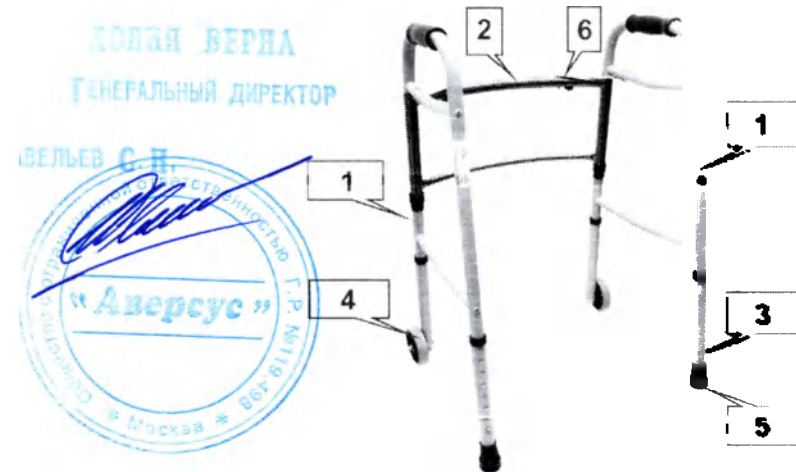


рис. 1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки на колесиках детские складные арт. ХД-2С
изготовлены по ГОСТ Р 51080-97

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наконечники гарантия не распространяется.

Дата выпуска

Сборщик

ОТК

Партия

Производитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Инструкция по применению

Ходунки на колесиках для взрослых (не складные) арт. Х-2 предназначены для опоры при ходьбе людей массой до 120 кг и ростом от 165 см до 190 см, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, а также инвалидов и престарелых. Ходунки состоят из двух "П"-образных опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Стойки передней и задней опоры оснащены резиновыми наконечниками (4) с внутренним диаметром 28 мм. (См. рис. 1)

Для регулирования высоты ходунков необходимо: последовательно на каждой из четырех ножек ходунка нажать фиксирующую кнопку. Сдвинуть трубки ножки относительно друг друга на нужную длину, и при совмещении отверстий зафиксировать положение кнопкой. Шаг регулировки высоты ходунка - 25 мм.

Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг - перестановка - шаг.

Для складывания ходунков необходимо: нажать фиксирующие кнопки на малых перекладинах (6), затем последовательно повернуть опоры (1) вплотную к большой перекладине.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми опорами!

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех 4-х опор с поверхностью, по которой происходит передвижение!

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой р

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Х-2

Высота, мм	Min	Max
	800	975
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		715
Нагрузка, кг		120
Вес ходунков, кг		2,42

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Производитель: ООО «АВЕРСУС»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2

Фактический адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2.

Тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83; info@aversus.ru; www.aversus.ru

Зарегистрированный товарный знак

АВЕРСУС®

Ходунки на колесиках для взрослых (не складные) арт. Х-2

Рег. удостов. Росздравнадзора № ФСР 2009/06105 от 19.11.2009 г.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

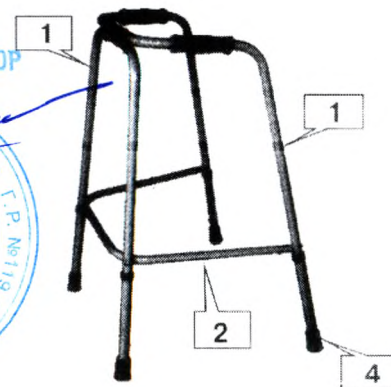


рис. 1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки на колесиках для взрослых (не складные) арт. Х-2 изготовлены по ГОСТ Р 51080-97

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наконечники гарантия не распространяется.

Дата выпуска

Сборщик

ОТК

Партия

Производитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Рекомендации по применению:

Ходунки на колесиках складные ХД-2 предназначены для опоры при ходьбе дете 5-10 лет и весом до 60 кг. имеющих травмы и заболевания нижних конечностей.

Ходунки состоят (см. рис. 1) из двух «П» образных опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Каждая опора имеет ножки с отверстиями и фиксирующими кнопками (3), позволяющими регулировать высоту ходунков. Стойки передней опоры оснащены колесами (4), задние опоры – резиновыми наконечниками с внутренним диаметром 24 мм. (См. Рис. 1)

Принцип действия ходунков состоит в последовательной их перестановке. По принципу: шаг-перестановка-шаг.

Для регулирования высоты ходунков необходимо: последовательно на каждой из 4-х ножек ходунка нажать фиксирующую кнопку. Сдвинуть трубки ножки относительно друг друга на нужную длину, и при совмещении отверстий зафиксировать положение кнопок. Шаг регулировки высоты ходунка - 25 мм.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков. опираться только при контакте всех четырех опор с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХД-2

Высота, мм	Min	Max
	630	750
Шаг перестановки по высоте	25	
Ширина		
- передние опоры	410	445
- задние опоры	510	530
Глубина, мм	430	465
Нагрузка, кг		60
Вес ходунков, кг		1,75

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ГОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем без предварительного уведомления

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Производитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ; www.aversus.ru

Зарегистрированный товарный знак

АВЕРСУС®



ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ НА КОЛЁСИКАХ (НЕ СКЛАДНЫЕ) ХД-2

Рег. удостов. Росздравнадзора № ФСР 2009/06107 от 19.11.2009 г.

ОЛГА ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

З.С.Н.

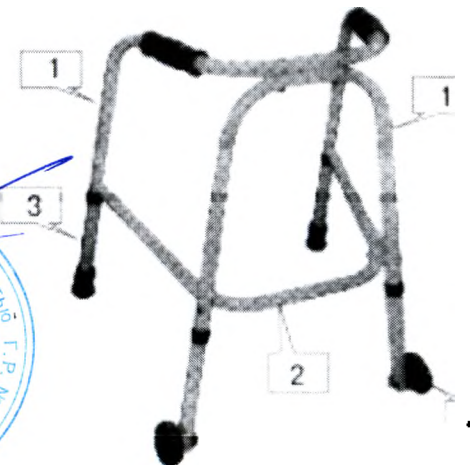


рис. 1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки на колесиках детские складные ХД-2
изготовлены по ГОСТ Р 51080-97

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наконечники
гарантия не распространяется.

Производитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Дата выпуска

Сборщик

ОТК

Партия

Рекомендации по применению:

Ходунки на колесиках складные Х-2С предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом от 165 см до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис. 1) из двух «П» образных опор (1), скрепленных между собой перекладной (2). Каждая опора имеет ножки с отверстиями и фиксирующими кнопками (3), позволяющими регулировать высоту ходунков. Передние ножки оснащены колесами (4), задние ножки – резиновыми наконечниками (5) с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг – перестановка – шаг. При этом перестановка производится путем поднятия задних ножек ходунков, и перекачиванием передних ножек на колесиках.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующих кнопок (6). (см. рис. 1)

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (3), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Для складывания ходунков (см. рис. 1) необходимо нажать два кнопочных фиксатора (6) на центральной перекладке (2), затем сложить ходунки.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
высота, мм	815	990
шаг регулировки по высоте		25
ширина		570
нагрузка, кг		120
вес ходунков, кг		3,0

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать костыли следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения костыли подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Производитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

10, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Зарегистрированный товарный знак

АВЕРСУС®



ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (СКЛАДНЫЕ) Х-2С

Рег. удостов. Росздравнадзора № ФСР 2009/06107 от 19.11.2009 г.

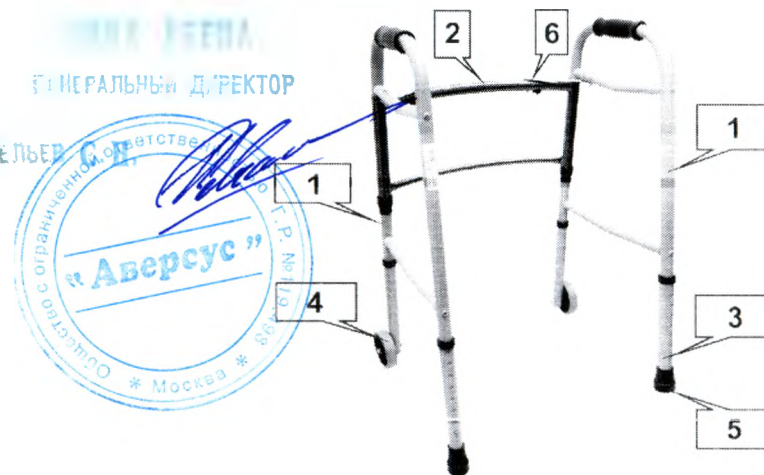


рис. 1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Ходунки на колесиках для взрослых (складные) Х-2С
изготовлены по ГОСТ Р 51080-97 (ИСО 11199-1-96)**

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

**На резиновый наконечник
гарантия не распространяется.**

Дата выпуска

Сборщик

ОТК

Партия

Производитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва