

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Мирпак»
Семенов А.А.

«19» февраля 2019 г.

A blue circular stamp of the company "MIRPAK". The outer ring contains the text "ООО «МИРПАК»" at the top and "МОСКВА" at the bottom. Inside the ring, there is a signature in blue ink and the date "19 февраля 2019 г." written in blue ink.

**Инструкция по применению
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов
классов А, Б, В, Г по ТУ 21.20.23-001-11537720-2017**

2019

Инструкция по применению.

Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г
по ТУ 21.20.23-001-11537720-2017

Вариант исполнения: Пакеты класса А (цвет белый).

состав	Пакеты производятся из полиэтилена низкого давления.
значение	Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса А в организациях, при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.
назначение	Пакеты класса А (белые) предназначены для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса А - эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Характеристика морфологического состава отходов класса А: Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства. Смет от уборки территории и так далее. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических. Пакеты выдерживают нагрузку до 15 кг.
противопоказания	Запрещается использовать пакеты для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов; Запрещается устанавливать одноразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.
способ применения	Пакеты применяются в лечебных учреждениях медицинским персоналом. К работе по обращению с медицинскими отходами допускается только специально обученный персонал по СанПиН 2.1.7.2790-10. Пакет закрепить на специальной стойке-тележке или контейнере и заполнить отходами выбранного класса опасности, по объему примерно на ¾. После этого необходимо из пакета полностью удалить воздух, произвести его герметизацию (для дополнительной герметизации можно использовать пластиковые хомуты – стяжки) и заполнить пустые поля на информационном окне пакета. После заполнения пакеты доставляются с использованием средств малой механизации и перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса, установленные на специальной площадке (в помещении). Примечание: Запрещается осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды»
условия транспортировки, хранения и утилизации	Пакеты транспортируют при температуре от -30°C до +40°C при влажности не более 80% всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Пакеты хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении при температуре от 5 до 40 °C и влажности не более 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок хранения пакетов – 6 мес. Пакеты должны эксплуатироваться при температурах от +15 до +35°C и влажности не более 80%
эксплуатации	Порядок сбора, хранения, удаления, и утилизации отходов в медицинских подразделениях осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Неиспользованные пакеты утилизируются, как твердые бытовые отходы.
маркировка	Каждом пакете имеется следующая маркировка: наименование изделия, обозначение технических условий, класс опасности, размер пакета, толщина пакета, максимальная нагрузка, предупреждение: Используйте средства индивидуальной защиты, предупреждение: Пакет не предназначен для острых и режущих предметов, указание по наполнению и герметизации пакета, информация о производителе, информация о месте производства, информация о регистрационном удостоверении, дата производства, срок хранения, символы: используйте защитные перчатки, используйте защитные очки, добровольная сертификация ГОСТ Р, информационное окно для заполнения, со следующими графами: * наименование ЛПУ; * наименование подразделения; * ответственное лицо; * дата заправки отходов. Сведения, отмеченные «*» заполняются ответственным за упаковку отходов лицом.

Основные типоразмеры пакетов класса А

Класс отходов	Цвет	Габаритные размеры, мм			Допускаемая масса отходов, кг
		Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мкм	
А	белый	300	330	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
А	белый	330	600	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
А	белый	500	600	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
А	белый	600	1000	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
А	белый	700	800	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
А	белый	700	1100	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
А	белый	800	900	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
			1100	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15

Инструкция по применению.
Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г
по ТУ 21.20.23-001-11537720-2017

Вариант исполнения: Пакеты класса Б (цвет желтый).

Состав	Пакеты производятся из полиэтилена низкого давления с добавлением красителя.
Назначение	Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса Б в организациях, при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.
Показания	Пакеты класса Б (желтые) предназначены для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса Б - эпидемиологически опасных отходов. Характеристика морфологического состава отходов класса Б: Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и так далее). Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Живые вакцины, непригодные к использованию. Пакеты выдерживают нагрузку до 15 кг.
Противопоказания	Запрещается использовать пакеты для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов; Запрещается устанавливать одноразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.
Способ применения	Пакеты применяются в лечебных учреждениях медицинским персоналом. К работе по обращению с медицинскими отходами допускается только специально обученный персонал по СанПиН 2.1.7.2790-10. Пакет закрепить на специальной стойке-тележке или контейнере и заполнить отходами выбранного класса опасности, по объему примерно на ¼. После этого необходимо из пакета полностью удалить воздух, произвести его герметизацию (для дополнительной герметизации можно использовать пластиковые хомуты – стяжки) и заполнить пустые поля на информационном окне пакета. После заполнения пакеты доставляются с использованием средств малой механизации и перетружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса, установленные на специальной площадке (в помещении). Примечание: Запрещается осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды»
Условия транспортировки, хранения и эксплуатации	Пакеты транспортируют при температуре от -30°C до +40°C при влажности не более 80% всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Пакеты хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении при температуре от 5 до 40 °C и влажности не более 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок хранения пакетов – 6 мес. Пакеты должны эксплуатироваться при температурах от +15 до +35°C и влажности не более 80%
Утилизация	Порядок сбора, хранения, удаления, и утилизации отходов в медицинских подразделениях осуществляется согласно СанПин 2.1.7.2790-10. Неиспользованные пакеты утилизируются, как твердые бытовые отходы.
Маркировка	Каждом пакете имеется следующая маркировка: наименование изделия, обозначение технических условий, класс опасности, размер пакета, толщина пакета, максимальная нагрузка, предупреждение: Используйте средства индивидуальной защиты, предупреждение: Пакет не предназначен для острых и режущих предметов, указание по наполнению и герметизации пакета, информация о производителе, информация о месте производства, информация о регистрационном удостоверении, дата производства, срок хранения, символы: используйте защитные перчатки, используйте защитные очки, добровольная сертификация ГОСТ Р, информационное окно для заполнения, со следующими графами: * наименование ЛПУ; * наименование подразделения; * ответственное лицо; * дата запакровки отходов. Сведения, отмеченные «*» заполняются ответственным за упаковку отходов лицом.

Основные типоразмеры пакетов класса Б

Класс отходов	Цвет	Габаритные размеры, мм			Допускаемая масса отходов, кг	
		Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мкм		
Б	жёлтый	300	330	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15	
Б	жёлтый	330	600	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15	
Б	жёлтый	500	600	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15	
Б	жёлтый	600	1000	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15	
Б	жёлтый	700	800	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15	
Б	жёлтый	700	1100	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15	
🇷🇺 000 ЦИРМИ 📧 INFO@CIRMI.RU 🌐 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU					8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
Б	жёлтый	1000	1100	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15	

Инструкция по применению.
Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г
по ТУ 21.20.23-001-11537720-2017

Вариант исполнения: Пакеты класса В (цвет красный).

Назначение	Пакеты производятся из полиэтилена низкого давления с добавлением красителя.
Назначение	Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса В в организациях, при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.
Назначение	Пакеты класса В (красные) предназначены для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса В - чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов.
Назначение	Характеристика морфологического состава отходов класса В: Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности. Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза. Пакеты выдерживают нагрузку до 15 кг.
Назначение	Запрещается использовать пакеты для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов; Запрещается устанавливать одноразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.
Назначение	Пакеты применяются в лечебных учреждениях медицинским персоналом. К работе по обращению с медицинскими отходами допускается только специально обученный персонал по СанПиН 2.1.7.2790-10. Пакет закрепить на специальной стойке-тележке или контейнере и заполнить отходами выбранного класса опасности, по объему примерно на ¾. После этого необходимо из пакета полностью удалить воздух, произвести его герметизацию (для дополнительной герметизации можно использовать пластиковые хомуты – стяжки) и заполнить пустые поля на информационном окне пакета. После заполнения пакеты доставляются с использованием средств малой механизации и перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса, установленные на специальной площадке (в помещении). Примечание: Запрещается осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды»
Назначение	Пакеты транспортируют при температуре от -30°С до +40°С при влажности не более 80% всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Назначение	Пакеты хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении при температуре от 5 до 40 °С и влажности не более 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок хранения пакетов – 6 мес.
Назначение	Пакеты должны эксплуатироваться при температурах от +15 до +35°С и влажности не более 80%
Назначение	Порядок сбора, хранения, удаления, и утилизации отходов в медицинских подразделениях осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Неиспользованные пакеты утилизируются, как твердые бытовые отходы.
Назначение	Каждом пакете имеется следующая маркировка: наименование изделия, обозначение технических условий, класс опасности, размер пакета, толщина пакета, максимальная нагрузка, предупреждение: Используйте средства индивидуальной защиты, предупреждение: Пакет не предназначен для острых и режущих предметов, указание по наполнению и герметизации пакета, информация о производителе, информация о месте производства, информация о регистрационном удостоверении, дата производства, срок хранения, символы: используйте защитные перчатки, используйте защитные очки, добровольная сертификация ГОСТ Р, информационное окно для заполнения, со следующими графами: * наименование ЛПУ; * наименование подразделения; * ответственное лицо; * дата заправки отходов.
Назначение	Сведения, отмеченные «*» заполняются ответственным за упаковку отходов лицом.

Основные типоразмеры пакетов класса В

Класс отходов	Цвет	Габаритные размеры, мм			Допускаемая масса отходов, кг
		Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мм	
В	красный	300	330	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
В	красный	330	600	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
В	красный	500	600	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
В	красный	600	1000	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
В	красный	700	800	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
В	красный	700	1100	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
В	красный	900	900	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
В	красный	1000	1100	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15

Инструкция по применению.

Пакеты для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г
по ТУ 21.20.23-001-11537720-2017

Вариант исполнения: Пакеты класса Г (цвет чёрный).

Состав	Пакеты производятся из полистилена низкого давления с добавлением красителя.
Назначение	Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов классов А, Б, В, Г в организациях, при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.
Показания	Пакеты класса Г (чёрные) предназначены для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса Г - токсикологически опасных отходов 1-4 классов опасности. Характеристика морфологического состава отходов класса Г: Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы сырья и продукции фармацевтических производств. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие. Пакеты выдерживают нагрузку до 15 кг
Противопоказания	Запрещается использовать пакеты для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов; Запрещается устанавливать одноразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.
Способ применения	Пакеты применяются в лечебных учреждениях медицинским персоналом. К работе по обращению с медицинскими отходами допускается только специально обученный персонал по СанПиН 2.1.7.2790-10. Пакет закрепить на специальной стойке-тележке или контейнере и заполнить отходами выбранного класса опасности, по объему примерно на ¾. После этого необходимо из пакета полностью удалить воздух, произвести его герметизацию (для дополнительной герметизации можно использовать пластиковые хомуты – стяжки) и заполнить пустые поля на информационном окне пакета. После заполнения пакеты доставляются с использованием средств малой механизации и перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса, установленные на специальной площадке (в помещении). Примечание: Запрещается осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды»
Условия транспортировки, хранения и эксплуатации	Пакеты транспортируют при температуре от -30°C до +40°C при влажности не более 80% всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Пакеты хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении при температуре от 5 до 40 °C и влажности не более 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок хранения пакетов – 6 мес. Пакеты должны эксплуатироваться при температурах от +15 до +35°C и влажности не более 80%
Утилизация	Порядок сбора, хранения, удаления, и утилизации отходов в медицинских подразделениях осуществляется согласно СанПин 2.1.7.2790-10. Неиспользованные пакеты утилизируются, как твердые бытовые отходы.
Маркировка	Каждом пакете имеется следующая маркировка: наименование изделия, обозначение технических условий, класс опасности, размер пакета, толщина пакета, максимальная нагрузка, предупреждение: Используйте средства индивидуальной защиты, предупреждение: Пакет не предназначен для острых и режущих предметов, указание по наполнению и герметизации пакета, информация о производителе, информация о месте производства, информация о регистрационном удостоверении, дата производства, срок хранения, символы: используйте защитные перчатки, используйте защитные очки, добровольная сертификация ГОСТ Р, информационное окно для заполнения, со следующими графами: * наименование ЛПУ; * наименование подразделения; * ответственное лицо; * дата запаковки отходов. Сведения, отмеченные «*» заполняются ответственным за упаковку отходов лицом.

Основные типоразмеры пакетов класса Г

Класс отходов	Цвет	Габаритные размеры, мм			Допускаемая масса отходов, кг
		Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мкм	
Г	чёрный	300	330	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
Г	чёрный	330	600	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
Г	чёрный	500	600	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
Г	чёрный	600	1000	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
Г	чёрный	700	800	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
Г	чёрный	700	1100	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
Г	чёрный	800	900	8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15
				8, 10, 12, 14, 18, 20, 25, 30, 35, 40	15

Всего пронумерованно и сшито
5 (17876) листов
25 февраля 2018 г.



Handwritten signature

(Семенюк А.А.)
МП