

Bohus BioTech

Инструкция по применению на медицинское изделие:

«Имплантат для коррекции дефектов кожи Decoria®»

В вариантах исполнения: Decoria® essence, Decoria® intense, Decoria® voluma
(далее по тексту - имплантат или Decoria® essence, Decoria® intense, Decoria® voluma)

Производитель: Bohus BioTech AB

Адрес: Tradgardsgatan 4, Strömstad, SE-452 31, SWEDEN

Почтовый индекс и город: SE-452 31 Strömstad

Номер телефона: +46 526 146 86

Номер факса: +46 526 126 22

Электронная почта: info@bohusbiotech.com

Уполномоченный представитель на территории РФ:

Представитель: ИП Иванов М.Н.

Адрес: 121614, г. Москва, Осенний б-р, д. 12, корп. 3, кв. 446

Телефон, факс: (495) 223-55-15



I the undersigned Notary Public in Strömstad, Sweden,
hereby certify that this is a true copy from the original
presented to me.

Strömstad 2020-06-08

A blue ink signature of Elin Nilsson, written over a horizontal line.

ELIN NILSSON

Назначение: Имплантат для коррекции дефектов кожи Decoria® предназначен для введения в дерму/гиподерму кожи, подслизистый слой губы и/или для супрапериостального введения для увеличения объема; Имплантат для коррекции дефектов кожи Decoria® служит заполняющей пространство объемной добавкой к внутриклеточному матриксу соединительной ткани (дермальным филлером), обычно используется для коррекции дефектов кожи.

Показания к применению:

Decoria® essence предназначен для коррекции контуров, поверхностных морщин и губ. Продукт следует вводить подкожно через иглу в средне-глубокие слои дермы.

Decoria® intense предназначен для коррекции средних и глубоких морщин и складок и для увеличения губ. Продукт следует вводить подкожно через иглу в глубокие слои дермы и/или в подслои гиподермы.

Decoria® voluma предназначен для изменения форм лица, включая щеки или подбородок, чтобы исправить возрастной дефицит объема. Глубина инъекции может измениться между инъекциями в подкожную ткань до супрапериостальных инъекций, в зависимости от места обработки.

Противопоказания:

- Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma нельзя применять на пациентах с какими-либо острыми или хроническими кожными заболеваниями или воспалениями (таким как прыщи, сыпь или крапивница) в или рядом с областью, выбранной для коррекции
- Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma нельзя применять на пациентах с нарушением свертываемости или на пациентах, принимающих тромболитики или антикоагулянты
- повышенная чувствительность к входящим в состав Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma препаратам компоненты
- наличие онкологических заболеваний у пациента
- возраст пациента до 18 лет
- склонность к образованию гипертрофических рубцов
- аутоиммунные заболевания
- беременность и кормление грудью

Условия применения: Имплантат Decoria® применяют в косметологии, пластической хирургии

Предупреждения:

- Всегда соблюдайте общие меры предосторожности, применяемые к внутрикожным инъекциям.
- Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma содержат следы ДГЭБД (1,4 бутандиол-диглицидил-эфир, менее 0,0001%) используемый в качестве сшивающего агента, который в редких случаях может вызвать раздражение кожи.
- Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma может использоваться только в качестве внутрикожного имплантата правильно обученными, компетентными врачами или уполномоченными сотрудниками в соответствии с национальным законодательством.
- Обычный внутрикожный метод инъекции должен использоваться во время применения.
- Убедитесь, что целостности шприца и иглы ничто не угрожает и проверьте дату окончания срока действия до использования.
- Не смешивайте Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma с другими препаратами или вводите препараты в кровоток.

- Не использовать Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma непосредственно рядом с местом постоянного имплантата или вместе с другими продолжающимися или запланированными лечебными процедурами для кожи, например, лазерной терапией, в той же самой области.
- Не используйте Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma на пациентах с инфекциями или воспалением в намеченной области инъекции.
- Обратите внимание на то, что инъекции Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma могут повторно активировать скрытый вирус простого герпеса или вызвать опухоль типа болезни Квинке.
- Используя вещества, которые могут иметь эффект на тромбоцитную функцию, такие как противовоспалительные препараты или аспирин, у пациента могут появиться более крупные синяки или кровотечение в местах инъекции.
- Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma не испытывались на беременных или кормящих женщинах или на детях.
- Не используйте имплантат, если упаковка была вскрыта.

Инструкция по безопасности при применении имплантатов:

- Строгая стерильность должна соблюдаться в любом случае.
- Decoria essence и Decoria intense должны вводиться внутрикожным образом под морщины или складки, увеличивая объем и добавляя лифтинг и улучшая форму. Корректируя морщины и складки, не смотря на сглаживание, контур будет оставаться прежним.
- Decoria voluma следует вводить подкожно или супрапериостально, увеличивая объем и добавляя лифтинг и форму.
- Результат применения основан на использовании правильного метода инъекции. Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma должны использоваться только уполномоченным персоналом в соответствии с местным законодательством.
- Ожидаемые результаты применения оцениваются для каждого пациента индивидуально. Пациенты с нереализуемыми ожиданиями не должны подвергаться воздействию препарата.
- Всегда проверяйте анамнез пациента перед применением препарата, чтобы гарантировать, что нет никаких противопоказаний. Пациенту необходимо сообщить о признаках, противопоказаниях, а также предупреждениях и мерах предосторожности.
- Необходимо определить необходимость в использовании обезболивания.
- Чтобы достигнуть и поддержать максимальный желаемый результат, пациенту нужно сообщить о необходимости в дополнительном применении (имплантатов).

Передозировка:

Случаи передозировки не зафиксированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Существует несовместимость между гиалуронатом натрия и соединениями четвертичного аммония, такими как хлорид бензалкония. Необходимо избегать контакта имплантата Decoria с такими веществами, а также с инструментами, которые контактировали с названными субстанциями.

Особые указания для безопасного применения:

Продукты предназначены только для однократного применения, и с каждым шприцем поставляется две одноразовые стерильные иглы. Блистеры упакованы в картонную коробку, по одному в упаковке, вместе с инструкцией по применению (ИП).

1. В течение 12 часов после процедуры нельзя наносить на кожу никаких косметических средств. Необходимо исключить воздействие солнечных лучей и ультрафиолетового излучения, а также не посещать сауну и избегать переохлаждения в течение 1 недели после процедуры. Так же после инъекций следует избегать воздействия обработанной поверхности нагревания (загорать, сауна, паровые бани и т. д.) и чрезмерного переохлаждения, пока не исчезнут какие-либо признаки локального воспаления.

2. Нельзя вводить имплантаты Decoria в кровеносные сосуды, а также в кости, сухожилия, связки или мышцы. Не вводите Decoria в невусы (родимые пятна). Не проводите избыточную коррекцию.

Состав имплантатов

Активный ингредиент:	Количество в мл	Функция	Ссылка*
Сшитый Гиалуронат натрия	20 мг	Филлер для кожи и губ	A
Другие компоненты:			
1,4-бутандиол-диглицидил-эфир (ДГЭБД)	<1 мг	Сшивающий агент	B
Хлорид натрия	8,3 мг	Буфер	C
Дигидрат двунариевого фосфата	1,4 мг	Буфер	D
Дигидрофосфат калия	0,26 мг	Буфер	D
Вода для инъекции	Дост. кол.	Разжижитель	C и D
Соляная кислота (3,7%)	Дост. кол.**	Регулятор pH	E
Гидроксид натрия (1,0%)	Дост. кол.**	Регулятор pH	F

Ссылка*:

A=Гиалуронат натрия. Производится HTL S.A.S. и поставляется Kraeber & Co GmbH.

B=1,4-бутандиол-диглицидил-эфир (ДГЭБД), сшивающий агент. Производится и поставляется Sigma-Aldrich.

C = Natriumklorid infusionsvätska (Жидкий хлорид натрия для вливания) с концентрацией 9 мг/мл. Производится и поставляется Fresenius Kabi.

D = Жидкий буферный фосфат для вливания pH 7.4. Производится и поставляется APL.

E= Производится Scharlab S.L.и поставляется Fischer Scientific.

F= Производится Scharlab S.L.и поставляется Fischer Scientific.

** Соляная кислота и гидроксид натрия предназначены только для корректировки pH имплантатов. В процессе производства геля, для получения pH в пределах спецификации, при необходимости, pH регулируют с помощью NaOH 1% или HCL 3,7% для получения pH 6,0-7,5. Если pH геля уже в пределах спецификации, то эти соединения не добавляются. После растворения соляная кислота и гидроксид натрия не существуют в виде соединений в имплантатах, только увеличивают или уменьшают количество ионов, уже находящихся в имплантатах.

Материалы составляющих имплантатов

Часть медицинского изделия	Марка, материал	Производитель
Иглы инъекционные одноразовые стерильные	Медицинская сталь	Terumo Europe N.V. РУ ФСЗ № РЗН 2018/7086
Цилиндр BD Нупак SCF™	Стекло боросиликатное I типа	BD Medical – Pharmaceutical Systems
Наконечник с замком Люэра	Поликарбонат	
Колпачок наконечника	Эластомер 7025/65 Gray	BD Pont de Claix
	Полипропилен	
Поршень	Полистирол Styrolution 124N	Mora
Резиновый стопор (ограничитель поршня)	Эластомер PH701/50C black	BD Pont de Claix
Задний стопор (ограничитель обратного хода)	Полипропилен PPH5060	ADVAL TECH (Grenchen) AG
Упаковка:		
Блистер	Полиэтилен PETG	Sealed Air Nelipak
Бумага-пленка	полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), марки Tyvek®	Oliver-Tolas

Decoria® essence, Decoria® intense и Decoria® voluma являются прозрачными, вводимыми имплантатами в форме вязкого, стерильного, непирогенного геля, высокоочищенного, с высокой молекулярной массой, сшитого гиалуроната натрия в виде волокон, растворенных в физиологическом буфере. Decoria® essence, Decoria® intense и Decoria® voluma состоят из сшитого гиалуроната натрия неживотного происхождения биосовместимы с тканями человека.

Decoria® essence, Decoria® intense и Decoria® voluma поставляются в градуированном, одноразовом, стеклянном шприце емкостью 1.0 мл. Продукты только для однократного применения. С каждым шприцем поставляется две одноразовые стерильные иглы. Случаи передозировки имплантатов не зафиксированы.

Шприц:

Стеклянный шприц с наконечником Люэра, колпачком наконечника, поршнем, резиновым стопором и ограничителем хода (задним стопором).

Игла:

Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle
 РУ ФСЗ № РЗН 2018/7086 от 26.04.2018 г.

Производитель «Terumo Europe N.V.», Бельгия

Адрес производителя: Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium

Размер иглы: 27G.

27G x 1/2" TW (0.4 x 12 мм)

pH имплантата в шприце: 6.0-7.5

вязкость изделия: 1,7 – 2,1 мПа·с

Размеры частиц гиалуроната натрия:

Decoria® essence	Decoria® intense	Decoria® voluma
250-500 мкм	500-950 мкм	250-500 мкм

Время рассасывания:

Decoria® essence	Decoria® intense	Decoria® voluma
6-9 месяцев	6-9 месяцев	6-9 месяцев

Основной упаковочный материал (стерильная барьерная система), контактирующий с имплантатом:

Стекланный цилиндр с наконечником и замком Люэра

Колпачок наконечника

Резиновый стопор

Поршень

Задний стопор

Иглы

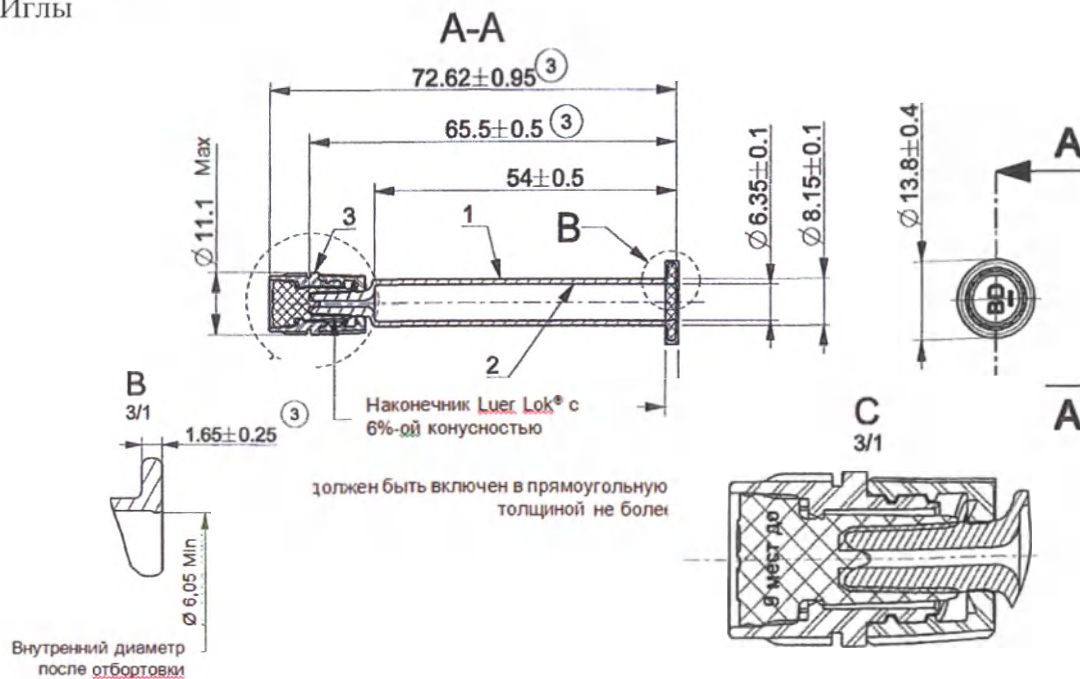


Рисунок 1 – Чертеж стеклянного цилиндра с наконечником и замком Люэра, пластиковым жестким колпачком наконечника и поршнем (1- стеклянный цилиндр с наконечником и замком Люэра, 2 - поршень, 3 - колпачок наконечника)

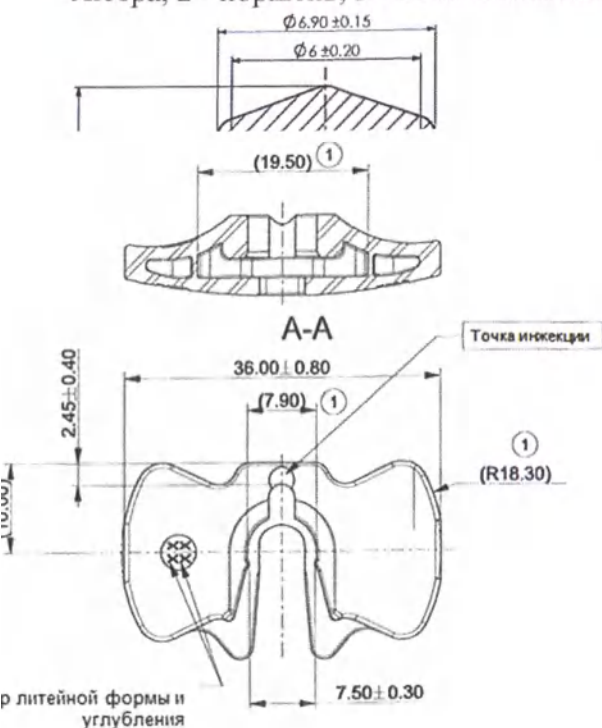


Рисунок 2 - Резиновый стопор (ограничитель хода)

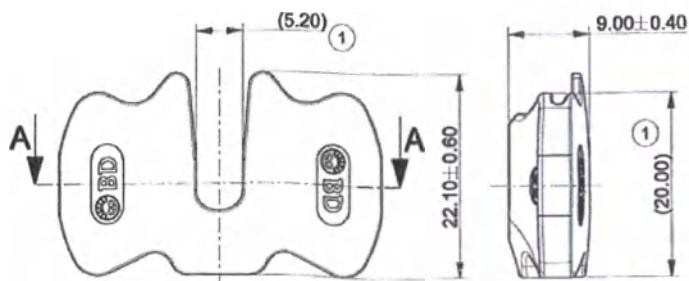


Рисунок 3 – Задний стопор (ограничитель обратного хода)

Наименование части изделия	Габаритные размеры (дхшхв, мм) $\pm 3\%$ максимальная (max)	Масса, мг $\pm 3\%$
Стеклянный цилиндр с наконечником и замком Люэра	65,5 x 8,15 (11,1 max) x 8,15 (11,1 max)	3 495
Поршень	54 x 6,35 (8,15 max) x 6,35 (8,15 max)	1185
Колпачок наконечника	18,6x13,8x13,8	867
Задний стопор	36,00x22,10x9,00	1827
Резиновый стопор	7,65 x 6,90 (7,05 max) x 6,90 (7,05 max)	233

Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle

РУ ФСЗ № РЗН 2018/7086 от 26.04.2018 г.

Производитель «Terumo Europe N.V.», Бельгия

Адрес производителя: Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium

Размер иглы: 27G.

27G x 1/2" TW (0.4 x 12 мм)

Учитывая кратковременный контакт инъекционных игл с внутренней средой и тканями организма, изделия должны быть исправными в процессе эксплуатации при номинальных значениях температуры от 32 до 42°C.

ПРОЦЕДУРА:

К проведению процедуры допускаются лица с высшим медицинским образованием и прошедшие обучение.


Перед использованием убедитесь в отсутствии повреждений и деформаций в упаковке и внутреннем содержимом.

Проведение процедур должно быть в асептических условиях. Перед процедурой врач проводит дезинфекцию и несколько раз обрабатывает зоны коррекции антисептиком от центра к периферии.

Применение препарата проводится в амбулаторных условиях, как правило без анестезии. Перед введением может быть добавлен 1% раствор лидокаина (или другого анестетика для инъекций) в объеме не более 2 мл для более комфортного состояния пациента во время процедуры, так как момент введения филлера в ряде случаев может вызвать дискомфорт. Аппликационная анестезия, как правило не требуется.

а) Подготовка к использованию и рекомендации:

1. Для получения информации о том, как собрать иглу и шприц, пожалуйста, посмотрите ниже.

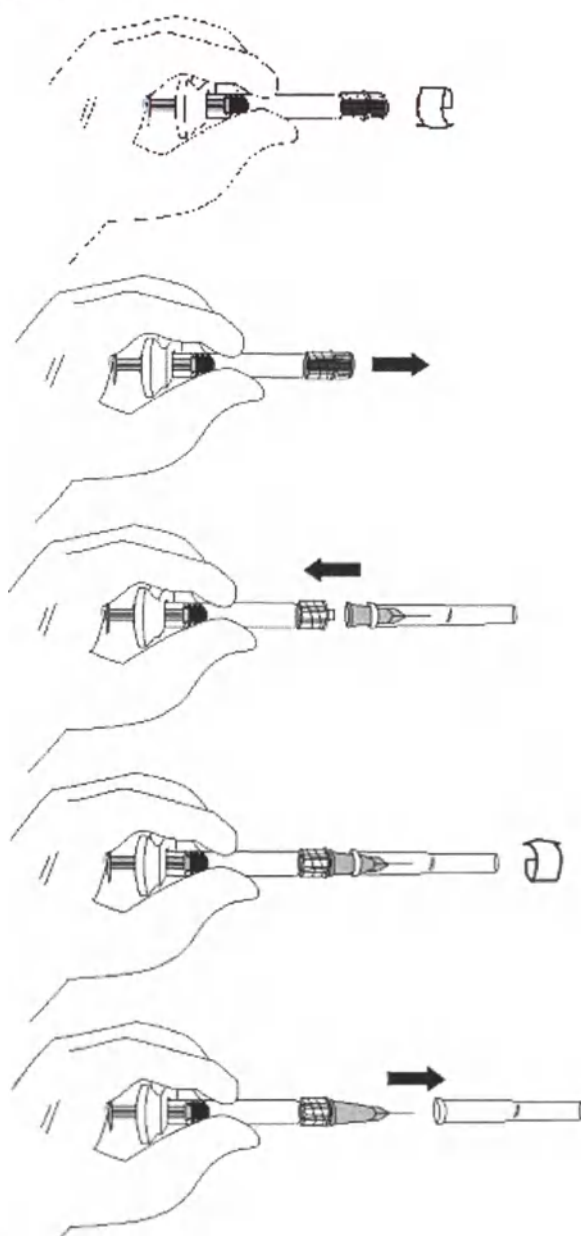

2. Чтобы избежать риска инфекции во время введения, убедитесь, что кожа была полностью дезинфицирована спиртом или другим антисептическим раствором. Всегда должна осуществляться общепринятая практика для предотвращения инфекции.

3. Не вводите Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma слишком глубоко, поскольку это сократит эффект препарата.

4. Не вводите Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma слишком поверхностно, поскольку это может привести к видимым шишкам и/или обесцвечиванию кожи.

б) Принцип введения имплантата и рекомендации по введению:

1. Медленно вводите препарат в кожу, постепенно выводя иглу наружу.
2. Заканчивайте инъекцию за несколько миллиметров до точки входа в кожу, чтобы препятствовать тому, чтобы материал просочился из места инъекции.
3. Коррекция должна проводиться лишь до 100% желаемого объема. Не перестарайтесь.
4. При переключении на новое место применения, используйте новую иглу.

5. Максимальная рекомендуемая дозировка для каждого места применения препарата 2 мл.
6. После инъекции Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma, можно слегка помассажировать кожу, чтобы заставить продукт следовать контурам окружающей ткани.
7. Если продукт хранился ниже комнатной температуры, позвольте продукту достичь комнатной температуры в течение, по крайней мере, 20 минут до использования.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Особые указания и возможные побочные эффекты препарата:

- После введения Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma, в месте инъекции могут возникнуть нежелательные краткосрочные реакции, такие как боль, чувствительность, краснота, гематома, зуд (раздражение кожи) или опухание. Реакции обычно появляются вскоре после применения и могут держаться до одной недели после инъекций в кожу и 2 недель после инъекций в губы. Эти типы реакций встречаются со всеми типами инъекций. Если пациент испытывает серьезный дискомфорт или если другие симптомы, такие как отек или длительное опухание, возникающие рядом с местом инъекции, свяжитесь с врачом, который вводил препарат;
- Во время инъекции возможны незначительные кровотечения, которые исчезают сами собой по завершении инъекции;
- Вследствие низкой эластичности кожи носа (особенно после хирургической ринопластики) существует вероятность вызвать косвенное повреждение сосудов вследствие механического закупоривания при размещении больших объемов имплантата даже при отсутствии интраваскулярной инъекции.
- Аллергия на гиалуроновую кислоту;
- Вспухания и узелки в местах инъекций;
- Обесцвечивание участка кожи, обработанного препаратом;
- При введении препарата в кровеносный сосуд - окклюзия просвета концевой артерии;
- Decoria essence, Decoria intense и Decoria voluma со временем разрушаются естественным путем и рассасываются в тканях. Длительность различается в зависимости от пациента и места введения;
- Пациент не должен подвергать обработанную область экстремальным температурам (например, солнечные ванны и солярий) в течение первой недели после лечения или пока любые нежелательные реакции полностью не прошли. Следует избегать физических нагрузок в течение первых двух дней после инъекций;
- Пациент должен быть проинформирован о том, чтобы не использовать косметические средства до проведения процедуры и еще минимум 12 часов после нее.

Форма выпуска: Decoria® essence, Decoria® intense и Decoria® являются прозрачными, вводимыми имплантатами в форме вязкого, стерильного, непирогенного геля, высокоочищенного, с высокой молекулярной массой, сшитого гиалуроната натрия в виде волокон, растворенных в физиологическом буфере. Decoria® essence, Decoria® intense и Decoria® voluma состоят из сшитого гиалуроната натрия неживотного происхождения биосовместимы с тканями человека.

Decoria® essence, Decoria® intense и Decoria® voluma поставляются в градуированном, одноразовом, стеклянном шприце емкостью 1.0 мл. Продукты только для единовременного использования. С каждым шприцем поставляется две одноразовые стерильные иглы.

Стерилизация:

Стерилизация материала, используемого в производственном процессе, выполняется паром или сухим теплом и является той же самой процедурой что касается других продуктов, произведенных Bohus BioTech AB.

Шприцы наполняются конечными продуктами и затем стерилизуются паром при $F_0=25$, обеспечивая Уровень гарантируемой стерильности 10^{-6} . Процессы стерилизации утверждены и квалифицированы в соответствии с системой качества Bohus BioTech AB.

Стерильные Иглы, поставляемые «Terumo Europe N.V.», стерилизуются этиленоксидом (EO), который указан в технической характеристике изделия иглы.

Условия хранения:

Храните продукты при температуре 2-25 °C (36-77 °F).

Продукты не должны замораживаться.

Не допускайте попадания прямого солнечного света.

Условия транспортирования: транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от 2 до 25 °C вдали от источников тепла и при относительной влажности до 70%.

Требования безопасности и охраны окружающей среды, в том числе требования безопасного уничтожения и утилизации. Защита окружающей среды.

2.4.1 Требования к производственным процессам

Все работы по производству должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией. Применение открытого огня в этих помещениях запрещается. Условия труда работников – должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. Все работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры по действующим нормам страны производителя.

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань. Производство имплантатов не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсibilизирующего воздействия на человека. При производстве имплантатов, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке. Охрана окружающей среды в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами страны производителя.

2.4.2 Требования к процессам использования

Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении или непригодных для использования медицинских изделий.

Имплантаты Desocia не относятся к эпидемиологически опасным отходам, т.к. не загрязнены кровью и другими биологическими жидкостями. Имплантат не подлежит утилизации в связи с введением данного изделия в организм человека. Утилизация изделия с истекшим сроком годности осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Г. Утилизация инъекционных игл, контактирующих с внутренними средами организма, а также шприцев с поршнем и стоппером, осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б. Охрана окружающей среды в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, действующими на территории РФ.

Упаковка

Поставляются в стерильных одноразовых стеклянных градуированных шприцах для инъекции. Шприцы упакованы в одноразовые блистеры вместе с двумя стерильными иглами, которые упакованы во внешнюю коробку с Инструкцией для использования (ИИ). Размер внешней упаковки: 19 см x 7,7 см x 3,2 см. Размер блистера: 18 см x 7,5 см x 2,3 см. Масса блистера индивидуальной упаковки составляет 9988 мг, масса бумаги-пленки индивидуальной упаковки составляет 1174 мг.

Срок годности: Три года от даты стерилизации.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие имплантатов требованиям технического документа при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим нормативным документом в течение 3 лет (срок годности).

Рекламации

При обнаружении брака или несоответствия изделия претензии принимаются уполномоченным представителем на территории РФ:

ИП Иванов М. Н.

Адрес: 121614, г. Москва, Осенний б-р, д. 12, корп. 3, кв. 446

Телефон, факс: (495) 223-55-15

Стерильно

Для однократного применения

Техобслуживанию и ремонту не подлежит.

Условия эксплуатации: использовать при температуре от 10°C до 42 °C.

Условия отпуска: без рецепта.

Маркировка

Символы на упаковке:

Символы согласно ISO EN 15223-1



Смотрите инструкции для использования



Хранить при 2-25 °C



Хранить сухим



Не используйте, если упаковка вскрыта



Хранить вдали от солнечного света



CE маркировка продукта согласно MDD 93/42/EEC



Код партии

 Стерилизация паром или сухим теплом  Использовать до  символ апиrogenности и нетоксичности внутри	 Внимание! Обратитесь к инструкции по применению  Стерилизация этиленоксидом (для игл)
---	---

Надписи на упаковке:

Изготовитель: Bohus BioTech AB

(Бохус БиоТех ЭйБи)

Адрес: Tradgårdsgatan 4, SE-452 31, Strömstad, Sweden

(Традгардсгата 4, 45231, Стромстад, Швеция)

Производственный номер/номер партии:

Годен до:

Дата изготовления и стерилизации:

Гарантийный срок хранения: 3 года

Компания-представитель:

ИП Иванов М.Н.

Юридический адрес:

121614, г. Москва, Осенний б-р, д. 12, корп. 3, кв. 446

Номер регистрационного удостоверения и дата выдачи:

Для однократного применения

Не токсично

Условия отпуска: без рецепта

/Печать/: Нотариус* Стремстад/ /Штамп/: Бохус БиоТек Бохус БиоТек АБ Трэдгардсгатан, 4 SE-45231 Стремстад, Швеция www.bohusbiotech.com/ <u>/Подпись/</u>	«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE» Управляющий Директор / Managing Director (должность / position) Матс Андерссон / Mats Andersson (имя / name) (подпись / signature) М.П. / Stamp
--	--

/Печать/: Нотариус* Стремстад/

/Штамп/:

Я, нижеподписавшийся Нотариус в г. Стремстад, Швеция,
настоящим подтверждаю верность данной копии с
представленным мне подлинником документа.

Стремстад 06.08.2020

/Подпись/

МЛАН ПИЛССОН/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Тредгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Тредгардсгата, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/



Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Трэдгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/



Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Тредгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Тредгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Тредгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Трэдгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Трэдгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Тредгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Трэдгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Тредгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Текст на русском языке

/Штамп/:

Бохус

БиоТек

Бохус БиоТек АБ

Трэдгардсгатан, 4

SE-45231 Стремстад, Швеция

www.bohusbiotech.com/

/Подпись/

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Марычевым Юрием Игоревичем.



Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого августа две тысячи двадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Марычева Юрия Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2020- *52-24*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью *2* лист(а)(ов)



Г.Б. Акимов



Нотариус