

**ФОТОГРАФИИ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
и образцы маркировки**


**МАТЕРИАЛЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
по ТУ 20.59.52-001-22295444-2018**



Материал стоматологический моделировочный полимерный «ПАТТЕРНПЛАСТ»

в составе

порошок «ПАТТЕРНПЛАСТ»; жидкость «ПАТТЕРНПЛАСТ»;
пипетка 1 шт; крышка-дозатор или мерник (ложка мерная) 1 шт.

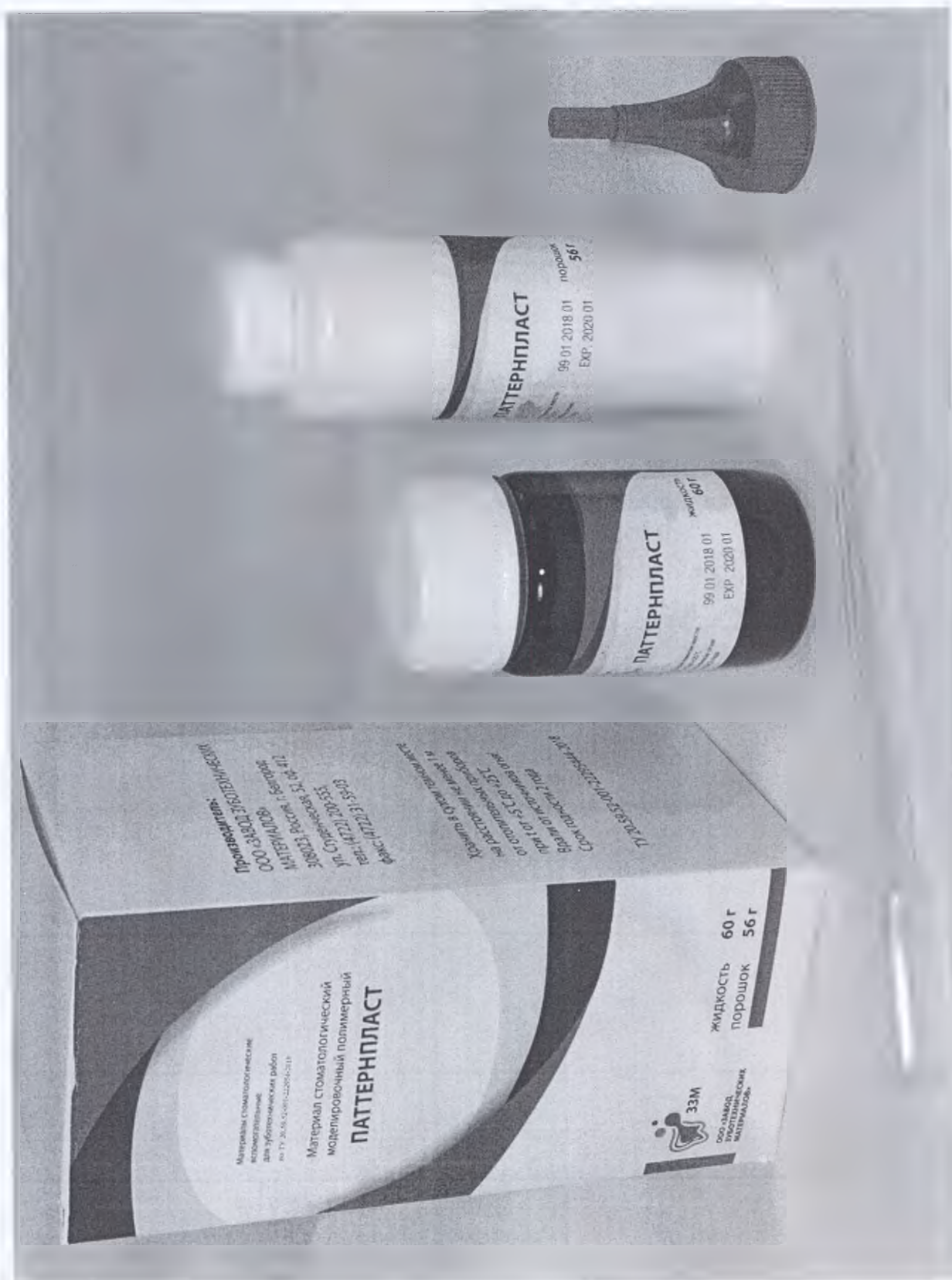



Пипетка



Мерник (ложка мерная)



Крышка-дозатор




Manufacturer:
LTD "ZSM"
 Studencheskaya st. 52, off. 412
 Belgorod, 308023, Russia
 tel. +7 4722 200-555
 fax: +7 4722 31-59-03

Store in a dry and dark place,
 not less of 1 m distance
 from heating sets at
 t of +5°C to +25°C
 Far from fire!
 2 years shelf-life



liquid 60 g
 powder 56 g

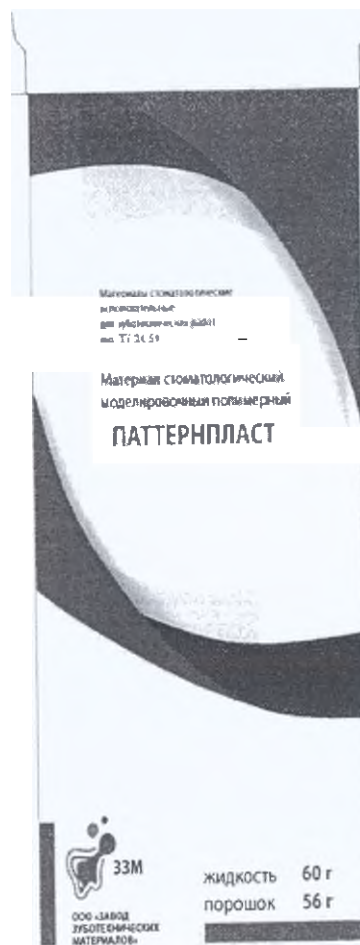


Производитель:
 ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ
 МАТЕРИАЛОВ»
 308023, Россия, г. Белгород
 ул. Студенческая, дом 52, офис 412
 тел.: (4722) 200-555,
 факс: (4722) 31-59-03

Хранить в сухом темном месте
 на расстоянии не менее 1 м
 от отопительных приборов
 при t от +5°C до +25°C
 Вдали от источников огня!
 Срок годности 2 года

ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
 РУ № от




жидкость 60 г
 порошок 56 г

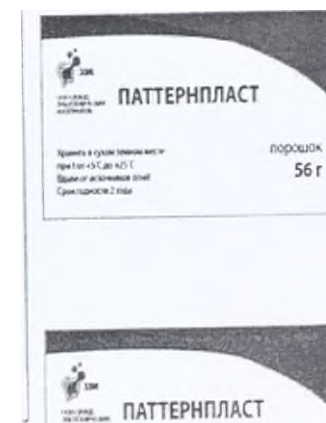

Материал стоматологический моделировочный полимерный «ПАТТЕРНПЛАСТ» М

в составе:

порошок «ПАТТЕРНПЛАСТ» М; жидкость «ПАТТЕРНПЛАСТ» М;
пипетка 1 шт; крышка-дозатор или мерник (ложка мерная) 1 шт.

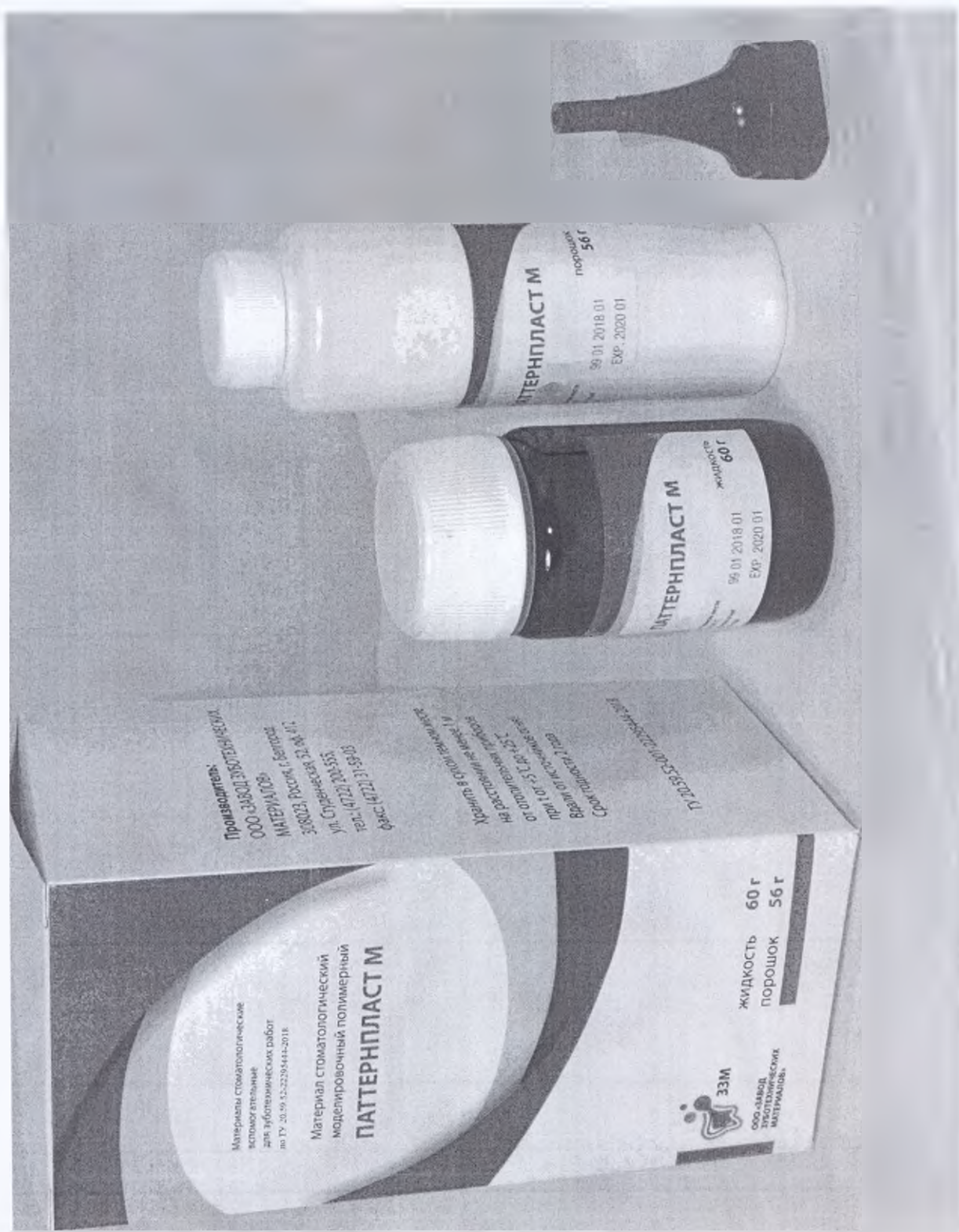




Пипетка



Мерник (ложка мерная)



Крышка-дозатор

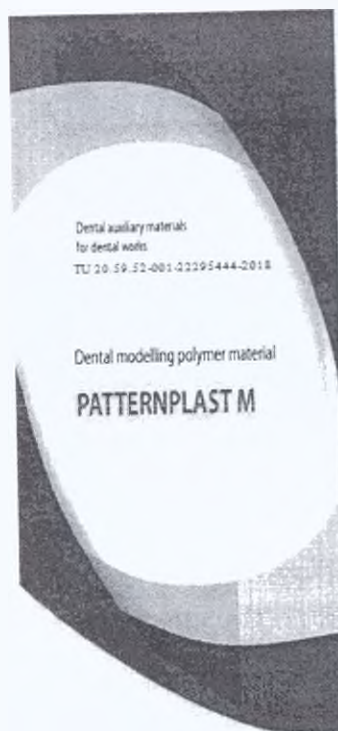


Manufacturer:
LTD "ZZM"
 Studencheskaya st. 52, off. 412
 Belgorod, 308023, Russia
 tel.: +7 4722 200-555
 fax: +7 4722 31-59-03

Store in a dry and dark place,
 not less of 1 m distance
 from heating sets at
 t of +5°C to +25°C
 Far from fire!
 2 years shelf-life



liquid 60 g
 powder 56 g

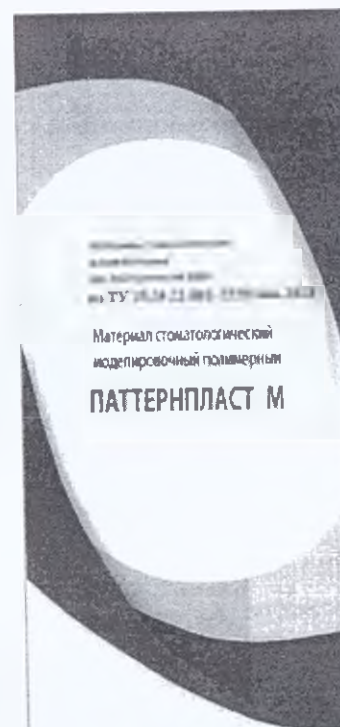


Производитель:
 ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»
 308023, Россия, г. Белгород
 ул. Студенческая, дом 52, офис 412
 тел: (4722) 200-555,
 факс: (4722) 31-59-03

Хранить в сухом темном месте
 на расстоянии не менее 1 м
 от отопительных приборов
 при t от +5°C до +25°C
 Вдали от источников огня!
 Срок годности 2 года

ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
 РУ № от



жидкость 60 г
 порошок 56 г

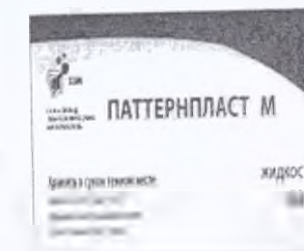

материал стоматологический моделировочный полимерный «ПАТТЕРНПЛАСТ» LC
в составе
паста «ПАТТЕРНПЛАСТ» LC; игла изогнутая (канюля) 3-10 шт.





игла изогнутая (канюля)

Производитель:
ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»
190022, Россия, Санкт-Петербург
ул. Троицкая, д. 412, лит. А
тел. +7 (812) 200-555
факс: +7 (812) 31-59-03

Хранить в сухом, защищенном от света месте при t от +5°C до +25°C. Срок годности 2 года.

ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
Материал стоматологический полимерный

Р/У № от



Dental auxiliary materials

Dental modelling polymer material

PATTERNPLAST LC

paste 5 g



Производитель:
ООО «ЦРМИ»
Студенческая ул. 52, лит. А12
Санкт-Петербург, Россия
тел. +7 (812) 200-555
факс +7 (812) 31-59-03

Store in a dry and dark place at t of +5°C to +25°C. Do not use after

Icons: explosion, fire, no open flame, no smoking, no heat, no fire, no open flame, no smoking, no heat, no fire

Packer LOT



Материалы стоматологические вспомогательные для зуботехнических работ по ТУ 20.59.52-001-22295444-2018

Материал стоматологический моделировочный полимерный

ПАТТЕРНПЛАСТ LC

паста 5 г




ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

ПАТТЕРНПЛАСТ LC

Хранить в защищенном от света месте при t от +5°C до +25°C


паста 5 г

Материал стоматологический моделировочный полимерный «ПАТТЕРНПЛАСТ» ЛС ФЛОУ,
в составе
паста «ПАТТЕРНПЛАСТ» ЛС ФЛОУ; - игла изогнутая (канюля) 3-10 шт.


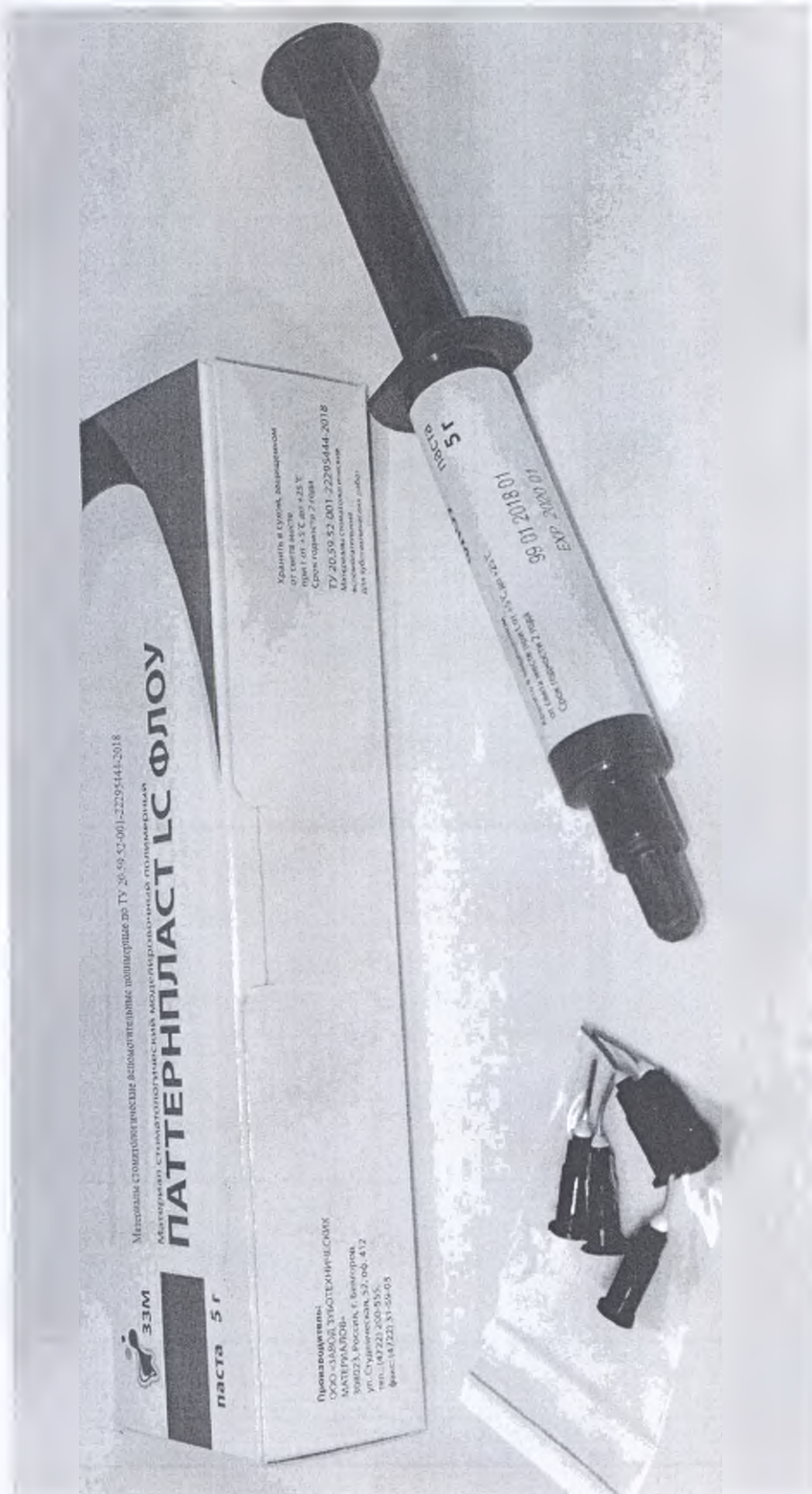





игла изогнутая (канюля)

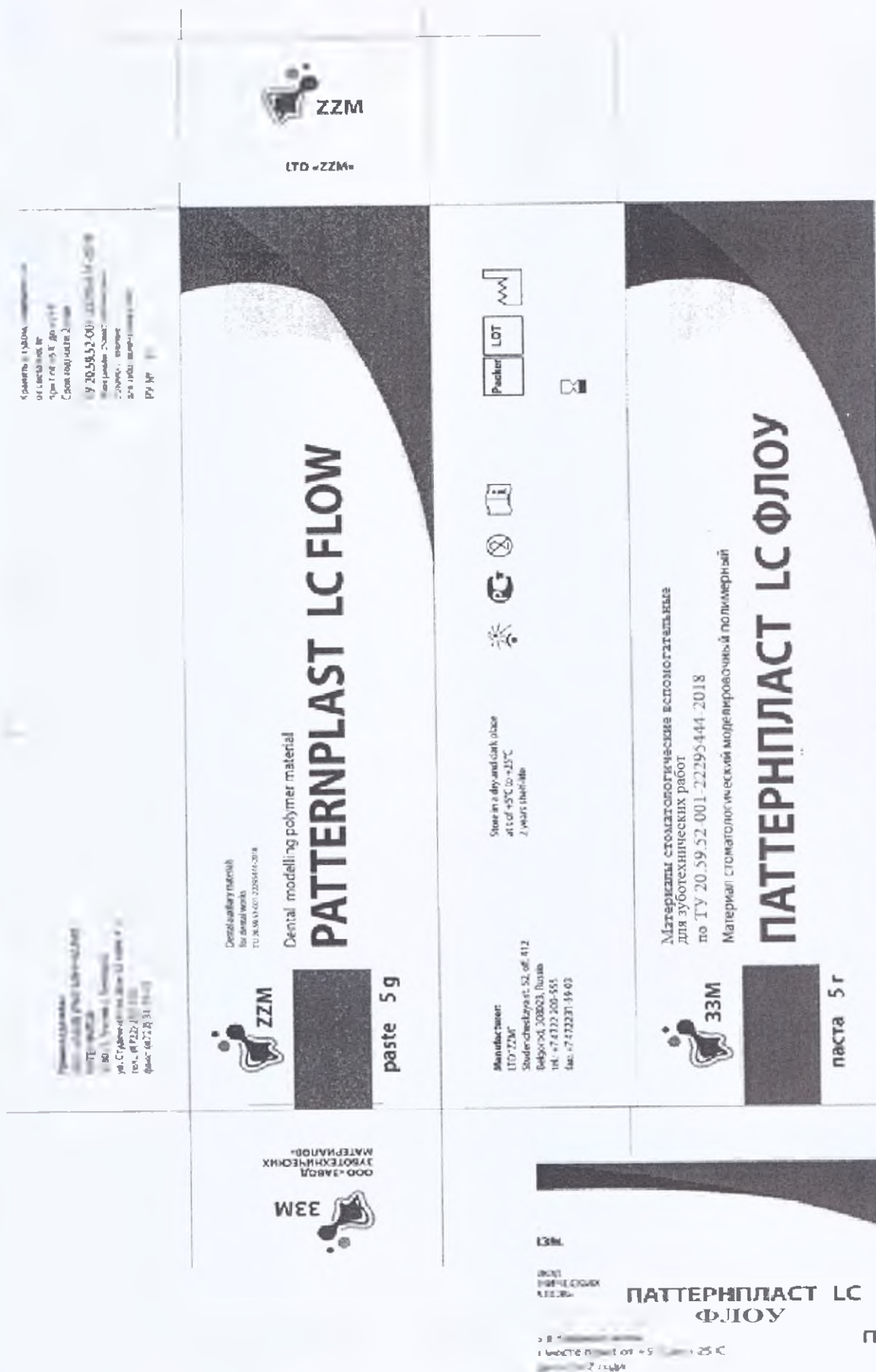


Лак зуботехнический компенсационный «ЗТ»-лак (красный) с растворителем

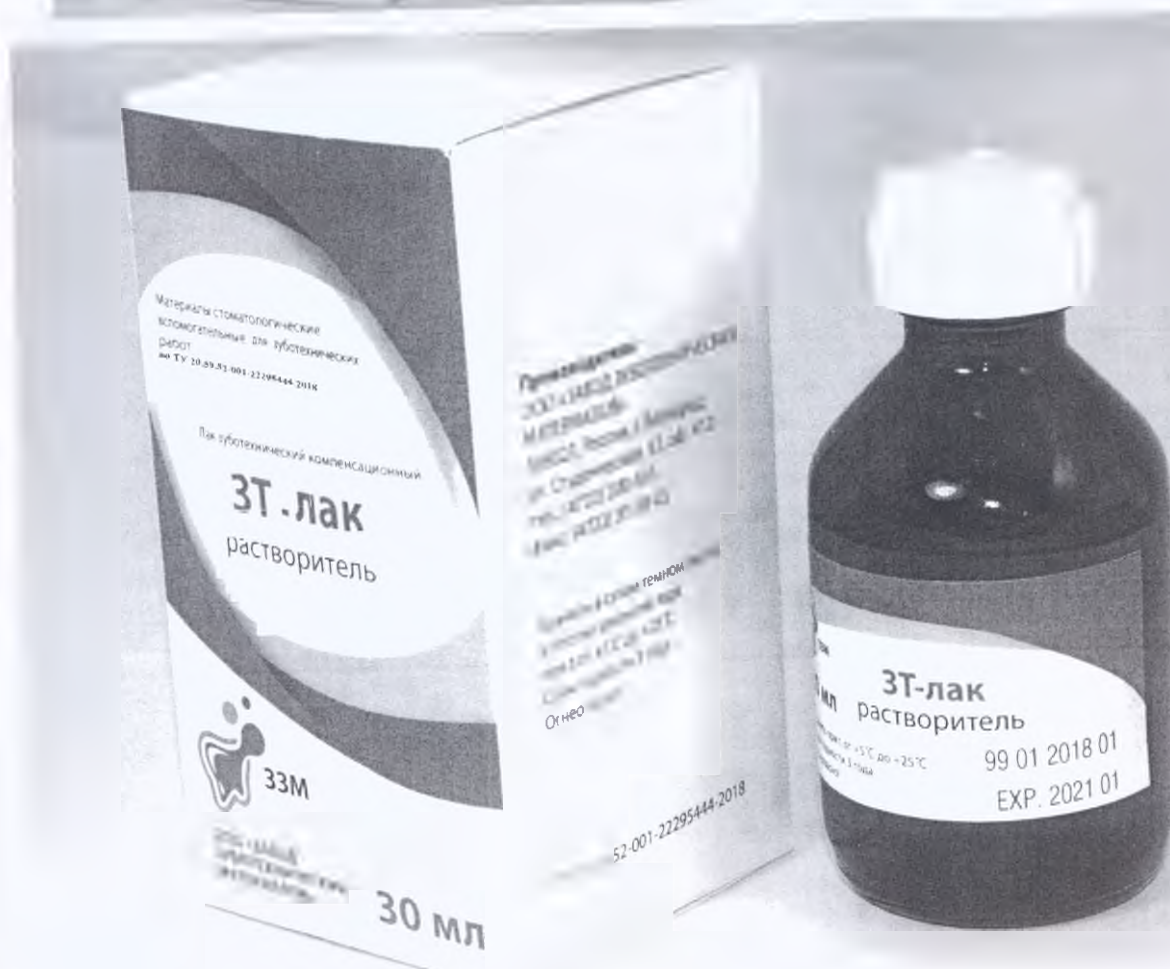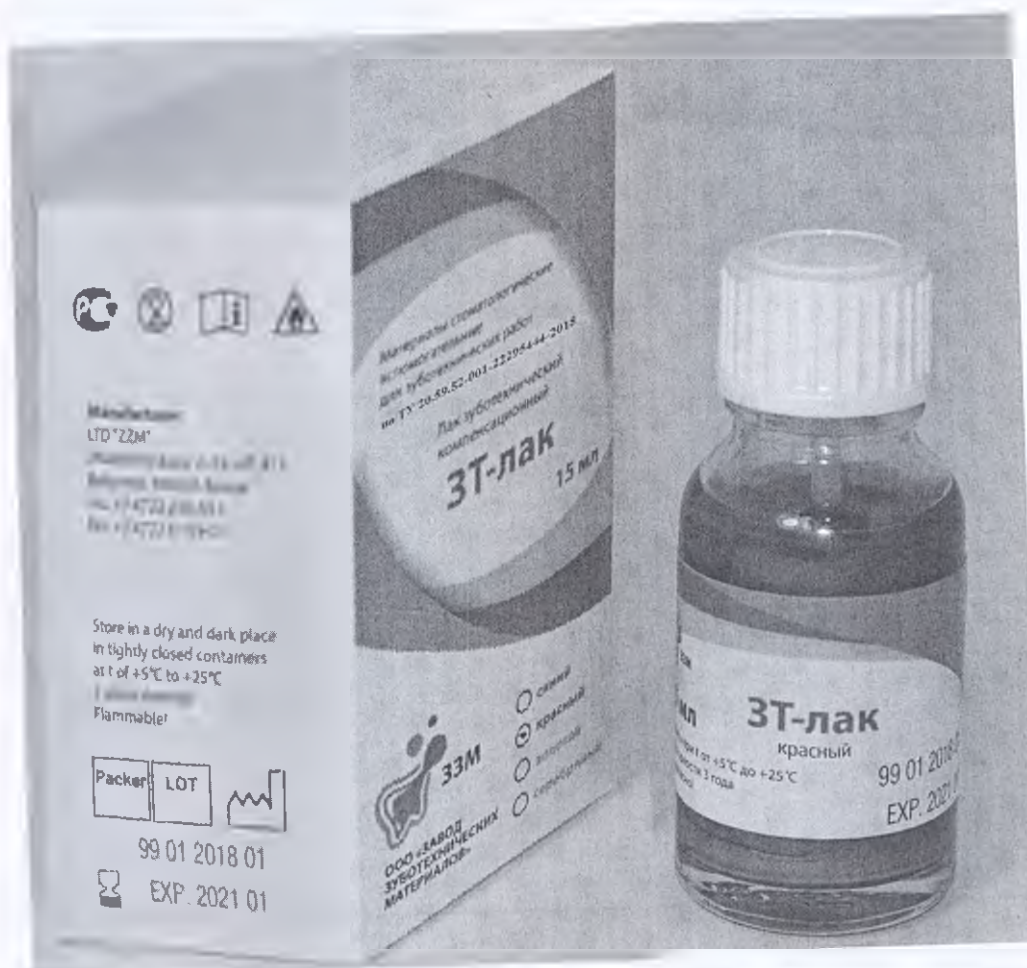


Образцы маркировки: коробка, этикетка
«ЗТ»-лак красный

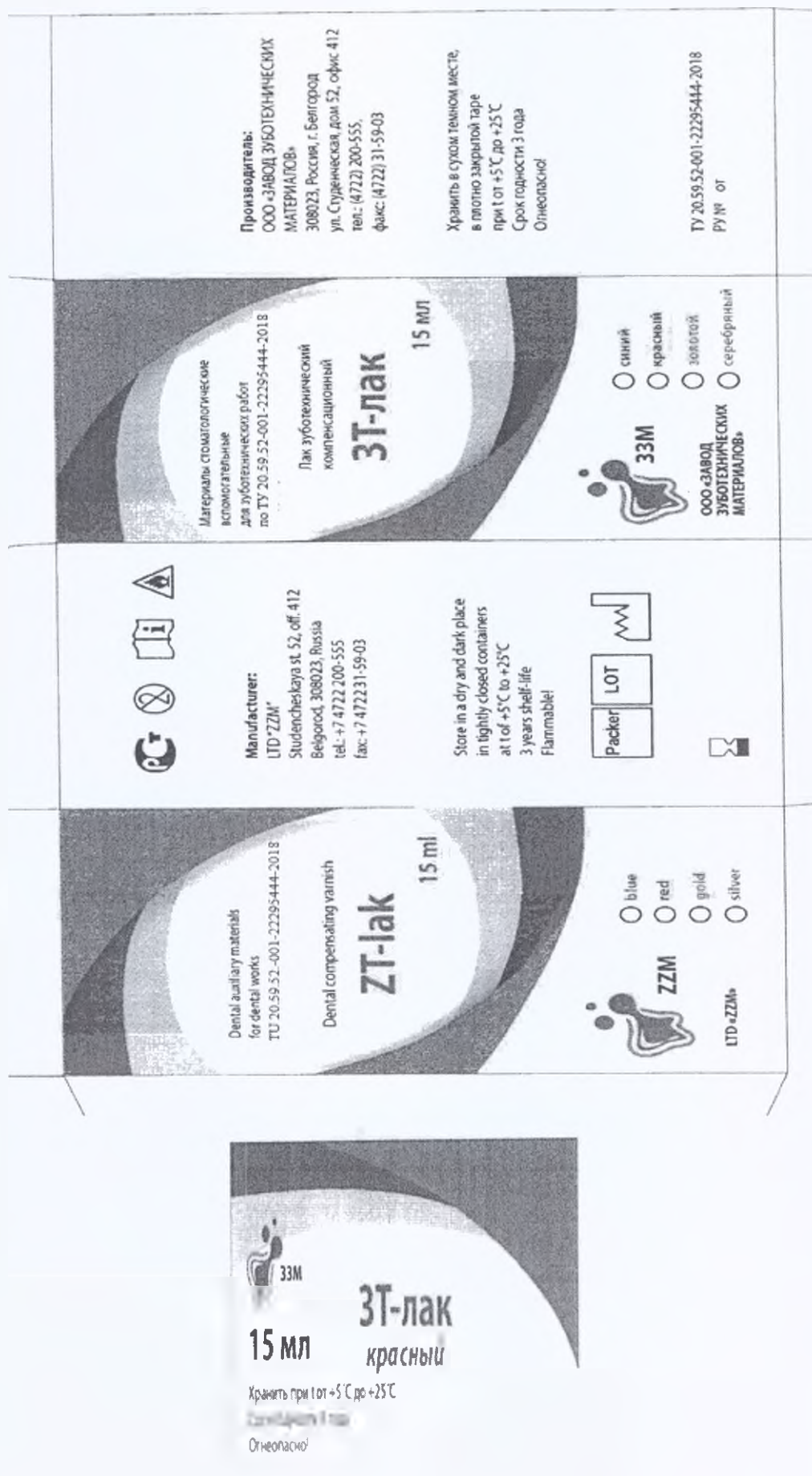


Лак зуботехнический компенсационный «ЗТ»-лак (золотой) с растворителем

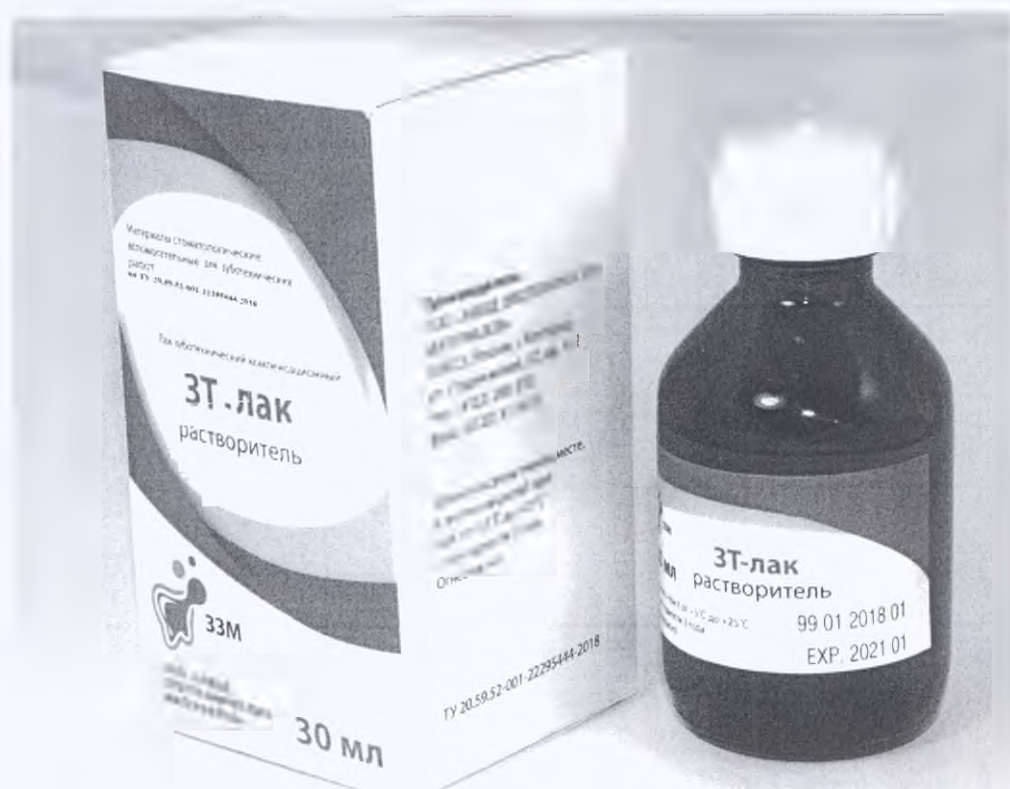


Образцы маркировки: коробка, этикетка «ЗТ»-лак золотой

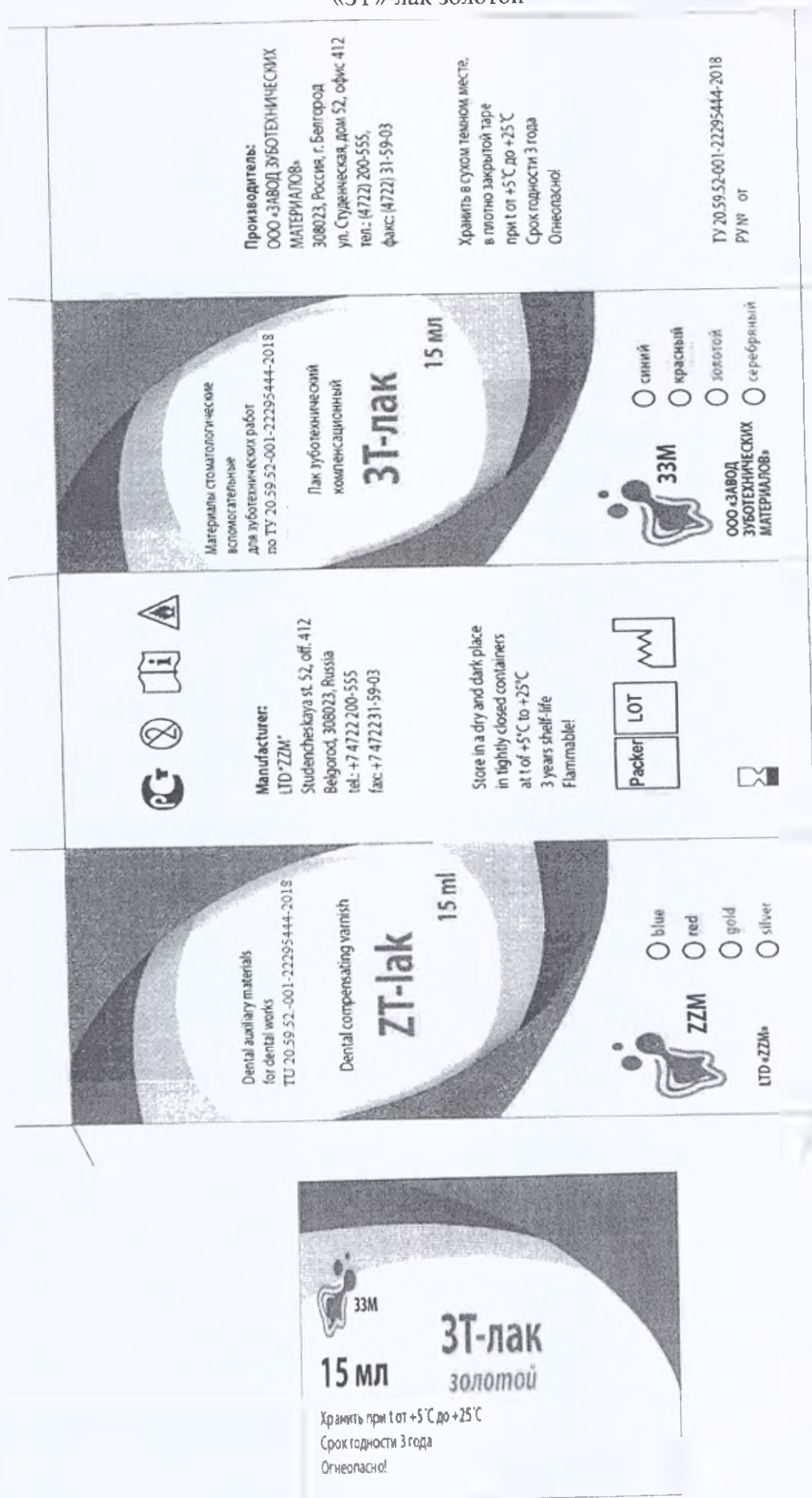


Лак зуботехнический компенсационный «ЗТ»-лак (синий) с растворителем

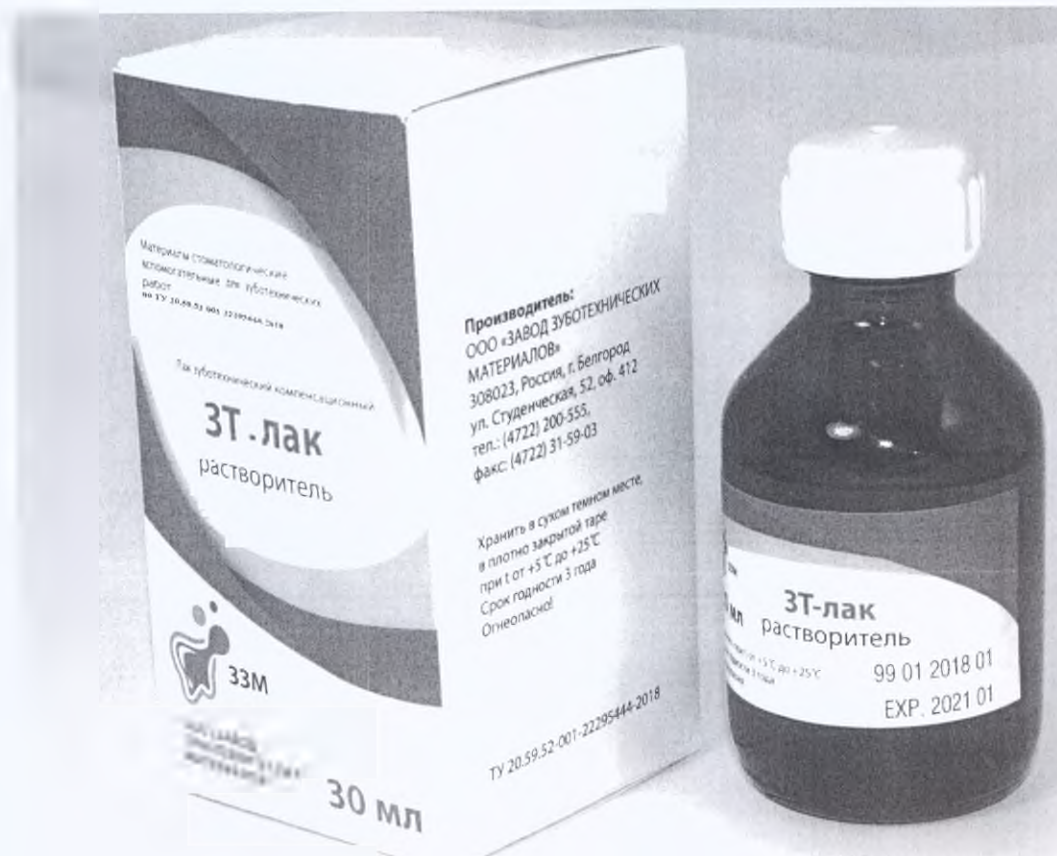


Образцы маркировки: коробка, этикетка
«ЗТ»-лак синий

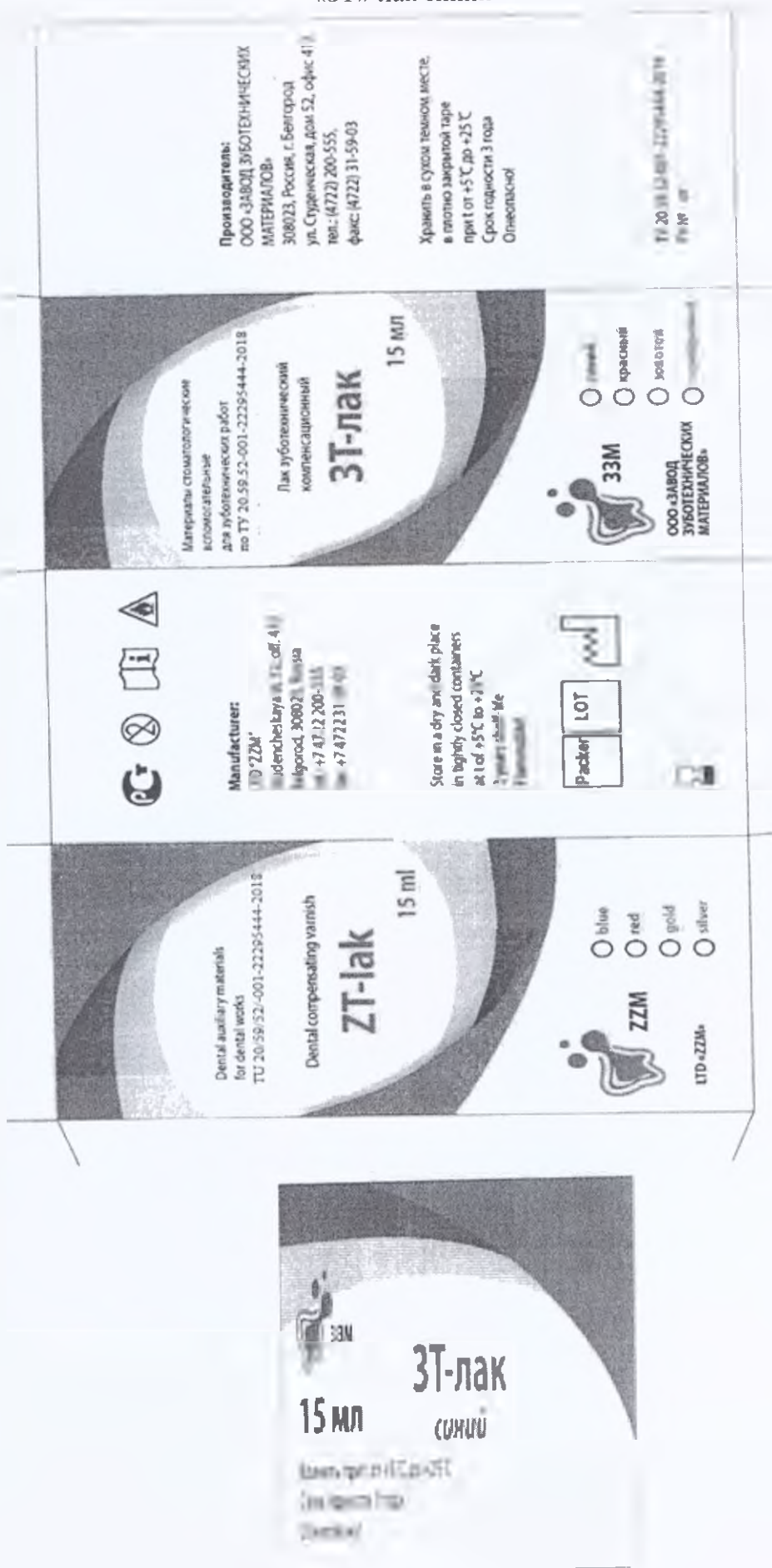



Лак зуботехнический компенсационный «ЗТ»-лак (серебряный) с растворителем

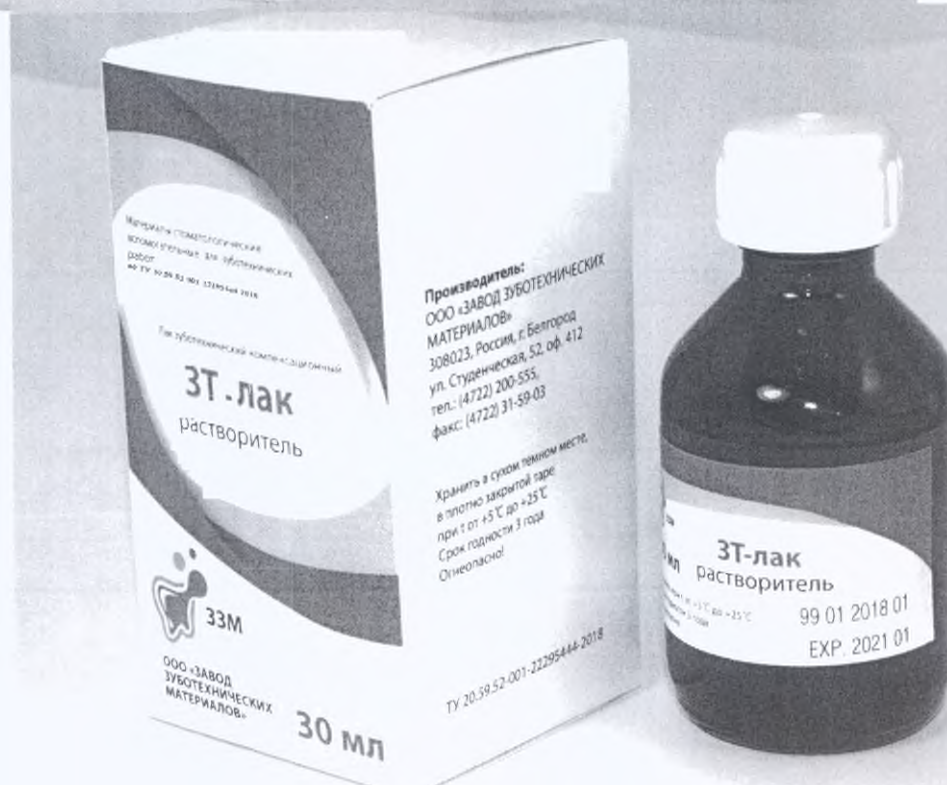


Лак зуботехнический компенсационный «ЗТ»-лак штумфлак с растворителем

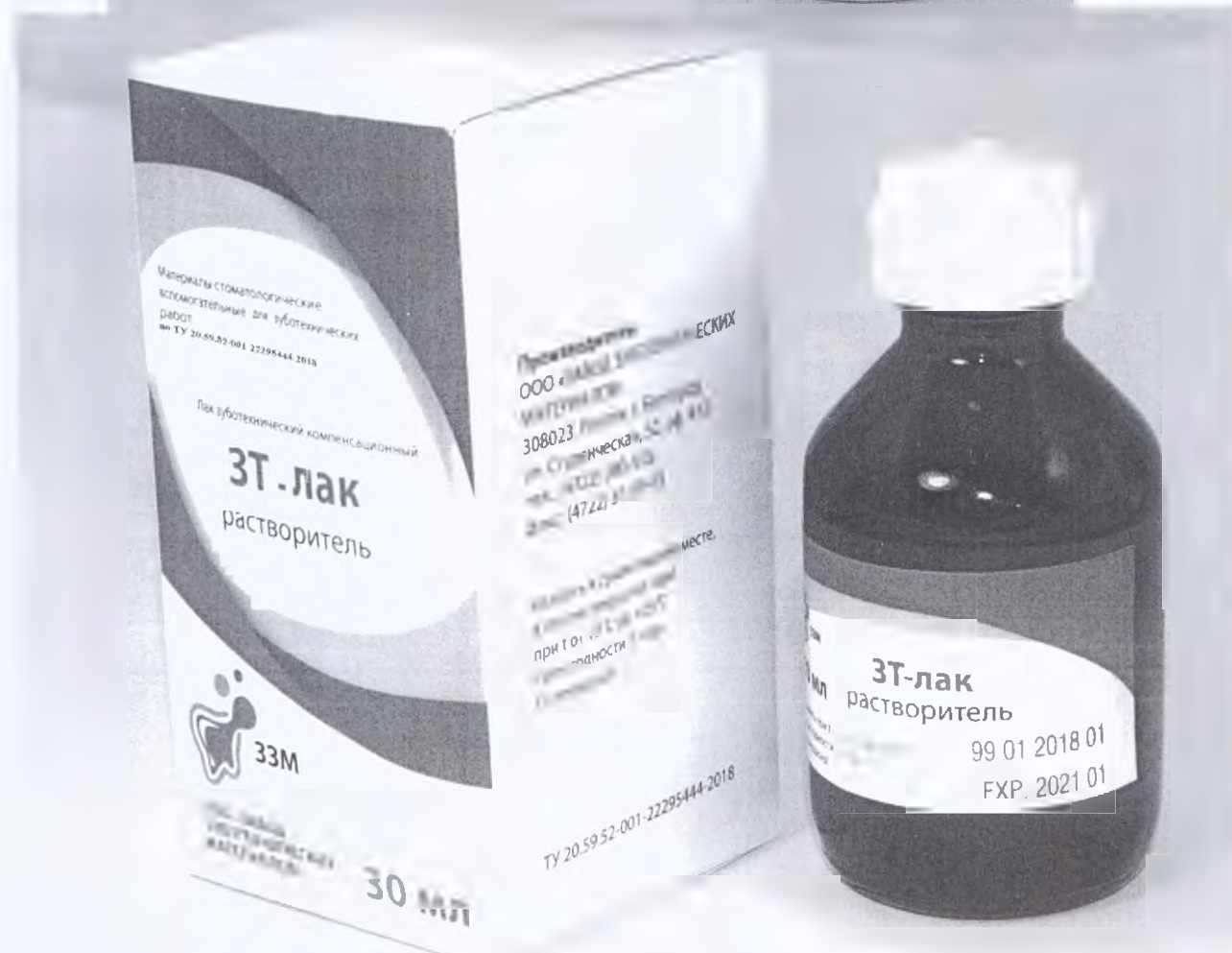

Образцы маркировки: коробка, этикетка «ЗТ»-лак шtumфлак

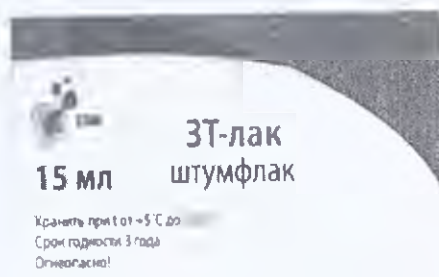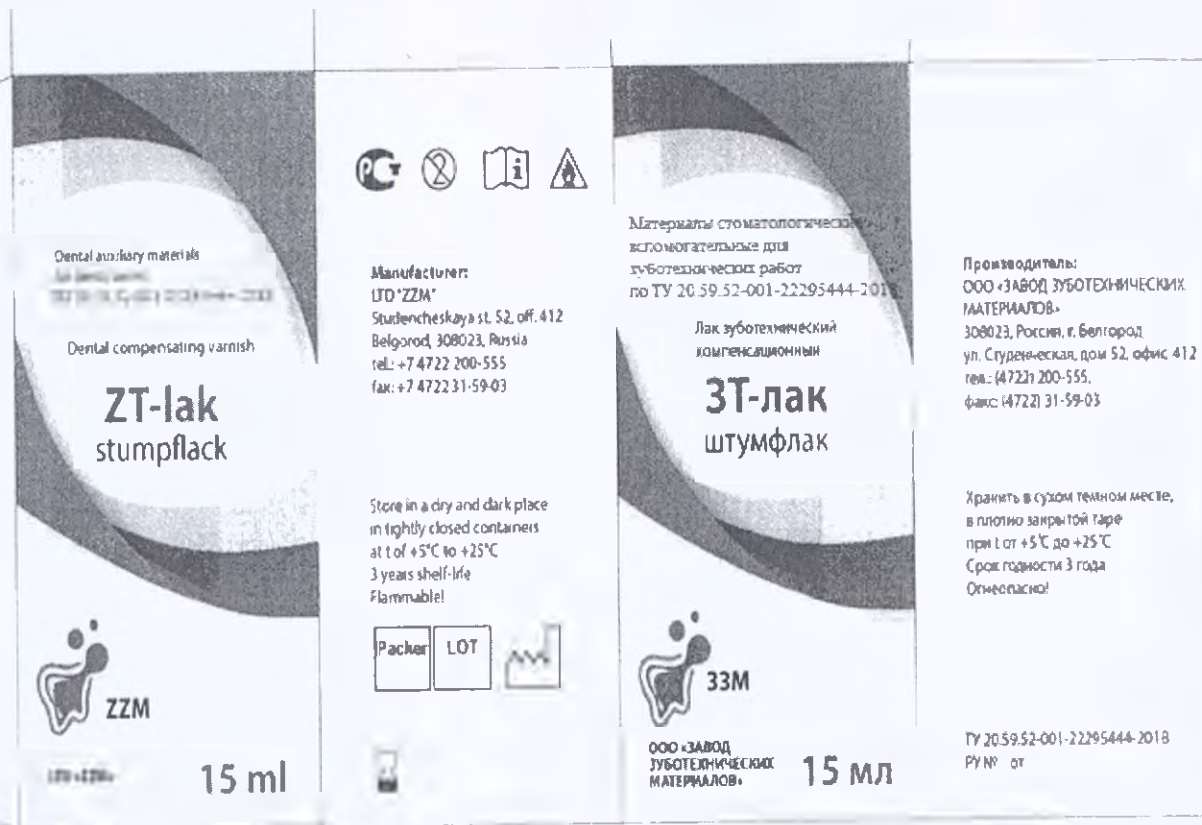


Образцы маркировки: коробка, этикетка «ЗТ»-лак растворитель

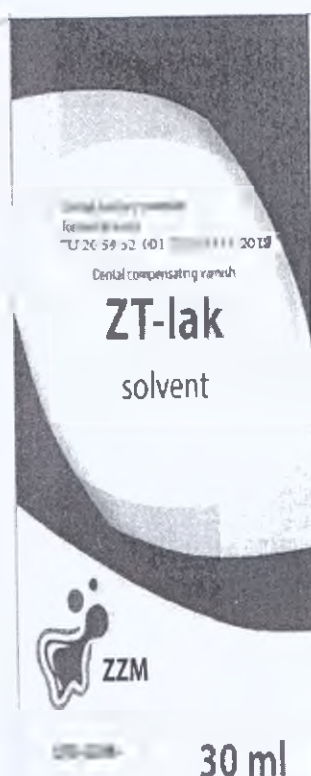

Manufacturer:
LTD "ZZM"
Studenteskaya st. 52, off. 412
Belgorod, 308023, Russia
tel.: +7 4722 200-555
fax: +7 4722 31-59-03


Store in a dry and dark place
in refrigerator containers
at 1 of +5°C to +25°C
3 years shelf-life
Flammable!

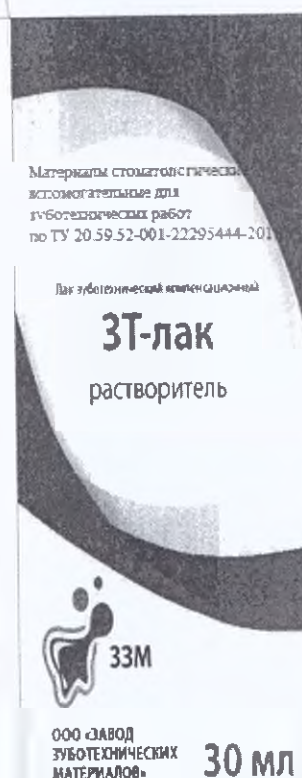

Производитель:
ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, дом 52, офис 412
тел.: (4722) 200-555,
факс: (4722) 31-59-03

Хранить в сухом темном месте,
в плотно закрытой таре
при 1 of +5°C до +25°C
Срок годности 3 года
Огнеопасно!

ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
РУ № от

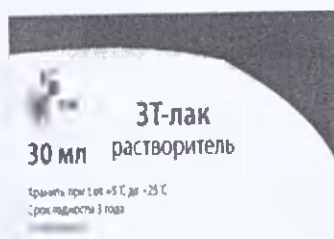

**Копирка маркер зуботехническая жидкая «ЛАБОМАРК» (белый)
с растворителем**



Образцы маркировки: коробка, этикетка



**Копирка маркер зуботехническая жидкая «ЛАБОМАРК» (красный)
с растворителем**






**Копирка маркер зуботехническая жидкая «ЛАБОМАРК» (синий)
с растворителем**




Образцы маркировки: коробка, этикетка

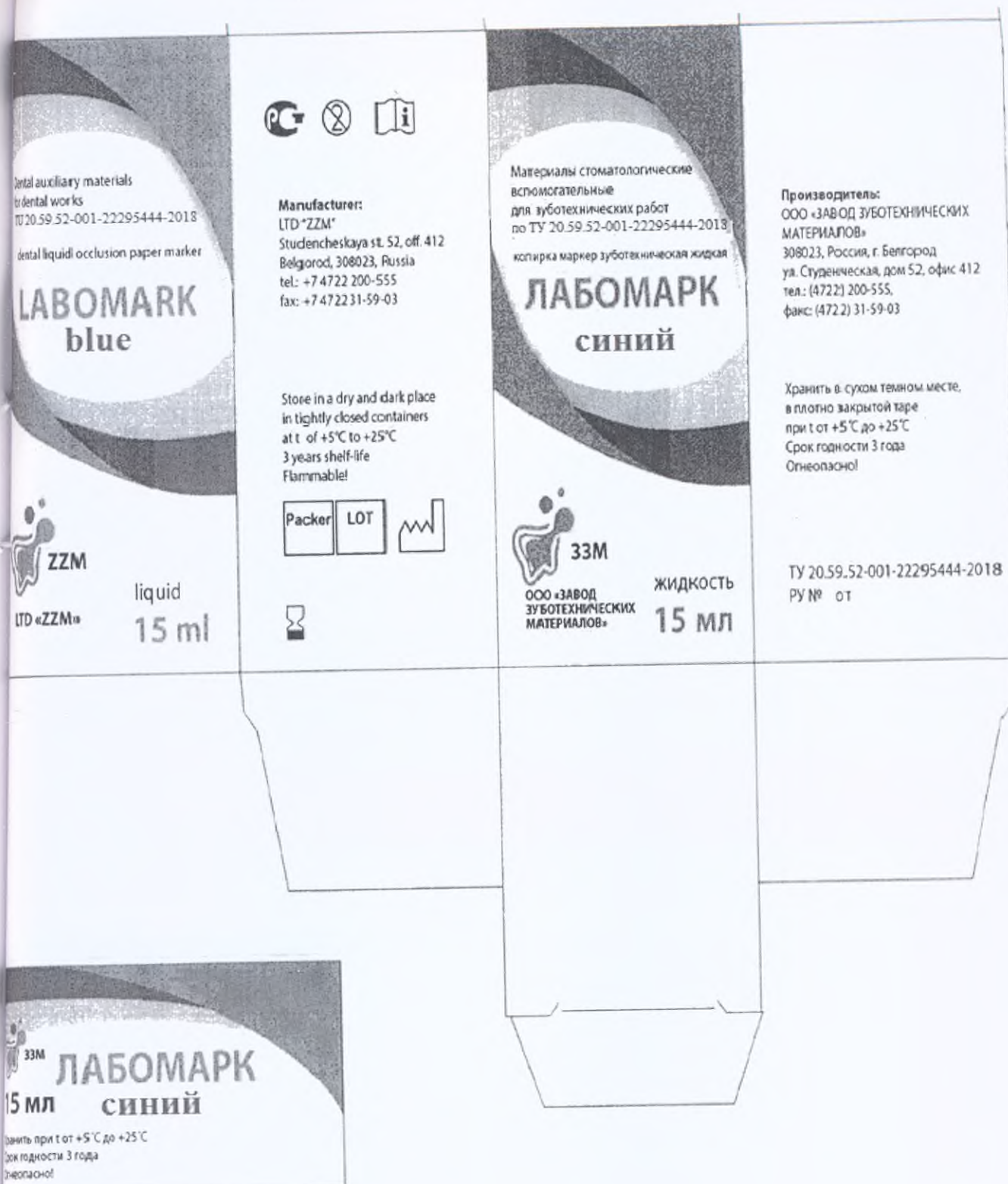

Копирка маркер зуботехническая жидкая «ЛАБОМАРК» (зеленый) с растворителем




Образцы маркировки: коробка, этикетка

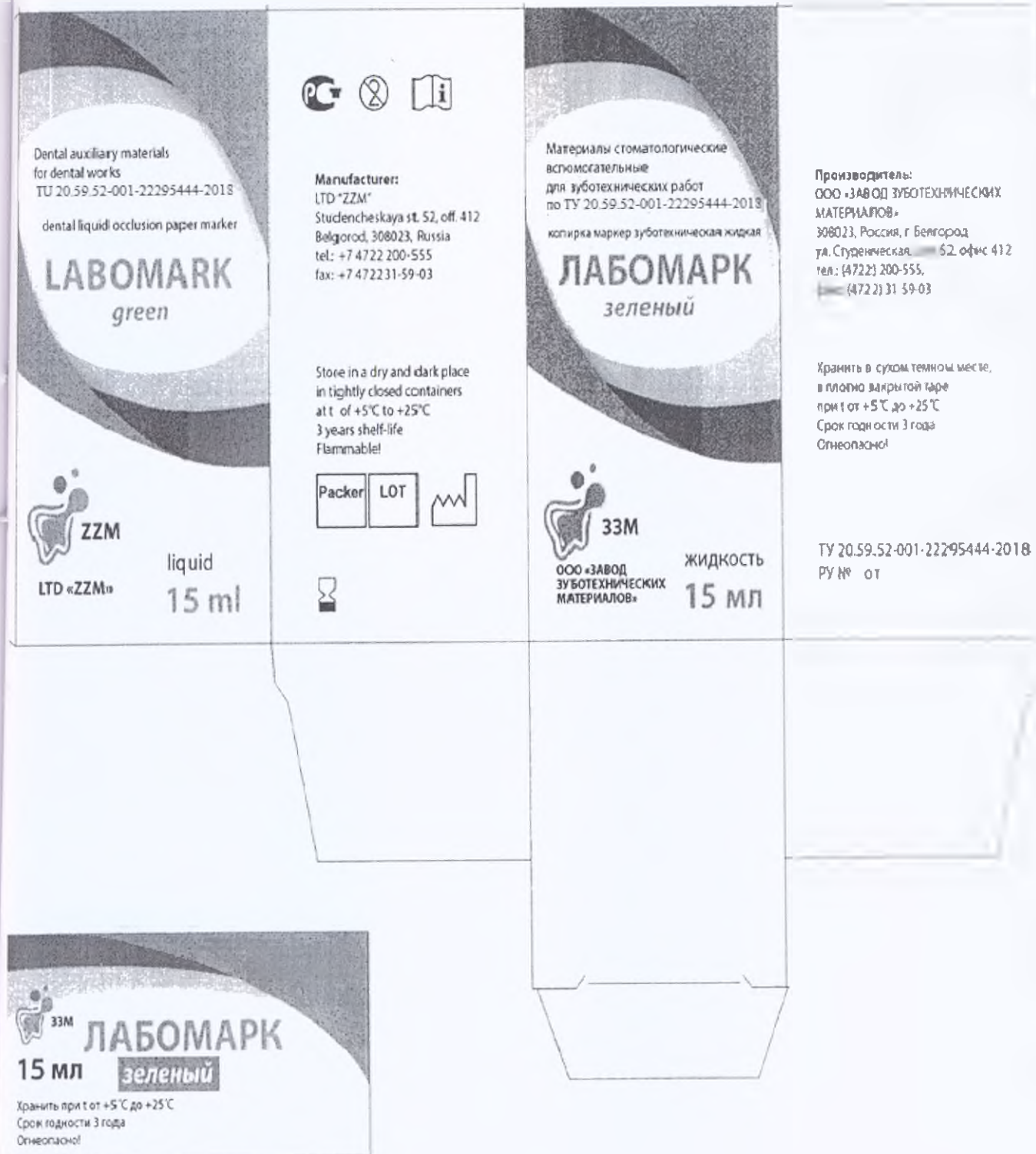

Образцы маркировки: коробка, этикетка



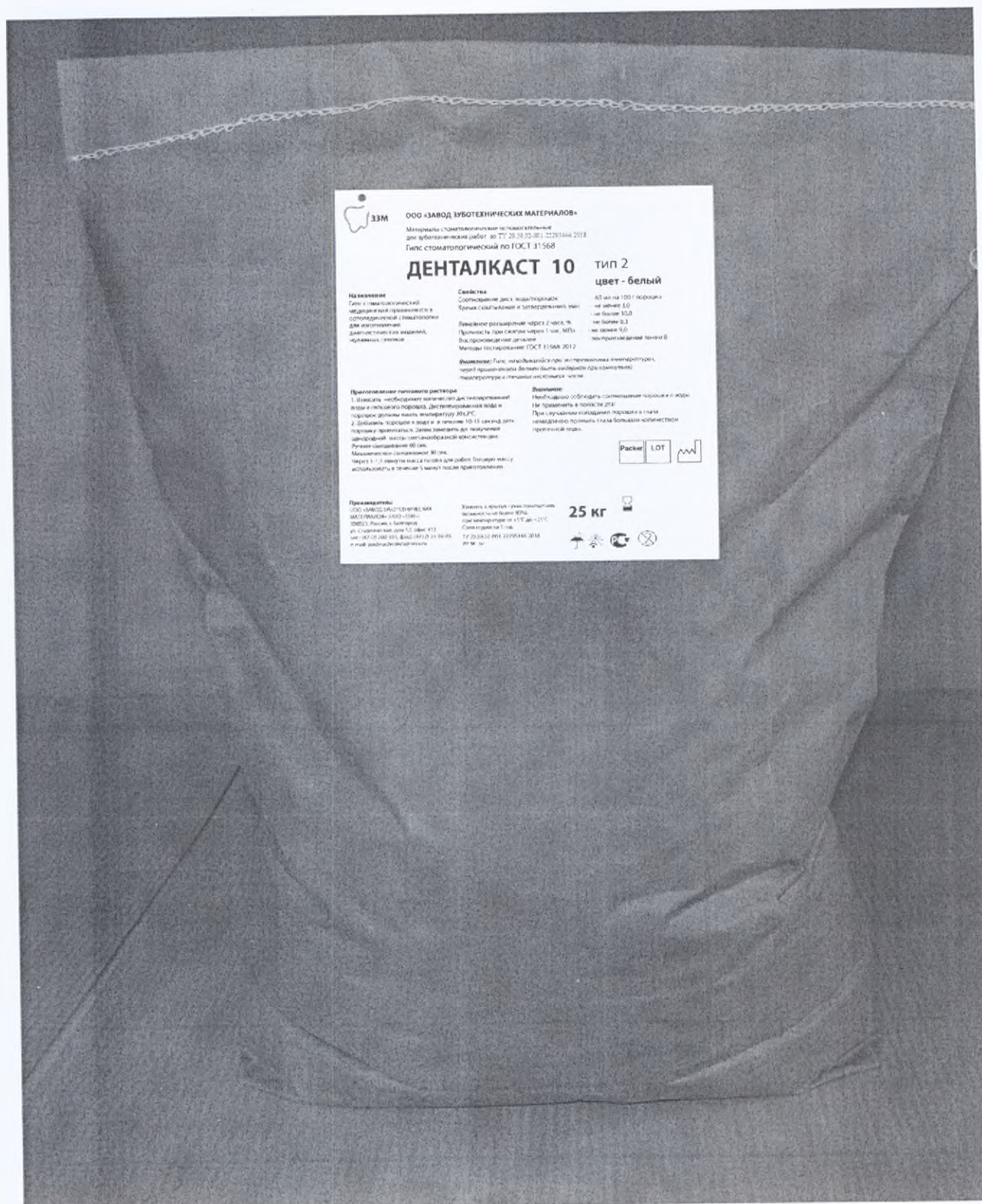

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»
 Материалы стоматологические, предназначенные
 для зуботехнических работ. № ТУ 28.38.02.001.22.00044.2018
 Гипс стоматологический по ГОСТ 31568

ДЕНТАЛКАСТ 10 тип 2

цвет - белый

Назначение Гипс - стоматологический, предназначенный для изготовления в стоматологической практике моделей, слепков, оттисков, диагностических и лечебных моделей, зубных слепков.	Свойства Соответствие классификации Бритая, сглаженная и затвердевшая, чистая. Растворение в воде через 2 часа, % Прочность при сжатии через 1 час, МПа Водостойкость, дней Методы испытаний по ГОСТ 31568-2012	А2 до 100 г/л порошка не менее 3,0 не более 3,2 не более 3,3 не менее 3,0 не менее 3,0 не менее 3,0
---	---	--

Внимание! Гипс, предназначенный для изготовления моделей, слепков, оттисков, диагностических и лечебных моделей, должен быть высушен при комнатной температуре и храниться в сухом месте.

Подготовка к применению:
 1. Засыпать необходимое количество гипса в подготовленную форму и тщательно перемешать. Длительность перемешивания должна быть не менее 10-15 секунд.
 2. Добавить порошок в воду и тщательно перемешать. Длительность перемешивания должна быть не менее 10-15 секунд.
 3. Добавить порошок в воду и тщательно перемешать. Длительность перемешивания должна быть не менее 10-15 секунд.
 4. Добавить порошок в воду и тщательно перемешать. Длительность перемешивания должна быть не менее 10-15 секунд.
 5. Добавить порошок в воду и тщательно перемешать. Длительность перемешивания должна быть не менее 10-15 секунд.

Хранение: Гипс необходимо хранить в сухом месте, защищенном от влаги. Срок хранения - 12 месяцев.

Примечание: Гипс необходимо хранить в сухом месте, защищенном от влаги. Срок хранения - 12 месяцев.

Производитель:
 ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»
 105083, Москва, Б. Пискаревский пр., д. 10, стр. 1
 Тел: (495) 283-0000, (495) 283-0001, (495) 283-0002
 e-mail: info@zsm.ru

Хранить в закрытой упаковке при температуре не выше 30°C, относительная влажность воздуха не более 70%.

25 кг

Образец маркировки - этикетка гипс «ДЕНТАЛКАСТ» 10, тип 2



ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Материалы стоматологические вспомогательные
для зуботехнических работ по ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
Гипс стоматологический по ГОСТ 31568

ДЕНТАЛКАСТ 10

тип 2

цвет - белый

Назначение

Гипс стоматологический
медицинский применяется в
ортопедической стоматологии
для изготовления
диагностических моделей,
муляжных слепков

Свойства

Соотношение дист. вода/порошок
Время схватывания и затвердевания, мин

Линейное расширение через 2 часа, %
Прочность при сжатии через 1 час, МПа
Воспроизведение деталей
Методы тестирования: ГОСТ 31568-2012

- 60 мл на 100 г порошка
- не менее 3,0
- не более 30,0
- не более 0,3
- не менее 9,0
- воспроизведение линии В

Внимание: Гипс, находившийся при экстремальных температурах,
перед применением должен быть выдержан при комнатной
температуре в течение нескольких часов.

Приготовление гипсового раствора

1. Взвесить необходимое количество дистиллированной
воды и гипсового порошка. Дистиллированная вода и
порошок должны иметь температуру $20 \pm 2^\circ\text{C}$.
2. Добавить порошок к воде и в течение 10-15 секунд дать
порошку пропитаться. Затем замешать до получения
однородной массы сметанообразной консистенции.
Ручное смешивание 60 сек.
Механическое смешивание 30 сек.
Через 1-1,5 минуты масса готова для работ. Готовую массу
использовать в течение 5 минут после приготовления.

Внимание:

Необходимо соблюдать соотношение порошка и воды.
Не применять в полости рта!
При случайном попадании порошка в глаза
немедленно промыть глаза большим количеством
проточной воды.



Производитель:

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ» (ООО «33М»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, дом 52, офис 412
тел.: (4722) 200-555, факс: (4722) 31-59-03
e-mail: postmaster@viadmiva.ru

Хранить в крытых сухих помещениях
(влажность не более 80%),
при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$
Срок годности 1 год
ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
РУ № от

25 кг



Гипс стоматологический по ГОСТ 31568 «ДЕНТАЛКАСТ» Арти 30 тип 3



ООО «ЗАВОД СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»
Материалы и технологии для стоматологических работ № 27 20 76 75 86 229144 2018
Гипс стоматологический по ГОСТ 31568

ДЕНТАЛКАСТ АРТИ 30 ТИП 3


цвет - белый

Назначение Гипс стоматологический высокопрочный применяется для фиксации моделей в ортогнатике	Свойства Содержит анти-водопоглощающие добавки, не впитывает воду. Прочность при сжатии через 2 часа, 30° Высокая прочность при сжатии через 2 часа, 30° Модуль упругости по ГОСТ 31568-2012	30 кг на 100 г порошка - 5,5 - 5,5 по шкале R, 0,8 по шкале 70 выпускается марка А
--	--	---

Внимание! Гипс, используемый при ортогнатической стоматологии, перед применением должен быть высушен при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Приготовление и использование
1. Всыпать необходимое количество гипса в подготовленную форму и тщательно перемешать. Дать гипсу высохнуть в течение 2 часов при температуре 20-25°C.
2. Добавить порошок в воду и, используя 10-15 секунд, дать гипсу затвердеть. Гипс можно использовать для изготовления моделей.
Порошок упакован в 25 кг.
Порошок упакован в 25 кг.

Внимание! Неиспользованный гипс должен быть высушен при комнатной температуре в течение нескольких часов.
Для лучшей фиксации порошка в воду рекомендуется использовать порошок в виде жидкой смеси, добавив небольшое количество воды.

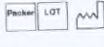

Packlot LOT

Примечание:
ООО «ЗАВОД СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗINFORM.RU
800000 Россия, г. Москва
ул. Суровых, д. 55, стр. 112
тел. (495) 280-1111, факс (495) 280-1112
e-mail: info@zsm.ru

Упаковка: 25 кг
Срок годности: 2 года
Год выпуска: 2018

25 кг



Образец маркировки - этикетка
гипс «ДЕНТАЛКАСТ» Арти 30 тип 3



ЗЗМ

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Материалы стоматологические вспомогательные
для зуботехнических работ по ТУ 20.59.52-001-22295444-2018

Гипс стоматологический по ГОСТ 31568

ДЕНТАЛКАСТ АРТИ 30 тип 3

цвет - белый

Назначение

Гипс стоматологический
высокопрочный применяется
для фиксации моделей в
артикуляторе.

Свойства

Соотношение дист. вода/порошок
Рабочее время, мин
Время затвердевания, мин
Линейное расширение через 2 часа, %
Прочность при сжатии через 1 час, МПа
Воспроизведение деталей
Методы тестирования. ГОСТ 31568-2012

- 30 мл на 100 г порошка
- 3,5
- 5,5
- не более 0,08
- не менее 20
- воспроизведение линии А

Внимание: Гипс, находившийся при экстремальных температурах,
перед применением должен быть выдержан при комнатной
температуре в течение нескольких часов.

Приготовление гипсового раствора

1. Взвесить необходимое количество дистиллированной воды и гипсового порошка. Дистиллированная вода и порошок должны иметь температуру $20 \pm 2^\circ\text{C}$.
 2. Добавить порошок к воде и в течение 10-15 секунд дать порошку пропитаться, затем замешать до получения однородной массы.
- Ручное смешивание 60 сек.
Механическое смешивание 30 сек.

Внимание:

Необходимо соблюдать соотношение порошка и воды.
Не применять в полости рта!
При случайном попадании порошка в глаза
немедленно промыть глаза большим количеством
проточной воды.



Производитель:

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ЗЗМ»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, дом 52, офис 412
тел.: (4722) 200-555, факс: (4722) 31-59-03
e-mail: postmaster@vladmiva.ru

Хранить в крытых сухих помещениях
(влажность не более 80%),
при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$
Срок годности 2 года
ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
РУ № от

25 кг



Гипс стоматологический по ГОСТ 31568 «ДЕНТАЛКАСТ» 30, тип 3



ООО «ЗАВОД СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Материалы стоматологические стоматологические
для зуботехнических работ № ТУ 30.38.02.001-22.04.04-2018

Гипс стоматологический по ГОСТ 31568

ДЕНТАЛКАСТ 30 тип 3

цвет - голубой

Назначение

Базис стоматологический высокопрочный для моделей, применяется в ортопедической стоматологии для изготовления диагностических и рабочих моделей челюстей в технологии гипсового зубного протезирования, а также для получения раббермодельных копий и изготовления мастер-моделей зубных рядов.

Материал применяется только для использования профессиональными стоматологами.

Приготовление гипсового раствора

1. Взвесить необходимое количество дистиллированной воды и гипсового порошка. Дистиллированная вода и порошок должны иметь температуру 20±2°C.
2. Добавить порошок к воде и в течение 10-15 секунд дать порошку пропитаться, затем помешать до получения однородной массы.
3. Раствор смешивать производить в течение 60 сек.
4. Смешивание с помощью вакуумного сифона в течение 30 сек.
5. Залить полученную массу в отливку. Для получения модели без недостатков рекомендуется использовать вакуумный отливочник.
6. Извлечь модель из отливки не раньше чем через 45 минут.

Примечание:

ООО «ЗАВОД СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ЗСМ»), 39001, Россия, г. Белгород

ул. Студенческая, д. 32, офис 412
тел.: +7 (306) 380-000, факс: +7 (306) 31-99-00
и сайт: www.zsm-bel.ru

Свойства

Соответствие требованиям:
Время схватывания и затвердевания, мин.
Плотность упаковки при затвердевании через 2 часа, %
Прочность при сжатии через 1 час, МПа
Восприимчивость к давлению
Методы тестирования: ГОСТ 31568-2012

Внимание: Гипс, использованный при изготовлении моделей, перед применением должен быть выдержан при комнатной температуре и влажности не менее 2 часов.

Внимание: Необходимо соблюдать соотношение порошка и воды. Не применять в полости рта! При случайном попадании порошка в глаза немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды.


25 кг



Пакет LOT



Образец маркировки - этикетка
гипс «ДЕНТАЛКАСТ Г» 30, тип 3

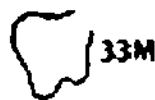

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Материалы стоматологические вспомогательные
для зуботехнических работ по ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
Гипс стоматологический по ГОСТ 31568

ДЕНТАЛКАСТ 30 тип 3

цвет - голубой

Назначение

Гипс стоматологический высокопрочный для моделей применяется в ортопедической стоматологии для изготовления диагностических и рабочих моделей челюстей в технологии съемного зубного протезирования, а также для получения разборных моделей челюстей и изготовления мастер-моделей зубного ряда.

Материал предназначен только для использования профессиональными стоматологами.

Приготовление гипсового раствора

1. Взвесить необходимое количество дистиллированной воды и гипсового порошка. Дистиллированная вода и порошок должны иметь температуру $20 \pm 2^\circ\text{C}$.
2. Добавить порошок к воде и в течение 10-15 секунд дать порошку пропитаться, затем замешать до получения однородной массы.
- Ручное смешивание производить в течение 60 сек. Замешивание с помощью вакуумного смесителя в течение 30 сек.
3. Залить полученную массу в оттиск. Для получения модели без пористости рекомендуется использовать вибростол.
4. Извлечь модель из оттиска не раньше чем через 45

Производитель:

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ЗЗМ»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, дом 52, офис 412
тел.: (4722) 200 555, факс: (4722) 31 59 03
e-mail: postmaster@vladmiva.ru

Свойства

Соотношение дист. вода/порошок
Время схватывания и затвердевания, мин
Линейное расширение при затвердевании через 2 часа, %
Предел прочности при сжатии через 1 час, МПа
Воспроизведение деталей
Методы тестирования: ГОСТ 31568-2012

- 30 мл на 100 г порошка
- не более 8,0, не менее -14,0
- не более 0,2
- не менее 20,0
- воспроизведение линии А

Внимание: Гипс, находившийся при экстремальных температурах, перед применением должен быть выдержан при комнатной температуре в течение нескольких часов.

минут с момента заливки в оттиск.

Внимание:

Необходимо соблюдать соотношение порошка и воды.

Не применять в полости рта!

При случайном попадании порошка в глаза немедленно промыть глаза большим количеством проточной воды.

Packer


LOT




25 кг

Хранить в крытых сухих помещениях (влажность не более 80%), при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$
Срок годности 2 года
ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
РУ № от



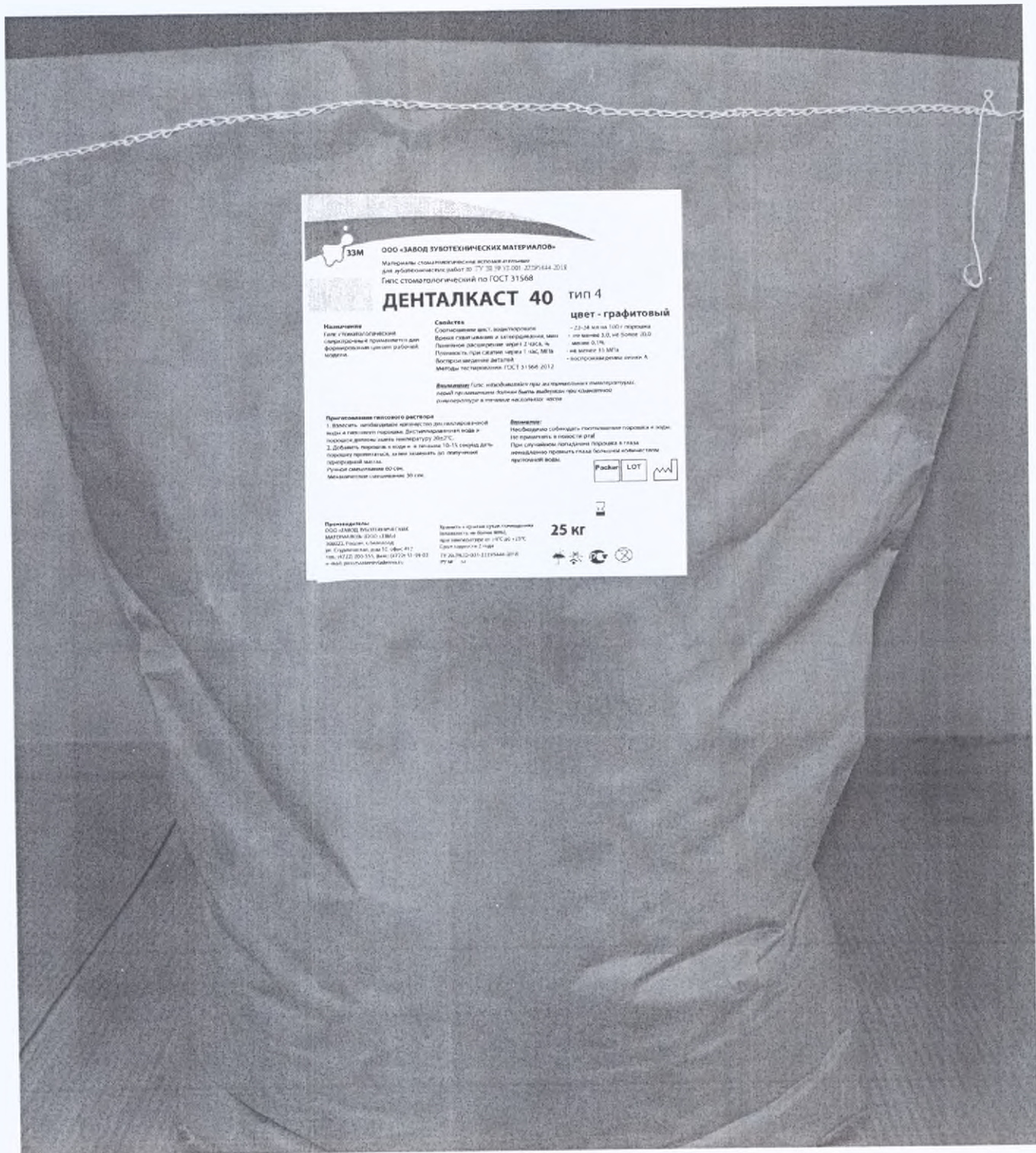

Образец маркировки - этикетка

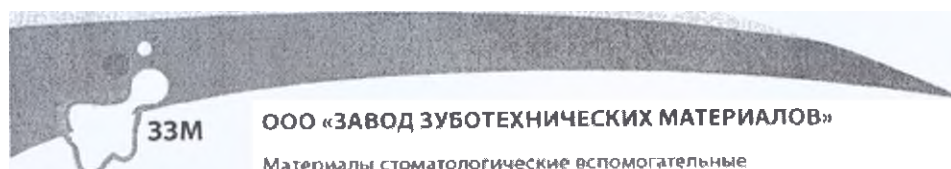

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Материалы стоматологические вспомогательные
для зуботехнических работ по ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
Гипс стоматологический по ГОСТ 31568

ДЕНТАЛКАСТ 40 тип 4

цвет - графитовый

Назначение

Гипс стоматологический
сверхпрочный применяется для
формирования цоколя рабочей
модели.

Свойства

Соотношение дист. вода/порошок
Время схватывания и затвердевания, мин
Линейное расширение через 2 часа, %
Прочность при сжатии через 1 час, МПа
Воспроизведение деталей
Методы тестирования: ГОСТ 31568-2012

- 22-24 мл на 100 г порошка
- не менее 3,0, не более 20,0
- менее 0,1%
- не менее 35 МПа
- воспроизведение линии А

Внимание: Гипс, находившийся при экстремальных температурах,
перед применением должен быть выдержан при комнатной
температуре в течение нескольких часов.

Приготовление гипсового раствора

1. Взвесить необходимое количество дистиллированной воды и гипсового порошка. Дистиллированная вода и порошок должны иметь температуру $20 \pm 2^\circ\text{C}$.
 2. Добавить порошок к воде и в течение 10-15 секунд дать порошку пропитаться, затем замешать до получения однородной массы.
- Ручное смешивание 60 сек.
Механическое смешивание 30 сек.

Внимание:

Необходимо соблюдать соотношение порошка и воды.
Не применять в полости рта!
При случайном попадании порошка в глаза
немедленно промыть глаза большим количеством
проточной воды.

Packer

LOT



Производитель:

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ЗЗМ»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, дом 52, офис 412
тел.: (4722) 200-555, факс: (4722) 31-59-03
e-mail: postmaster@vladmiva.ru

Хранить в крытых сухих помещениях
(влажность не более 75%)
при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$
Срок годности 2 года
ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
РУ № от

25 кг



Образец маркировки - этикетка



ЗЗМ

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Материалы стоматологические вспомогательные
для зуботехнических работ по ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
Гипс стоматологический по ГОСТ 31568

ДЕНТАЛКАСТ 50

тип 4

цвет - золотисто-коричневый

Назначение

Применяется для:

- изготовления комбинированных разборных гипсовых моделей челюстей и штампиков при протезировании металлокерамическими и цельнокерамическими протезами;
- отливки рабочих моделей, используемых при изготовлении вкладок, коронок и мостовидных протезов;
- изготовления полных и частичных моделей в съемном протезировании и имплантологии.

Свойства

Соотношение дист. вода/порошок
Время схватывания и затвердевания, мин
Линейное расширение через 2 часа, %
Прочность при сжатии через 1 час, МПа
Воспроизведение деталей
Методы тестирования: ГОСТ 31568-2012

- 22-24 мл на 100 г порошка
- не менее 8,0 не более 20,0
- не более 0,15
- не менее 35
- воспроизведение линии А

Внимание: Гипс, находящийся при экстремальных температурах, перед применением должен быть выдержан при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Приготовление гипсового раствора

1. Взвесить необходимое количество дистиллированной воды и гипсового порошка. Дистиллированная вода и порошок должны иметь температуру $20 \pm 2^\circ\text{C}$.
2. Добавить порошок к воде и в течение 10-15 секунд дать порошку пропитаться, затем замешать до получения однородной массы.
Ручное смешивание 60 сек.
Механическое смешивание 30 сек.
3. Залить полученную массу в оттиск. Для получения модели без пористости рекомендуется использовать вибростол.
4. Извлечь модель из оттиска через 30-40 минут с момента заливки в оттиск.

Производитель:

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ЗЗМ»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, дом 52, офис 412
тел.: (4722) 200-555, факс: (4722) 31-59-03
e-mail: postmaster@vladmiva.ru

Хранить в крытых сухих помещениях (влажность не более 80%), при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$
Срок годности 2 года
ТУ 20.59.52-001-22295444-2018
ПУ № от


25 кг



Packer

LOT



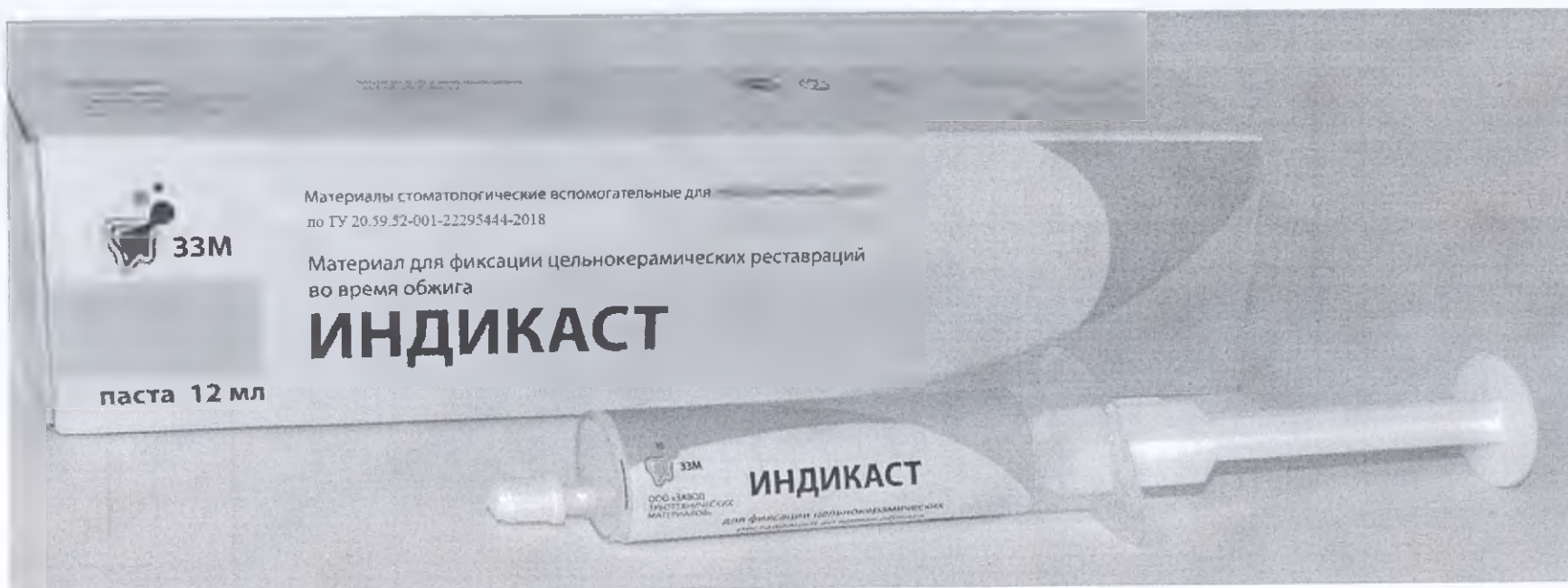

Образцы маркировки - коробка, этикетка

Производитель:
ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ»
390023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, дом 52, офис 412
тел.: +7 472 200 555
факс: +7 472 21 59 03

Хранить в сухом темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года
Не оставлять шприц
в открытом состоянии надолго!

ТУ 20.59.52.001-22295444-2018
РУ № от



Dental auxiliary materials for dental works
ТУ 20.59.52.001-22295444-2018

Material for fixation of all-ceramic restorations
during firing

INDICAST

paste 12 ml

Manufacturer:
LTD "ZZM"
Studenteskaya st. 52, off. 412
Belgorod, 308023, Russia
tel.: +7 472 200 555
fax: +7 472 21 59 03

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +25°C
2 years shelf-life
Do not leave open syringe for long!




Материалы стоматологические вспомогательные для зуботехнических работ
по ТУ 20.59.52.001-22295444-2018


Материал для фиксации цельнокерамических реставраций
во время обжига

ИНДИКАСТ

паста 12 мл

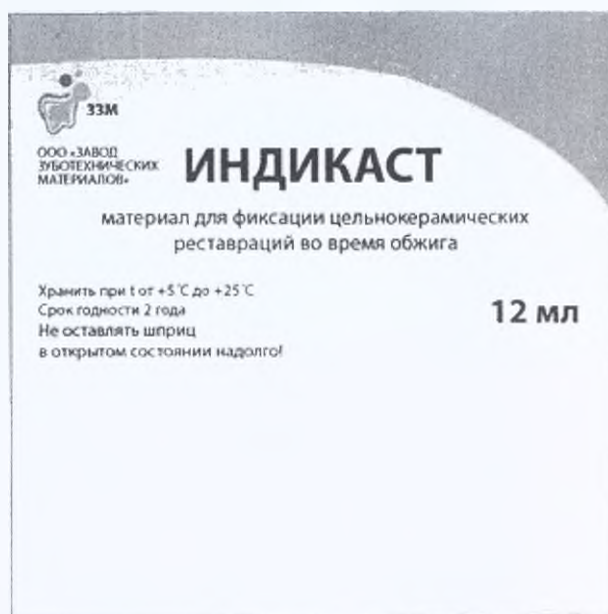

Материал для изготовления оттисковых ложек «ФОТОТРЕЙ»

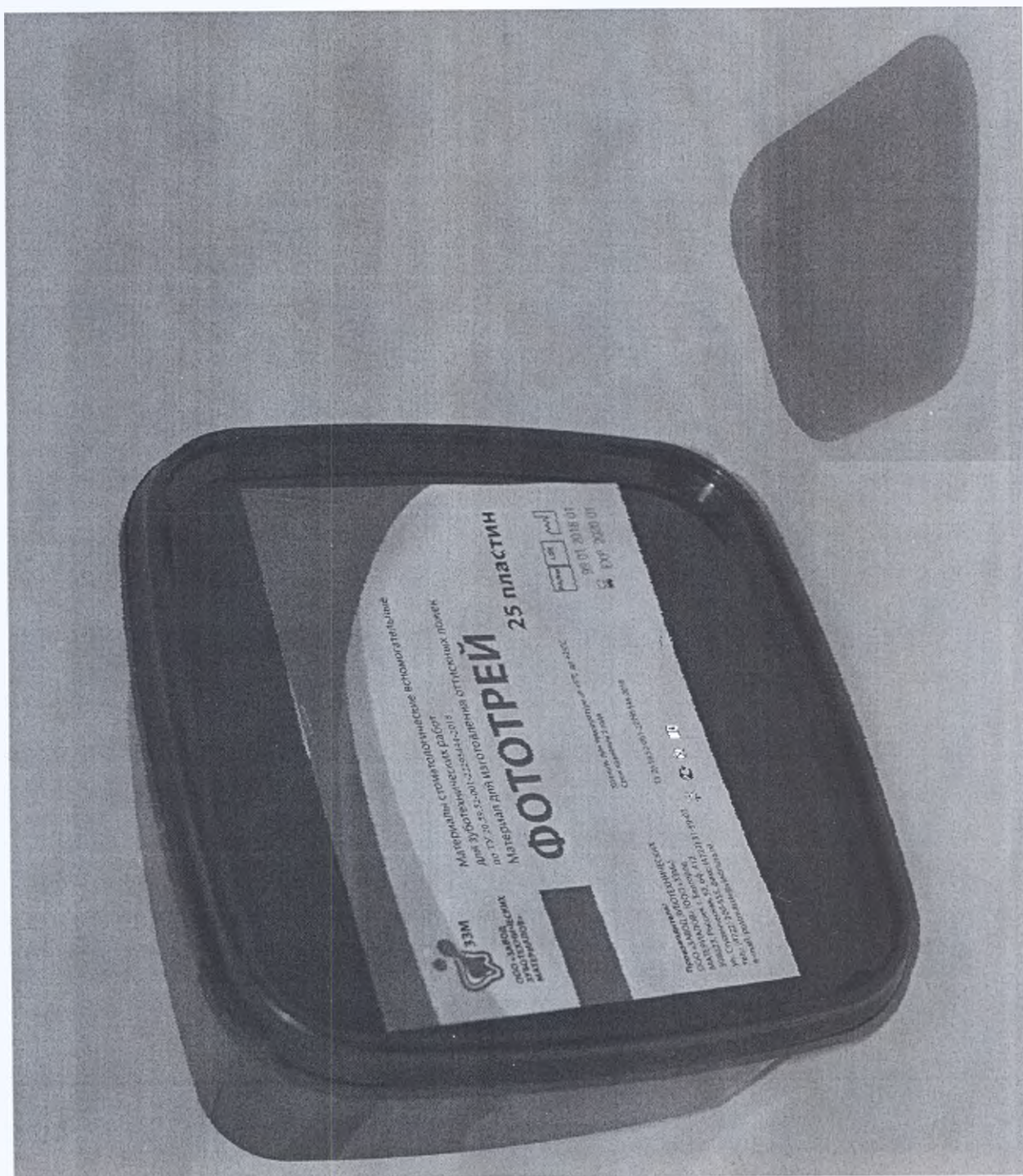



ООО «ЗАВОД
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ»

Материалы стоматологические вспомогательные
для зуботехнических работ
по ТУ 20.59.52-001-22295444-2018

Материал для изготовления оттисковых ложек

ФОТОТРЕЙ

25 пластин

Производитель:

ООО «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ЗЗМ»)

308023, Россия, г. Белгород

ул. Студенческая, дом 52, офис 412

тел.: (4722) 200-555, факс: (4722) 31-59-03


e-mail: postmaster@vladmlva.ru

Хранить при температуре от +5°C до +25°C

Срок хранения 2 года

ТУ 20.59.52-001-22295444-2018

РУ № от

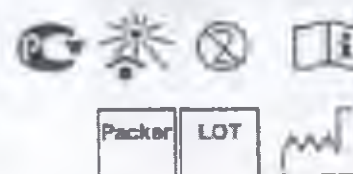

Образец маркировки - этикетки

В данном документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

