

УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Рос-
медтехнологии» — ЭТП «МГ»



И. Г. Иванов

2008 г.

ПЕТЛИ С ТИТАНОВОЙ РУЧКОЙ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЯДРА ХРУСТАЛИКА ПУях-«ЭТП-МГ»

Этикетка

ГХ.1441.00.00 ЭТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Петли с титановой ручкой для удаления ядра хрусталика ПУях-«ЭТП-МГ» (в дальнейшем — петли) предназначены:

- петля с насечкой — для удаления жесткого ядра хрусталика;
- петля без насечки — для удаления мягкого ядра хрусталика.

Область применения — офтальмология.

Петли предназначены для поставки в районы с умеренным и холодным климатом (исполнение — УХЛ 4.2).

С.И.И.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и основные размеры петель:

- длина рабочей части — 145 мм;
- ширина рабочей части — 4 мм.

Масса петель — не более 0,02 кг.

Петли изготовлены:

- ручка — из титана BT1-0 по ГОСТ 27256;
- рабочая часть — из нержавеющей стали марки 03X11H10M2T2 по ТУ 14-131-795 или 12X18H10T по ГОСТ 5632.

Средний срок службы петель — не менее 3 лет.

За критерий предельного состояния принимают:

- механические повреждения;
- появление неустранимой коррозии, видимой невооруженным глазом;
- отгиб рабочей части на 15°±2% от нормы.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Петли поставляются в коробках по 1 шт. одного наименования с этикеткой.

4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Инструменты устойчивы:

- к дезинфекции в тройном растворе при температуре +18 °C в течение 45±5 мин.;
- к предстерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания под проточной водой по ГОСТ 2874-82 в течение 0,5±0,1 мин., замачивания в растворе моющего препарата «Биолот» при температуре 40±5 °C в течение 15±1 мин., мойки изделий в растворе «Биолот» в течение 0,5±0,1 мин., ополаскивания под проточной водой по ГОСТ 2874-82 в течение 3±1 мин., ополаскивания дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72 в течение 0,5±0,1 мин., сушки горячим воздухом при температуре 85⁺²₋₁₀ °C до полного исчезновения влаги;
- к стерилизации горячим воздухом при температуре 180⁺²₋₁₀ °C в течение 60±5 мин.

5. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Петли в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности не более 80% при температуре +25 °C.

Воздух помещения не должен содержать коррозионноактивных примесей.

					ГХ.1441.00.00 ЭТ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Петли с титановой ручкой для удаления ядра хрусталика ПУях-«ЭТП-МГ» Этикетка			Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Десятник А. И.							A	2	3
Пров.	Герасимов В. Н.									
Н. контр.										
Ум										
ООО ЦИРМИ					Филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» — ЭТП «МГ»					

6. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Петли соответствуют ТУ 9434-022-04980981-2004 и признаны годными для эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____

ОТК _____

Евгений

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 1,5 года.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке с этикеткой предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 127486 Россия, Москва, Бескудниковский б-р, д. 59а, стр. 2а.

					ГХ.1441.00.00 ЭТ	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		