

Директор Филиала ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Рос-
сийской Федерации»  ЭТП «МГ»



2008 г.

Этикетка

ГХ.0103.00.00 ЭТ

2008

Искусственные хрусталики глаза модели Т-03 предназначены для имплантации после удаления катаракты любой этиологии. В глазу тело линзы и передние опорные элементы (антенки) располагаются на радужке, задние опорные элементы — в задней камере. Линза относится к разряду ирис-клипс линз.

Евгений

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.1. Искусственные хрусталики глаза модели Т-03 ГХ.0103.00.00 — 1 шт. Хрусталик поставляется стерильным; повторная стерилизация хрусталика не допускается.

1.2. Эксплуатационная документация: этикетка ГХ.0103.00.00 ЭТ — 1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Габаритные размеры:

- величина по дужкам — $\varnothing 9^{+0,2}$ мм;
- диаметр линзы — $\varnothing 5_{-0,05}$ мм;
- световой диаметр — $\varnothing 3$ мм;
- расположение дужек — $120 \pm 2^\circ$.

2.2. Оптическая сила — от 8 до 32 диоптрий через 1 диоптрию. Величина отклонения оптической силы хрусталика не должна быть более 0,5 диоптрий. Маркировка на поверхности хрусталика содержит данные об оптической силе в диоптриях и шифры монтажницы и прессовщицы.

2.3. Масса хрусталика — не более 12 мг.

2.4. Хрусталик изготавливается из следующих материалов:

- линза — из инертного полиметилметакрилата — стекло органическое высокочистое СОВ-1 и СОВ-2 «Спектр» (БУО 023.089 ТУ) НПО «Полимер» или СО-95-К по ГОСТ 10667-90;
- антенки с шариком — монополь капроновая по ТУ 6-06-С155-85;
- дужки — полипропилен марок 21030 или 21060 по ТУ 6-06-527-81.

2.5. Хрусталики — одноразового использования.

2.6. Климатическое исполнение — Т6.

3. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

3.1. Хрусталики в индивидуальной упаковке должны сохранять свои характеристики и стерильность в течение срока хранения в диапазоне температур от +10 до +20 °С и относительной влажности 30—50%. При хранении следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

3.2. Гарантийный срок хранения — 3 года.

4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

4.1. Хрусталики соответствуют ТУ 9396-801-04980981-97 и признаны годными для эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____

ОТК _____

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке с этикеткой предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 127486 Россия, Москва, Бескудниковский б-р, д. 59а, стр. 2а.

Име. № подл.	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	ГХ.0103.00.00 ЭТ					
				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
				Разреш.	Десятник А. И.				
				Пров.	Герасимов В. Н.				
Име. № подл.	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Искусственные хрусталики глаза модели Т-03 Этикетка			Лист	Лист	Листов
					А	2	2		
				И. контр.			Филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» — ЭТТ «МГ»		

УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Рос-
медтехнологии» — ЭТП «МГ»

_____ И. Г. Иванов

_____ 2008 г.

ИСКУССТВЕННЫЕ ХРУСТАЛИКИ ГЛАЗА
МОДЕЛИ Т-19

Этикетка

ГХ.0119.00.00 ЭТ

№ п/п	Подпись и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата

2008

Искусственные хрусталики глаза модели Т-19 предназначены для имплантации после удаления катаракты любой этиологии. Хрусталики предназначены для иридокапсулярной фиксации ИОЛ (расположение опорных элементов в капсулярном мешке).

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.1. Искусственные хрусталики глаза модели Т-19 ГХ.0119.00.00 — 1 шт. Хрусталик поставляется стерильным; повторная стерилизация хрусталика не допускается.

1.2. Эксплуатационная документация: этикетка ГХ.0119.00.00 ЭТ — 1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Габаритные размеры:

— величина по дужкам — $\varnothing 9^{+0,5}$ мм;

— диаметр линзы — $\varnothing 5_{-0,05}$ мм;

— световой диаметр — $\varnothing 3$ мм;

— расположение дужек — $120 \pm 2^\circ$.

2.2. Оптическая сила — от 8 до 32 диоптрий через 1 диоптрию. Величина отклонения оптической силы хрусталика не должна быть более 0,5 диоптрий. Маркировка на поверхности хрусталика содержит данные об оптической силе в диоптриях и шифры монтажныи и прессовщицы.

2.3. Масса хрусталика — не более 12 мг.

2.4. Хрусталик изготавливается из следующих материалов:

— линза — из инертного полиметилметакрилата — стекло органическое высокочистое СОВ-1 и СОВ-2 «Спектр» (ЫУО 023.089 ТУ) НПО «Полимер» или СО-95-К по ГОСТ 10667-90;

— дужки — полипропилен марок 21030 или 21060 по ТУ 6-06-527-81.

2.5. Хрусталики — одноразового использования.

2.6. Климатическое исполнение — Т6.

3. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

3.1. Хрусталики в индивидуальной упаковке должны сохранять свои характеристики и стерильность в течение срока хранения в диапазоне температур от +10 до +20 °С и относительной влажности 30—50%. При хранении следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

3.2. Гарантийный срок хранения — 3 года.

4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

4.1. Хрусталики соответствуют ТУ 9396-801-04980981-97 и признаны годными для эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____

ОТК _____

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке с этикеткой предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 127486 Россия, Москва, Бескудниковский б-р, д. 59а, стр. 2а.

ГХ.0119.00.00 ЭТ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Десятник А. И.		
Пров.		Герасимов В. Н.		
Н. контр.				
Име.		Павлова И. А.		

Искусственные хрусталики глаза
модели Т-19
Этикетка

Лит.	Лист	Листов
А	2	2
Филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» — ЭТП «МГ»		



УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Рос-
медтехнологии» — ЭТП «МГ»

И. Г. Иванов_____
2008 г.

ИСКУССТВЕННЫЕ ХРУСТАЛИКИ ГЛАЗА
МОДЕЛИ Т-26

Этикетка

ГХ.0135.00.00 ЭТ

Вне. № модиф.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

2008

Искусственные хрусталики глаза модели Т-26 предназначены для имплантации в заднюю камеру глаза после экстракапсулярной экстракции катаракты. Модификация хрусталика Т-26М (Ø6 мм) применяется в случае широкого или деформированного зрачка (разрывы, травмы, медриаз).

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.1. Искусственные хрусталики глаза модели Т-26 (Т-26М) ГХ.0135.00.00 — 1 шт. Хрусталики поставляются стерильными; повторная стерилизация хрусталиков не допускается.

1.2. Эксплуатационная документация: этикетка ГХ.0135.00.00 ЭТ — 1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Габаритные размеры:

— величина по дужкам — $6,2 \pm 0,4$ мм $\times$ $11 \pm 0,4$ мм;

— диаметр линзы — Ø5_{-0,05} мм, Ø6_{-0,05} мм;

— световой диаметр — Ø3 мм.

2.2. Оптическая сила — от 8 до 32 диоптрий через 1 диоптрию. Величина отклонения оптической силы хрусталика не должна быть более 0,5 диоптрий. Маркировка на поверхности хрусталика содержит данные об оптической силе в диоптриях и шифры монтажицы и прессовщицы.

2.3. Масса хрусталика — не более 12 мг.

2.4. Хрусталик изготавливается из следующих материалов:

— линза — из инертного полиметилметакрилата — стекло органическое высокочистое СОВ-1 и СОВ-2 «Спектр» (БЮО 023.089 ТУ) НПО «Полимер» или СО-95-К по ГОСТ 10667-90;

— дужки — полипропилен марок 21030 или 21060 по ТУ 6-06-527-81.

2.5. Хрусталики — одноразового использования.

2.6. Климатическое исполнение — Т6.

3. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

3.1. Хрусталики в индивидуальной упаковке должны сохранять свои характеристики и стерильность в течение срока хранения в диапазоне температур от +10 до +20 °С и относительной влажности 30—50%. При хранении следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

3.2. Гарантийный срок хранения — 3 года.

4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

4.1. Хрусталики соответствуют ТУ 9396-801-04980981-97 и признаны годными для эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____

ОТК _____

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке с этикеткой предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 127486 Россия, Москва, Бескудниковский б-р, д. 59а, стр. 2а.

Име. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ГХ.0135.00.00 ЭТ					
				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Име. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Разраб.	Десятник А. И.				
				Пров.	Герасимов В. Н.				
				Н. контр.					
				Умк.	Павлов М. А.				
				Искусственные хрусталики глаза модели Т-26 Этикетка					
				Лит.	Лист	Листов			
				А	2	2			
				Филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии — ЗПП «МГ»					