

«КОМПЛЕКТ ВЕКРАСИРИТЕЛЕЙ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ТИТАНОВЫХ С
ВИНТОВЫМ И НАПРАВЛЯЮЩИМ КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
КВМ_Т - «МИКОФ».

Этикетка.

ГХ.1500.00.00.ЭТ

№

1. Свидетельство о приемке.

Изделие изготовлено в соответствии с действующей
технологической документацией и признано годным для
эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Личная подпись

расшифровка подписи

год месяц число

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Климатическое
исполнение УХЛ4.2.

Векорасширители предназначены для расширения век при офтальмологических операциях проводимых под микроскопом.

1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1.1 В комплект поставки входят векорасширители согласно таблице 1.

Таблица 1

№ п\п	Наименование	Обозначение
1	Векорасширитель винтовой с удлиненной браншей, височный	ГХ.1500.00.00
2	Векорасширитель винтовой с удлиненной браншей, носовой	ГХ.1500.00.00-01
3	Векорасширитель винтовой носовой взрослый	ГХ.1503.00.00
4	Векорасширитель винтовой носовой детский	ГХ.1503.00.00-01
5	Векорасширитель винтовой височный детский	ГХ.1503.00.00-02
6	Векорасширитель винтовой височный взрослый	ГХ.1503.00.00-03
7	Векорасширитель винтовой сплошной носовой взрослый	ГХ.1524.00.00

ГХ.1500.00.00 ЭТ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Кондрашова Н.И. 15.03.01

Провер. Русанова О.С. 15.03.01

Гл. инж. Березовский 15.03.01

Утв. Латышев 15.03.01

Комплект векорасширителей
микрохирургических.
Этикетка.

Лит. Лист Листов
01 2 6

ЗАО ЭТП «Микрохирургия глаза»

Продолжение таблицы 1

8	Векорасширитель винтовой сплошной носовой детский	ГХ. 1524.00.00-01
9	Векорасширитель винтовой сплошной височный взрослый	ГХ. 1524.00.00-02
10	Векорасширитель винтовой сплошной височный детский	ГХ. 1524.00.00-03
11	Векорасширитель с направляющей детский	ГХ. 1550.00.00
12	Векорасширитель с направляющей взрослый	ГХ. 1550.00.00-01

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1 Габаритные размеры и масса векорасширителей должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Обозначение.	Длина $L \pm 1$ в мм	Высота $h \pm 1$ в мм	Ширина ± 1 в мм	Длина захвата $\pm 0,5$ в мм	Масса в г не более
Векорасширитель винтовой с удлиненной branшей, височный - ГХ. 1500.00.00	82	21	14	15; 16	5
Векорасширитель винтовой с удлиненной branшей, носовой - ГХ. 1500.00.00-01	78	26	14	15; 16	5
Векорасширитель винтовой носовой взрослый - ГХ. 1503.00.00	67	17	14	16	4,2
Векорасширитель винтовой носовой детский - ГХ. 1503.00.00-01	63	15	14	12	4,2

Продолжение таблицы 2

Векорасширитель винтовой височный детский ГХ.1503.00.00-02	63	18	14	12	4,2
Векорасширитель винтовой височный взрослый - ГХ.1503.00.00-03	65	20	14	16	4,2
Векорасширитель винтовой сплошной носовой взрослый - ГХ.1524.00.00	68		14	14	4,6
Векорасширитель винтовой сплошной носовой детский - ГХ.1524.00.00-01	66		14	10	4,6
Векорасширитель винтовой сплошной височный взрослый -ГХ.1524.00.00-02	66		14	14	4,6
Векорасширитель винтовой сплошной височный детский - ГХ.1524.00.00-03	60		14	10	4,6
Векорасширитель с направляющей детский - ГХ.1550.00.00	45	45	-	10	3,5
Векорасширитель с направляющей взрослый - ГХ.1550.00.00-01	45	45	-	14	4

2.2 Векорасширители изготавливаются из следующих материалов: титан BT5-1 (пруток) по ГОСТ26492-85; титан BT5-1 (лист) по ГОСТ22178-76.

2.3 Векорасширители соответствуют ТУ9434-004-04980981-2001.

ГХ.1500.00.00 ЭТ

Лист 4

3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ.

3.1 Дезинфекцию проводят одним из следующих способов: сухим горячим воздухом при температуре $(120 \pm 4)^\circ\text{C}$ в течение 45-50 мин. или тройным раствором (2% формалина, 0,5% фенола, 1,5% двууглекислого натрия) в течение (45 ± 5) мин при температуре не менее 18°C .

Предстерилизационную очистку векорасширителей проводят:

- предварительно ополаскиванием в проточной воде;
- погружением на 15-16 мин в моющий раствор «Биолот» (5г «Биолот» и 995мл питьевой воды) при температуре $40-45^\circ\text{C}$;
- повторным ополаскиванием в течение 5-4 мин в проточной воде, а затем в дистиллированной воде;
- сушка горячим воздухом при температуре $(85 \pm_{-10}^{+2})^\circ\text{C}$ до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию векорасширителей проводят в воздушном стерилизаторе сухим горячим воздухом при температуре $(180 \pm_{-10}^{+2})^\circ\text{C}$ в течение 60-65 мин.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

4.1 Транспортировать векорасширители следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Размещение и крепление ящиков с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения ящиков и ударов их друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2 Условия транспортирования векорасширителей вида климатического исполнения УХЛ4.2 по условиям хранения 5 согласно ГОСТ15150.

5 ХРАНЕНИЕ.

5.1 В индивидуальной упаковке векорасширители должны сохранять свои характеристики в течение срока хранения в интервале температур от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

5.2 Гарантийный срок хранения - 3 года.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1 Экспериментально-техническое производство «Микрохирургия глаза» гарантирует соответствие изделия: «Комплект векорасширителей микрохирургических титановых с винтовым и направляющим креплением для взрослых и детей КВМ_т - «МИКОФ»» требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

6.2 В случае рекламации изделие: «Комплект векорасширителей микрохирургических титановых с винтовым и направляющим креплением для взрослых и детей КВМ_т - «МИКОФ» - с приложением этикетки предъявляют предприятию изготовителю по адресу: г.Москва, Бескудниковский бульвар, дом 59а, ЗАО «ЭТП «Микрохирургия глаза».

6.3 Срок службы не менее 2-х лет при проведении дезинфекция и стерилизация не более 2-х раз в сутки и среднем ресурсе - 5000 циклов.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

ГХ. 1500.00.00 ЭТ

Лист 6

Кемп

Сервис

Восстановление

