

УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала ФГУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Рос-
медтехнологии» – ЭТП «МГ»


И. Г. Иванов
2010 г.

КАНЮЛИ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЛАЗНЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ

Этикетка

ГХ.1646.00.00 ЭТ

№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Канюли микрохирургические глазные ирригационные (в дальнейшем — канюли) предназначены для ирригации жидкости, воздуха (газа), вязкоэластического препарата, перфторорганического вещества, силикона и лекарственных средств при операциях по поводу катаракты, глаукомы, кератопластики, рефракционной и витреоретинальной хирургии.

Область применения — офтальмология (офтальмохирургия). Канюли предназначены для применения в клиниках и офтальмохирургических отделениях больниц.

Канюли предназначены для поставки в районы с умеренным климатом (исполнение — УХЛ 4.2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры канюль:

- длина — 37 мм;
- диаметр иглы в зависимости от исполнения — 0,45—0,6 мм;
- диаметр входного отверстия пластмассовой головки — 8,0 мм;
- угол загиба иглы — 45°.

Масса — не более 0,25 г.

Канюли изготавливаются из заготовок «иглы инъекционные однократного применения типа „Луер“ с пластмассовой головкой» по ТУ 9398-002-81136323-2008.

Средний срок сохраняемости в стерильной упаковке — 2 года. Стерилизация — газовая, окисью этилена по МУ 287-113-98. Повторная стерилизация не допускается.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки изделия входят:

- канюля одного наименования — от 1 до 10 шт.;
- эксплуатационная документация: этикетка — 1 шт.

4. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Канюли в индивидуальной упаковке должны сохранять свои характеристики и стерильность в течение срока хранения в диапазоне температур от +10 до +20 °С и относительной влажности 30—50%. При хранении следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

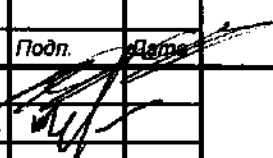
Канюли соответствуют требованиям ТУ 9436-034-94443956-2010 и признаны годными для эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____

ОТК _____

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке с этикеткой предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 127486 Россия, Москва, Бескудниковский б-р, д. 59А, стр. 2А.

Подпись и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подпись и дата	ГХ.1646.00.00 ЭТ					
				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
в. № подл.	Разраб.	Десятник А. Я.		Канюли микрохирургические глазные ирригационные Этикетка		Лит.	Лист	Листов	
	Пров.	Герасимов В. Н.				А	2	2	
	Н. контр.								
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU									
Филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» — ЗТП «МГ»									