

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Д-Медфарм»



Резник О. Д.

Фотографические изображения
медицинского изделия


***Комплект противозидемический одноразовый
«Садолит» по ТУ 9398-002-45508262-2010***

Производства

Общество с ограниченной
ответственностью «Д-Медфарм»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Комплект противоэпидемический одноразовый «Садолит-1 (общий вид упаковки)

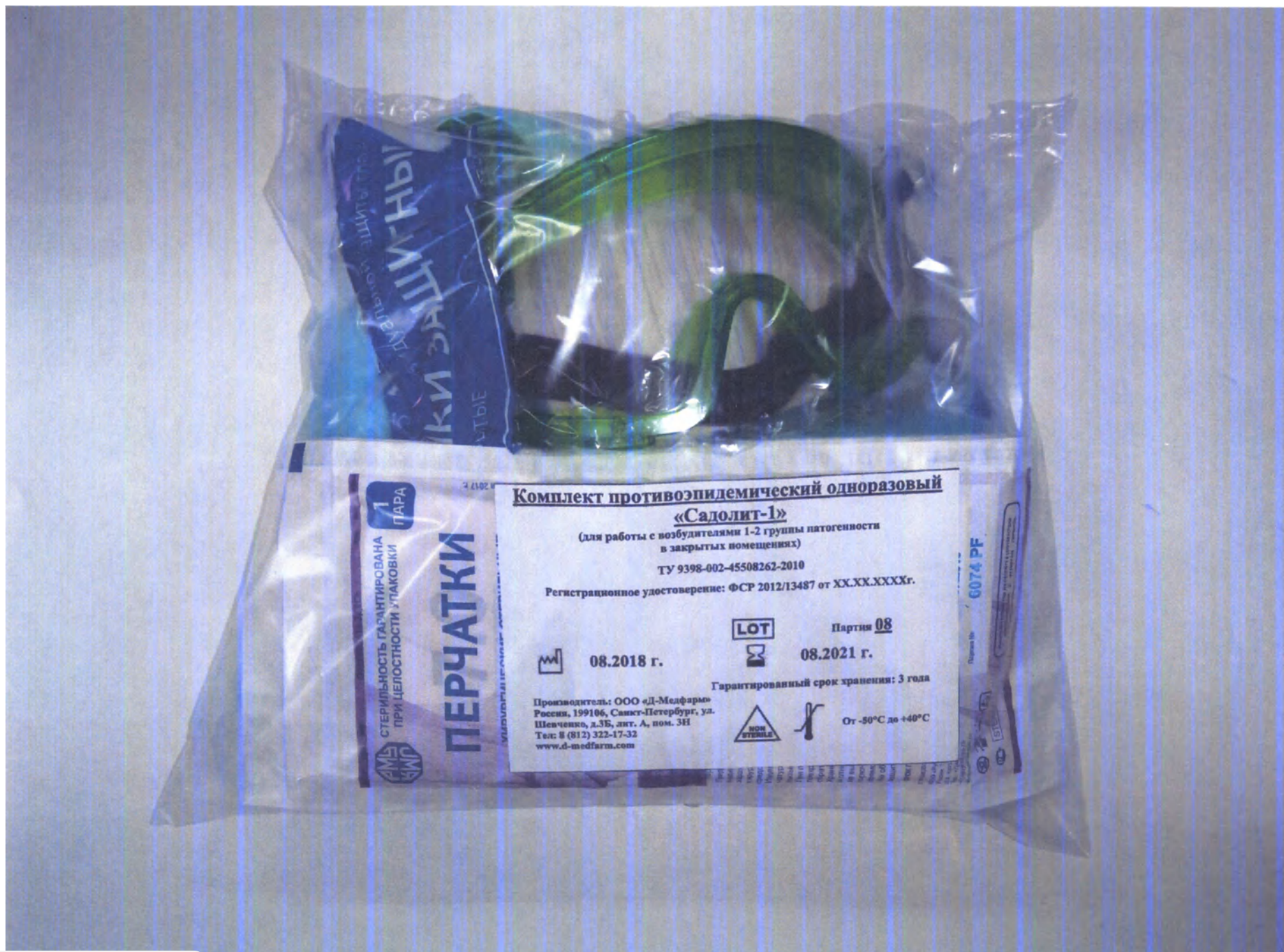

Комплект противоэпидемический одноразовый **«Садолит-1»**

**(для работы с возбудителями 1-2 группы патогенности
в закрытых помещениях)**

ТУ 9398-002-45508262-2010

Регистрационное удостоверение: ФСР 2012/13487 от XX.XX.XXXXг.

Класс потенциального риска – 2б
(см. указания по эксплуатации)



XX.XX.XXг.

LOT



Партия _____

XX.XX.XXг.

Гарантированный срок хранения: 3 года

**Производитель: ООО «Д-Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н
Тел: 8 (812) 322-17-32
www.d-medfarm.com**



От -50 °С до +40 °С

Куртка хирургическая длинный рукав плотность 42, ткань «Спанбонд»




Брюки хирургические на резинке плотность 42, ткань «Спанбонд»




Халат 160 см со стойкой и запахом, плотность 60, ткань «Спанбонд»




Косынка размером 165х115 см. из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка - шлем хирургическая «Шлем-Стандарт», из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка-шлем хирургическая «Шлем противэпидемиологический», из нетканых материалов ткань «Спанбонд»

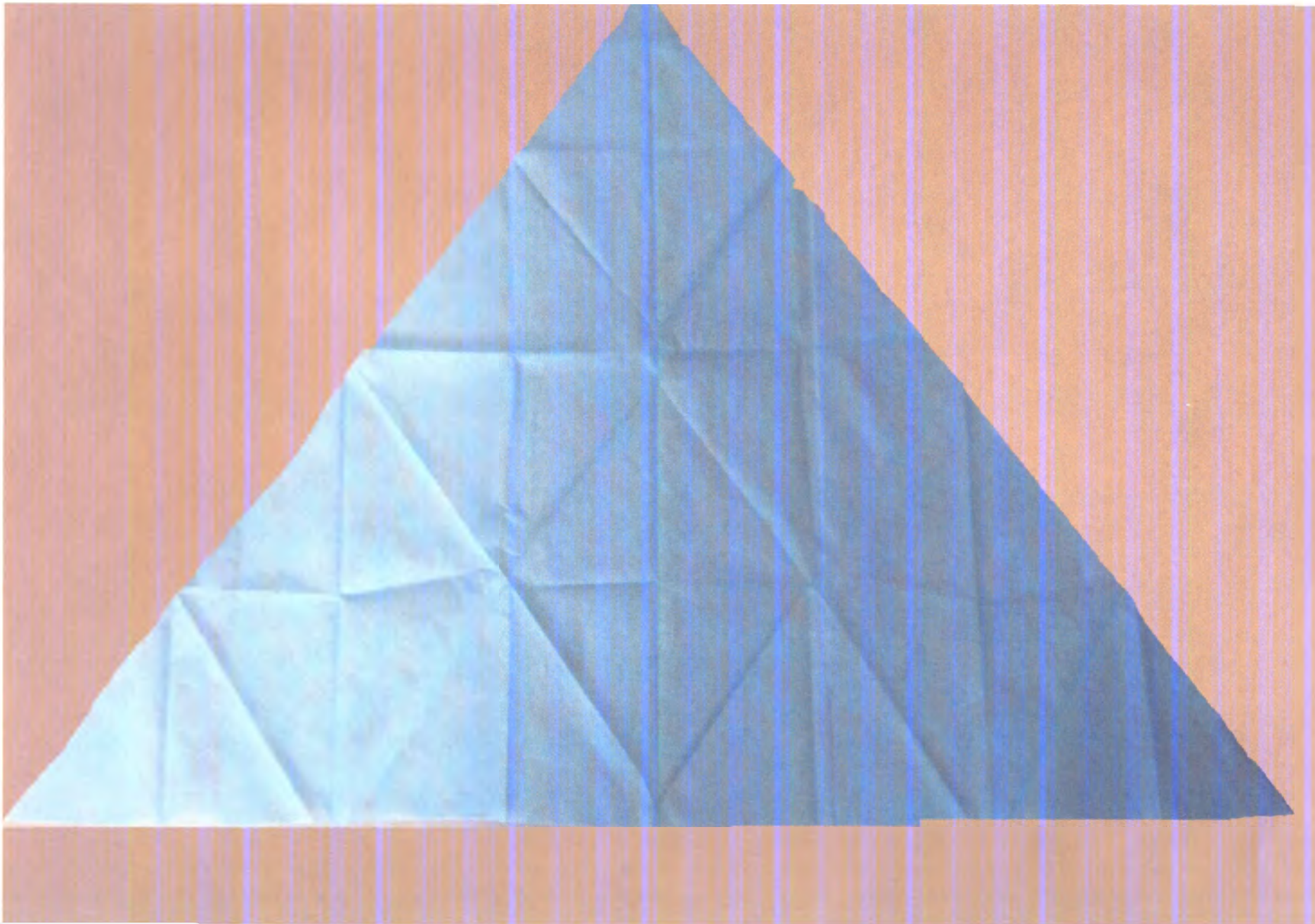


Косынка размером 165х115 см. из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка - шлем хирургическая «Шлем-Стандарт», из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка-шлем хирургическая «Шлем противэпидемиологический», из нетканых материалов ткань «Спанбонд»

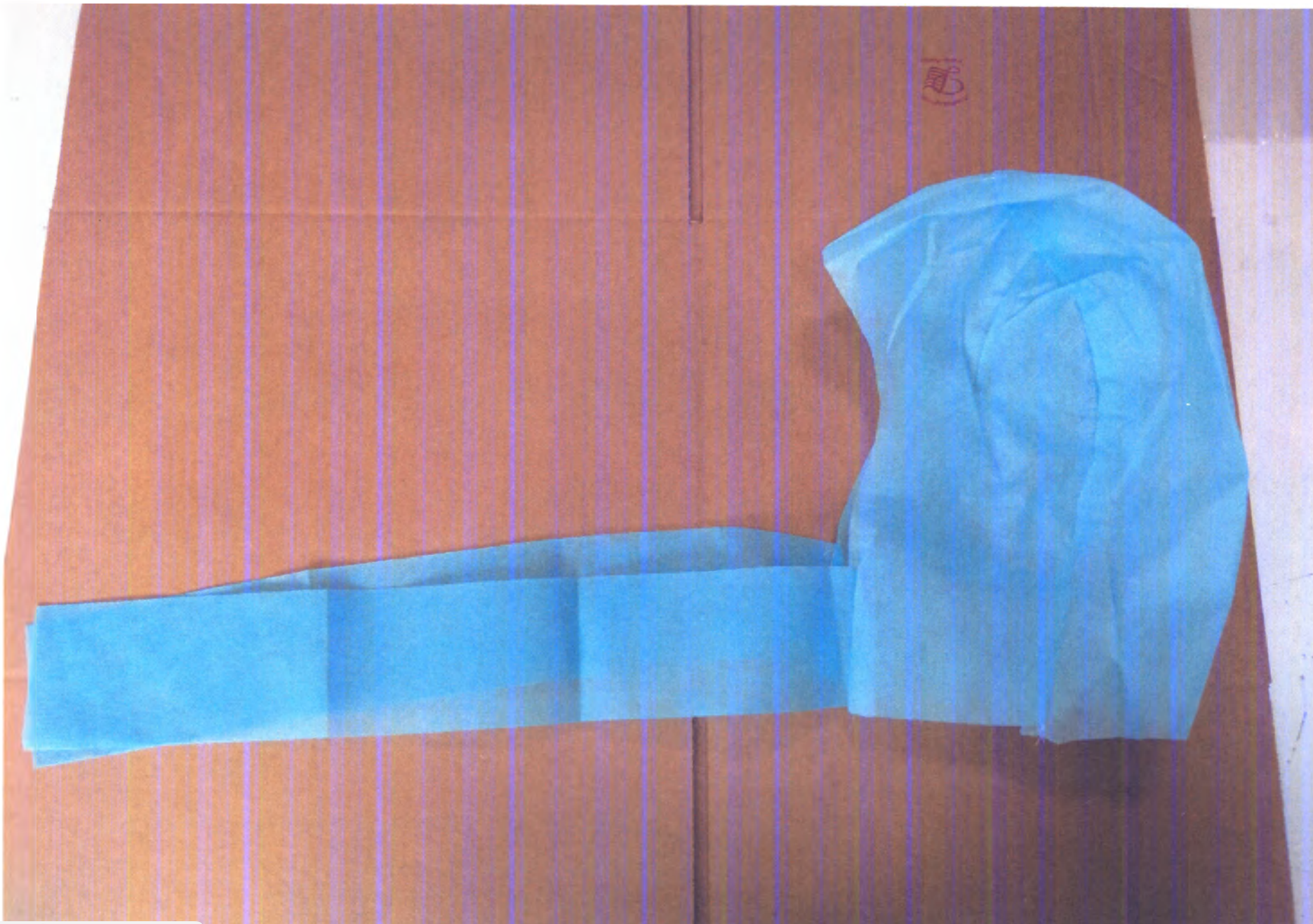

Косынка размером 165x115 см. из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка - шлем хирургическая «Шлем-Стандарт», из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка-шлем хирургическая «Шлем противэпидемиологический», из нетканых материалов ткань «Спанбонд»

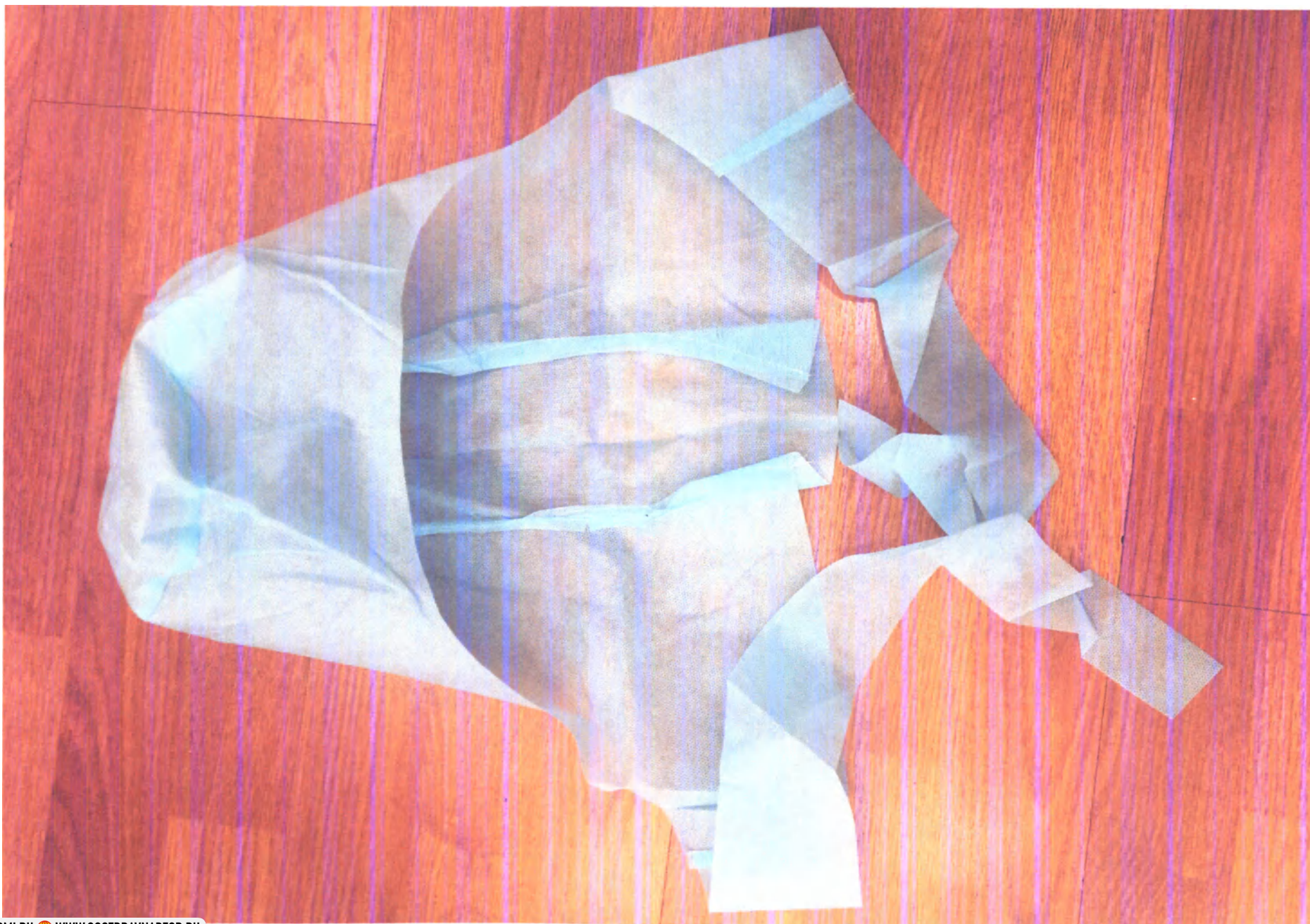

Фартук ламинированный плотность 60, ткань «Спанбонд»

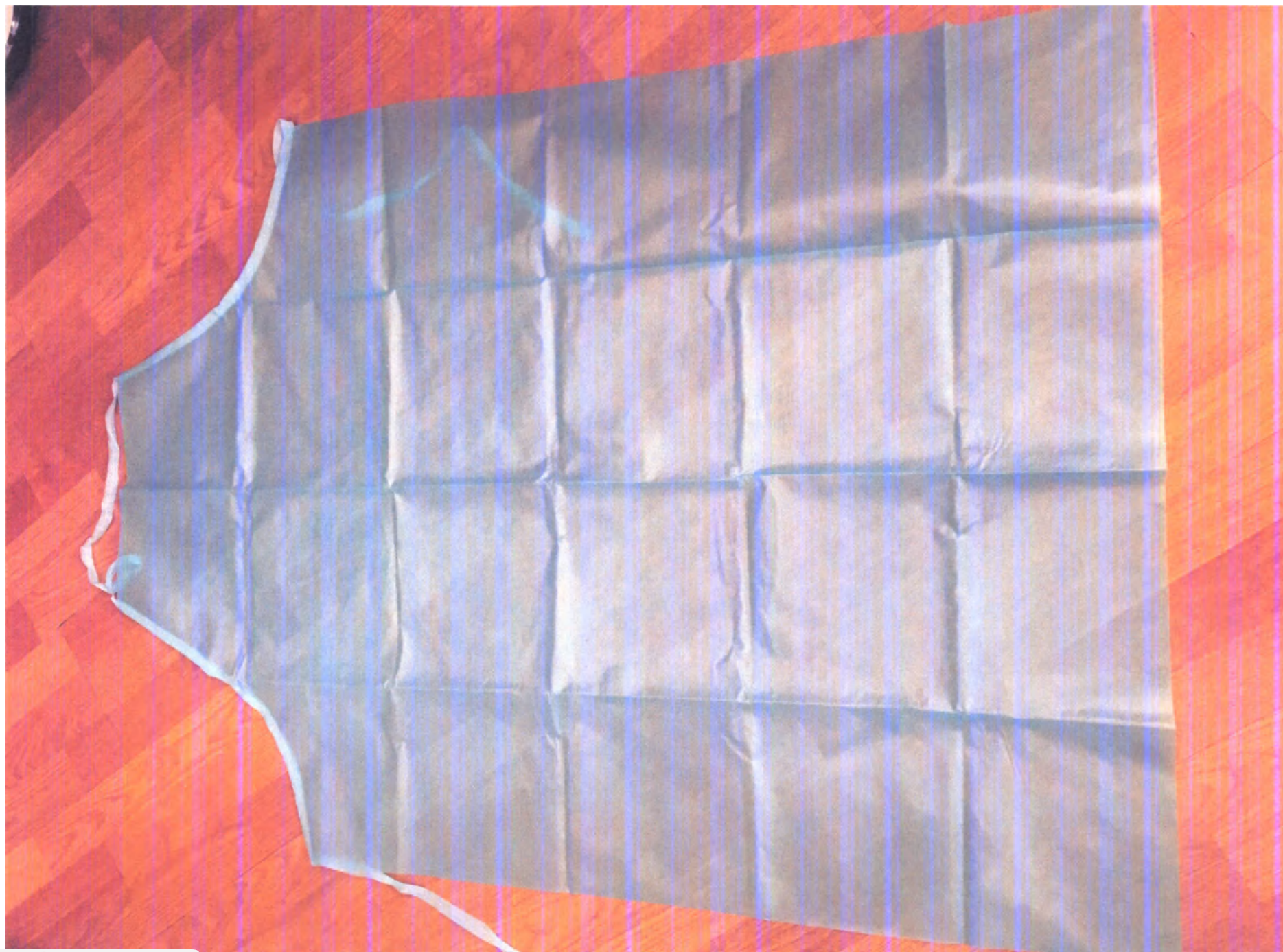


Нарукавники медицинские на резинке ламинированные плотность 60, ткань «Спанбонд»



Фильтрующий респиратор



Салфетка-полотенце плотность 25, ткань «Спанбонд»

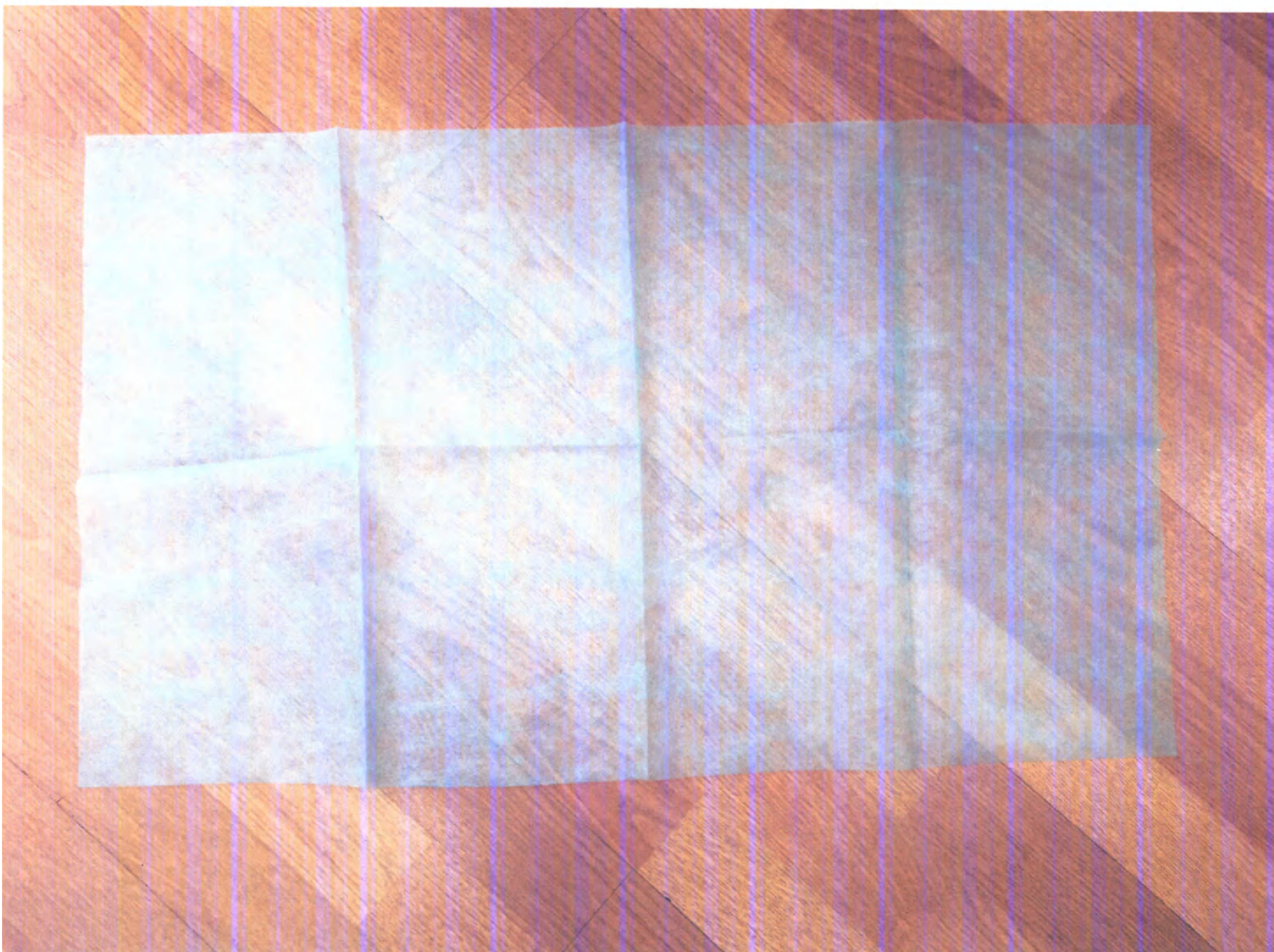

Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные




Бахилы высокие на завязках ламинированная подошва плотность 42/60, ткань «Спанбонд»



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»

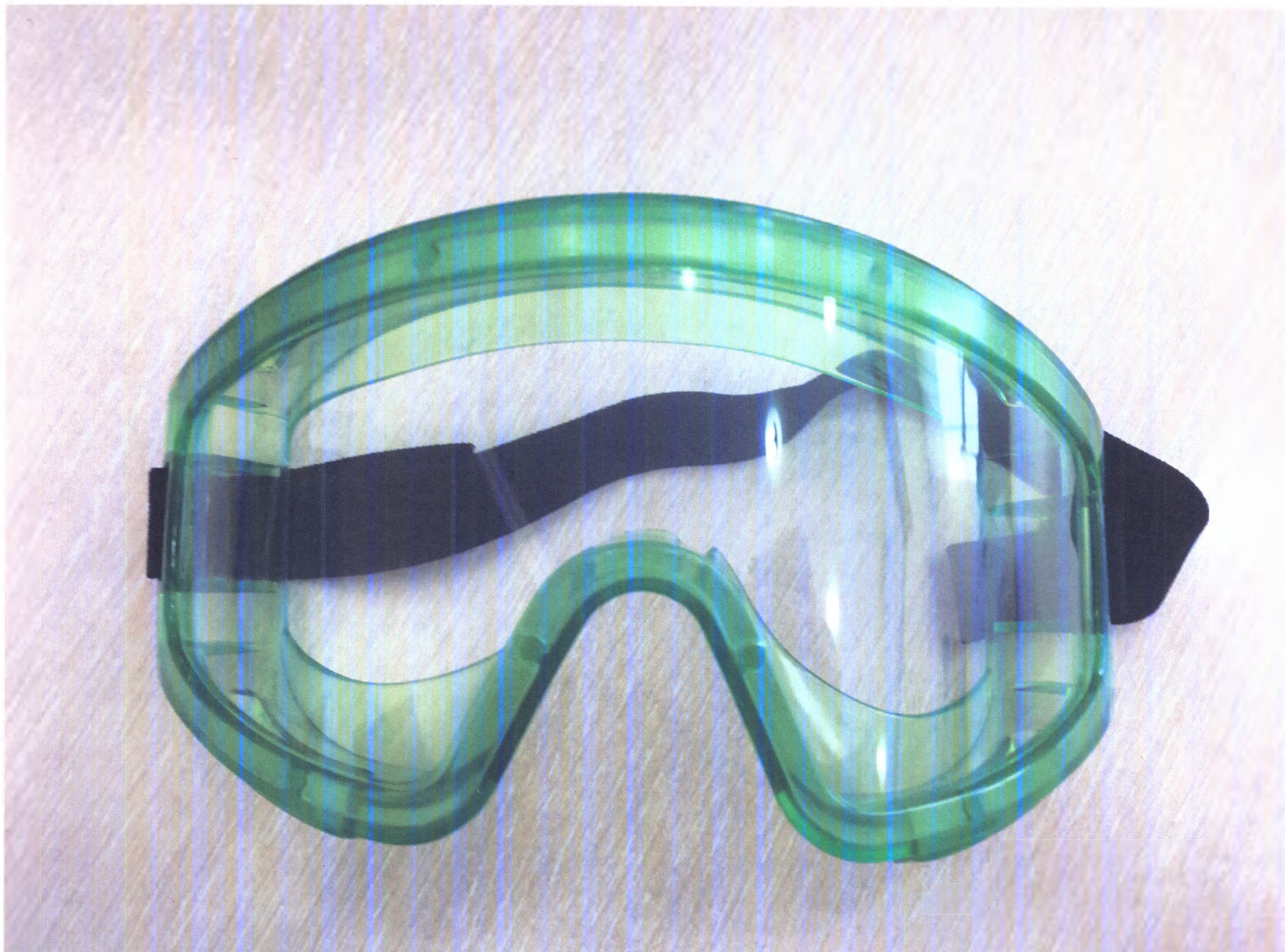

П А С П О Р Т

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ «САДОЛИТ-1»

(ТУ 9398-002-45508262-2010)

Назначение

- Комплект (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) предназначен для использования при организации и проведении противоэпидемических мероприятий в очагах ООИ и при профилактике свинного, птичьего гриппа и атипичной пневмонии, в том числе на этапах медицинской эвакуации.

Комплектность поставки

В комплект поставки входит:

- Куртка хирургическая длинный рукав плотность 42, ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Брюки хирургические на резинке плотность 42, ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Халат 160 см со стойкой и запахом, плотность 60, ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Косынка размером 165х115 см. из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка - шлем хирургическая «Шлем-Стандарт», из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка-шлем хирургическая «Шлем противоэпидемиологический», из нетканых материалов ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Фартук ламинированный плотность 60, ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Наручники медицинские на резинке ламинированные плотность 60, ткань «Спанбонд» - 1 пара;
- Фильтрующий респиратор - 1 шт.;
- Салфетка-полотенце плотность 25, ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные - 2 пары;
- Бахилы высокие на завязках ламинированная подошва плотность 42 60, ткань «Спанбонд» - 1 пара;
- Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ» - 1 пара;
- Паспорт и памятка-инструкция - 1 шт.;
- Упаковочный пакет - 1 шт.;
- Пакет для утилизации - 1 шт.

Техническое обслуживание

Изделие одноразового использования.

Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование изделий производится в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок для данного вида транспорта по ГОСТ № 10581-81.

4.2 Изделия хранятся в сухом проветриваемом помещении в местах защищенных от прямых солнечных лучей и не ближе 1м от отопительных приборов в упакованном виде.

Гарантии изготовителя

5.1 Организация – изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок хранения – 3 года.

Производитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61-07

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Регистрационное удостоверение: ФСР 2012 13487 от XX.XX.XXXXг.

Дата изготовления: _____ 20____ г.

**ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С КОМПЛЕКТОМ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ ОДНОРАЗОВЫМ**

«Садо.инт-1»

ВНИМАНИЕ!! Перед надеванием комплекта снимаются все украшения: цепочки, кольца, серьжки, браслеты, часы и т.д.

Костюм необходимо надевать не спеша, тщательно, с тем, чтобы во время работы не поправлять части костюма.

Надевать комплект необходимо в следующей последовательности:

- Надевается рубашка, брюки
- Надеваются бахилы на обувь, в них заправляются брюки
- Косынку шапочку-шлем надевают так, чтобы закрыть лоб до бровей плечо до подбородка, большую часть шеи; концы косынки шапочки-шлема завязывают на шее сзади. Сверху надевается капюшон.
- Проверяется на целостность и надевается первая пара перчаток, поверх рукавов рубашки.
- Противочумный халат надевают так, чтобы косынка или шапочка-шлем были заправлены под него; тесемки у ворота халата и пояс завязывают спереди на левой стороне пояса, после этого закрепляют тесемки на руках.
- Надевается фартук (сзади завязывается, подогнаться по размеру и росту).
- Надеваются нарукавники.
- Маску-респиратор надевают на лицо так, чтобы верхний край его доходил до нижней части орбит глаз, а нижний должен находиться под подбородком.
- Надеваются защитные очки. Перед надеванием очки протираются специальной жидкостью чтобы не запесовали стекла. Защитные очки должны быть хорошо пригнаны.
- Проверяется на целостность и надевается вторая пара перчаток (заводятся поверх рукавов халата)
- За пояс халата, с правой стороны, заправляется полотенце

Защитную одежду снимают после работы в специально отведенном для этого помещении или в той же комнате, где проводилась работа, но после полного обеззараживания помещения.

Внимание! Костюм снимают медленно, в строго определенном порядке

- ноги в бахилах поочередно ставят в таз (поддон) с дезинфицирующим раствором и протирают сверху вниз салфеткой (ташпоном), смоченной в дезинфицирующем растворе (6% раствор перекиси водорода);
- в течение 1-2 минут моют руки в перчатках дезинфицирующим раствором, после этого приступают к снятию костюма;
- вынимают полотенце и погружают в бак с дезинфицирующим раствором;
- протирают полотенцем (не выжимая его) фартук и нарукавники;

- снимают фартук, сворачивая наружной стороной внутрь;
- снимает нарукавники и верхнюю пару перчаток;
- снимают очки, оттягивая их двумя руками вперед, вверх и назад, за голову; погружают в бак с 70% спиртом или двукратно протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором «ВЕТ.ГО.ЛЕН» с интервалом в 15 мин.;
- маску-респиратор снимают, оттягивая от лица, не касаясь при этом лица наружной стороной респиратора и помещают в емкость для дальнейшего обеззараживания;
- развязывают тесемки ворота халата, пояс и развязывают тесемки рукавов, снимают халат, сворачивая наружную его часть внутрь, погружают в емкость для обеззараживания;
- снимает косынку шапочку-шлем, осторожно собирая его концы на затылке в одну руку; погружают в емкость для обеззараживания;
- снимают бахилы, заворачивая наружной стороной внутрь, погружают в емкость для обеззараживания;
- оттягивая верхний край перчаток, снимают рубашку и брюки, заворачивая наружной стороной внутрь, погружают в емкость для обеззараживания;
- снимают перчатки, при подозрении на нарушение целостности проверяют в дезинфицирующем растворе, но не воздухом;
- руки тщательно обрабатывают 70% этиловым спиртом и моют с мылом.

После снятия каждой части костюма руки в перчатках погружают в дезинфицирующий раствор

ПОРЯДОК ДЕЗИНФЕКЦИИ КОМПЛЕКТА

Дезинфекция проводится в соответствии с действующими нормативными документами непосредственно на местах перичного сбора отходов. Дезинфекция может проводиться химическим методом путем полного погружения изделий в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях. Для дезинфекции используются зарегистрированные и разрешенные к применению Министерством здравоохранения в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции указанных в инструкциях по их применению. Кроме того, дезинфекция может проводиться в паровых стерилизаторах (автоклавирование) и в дезинфекционных камерах. При дезинфекции использованной медицинской одежды одноразового применения в паровых стерилизаторах или в дезинфекционных камерах, она собирается в биксы или в камерные мешки. Проздезинфицированная одежда одноразового применения упаковывается в соответствующие классу отходов одноразовые пакеты для сбора и хранения медицинских отходов, в дальнейшем уничтожается на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами.

Упаковочный пакет



Код подразделения ЛПУ _____

Название учреждения _____

Дата сбора отходов _____

ФИО ответственного за сбор отходов лица _____

ПАКЕТ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ

ТУ 2293-013-27428909-2006

ОТХОДЫ. КЛАСС "Б"

Код подразделения _____
Название учреждения _____

Комплект противозидемический одноразовый «Садолит-1А» (общий вид упаковки)



Тү 9398-002-45508262-2010

Класс потенциального риска – 2б
(см. указания по эксплуатации)

Партия



XX XXXX.

**Производитель: ООО «Д-Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н
Тел: 8 (812) 322-17-32
www.d-medfarm.com**




От -50°C до +40°C


Комбинезон одноразовый ламинированный плотность 50, из нетканых материалов ткань «Спанбонд»




Халат 140 см со стойкой и запахом плотность 60, из нетканых материалов ткань «Спанбонд»

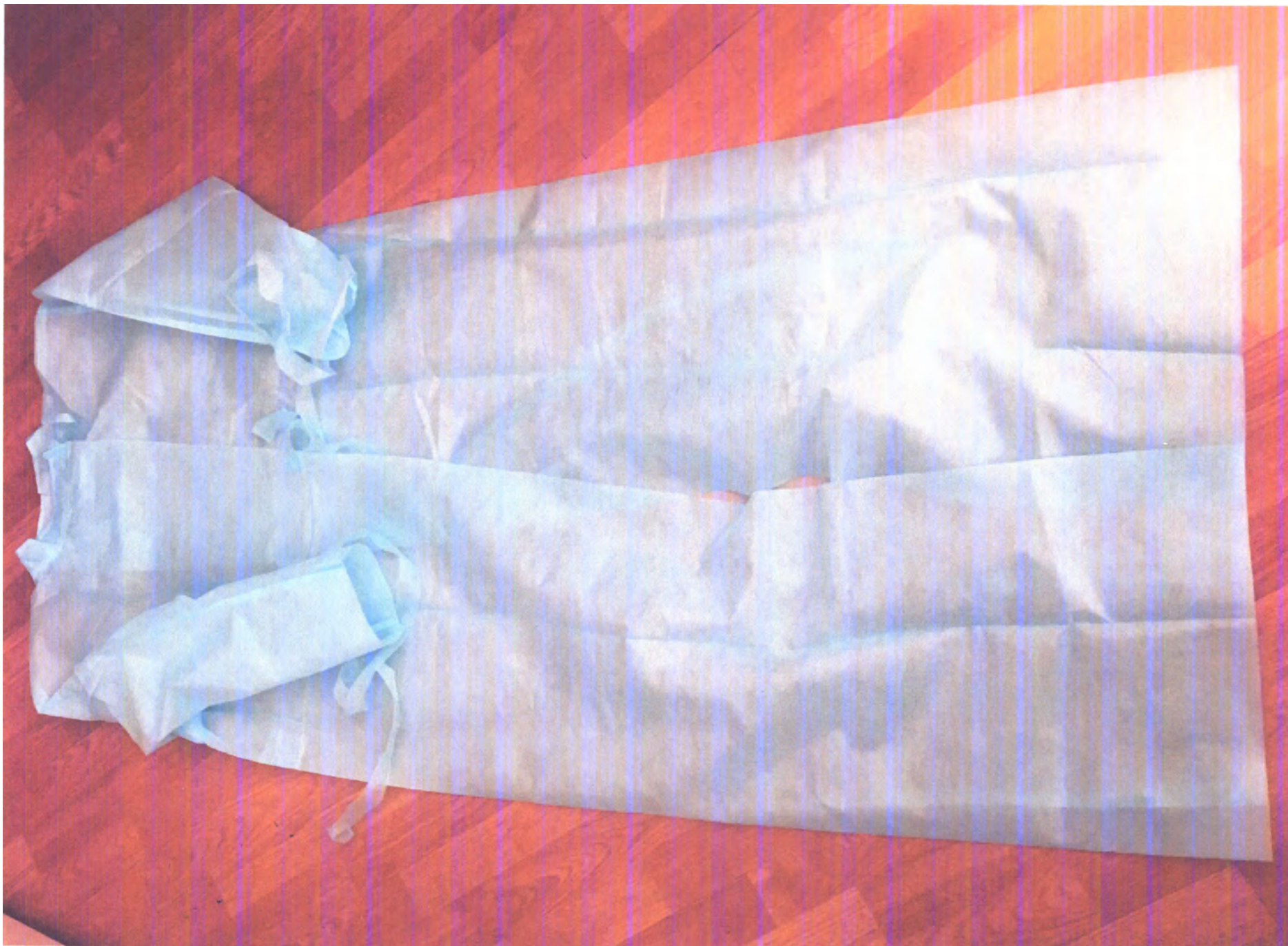


Косынка размером 165x115 см или шапочка - шлем хирургическая «Шлем-Стандарт» или шапочка-шлем хирургическая «Шлем противэпидемиологический», из нетканых материалов ткань «Спанбонд»

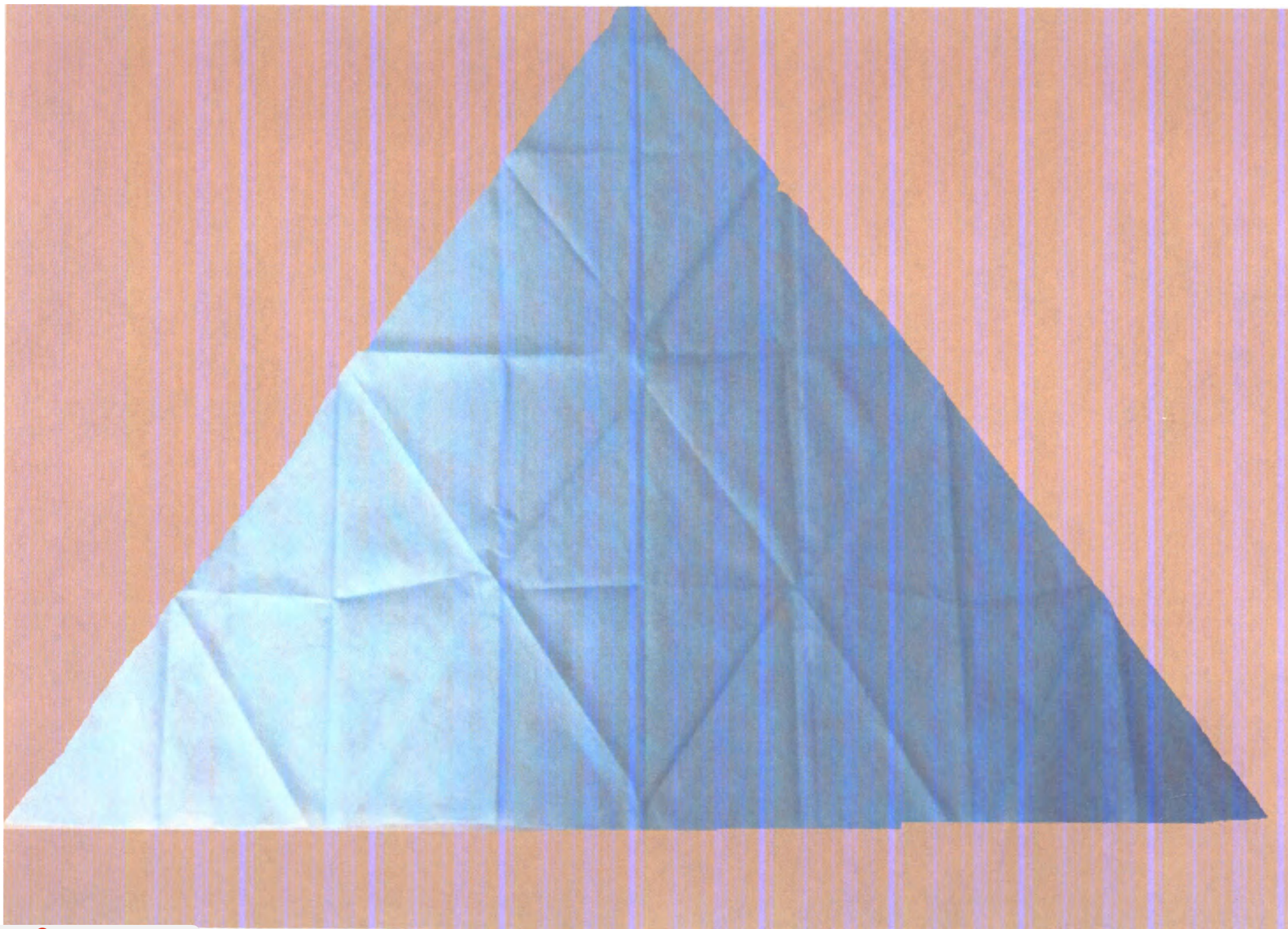


Косынка размером 165x115 см или шапочка - шлем хирургическая «Шлем-Стандарт» или шапочка-шлем хирургическая «Шлем

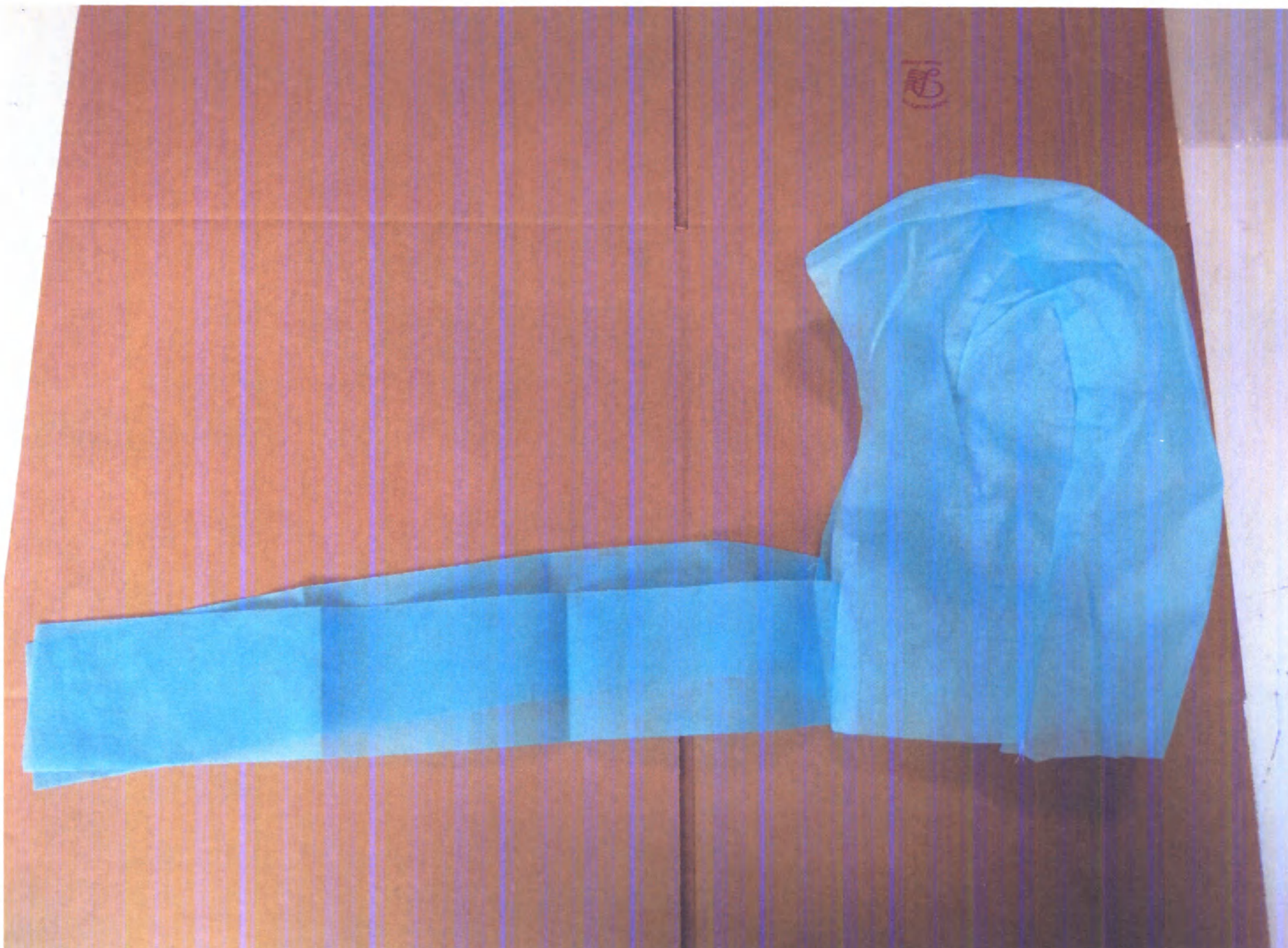

Косынка размером 165х115 см или шапочка - шлем хирургическая «Шлем-Стандарт» или шапочка-шлем хирургическая «Шлем противоэпидемиологический», из нетканых материалов ткань «Спанбонд»

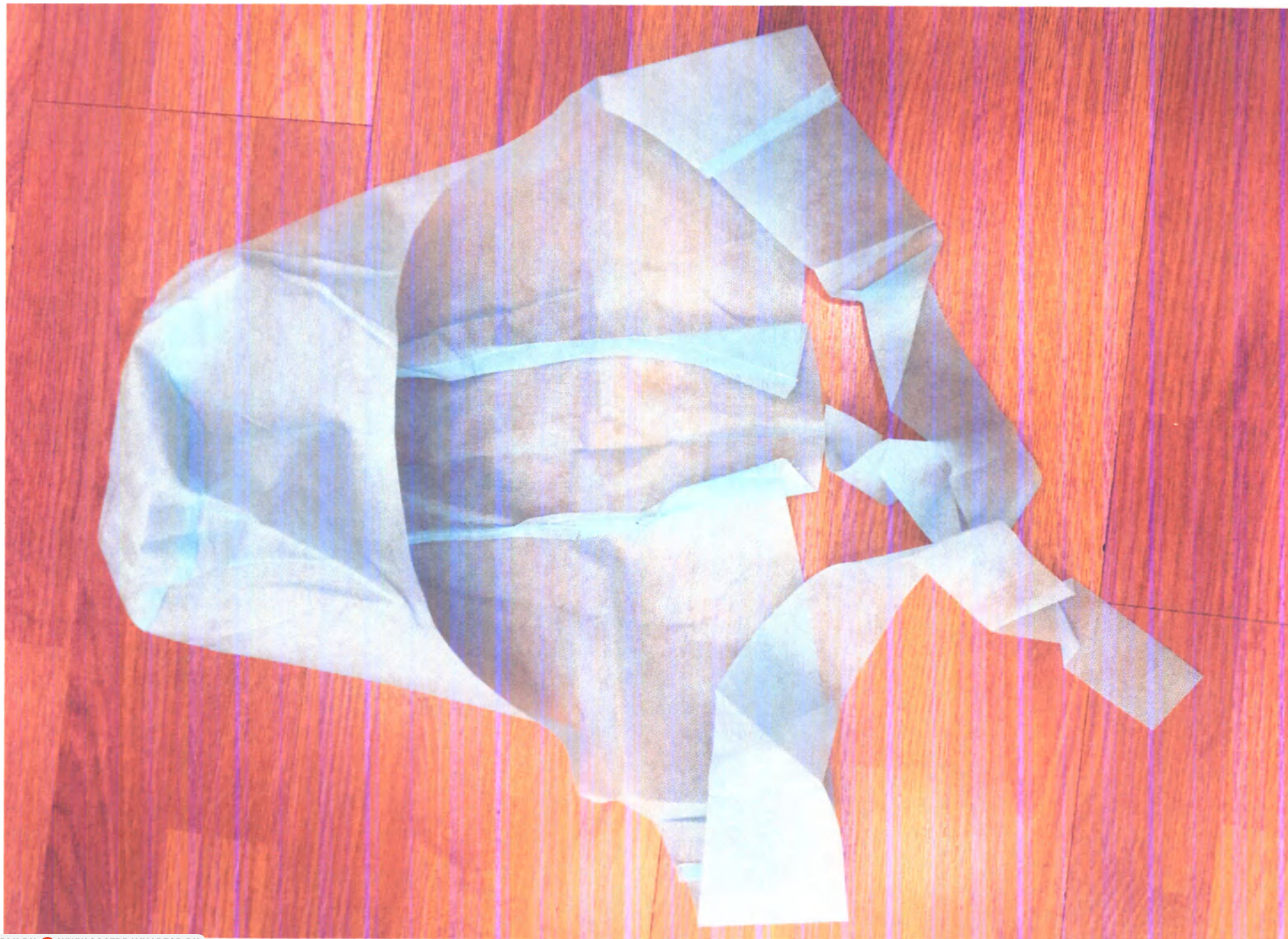

Фартук ламинированный плотность 60, ткань «Спанбонд»

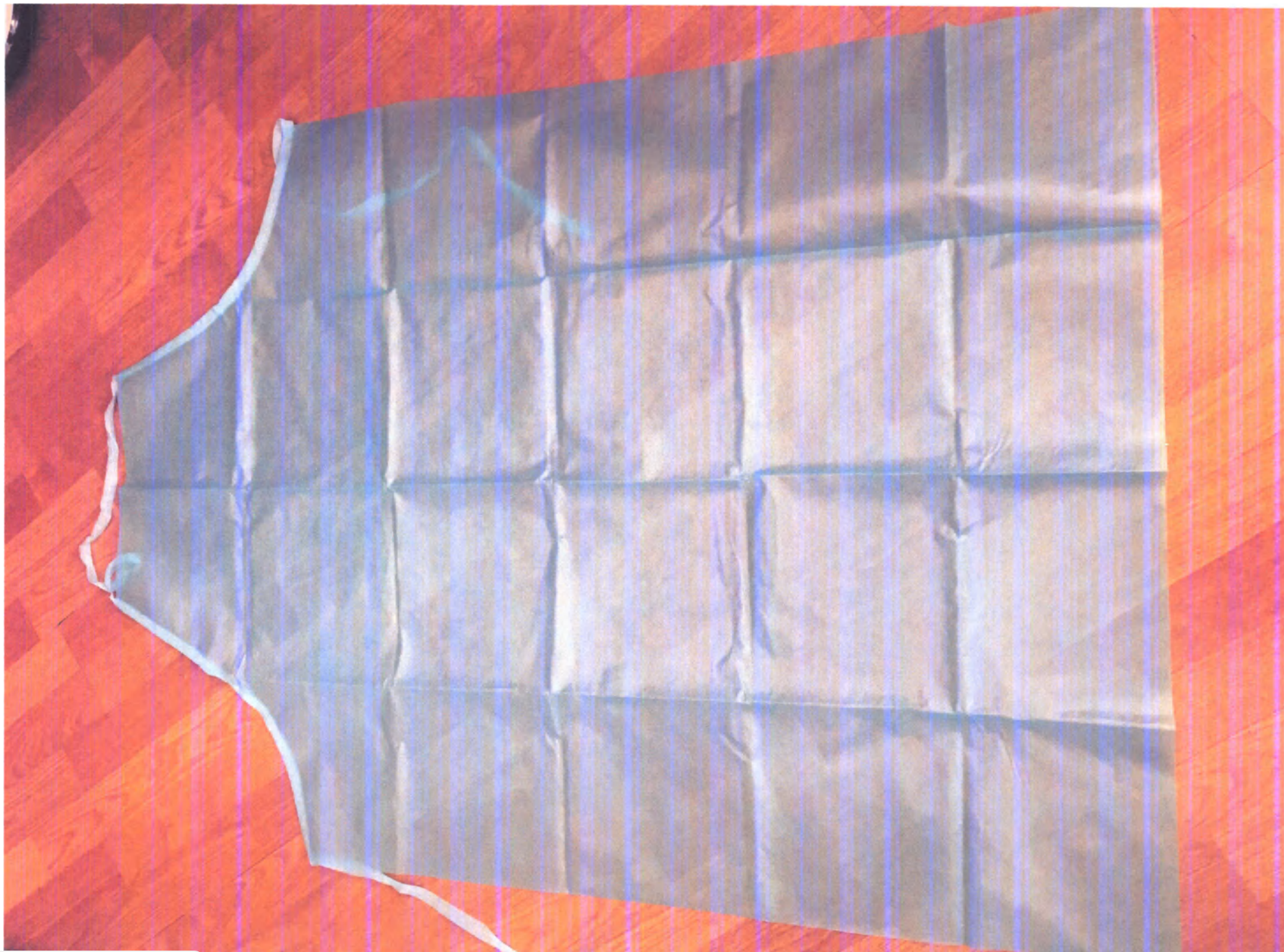

Нарукавники медицинские на резинке ламинированные плотность 60, ткань «Спанбонд»



Фильтрующий респиратор



Салфетка-полотенце плотность 25, ткань «Спанбонд»




Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные




Бахилы высокие на завязках ламинированная подошва плотность 42/60, ткань «Спанбонд»



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»

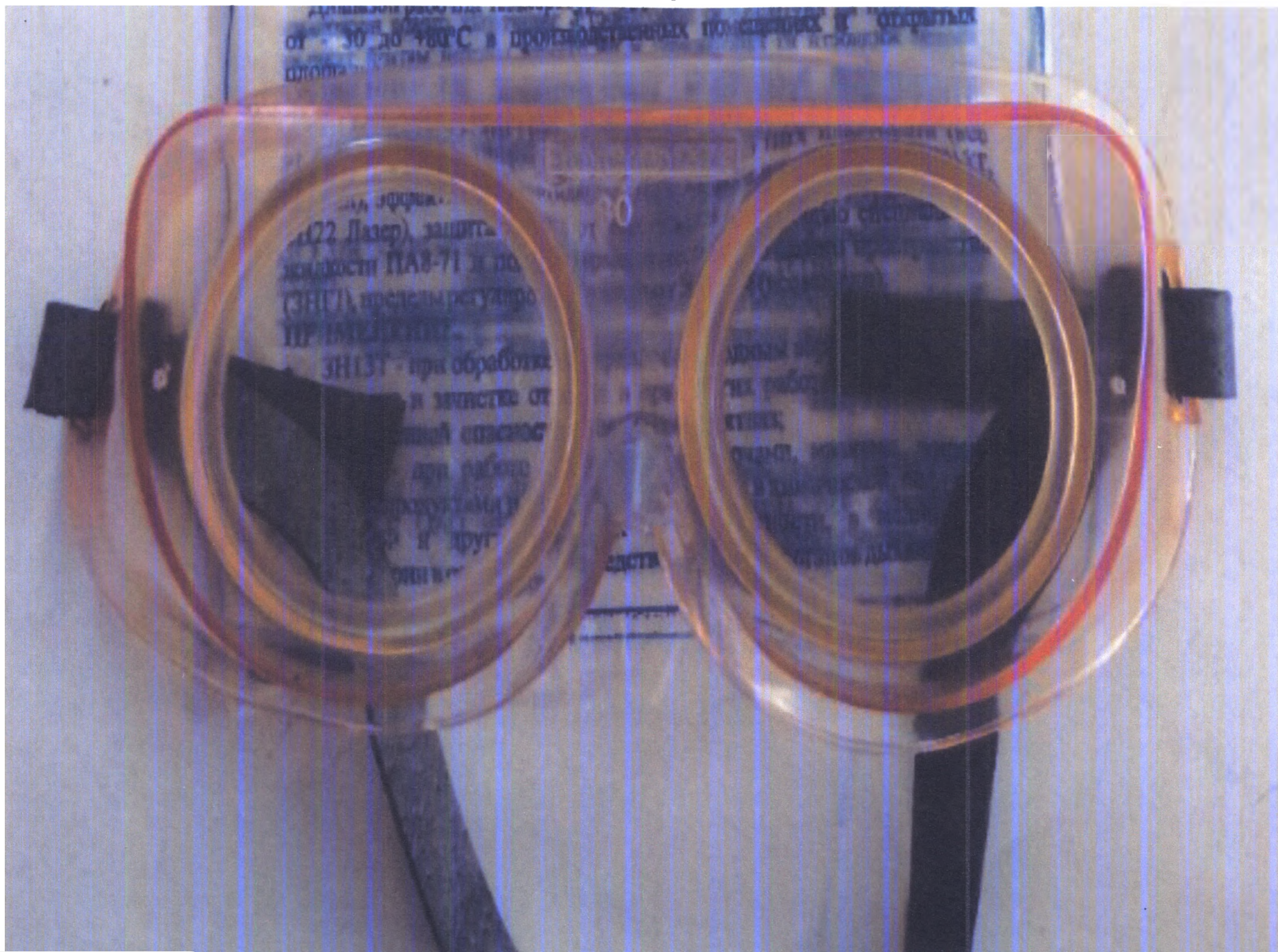

Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»

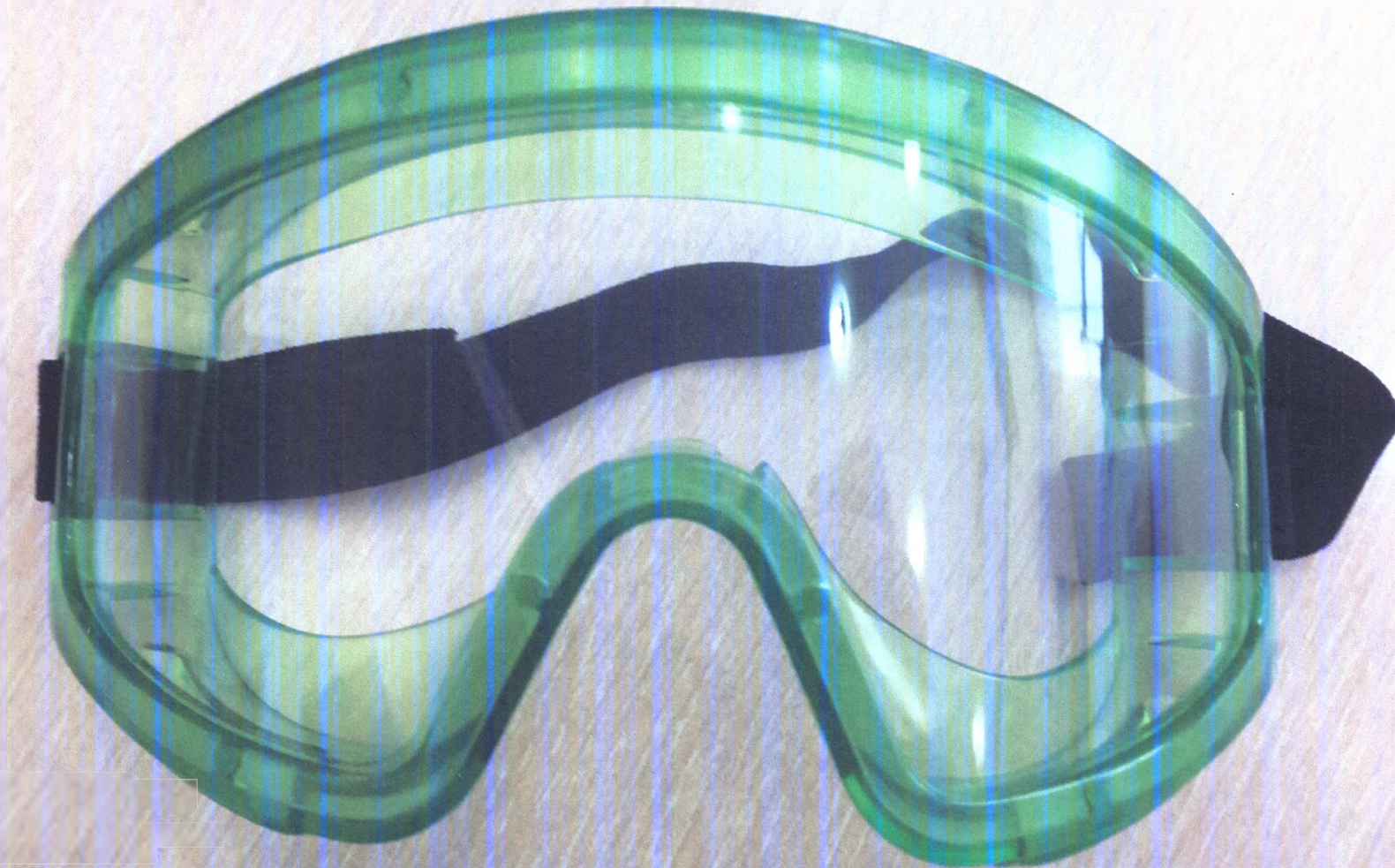

П А С П О Р Т

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ

«САДОЛИТ-1А»

(ТУ 9398-002-45508262-2010)

Назначение

Комплект (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в полевых условиях) предназначен для использования при организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очагах ООИ и при профилактике свиного, птичьего гриппа и атипичной пневмонии, в том числе на этапах медицинской эвакуации.

Комплектность поставки

В комплект поставки должны входить:

- Комбинезон одноразовый ламинированный плотность 50, из нетканых материалов ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Халат 140 см со стойкой и запахом плотность 60, из нетканых материалов ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Косынка размером 165х115 см. из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка - шлем хирургическая «Шлем-Стандарт», из нетканых материалов ткань «Спанбонд» или шапочка-шлем хирургическая «Шлем противоэпидемиологический», из нетканых материалов ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Фартук ламинированный плотность 60, ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Наручники медицинские на резинке ламинированные плотность 60, ткань «Спанбонд» - 1 пара;
- Фильтрующий респиратор - 1 шт.;
- Салфетка-полотенце плотность 25, ткань «Спанбонд» - 1 шт.;
- Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные - 2 пары;
- Бахилы высокие на завязках ламинированная подошва плотность 42 60, ткань «Спанбонд» - 1 пара;
- Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ» - 1 пара;
- Паспорт и памятка-инструкция - 1 шт.;
- Упаковочный пакет - 1 шт.;
- Пакет для утилизации - 1 шт.

Техническое обслуживание

Изделие одноразового использования.

Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование изделий производится в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок для данного вида транспорта по ГОСТ № 10581-81.

4.2 Изделия хранятся в сухом проветриваемом помещении в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, и не ближе 1м от отопительных приборов в упакованном виде.

Гарантии изготовителя

5.1 Организация – изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок хранения – 3 года.

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел. (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61-07

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Регистрационное удостоверение : ФСР 2012.13487 от XX.XX.XXXXг.

Дата изготовления: _____ 20__ г.

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С КОМПЛЕКТОМ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ ОДНОРАЗОВЫМ

«Садо-Пит-1А»

ВНИМАНИЕ!!! Перед надеванием комплекта снимаются все украшения:

цепочки, кольца, серьжки, браслеты, часы и т.д.

Костюм необходимо надевать на чистые, сухие руки, с тем, чтобы во время работы не поправлять части костюма.

Надевать комплект необходимо в следующей последовательности:

- Надевается комбинезон.
- Надеваются башки на голову, в них заправляются брови.
- Комбинезон/шпору-шпору надевается так, чтобы закрыть всё до бровей шею до подбородка, боковую часть шеи, концы косынки шпору-шпору заправляются на шею сзади. Шпору надевается на шею.
- Проверяется на целостность и надевается передняя пара перчаток, поверх рукавов комбинезона.
- Противовирусный капот надевается так, чтобы напоями были заправлены под него, теменья у воротника капота и под заправляются спереди на левой стороне плечей, после этого заправляются теменья на рукавах.
- Надевается фуражка (если используется, подгоняется по размеру и росту).
- Надевается наручники.
- Наручники расправляются на ладони так, чтобы веревки хвост его доходили до нижней части ладони, а нижний локоть не касался под подбородком.
- Надеваются защитные очки. Перед надеванием очки протираются специальной влажной салфеткой, чтобы не загрязнить стекла.
- Защитные очки должны быть хорошо прилегают.
- Проверяется на целостность и надевается вторая пара перчаток (заводится поверх рукавов халата).
- За левый капот, с правой стороны, заправляется полотенце.

Защитную одежду снимают после работы в специально отведенном для этого помещении или в той же комнате, где проводились работы, но после полного обеззараживания помещения.

Внимание! Костюм снимают маленько, в строго определенном порядке:

- ноги в башках поочередно ставят в таз (полость) с дезинфицирующим раствором и протирают сверху вниз салфеткой (ташпоном), смоченной в дезинфицирующем растворе (6% раствор перекиси водорода);
- в течение 1-2 минут мыют руки в перчатках дезинфицирующим раствором, после этого протирают к свету костюм;
- вынимают полотенце и погружают в бак с дезинфицирующим раствором;
- протирают полотенце (не касаясь его) фуражку и наручники.

- снимают фуражку, сворачивая наружную сторону внутрь;
- снимают наручники и веревки пары перчаток;
- снимают очки, отложив их на ладони вперед, вверх и назад, за голову;
- погружают в бак с 70% спиртом или другим противомикробным, обеззараживающим дезинфицирующим раствором «ВЕТПОЛЕН» с интервалом 1,5 мин.
- ладонь расправляют салфеткой, отложив от лица, не касаясь при этом лица наружной стороной расправителя, и помещают в емкость для дальнейшего обеззараживания;
- развешивают «вешки» воротника капота, под и развешивают «вешки» рукавов, снимают халат, сворачивая наружную его часть внутрь, погружают в емкость для обеззараживания;
- снимают комбинезон;
- снимают косынку/шпору-шпору, отложив его концы на затылке в одну руку, погружают в емкость для обеззараживания;
- снимают башки, заворачивая наружную сторону внутрь, погружают в емкость для обеззараживания;
- стелюга веревки хвост перчаток, снимают комбинезон, сворачивая наружную сторону внутрь, погружают в емкость для обеззараживания;
- снимают перчатки, при подозрении на нарушение целостности проверяют в дезинфицирующем растворе, но не водичкой;
- руки тщательно обрабатывают 70% этиловым спиртом и мылом с мылом.

После снятия каждой части костюма руки в перчатках погружают в дезинфицирующий раствор.

ПОРЯДОК ДЕЗИНФЕКЦИИ КОМПЛЕКТА:

Дезинфекция проводится в соответствии с действующими нормативными документами непосредственно на месте проведения сбора отходов. Дезинфекция может проводиться химическим методом путем полного погружения изделия в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях. Для дезинфекции используются хлорсодержащие и разрешенные к применению хлорсодержащие препараты. В хлорсодержащих учреждениях дезинфицирующие средства в концентрированном и разведенном виде, указанные в инструкции по их применению. Кроме того, дезинфекция может проводиться в тазиках с едким натром (гидроксидом натрия) и в дезинфицирующих камерах. При дезинфекции используются следующие емкости: одноразовые прикроватные и паровые стерилизаторы или в дезинфицирующих камерах, она собирается в бак или в камеру мусора. Прозрачные пластиковые пакеты с одноразовыми прикроватными и паровыми стерилизаторами и соответствующими этикетками с информацией о содержимом и времени дезинфекции отходов, в дальнейшем упаковываются в специально выделенные пакеты по обеззараживанию отходов. III-й термический метод.

Упаковочный пакет



Код подразделения 1117 _____
Название учреждения _____
Дата сбора отходов _____
ФИО ответственного за сбор отходов лица _____

ПАКЕТ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ
ТУ 2293-013-27428909-2006
ОТХОДЫ. КЛАСС "Б"

Код подразделения
Название учреждения

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 40 листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Д-Медфарм»



Резник О.Д.

Подпись