

П А С П О Р Т

укладка противоэпидемическая медицинская УК-5М

(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ ЛЮДЕЙ И ОБЪЕКТОВ
ОКР.СРЕДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ)

ТУ 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13489 от 31 мая 2012 года

1. Назначение

Укладки предназначены для проведения первичных противоэпидемических мероприятий:

- взятия материала от больных или умерших и из объектов окружающей среды в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в пунктах пропуска через государственную границу;
- патологоанатомического вскрытия умерших людей или трупов животных, проводимого в установленном порядке при болезнях неясной этиологии, подозрительных на особо опасную инфекционную болезнь;
- санитарно-эпидемиологического обследования эпидемического очага особо опасных инфекций (ООИ);
- выявления и учета лиц, контактировавших с больными с подозрением на ООИ;
- своевременного проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага ООИ.

2. Комплектность поставки

Комплектность укладки указана в упаковочном листе.

3. Техническое обслуживание

После работы в очаге ООИ использованные принадлежности укладки ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ И ЧАСТИЧНО ДЕЗИНФЕКЦИИ (согласно пункту 2.1.5), в соответствии с нормативами по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Укладки должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 4.2 Ящики с Укладками при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения.
- 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться способами, исключающими удары и броски ящиков с Укладками.
- 4.4 Укладки должны транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

5. Гарантии изготовителя

5.1 Организация — изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок хранения Укладки — 3 года со дня изготовления, одноразовых изделий — указано на упаковке изделий, но не более 1 года.

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61-07

199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 3Б, лит.А, пом. 3Н

Дата изготовления: сентябрь 2018 г.



П А С П О Р Т

укладка противоэпидемическая медицинская УК-5Б

(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ ЛЮДЕЙ И ОБЪЕКТОВ
ОКР.СРЕДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ)

ТУ 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13489 от 31 мая 2012 года

1. Назначение

Укладки предназначены для проведения первичных противоэпидемических мероприятий:

- взятия материала от больных или умерших и из объектов окружающей среды в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в пунктах пропуска через государственную границу;
- патологоанатомического вскрытия умерших людей или трупов животных, проводимого в установленном порядке при болезнях неясной этиологии, подозрительных на особо опасную инфекционную болезнь;
- санитарно-эпидемиологического обследования эпидемического очага особо опасных инфекций (ООИ);
- выявления и учета лиц, контактировавших с больными с подозрением на ООИ;
- своевременного проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага ООИ.

2. Комплектность поставки

Комплектность укладки указана в упаковочном листе.

3. Техническое обслуживание

После работы в очаге ООИ использованные принадлежности укладки **ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ И ЧАСТИЧНО ДЕЗИНФЕКЦИИ** (согласно пункту 2.1.5), в соответствии с нормативами по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Укладки должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 4.2 Ящики с Укладками при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения.
- 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться способами, исключающими удары и броски ящиков с Укладками.
- 4.4 Укладки должны транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

5. Гарантии изготовителя

- 5.1 Организация – изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2 Гарантийный срок хранения Укладки – 3 года со дня изготовления, однократных изделий – указано на упаковке изделий, но не более 1 года.

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61407

199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 3-Б, лит. А, пом. 3Н

