

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ООО «Д-Медфарм»

Резник О.Д.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Комплект противочумный 1-го типа многоразовый
«Алмаз-1»
По ТУ 9398-004-45508262-2010

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект рекомендуется к применению при проведении профилактических мероприятий в очагах особо опасных инфекций (ООИ), при транспортировании больных ООИ, при лечении больных ООИ в госпиталях и изоляторах, при патологоанатомическом исследовании трупов, при работе с патогенными биологическими агентами (ПБА) I-II групп в микробиологических лабораториях. Виды работ и комплектация защитного костюма регламентированы в приложениях №4 и №5 СП 1.3.1285 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. В комплект поставки входит:

- Пижама (рубашка и брюки) х/б бязь отбеленная - 1 шт.;
- Противочумный халат удлиненный х/б бязь отбеленная - 1 шт.;
- Косынка х/б бязь отбеленная размером 165x115 см. - 1 шт.;
- Ватно-марлевая маска защитная (200x150 мм) 4-х слойная - 1 шт.;
- Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные - 2 пары;
- Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ» - 1 шт.;
- Фартук из прорезиненной ткани - 1 шт.;
- Носки - 1 пара;
- Бахилы из прорезиненной ткани - 1 пара;
- Полотенце вафельное - 1 шт.;

- Упаковочная сумка - 1 шт.
- Упаковочный ПЭ пакет – 1 шт.
- Паспорт и памятка-инструкция - 1 шт.

2.2 Размер комплекта в упаковочной сумке не более 260 × 350 × 120 мм.

2.3 Масса комплекта в упакованном виде не более 1,3 кг.

2.4 Комплект обеспечивает защиту органов дыхания и кожных покровов оператора от микробного аэрозоля.

2.5 Составные части комплекта устойчивы к многократному автоклавированию, не менее 10 циклов.

2.6 Комплект сохраняет свои свойства в рабочих климатических условиях, которые соответствуют УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Комплект сохраняет свои свойства при механических воздействиях, которые возникают при работе оператора.

2.8 Комплект, в упакованном виде, устойчив к климатическим воздействиям при транспортировании, которые соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

2.9 Комплект, в упакованном виде, устойчив к механическим воздействиям при транспортировании, которые соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444 для условий транспортирования.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нарушение температурного режима, соответствующего климатическому исполнению изделия.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие не требует подготовки и готово к работе без дополнительных действий

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

5.1 ПОРЯДОК ОДЕВАНИЯ ПРОТИВОЧУМНОГО КОСТЮМА:

Костюм необходимо надевать до входа в помещение, где ведется работа с ПБА или находится больной ООИ (труп), перед зеркалом, не спеша, в строго определенной последовательности, с тем, чтобы во время работы не поправлять части костюма.

- Надеть пижаму и носки, заправить брюки в носки.
- Надеть резиновые бахилы (на обувь), затянуть голенище по ноге.
- Надеть косынку, закрыв лоб до бровей, большую часть щек и шею до подбородка, концы косынки завязать сзади на шее, предварительно тщательно подобрать волосы.
- Надеть противочумный халат, заправив под него косынку. Завязать петель тесемки ворота халата спереди на левой стороне (предварительно продев одну из тесемок в петлю на воротах спереди). Завязать петель пояса халата спереди на левой стороне (предварительно продев через петлю на спинке халата). Завязать тесемки на рукавах халата.
- Надеть фартук (сзади завязывается, подгоняется по размеру и росту).
- Надеть ватно-марлевую маску так, чтобы верхний край маски доходил до нижней части орбит, а нижний находился под подбородком. Завязать верхние

концы маски петель на затылке, завязать нижние концы маски петель на темени (по типу пращевидной повязки). Заложить ватные тампоны по бокам крыльев носа.

- Надеть защитные очки «поверх» косынки и маски, прижав очками нижний край косынки и верхний край маски. В случае неплотного прилегания заложить ватные тампоны.

- Надеть перчатки, предварительно проверив их на целостность воздухом. Первую пару заправить под рукава халата. Вторую – поверх рукавов халата.

- Заправить полотенце за пояс халата с правой стороны.

При необходимости использования фонендоскопа, его надевают раньше косынки.

При вскрытии трупов человека или животных дополнительно надевают прорезиненный фартук, такие же нарукавники и вторую пару перчаток. Пояс фартука завязывается слева, полотенце закладывается за пояс фартука с правой стороны.

5.2 ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПРОТИВОЧУМНОГО КОСТЮМА:

Следует предусмотреть наличие разрешенных к применению дезинфицирующих средств и емкостей для погружения (помещения) в них частей защитного костюма:

- Тазик с дезинфицирующим раствором для обработки бахил
- Тазик с дезинфицирующим раствором для мытья рук в перчатках.
- Бак с дезинфицирующим раствором (для обеззараживания полотенца, халата, косынки, фартука замачиванием) или большой бикс (для обеззараживания автоклавированием).
- Бикс для ватно-марлевой маски.
- Емкость с дезинфицирующим раствором для замачивания перчаток.
- Емкость с 70% спиртом для обработки защитных очков.

Костюм снимают вне «заразного» помещения, медленно, в строго определенном порядке.

Бахилы обрабатывают при выходе из «заразного» помещения. Ноги в бахилах поочередно ставят в таз с дезинфицирующим раствором и протирают сверху вниз салфеткой (тампоном), смоченной дезинфицирующим раствором.

- Руки в перчатках перед снятием костюма моют в дезинфицирующем растворе в течение 1-2 минут (затем перед снятием каждой части костюма руки в перчатках погружают в дезинфицирующий раствор!).

- Вынимают полотенце из-за пояса халата (или фартука), сворачивая его наружной частью внутрь, погружают в бак с дезраствором (или в бикс для автоклавирования).

- Снимают клеенчатый фартук, свертывают наружной стороной внутрь, помещают в бак с дезраствором (или в бикс для автоклавирования).

- Снимают 1-ю пару перчаток.

- Защитные очки оттягивают 2-мя руками вперед, вверх, назад и в сторону, осторожно снимают и погружают в емкость с 70% спиртом.

- Тесемки ватно-марлевой маски собирают в руках, маску отводят от лица, сворачивают наружной стороной внутрь, при этом тесемки также остаются внутри. Маску помещают в отдельную емкость (бикс).

- Снимают халат. Развязывают тесьму на вороте халата, пояс халата, завязки на рукавах халата, предварительно приспустив перчатки. Руки помещают крест-

накрест на плечи, халат постепенно стягивают, заворачивая наружную часть халата внутрь. Снятый и вывернутый халат скатывают и помещают в бак с дезраствором (или в бикс для автоклавирования).

- Снимают косынку. Концы косынки развязывают, собирая их в руке, косынку сворачивают на затылке наружной стороной внутрь, снимают через сторону, избегая движений перед лицом, помещают в бак с дезраствором (или в бикс для автоклавирования).

- Снимают бахилы, погружают в бак с дезраствором (или в бикс для автоклавирования).

- Снимают 2-ю пару перчаток (две одновременно), постепенно выворачивая, погружают в емкость с дезраствором. При необходимости перчатки проверяют на целостность, наполнив дезинфицирующим раствором.

После снятия противочумного костюма, руки обрабатывают 70% спиртом и тщательно моют теплой водой с мылом.

При необходимости может быть принят душ. После этого надевается обычная медицинская одежда и продолжается работа.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Срок хранения комплекта в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, не менее 3 лет.

Комплект должен транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Ящики с комплектами при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения.

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться способами, исключающими удары и броски ящиков с комплектами.

Комплекты должны храниться в крытых, вентилируемых складских помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и грунтовых вод.

Хранение комплектов в складских помещениях совместно с летучими и агрессивными веществами (щелочи, кислоты, растворители и др.), вызывающими коррозию металлических деталей, не допускается.

Комплекты должны транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

Комплекты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 2 ГОСТ 15150.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

При обнаружении повреждений, разрывов и сквозных отверстий в любых из комплектующих комплекта, комплект не ремонтируется, а подлежит утилизации.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные костюмы должны утилизироваться как отходы класса Г СанПиН 2.1.7.2790.

По окончании срока службы костюм должен утилизироваться как отходы класса А СанПиН 2.1.7.2790.

9. ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения комплекта – 5 лет со дня изготовления.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 листа (ов)



Генеральный директор
ООО «Д-Медфарм»

Подпись _____ Резник О.Д.