

**Правила ухода**  
Правила ухода, срок службы и условия многократного применения респираторов указаны в Помощке по дезинфекции медицинских изделий: респираторы фильтрующие многократного применения АЛИНА®-106, АЛИНА®-116, АЛИНА®-206, АЛИНА®-216, АЛИНА®-316.

**Правила, условия и сроки хранения**  
Респираторы до использования должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающей среды от -30 °С до +70 °С и относительной влажности до 80 %.

В случае неоднократного применения респиратор хранить в чистой зоне, в гигиеничной упаковке из гипоаллергенного материала, исключая загрязнение внутренней стороны поклауки.  
**Гарантийный срок хранения** - 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончания срока годности смотрите на упаковке.

**Транспортирование**  
Транспортирование респираторов осуществляется всеми видами транспорта, в защищенном виде от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пажающими веществами.

**Требования по утилизации**  
При применении респираторов для защиты от возбудителей воздушно-капельных инфекций отработанные респираторы утилизируются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Респираторы фильтрующие АЛИНА® TU 9396-011-45541035-2010 являются изделиями медицинского назначения (регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08771 от 18.04.2019 Российской Федерации; регистрационное удостоверение № ИМ-7.102694/1709 от 18.05.2015 Республики Беларусь) и соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009).

**Изготовитель:** ООО «Респираторный комплекс», Россия, 188679, Ленинградская обл., Всеволожский район, городская поселковая им. Морозова, ул. Чкалова, д.3, з.592  
Тел./факс: +7(812)329-11-65, e-mail: zakaz@rkspe.ru, www.rkspe.ru



# РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ АЛИНА®



**Защита от вирусов,  
бактерий и аллергенов**



**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
респираторы фильтрующие медицинского назначения АЛИНА®  
ГОСТ 12.4.294-2015  
ТУ 9396-011-45541035-2010

Респиратор АЛИНА® является медицинским средством индивидуальной защиты органов дыхания медицинского персонала и населения и представляет собой многократную фильтрующую неформованную поклауку универсального размера с эластичными регулирующими ремнями крепления, оснащенную клапаном выдоха и без него.

**Область применения**  
Респираторы являются медицинскими изделиями для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), в т.ч. микробиологических.

| Назначение | Класс защиты | Назначение                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АЛИНА®-106 | FFP1 R D     | Противозаразные респираторы без клапана выдоха. Для повседневного применения персоналом и населением в условиях чрезвычайных ситуаций.                                                                                                   |
| АЛИНА®-116 | FFP1 R D     | Противозаразные респираторы с клапаном выдоха. Для повседневного применения персоналом и населением в условиях чрезвычайных ситуаций.                                                                                                    |
| АЛИНА®-206 | FFP2 R D     | Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лабораторных исследований с патогенными микроорганизмами или присутствии в воздухе вирусов и бактерий. |
| АЛИНА®-216 | FFP2 R D     | Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лабораторных исследований с патогенными микроорганизмами или присутствии в воздухе вирусов и бактерий. |
| АЛИНА®-316 | FFP3 R D     | Противозаразные респираторы с клапаном выдоха. Для использования при проведении работ с высокими опасностями возбудителями заболеваний (туберкулез, грипп, пневмония, чума, грипп и т.д.).                                               |



**Ограничения по применению**  
Нельзя применять респиратор:  
- имеющий складные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала корпуса респиратора;  
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема;  
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

**ВНИМАНИЕ!**  
При применении респиратора лицами с бородами, щетиной, бородками, прелестующими его плотному прилеганию, эффективность защиты респиратора снижается.

**Правило использования**  
Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть респиратор на наличие дефектов. Застегнуть эластичные ремни крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть респиратор. Закрепить ремни крепления на голове, зафиксировать их на уровне темени и затылочной части головы при помощи фиксатора. Обжать пластину носового зажима на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице для исключения подсоса воздуха по клапану выдоха (при наличии).

Провести респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий вдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение ремней крепления. Повторить проверку респиратора на плотность прилегания. Респиратор подлежит замене после окончания срока службы, а также в случае его повреждения или сильного соприкосновения дыхания.



# ФИЛЬТРУЮЩИЕ МНОГОРАЗОВЫЕ РЕСПИРАТОРЫ АЛИНА®



Защита от вирусов,  
бактерий и аллергенов



## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Респиратор АЛИНА® является фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания медицинского персонала и населения и представляет собой многоразовый, фильтрующий, неформальную по размеру универсального размера с эластичными регулируемыми ремнями крепления, оснащенный клапаном выдоха и без него.

### Область применения

Респираторы являются медицинскими изделиями для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), а т.к. микробиологических.

### Ограничения по применению

#### Нельзя применять респиратор:

- имеющим склеенные отверстия и нарушение целостности фильтрующей по материалу корпус респиратора;
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

### ВНИМАНИЕ!

При применении респиратора издается с бародой, щетинной бакембардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность защиты респиратора снижается.

### Правило использования

Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть респиратор на наличие дефектов. Завести эластичные ремни крепления за голову и, нажав с подбородка, надеть респиратор, закрепить ремни крепления на голове, зафиксировав их на уровне челки и в затылочной части головы при помощи фиксаторов. Обхват клапанного носового дужки на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице для исключения подсоса воздуха по полосу обводки (примерно).

Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигать респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий выдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение ремней крепления. Повторить проверку респиратора на плотность прилегания.

Респиратор подложить кофмане после окончания срока службы, а также в случае его повреждения или сильного сопротивления дыхания.

### Правило ухода

Правило ухода, срок службы и условия многократного применения респиратора указаны в Политике по дезинфекции медицинских изделий: респираторы фильтрующие многоразовые АЛИНА® - 106, АЛИНА® - 116, АЛИНА® - 206, АЛИНА® - 216, АЛИНА® - 316.

### Правило, условия и сроки хранения

Респираторы до использования должны храниться в упаковке изготовителя в сухом, защищенном, защищенном от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, при температуре окружающей среды от -30°С до +70°С и относительной влажности до 80%.

В случае несоответствия применения респиратор хранить в чистой зоне в герметичной упаковке из термостойкого материала, исключая загрязнение внутренней стороны упаковки.

Гарантийный срок хранения - 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Датирование и окончание срока годности сматривается упаковкой.

### Транспортирование

Транспортирование респираторов осуществляется всеми видами транспорта, в защищенном виде от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и потенциально агрессивными веществами.

### Требования по утилизации

При применении респираторов для защиты от возбудителей воздушно-капельных инфекций отработанные респираторы утилизируются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Респираторы фильтрующие многоразовые АЛИНА® Ту 9396-011-45541035-2010 являются изделиями медицинского назначения (регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08771 от 18.04.2011) Российской Федерации, регистрационное удостоверение № ИМ-7-102694/1709 от 18.05.2015 Республики Беларусь) и соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12 4 294 2015 [EN 149:2001+A1:2009].

### Изготовитель:

ООО «Респираторный комплекс»  
Россия, 186679, Ленинградская обл.,  
Всеволожский район, городское поселение  
им. Морозова, ул. Чкалова д.3, м.592  
Тел./факс: +7 (813) 2329-11-65  
e-mail: zakaz@rkcpr.ru, www.rkcpr.ru

## РЕСПИРАТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МНОГОРАЗОВЫЕ АЛИНА®

Защита от вирусов,  
бактерий и аллергенов



10 штук



АЛИНА® - 106



АЛИНА® - 116



АЛИНА® - 206



АЛИНА® - 216



АЛИНА® - 316



## Респираторы фильтрующие многоразовые медицинского назначения АЛИНА®

ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.294-2015  
ТУ 9398-011-45541035-2010

### Область применения

| Наименование | Класс защиты | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АЛИНА®-106   | FFP1 R D     | Противоаэрозольный респиратор без клапана выдоха. Для повседневного применения персоналом и посетителями лечебных учреждений.                                                                                                                                                      |
| АЛИНА®-116   | FFP1 R D     | Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха. Для повседневного применения персоналом и посетителями лечебных учреждений.                                                                                                                                                       |
| АЛИНА®-206   | FFP2 R D     | Противоаэрозольный респиратор без клапана выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий. |
| АЛИНА®-216   | FFP2 R D     | Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.  |
| АЛИНА®-316   | FFP3 R D     | Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.).                                                                                    |



работа в лаборатории,  
диспансере, операционной



уход за больными,  
прием пациентов,  
обход больных,  
посещение поликлиники



косметология,  
фармакология



медицинские  
процедуры

