

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству

Серебрякова И.Н.

Указания по эксплуатации

**Респираторы фильтрующие многоразовые
медицинского назначения**

АЛИНА®

ГОСТ 12.4.294-2015

ТУ 9398-011-45541035-2010

Респиратор АЛИНА® является фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания медицинского персонала и населения и представляет собой многоразовую фильтрующую неформованную полумаску универсального размера с эластичными регулируемыми ремнями крепления, оснащенную клапаном выдоха или без него.

Область применения

Респираторы являются медицинскими изделиями для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), в т.ч. микробиологических.

Класс защиты респираторов в соответствии с таблицей:

Наименование	Класс защиты	Назначение
АЛИНА® – 106	FFP 1 R D	Противоаэрозольный респиратор, без клапана выдоха. Для повседневного применения персоналом и посетителями лечебных учреждений
АЛИНА® – 116	FFP 1 R D	Противоаэрозольный респиратор, с клапаном выдоха. Для повседневного применения персоналом и посетителями лечебных учреждений
АЛИНА® – 206	FFP 2 R D	Противоаэрозольный респиратор, без клапана выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
АЛИНА® – 216	FFP 2 R D	Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
АЛИНА® – 316	FFP 3 R D	Противоаэрозольный, с клапаном выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.)

Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор:

- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала корпуса респиратора;
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

ВНИМАНИЕ!!!

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность защиты респиратора снижается.

Правила использования

Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть респиратор на наличие дефектов. Завести эластичные ремни крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть респиратор. Закрепить ремни крепления на голове, зафиксировав их на уровне теменной и затылочной части головы при помощи фиксатора. Обжать пластину носового зажима на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице для исключения подсоса воздуха по полосе обтюрации (прилегания).

Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий вдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение ремней крепления. Повторить проверку респиратора на плотность прилегания.

Респиратор подлежит замене после окончания срока службы, а также в случае его повреждения или сильного сопротивления дыханию.

Правила ухода

Правила ухода срок службы и условия многократного применения респираторов указаны в Памятке по дезинфекции медицинских изделий: респираторы фильтрующие многократные АЛИНА® – 106, АЛИНА® – 116, АЛИНА® – 206, АЛИНА® – 216, АЛИНА® – 316. (Измененная редакция. Изм.№4)

Правила, условия и сроки хранения

Респираторы до использования должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температурах окружающей среды от - 300С до +700С и относительной влажности до 80 %.

В случае неоднократного применения респиратор хранить в чистой зоне, в гигиеничной упаковке из гигроскопичного материала, исключающей загрязнение внутренней стороны полумаски.

Гарантийный срок хранения - 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончание срока годности смотрите на упаковке.

Транспортирование

Транспортирование респираторов осуществляется всеми видами транспорта, в защищенном виде от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающимися веществами.

Требования по утилизации

При применении респираторов для защиты от возбудителей воздушно-капельных инфекций отработанные респираторы утилизируются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Респираторы фильтрующие многократные (Измененная редакция. Изм.№3) АЛИНА® ТУ 9398-011-45541035-2010 являются изделиями медицинского назначения (регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08771 от 05.02.2018 Российской Федерации; № ИМ-7.102694/1709 от 18.05.2015 Республики Беларусь) и соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009).

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, гп им. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592 (Измененная редакция. Изм.№3)

Тел./факс: +7(812)329-11-65

e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru

Прошито и пронумеровано

На 2 листах

Копия верна

Генеральный директор
ООО «Респираторный комплекс»

Астахов В.С.

