



Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com

Контейнер для биопроб 60 мл, стерильный (с лопаткой) по ТУ 9398-021-24320270-2004

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6036 от 25.03.2019 г.

Руководство по эксплуатации*

Основные параметры и характеристики:

- габаритные размеры, мм, не более: диаметр – 56, высота – 60;
- масса, не более 16 г;
- номинальная вместимость, не менее 60 мл;
- крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера;
- поверхность зоны стакана контейнера для нанесения сведений выполнена под шагренё;
- температура окружающего воздуха: при эксплуатации от +10 до +35 °С, при транспортировке от -50 до +50 °С, при хранении от +5 до +40 °С;
- срок годности – не менее 3-х лет с даты изготовления.

Правила эксплуатации:

- упаковку вскрыть только непосредственно перед применением контейнера;
- извлечь контейнер из упаковки;
- снять крышку, вывинчивая ее против часовой стрелки;
- поместить биоматериал в стакан контейнера, при необходимости использовать лопатку;
- установить крышку, закручивая ее по часовой стрелке до упора.

Сведения о пациентах (Ф.И.О.), дата приема биоматериала наносятся в зоне, выполненной под шагренё, маркером.

Доставить пробу в лабораторию.

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

Утилизация: После использования по назначению контейнер подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».

СТЕРИЛЬНО

Однократное применение
Для in vitro диагностики



STERILE R

№ партии

IVD 2


Дата изготовления

Стерильность гарантирована при соблюдении целостности упаковки

*Наносится на индивидуальную упаковку



КОПИЯ
ВЕРНА

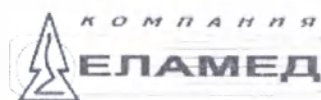

Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com

Контейнер для биопроб 60 мл, стерильный (без лопатки) по ТУ 9398-021-24320270-2004

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6036 от 25.03.2019 г.

Руководство по эксплуатации*

Основные параметры и характеристики:

- габаритные размеры, мм, не более: диаметр – 56, высота – 60;
- масса, не более 15 г;
- номинальная вместимость, не менее 60 мл;
- крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера;
- поверхность зоны стакана контейнера для нанесения сведений выполнена под шагрень;
- температура окружающего воздуха: при эксплуатации от +10 до +35 °С,
при транспортировке от -50 до +50 °С, при хранении от +5 до +40 °С;
- срок годности – не менее 3-х лет с даты изготовления.

Правила эксплуатации:

- упаковку вскрыть только непосредственно перед применением контейнера;
- извлечь контейнер из упаковки;
- снять крышку, вывинчивая ее против часовой стрелки;
- поместить биоматериал в стакан контейнера;
- устанавить крышку, закручивая ее по часовой стрелке до упора.

Сведения о пациентах (Ф.И.О.), дата приема биоматериала наносятся в зоне, выполненной под шагрень, маркером.

Доставить пробу в лабораторию.

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

Утилизация: После использования по назначению контейнер подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б».


СТЕРИЛЬНО

Однократное применение
Для *in vitro* диагностики



STERILE R

№ партии

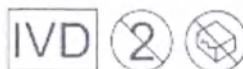

Дата изготовления

Стерильность гарантирована при соблюдении целостности упаковки

*Наносится на индивидуальную упаковку



КОПИЯ
ВЕРНА