



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2018 г.



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
4 апреля 2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Набора Реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови «Железо-Ново»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов предназначен для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови человека с помощью спектрофотометра. Набор реагентов «Железо-Ново» предназначен для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови человека с помощью спектрофотометра. Набор реагентов «Железо-Ново» предназначен для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови человека с помощью спектрофотометра.

3.8. Рекомендуются в каждой лаборатории при применении набора реагентов «Железо-Ново» использовать для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови человека с помощью спектрофотометра.

3.9. При использовании набора реагентов «Железо-Ново» необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в паспорте.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальная опасность для здоровья персонала при работе с набором реагентов «Железо-Ново» отсутствует. При работе с набором реагентов «Железо-Ново» необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в паспорте. При работе с набором реагентов «Железо-Ново» необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в паспорте. При работе с набором реагентов «Железо-Ново» необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в паспорте.

ПАСПОРТ № 3

Железо-Ново (60)

ТУ 008-23448172-2018

Кратчайший срок годности: 2 года

Срок годности: 2 года

Срок годности: 2 года

Срок годности: 2 года

Срок годности: 2 года

Срок годности: 2 года

Срок годности: 2 года

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Набора реактивов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови (Железо-Ново)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реактивов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови «Железо-Ново» (далее по тексту - набор) предназначен для количественного определения содержания железа в сыворотке и плазме крови человека с помощью метода без депротеинизации.

2. НАБОР РЕАКТИВОВ
Набор реактивов выпускается в двух вариантах комплектации: на 100 определений при расходе 0,50 мл реактива 1 на один анализ и на 100 определений при расходе 0,50 мл реактива 1 на один анализ и 100 определений при расходе 0,50 мл реактива 2 на один анализ.

3. КОМПОНЕНТЫ НАБОРА
Набор реактивов включает в себя следующие компоненты:

- Реактив 1 (50 мл)
- Реактив 2 (50 мл)
- Калибратор (5 мл)

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциально опасен при попадании на кожу и слизистые. При попадании на кожу немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды.

4.2. При работе с исследуемыми образцами следует соблюдать меры предосторожности, применяемые при работе с биологическими материалами. Остатки реактивов и использованных образцов должны быть уничтожены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора.

4.3. При работе с исследуемыми образцами следует соблюдать меры предосторожности, применяемые при работе с биологическими материалами. Остатки реактивов и использованных образцов должны быть уничтожены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора.

4.4. При работе с исследуемыми образцами следует соблюдать меры предосторожности, применяемые при работе с биологическими материалами. Остатки реактивов и использованных образцов должны быть уничтожены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора.

ПАСПОРТ № 4
Железо-Ново (240)

Набор реактивов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови

Дата изготовления: 2018-04
Дата окончания срока годности: 2020-04

Содержимое флакона	Объем	Результаты контроля
Прозрачная бесцветная жидкость	4 фл., 50 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 4 фл., 50 мл (соответствует)
Прозрачная бесцветная жидкость	2 фл., 20 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 2 фл., 20 мл (соответствует)
Прозрачная бесцветная жидкость	2 фл., 5 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 2 фл., 5 мл (соответствует)

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.
Директор по технологиям и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго А.В.

201 8 г.