

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медресурс»

Д.О. Литвин

« 01 » 11 2009 г. 2009 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
одноразовый стерильный**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Набор гинекологический одноразовый стерильный производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China, предназначен для комплексного обследования в гинекологических отделениях, для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур, взятия проб на анализ.

2. Основные технические характеристики.

Набор гинекологический одноразовый стерильный включает в себя:

- салфетку подкладную выполненную из нетканого материала,
- зеркало гинекологическое по Куско изготовлено методом термообработки под высоким давлением из гранул PS с помощью термопластавтомата.
- зонд уrogenитальный, изготовлен методом термообработки под высоким давлением из гранул PP и ABS с помощью термопластавтомата.
- перчатки смотровые, изготовленные из латекса.

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование набора при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку набора.
- С соблюдением правил асептики (стерильным инструментом) достаньте подкладную пленку и перчатки.
- После того, как пациентка будет готова к осмотру, достаньте из упаковки инструменты и приступите к работе.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку набора гинекологического непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения.

Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности наборов гинекологических 5 лет с даты стерилизации.

