

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Медресурс»

И.О. Литвин

2010 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN

2010 г.

1. Назначение.

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN (далее – салфетки) производство Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China предназначены для обработки кожи до и после инъекции, для очищения и обеззараживания поверхностей и медицинских инструментов.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 1.

2. Основные технические характеристики.

Салфетки выполнены на основе нетканого материала, не оставляют на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывают аллергических или местно-раздражающих реакций.

Салфетки предназначены для обработки кожи до и после инъекций, поверхностей, а также как средство личной гигиены для обработки рук и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи.

Салфетки пропитаны 70% раствором изопропилового спирта и обладают выраженным противомикробным и антибактериальным эффектом.

Салфетки поставляются различных размеров в различной упаковке:

В контейнере: одноразовые по 150 штук размер 45х45 мм;
 одноразовые по 110 штук размер 200х130мм (для
 обработки поверхностей).

В индивидуальной упаковке:

 одноразовые размер 30х65 мм;
 одноразовые размер 56х65 мм;
 одноразовые размер 60х100 мм.

3. Противопоказания к применению.

С осторожностью использовать салфетки при повреждении кожных покровов.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку.
- Достаньте салфетку.
- Используйте салфетку по назначению.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности салфеток медицинских проспиртованных SUYUN 5 лет.

СПРАВКА О МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ

Салфетки медицинские проспиртованные SUYUN (далее – салфетки) производство Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China предназначены для обработки кожи до и после инъекции, для очищения и обеззараживания поверхностей и медицинских инструментов.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 1.

Салфетки выполнены на основе нетканого материала, не оставляют на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывают аллергических или местно-раздражающих реакций.

Салфетки предназначены для обработки кожи до и после инъекций, поверхностей, а также как средство личной гигиены для обработки рук и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи.

Салфетки пропитаны 70% раствором изопропилового спирта и обладают выраженным противомикробным и антибактериальным эффектом. Варианты исполнения салфеток:

В контейнере: одноразовые по 150 штук размер 45х45 мм;
одноразовые по 110 штук размер 200х130мм (для обработки поверхностей).

В индивидуальной упаковке:
одноразовые размер 30х65 мм;
одноразовые размер 56х65 мм;
одноразовые размер 60х100 мм.

Салфетки изготавливаются на специальных автоматических линиях для изготовления и упаковки влажных салфеток.

Схема производства салфеток в индивидуальной упаковке: материал складывается → пропитывается спиртом → разрезается → упаковывается в индивидуальную упаковку.

Схема производства салфеток в контейнере: материал складывается → пропитывается спиртом → разрезается → автомат пробивает отверстие в упаковке, помещает салфетки внутрь упаковки, наклеивает клапан, набивает дату.

Генеральный директор
ООО «Медресурс»



/Литвин Д.О./