

УТВЕРЖДАЮ



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Набор оториноларингологический
одноразовый стерильный SUYUN**

2010 г.

1. Назначение.

Набор оториноларингологический одноразовый стерильный SUYUN (далее – набор) производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China используются для проведения профилактических осмотров и лечебных процедур в медицинских учреждениях.

2. Основные технические характеристики.

Используемые высококачественные материалы, делают процедуры максимально комфортными для пациента и врача.

Состав набора оториноларингологического одноразового стерильного SUYUN:

1. Воронка ушная – не более 2 шт.
2. Зеркало носовое – 1 шт.
3. Пинцет – 1 шт.
4. Зеркало гортанное – не более 2 шт.
5. Палочка-тампон – не более 6 шт.
6. Шпатель – 1 шт.
7. Салфетка – 1 шт.
8. Лоток для инструментов – 1 шт.

Зеркало носовое, зеркало гортанное, шпатель, пинцет используются для осмотра и обеспечения внутренних манипуляций отоларинголога, путем введения в носовую и ротовую полость.

Палочка-тампон используются для забора проб из дыхательных органов.

Воронка ушная предназначена для диагностического отоскопа, для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки.

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование набора при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку набора.
- Достаньте лоток с инструментами.
- Используйте инструменты по назначению.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку набора непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения.

Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности набора оториноларингологического одноразового стерильного SUYUN 5 лет с даты стерилизации.