

УТВЕРЖДАЮ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Зонды аспирационные, дуоденальные, желудочные,
ректальные, питательные (питательная система) SUYUN.**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Зонды аспирационные, дуоденальные, желудочные, ректальные, питательные (питательная система) SUYUN (далее – зонды) производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China используются для обеспечения жизнедеятельности тяжелобольных пациентов в палатах интенсивной терапии и реанимации.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 2а.

2. Основные технические характеристики.

Зонды изготовлены из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Дуоденальный и желудочный зонды снабжены рентген контрастной линией.

2.1 Зонд аспирационный (рис. 1) предназначен для трахеобронхиального отсасывания из легких. Зонд имеет открытый атравматичный конец. Прозрачный наконечник позволяет легко наблюдать за процессом отсасывания. Гладкая атласная поверхность обеспечивает легкое введение через интубационную трубку

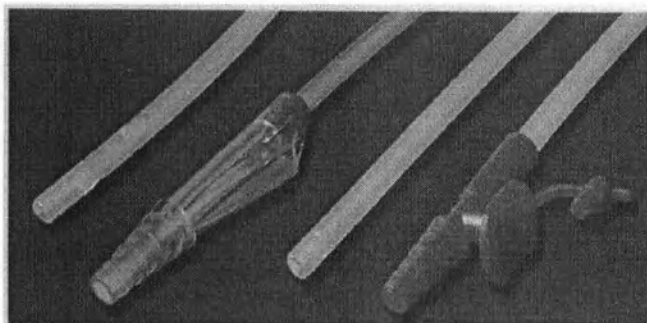


Рис. 1

2.2 Зонд дуоденальный (рис. 2) используется для введения лекарственных и питательных жидкостей и забора проб из двенадцатиперстной кишки. Увеличенные боковые глазки обеспечивают эффективный дренаж. Пропорциональность размеров боковых отверстий обеспечивает несминаемость дистального конца зонда. Прозрачный материал позволяет визуально оценить характер содержимого. Специально обработанная поверхность избавляет от необходимости применения смазывающих средств.

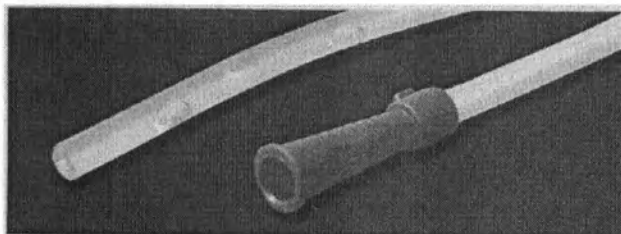


Рис. 2

2.3 Зонд желудочный (рис. 3) используется для введения лекарственных и питательных жидкостей и забора проб из желудка.

Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет не перекрывается при скручивании. Специально обработанная поверхность снижает потребность в применении смазывающих средств.

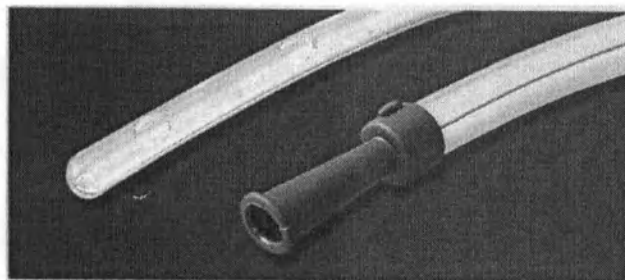


Рис. 3

2.4 Зонд ректальный (рис. 4) предназначен для введения лекарственных средств и дренажа прямой кишки. Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет не перекрывается при скручивании. Специально обработанная поверхность снижает потребность в применении смазывающих средств.



Рис. 4

2.5 Зонд питательный (питательная система) (рис. 5) используется для введения специальных питательных составов непосредственно в желудок пациента (энтеральное питание). Мягкий закругленный кончик обеспечивает атравматичность процедуры введения. Специально обработанная поверхность избавляет от необходимости применения смазывающих средств. Особое расположение боковых отверстий снижает риск развития "демпинг" синдрома. Просвет не перекрывается при скручивании. Коннектор с герметично закрывающейся пробкой препятствует вытеканию жидкости и предотвращает инфицирование содержимого зонда.

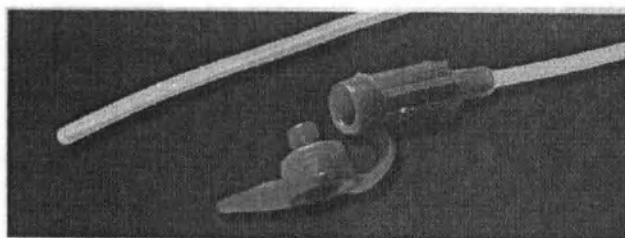


Рис. 5

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование зондов при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку зонда.
- Достаньте зонд.
- Используйте зонд по назначению.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку зонда непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения. Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности зондов аспирационных, дуоденальных, желудочных, ректальных, питательных (питательная система) SUYUN 5 лет со дня стерилизации.

Сшито и заверено печатью 4
(Литвин) лист а
Литвин Д.О.

