


УТВЕРЖДАЮ

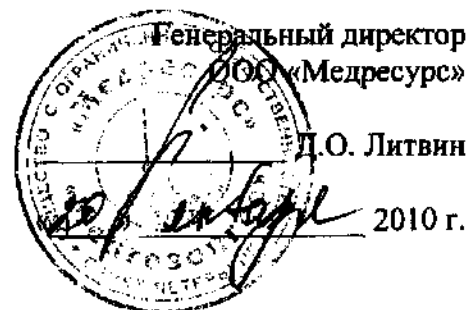

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Амниотом одноразовый SUYUN

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Амниотом одноразовый SUYUN (далее – амниотом) производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China, применяется в акушерстве для вскрытия плодного пузыря во время родов.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 1.

2. Основные технические характеристики.

Амниотом позволяет вскрыть оболочки плодного пузыря при помощи острого крючка, находящегося на закругленном конце. Амниотом атравматичен для шейки матки и плода.

Амниотомы изготовлены методом термообработки под высоким давлением из гранул ABS с помощью термопластавтомата. Из контейнера с гранулами нагретая до технологической температуры масса ABS под давлением поступает в форму – матрицу.

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование амниотома при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку.
- С соблюдением правил асептики достаньте амниотом.
- Для вскрытия плодного пузыря амниотом подвести закругленным концом к плодным оболочкам.
- Вскрыть плодные оболочки при помощи заостренного крючка, находящегося на закругленном конце.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку амниотома непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения. Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности амниотома 5 лет с даты стерилизации.

СПРАВКА О МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ

Амниотом одноразовый SUYUN (далее – амниотом) производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China, применяется в акушерстве для вскрытия плодного пузыря во время родов.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 1.

ОКП 94 3200.

Амниотом позволяет вскрыть оболочки плодного пузыря при помощи острого крючка, находящегося на закругленном конце (рис. 1). Амниотом атравматичен для шейки матки и плода.

Амниотомы изготовлены методом термообработки под высоким давлением из гранул ABS с помощью термопластавтомата. Из контейнера с гранулами нагретая до технологической температуры масса ABS под давлением поступает в форму – матрицу.


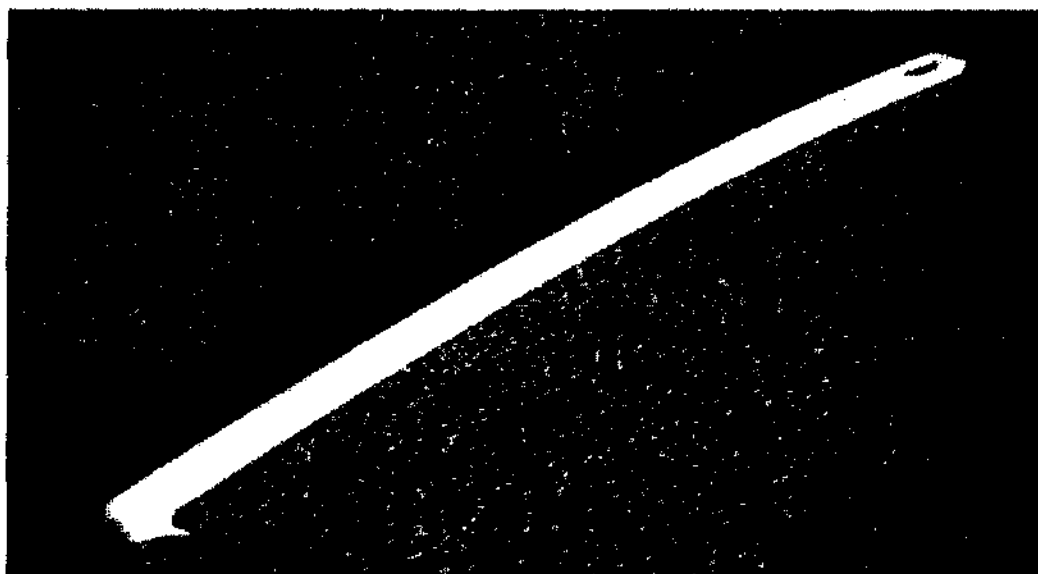


Рис. 1

Генеральный директор
ООО «Медресурс»

М.П.

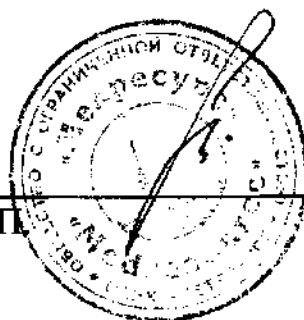

/Литвин Д.О./